

IRIS LIFE MÅNE

Elektronisk talende klokke med dag/døgn-visning



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	3
I pakken	3
Kontakter i siden	4
Framsiden	4
Baksiden	4
3. Komme i gang	4
Plassering	4
Tilkobling	4
4. Daglig bruk	5
Klokken	5
Lydstyrke	5
5. Innstillingsmeny	5
Tilgang	5
Klokke	5
Utseende (klokkeutseende)	6
Visning	7
System	8
6. Grunninnstillinger	8
Åpne for volumkontroll og innstillinger	8
Sammenkobling med FlexiBlink LIFE	9
Sammenkoble enheter	9
7. Viktig informasjon	10
Sikkerhet	10
Rengjøring	10
Resirkulering	10
8. Samsvarserklæring	11
9. Tekniske data	11
10. Feilsøking	12
11. Tilbehør	13
Fjernstyrt opplest tale	13
Automatisk opplest tale	13

1. Innledning

Klokka IRIS MÅNE LIFE (MÅNE) er en elektronisk talende klokke med valgbar visning av informasjon som dag, dato og tid på døgnet.

MÅNE har også valgbare skjerminnstillinger med bakgrunnsbilder og fargekombinasjoner.

MÅNE kommer ferdig til bruk, og man trenger kun å koble den til strømmen med den medfølgende strømforsyningen.

Ved oppstart, hvis klokken ikke er satt, vil skjermen gå rett til siden for justering av tid og dato.

Alle innstillinger er låst for brukeren, og man må låse opp innstillingsmenyen (bryter nr. 5) for å komme til menyer for innstillinger. Se kapittel 6.

MÅNE har innebygget batteri som holder på innstillingene hvis strømmen blir borte.

MÅNE kan også fungere med utvalgte Vestfold Audio FlexiBlink LIFE produkter for: fjernstyrt start av opplest klokkeslett og brannvarsling på MÅNE. For mer informasjon se kap. 11.

2. Oversikt

I pakken




MÅNE LIFE
Med avtakbar fot og
festebrakett for vegg



Strømforsyning

Kontakter i siden

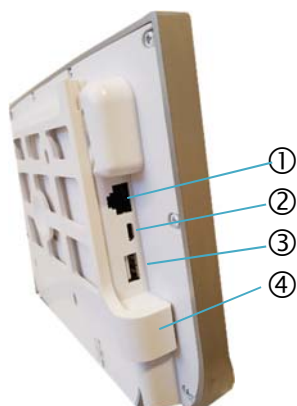

- ① Ethernet (for tilkobling til ruter)
- ② Ikke i bruk
- ③ USB (for minne-pinne)
- ④ Veggbrakett


Framsiden



Figur 1 Framsiden

- ① Lys (ikke i bruk)
- ② Skjerm med touch
- ③ HJEM knapp
- ④ Mikrofon (ikke i bruk)
- ⑤ Høyttaler
- ⑥ Volum opp/ned
- ⑦ Avtakbar fot

Baksiden

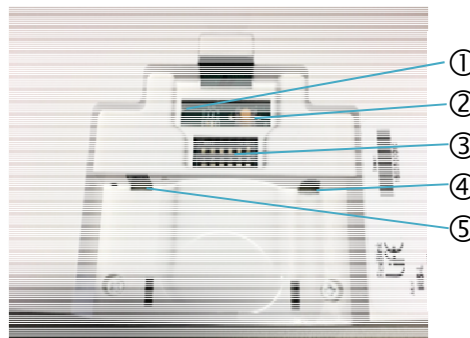

Figur 2 Baksiden

- ① Lysindikatorr
- ② LIFE-knapp (Sammenkobling)
- ③ Funksjonsbryter
- ④ Lydutgang for teleslynge / streamer
- ⑤ Tilkobling strømforsyning

3. Komme i gang

Plassering

MÅNE kan stå på et bord i den medfølgende foten, eller skrues opp på vegg med den medfølgende veggbraketten.



Tips

Ikke monter veggbraketten før du har kontrollert at strømledningen er lang nok

Tilkobling

Sett strømforsyningen i stikk-kontakten på veggen og plugg ledningen inn på baksiden av MÅNE (Figur 2, ⑤). Du vil nå se at skjermen starter.

MÅNE er nå klar til bruk, men det kan være nødvendig å stille klokke og dato, eller tilpasse produktet til brukeren. Se kapittel 5 og 6.

4. Daglig bruk

Klokken

Brukeren trenger ikke å gjøre noe med produktet selv.

Hvis man tar på skjermen, vil klokkeinformasjon (tid/dato/tid på døgnet) leses opp. Alternativt kan man benytte fjernbetjening - se kap. 11.

Lydstyrke

For å justere lydstyrken, må man først slå av låsebryteren. Se kapittel 6. Skyv skjermlåsen bryter 5 ned.

Når bryteren er i stilling ned, vil volumknappene (pluss/minus) på høyre fremside fungere.

Når riktig nivå er oppnådd, bør man låse funksjonen igjen.

5. Innstillingsmeny

Tilgang

MÅNE har innstillingsmenyer som er låst for brukeren med låsebryteren som beskrevet i kapittel 6.


Skyv bryter 5 **ned** for å åpne for innstillinger.




Trykk på HJEM-knappen så kommer det fram et ikon med teksten Innstillinger i nedre venstre hjørne på skjermen.



Trykk på ikonet og innstillingsmenyene vil nå vises som ikoner på skjermen.

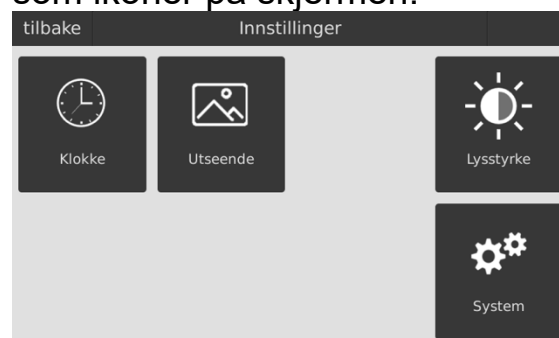


Klokke

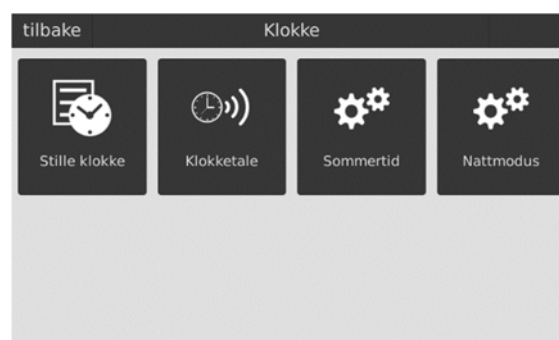

På denne siden finner man innstillinger av klokke, dato, nattmodus og relaterte funksjoner

Stille klokke

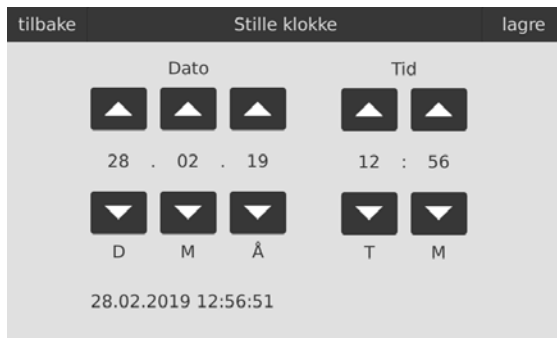

Bruk pilknappene for å endre. Trykk på *Lagre* for å lagre innstillingen eller *Tilbake* for å avbryte.


Klokketale



Her kan man velge om funksjonen med talende klokke skal være på eller av, og man kan begrense mengden informasjon i talemeldingen.

Sommertid

MÅNE skifter automatisk mellom sommer- og vintertid.

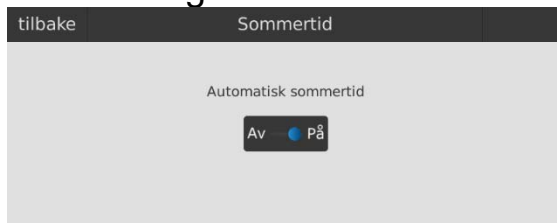

For å være klar til et forventet internasjonalt opphør av skifte mellom sommer- og vintertid, er det her en bryter for å slå av denne funksjonen.

Nattmodus

Med denne funksjonen kan du selv definere dag- og nattestid. Funksjonen benyttes for de som vil ha symboler for døgnorientering i stedet for klokkevisning. Valg av symbolvisning gjøres under visningsinnstillingene (se eget avsnitt «Visning»). Standardinnstillingene for nattestid er kl. 00:00 til kl. 06:00. (Gyldig valg for start av nattestid er mellom kl. 18:00 og 00:00. Gyldig valg for start av dagtid er mellom kl. 05:00 og 10:00).




Utseende (klokkeutseende)



På denne siden finner man innstillinger av skjermbildet.


Bakgrunn

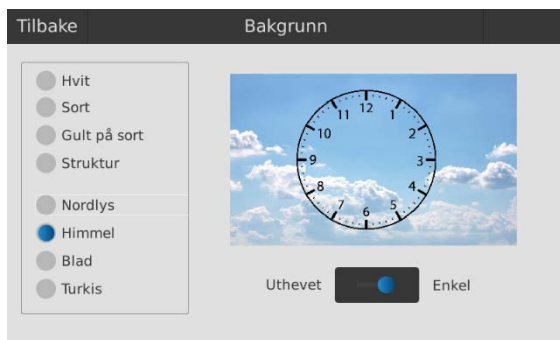

Her velges utseendet til klokken. Hvert utseende består av en bakgrunn og tekst/klokke i utvalgte farger for best mulig kontrast.

Klokkeskiven har to valg. Det utseendet som velges markeres med en blå prikk. Innstillingen lagres automatisk når du trykker på *Tilbake*.

Visning

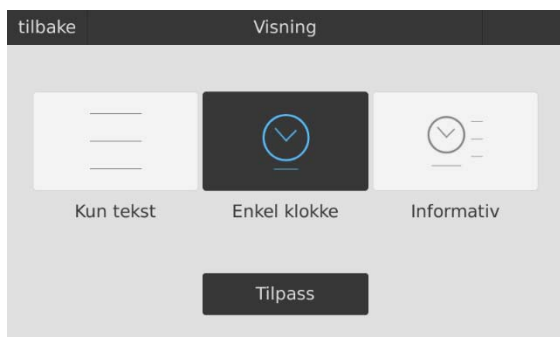

Man kan velge mellom 3 oppsett for hvordan klokken skal framstå:

1. Kun tekst
Her vises tiden bare i form av informativ tekst.
2. Enkel Klokke
Her vises en stor klokke med valgbar informasjon i underkant.
3. Informativ

Her vises klokken med valgbare informasjon i 4 felt.

Alle 3 oppsettene kan tilpasses spesielt. Velg først oppsettet og trykk så på *Tilpass*.

Nå vises forsidebildet med blå «penn-ikoner» på de plasseringen som kan justeres.



Når du trykker på et «penn-ikon» vises en liste over hva som kan vises i denne posisjonen på skjermen. Valgene inntreffer umiddelbart, slik at man kan prøve seg fram til det bildet som passer brukeren best.

Alle oppsettene har visning som skiller mellom dag og natt. Trykk på de hvite pilene øverst på skjermen for å bla mellom hva som skal vises på dagtid og nattestid.




Lysstyrke



Her velges skjermens lysstyrke. Innstillingen lagres automatisk.

System

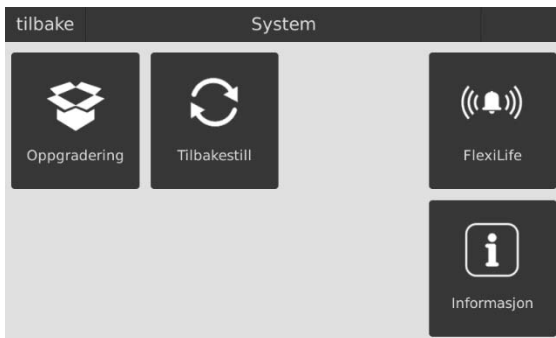

MÅNE er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, og det er ingen lisenser el. som må fornyes. Programvaren (software) er lagt fast i produktet.

I tilfelle det finnes ny versjon av programvaren fra Vestfold Audio som man ønsker å ta i bruk, kan denne fritt lastes ned via Internett.

Hvis man har fått spesialtilpasset programvare, kan denne legges inn via USB minnepinne som beskrevet under.

Oppgradering

Programvaren (SW) kan oppdateres herfra. Enten via kabel til internett-ruter eller via USB.

Kontakt Vestfold Audio AS ved behov for hjelp.

Tilbakestill

MÅNE kan tilbakestilles til fabrikkinnstilling her.

FlexiBlink LIFE

Her kan man velge om MÅNE skal kobles til FlexiBlink LIFE i boligen.



Når mottak står på, vil SOL motta fjernstyrt opplesing av klokken samt at den vil varsle brannalarm fra røykvarslere og brannsendere i FlexiBlink LIFE-serien.

Informasjon

Her vises informasjon om programvareversjon med mer. Dette er informasjon som kun benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS.

6. Grunninnstillinger

Åpne for volumkontroll og innstillinger



Skjermlås – bryter 5

Bryter 5 er for låsing av volum og menyer. Ved å skyve *bryter 5* opp, låses volum til gjeldende nivå. Denne innstillingen holdes selv etter strømbrudd, og ved forsøk på volumjustering eller systeminnstillinger vil det komme beskjed på skjermen at funksjonene er låst.

Sammenkobling med FlexiBlink LIFE


Hvis du ønsker å benytte SOL sammen med varslingsprodukter i FlexiBlink LIFE-serien, må du sammenkoble enhetene.

Sammenkoble enheter


Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. Denne finnes under bak-lokket på MÅNE.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

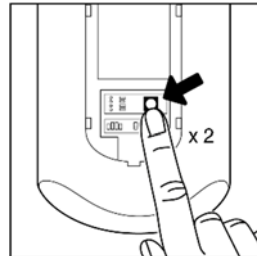

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

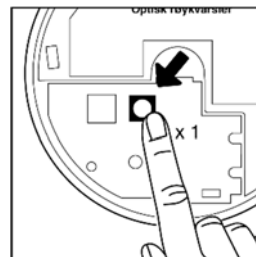

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

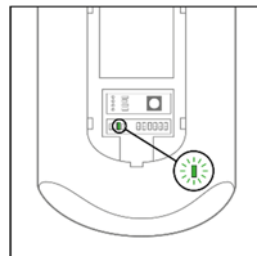

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får grønt og deretter rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den. Vennligst nullstill enheten.

Hvis indikatorlampen lyser fast rødt, betyr det at enheten allerede er koblet til et annet nett. Vennligst nullstill enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

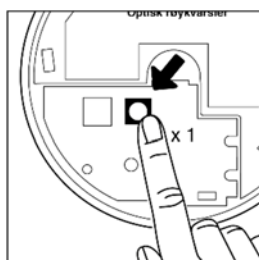

Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

7. Viktig informasjon

Sikkerhet

Unngå å eksponere produktet for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre.

Produktet må ikke nedsenkes i vann eller utsettes for vannsprut/regn.

Rengjøring

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS

8. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at MÅNE er i overensstemmelse med direktiv (RED) 2014/53/EU og (RoHS 2) 2011/65/EC.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.vestfoldaudio.no/samsvar

9. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 220x165x40mm
(uten veggfeste og fot)
Effektforbruk: 5W
Spenning inn: 15VDC
Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: 0°C – 40°C - ikke kondenserende
Innendørs bruk

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Klokken viser feil tidspunkt eller dato	Klokke eller dato er ikke justert	Still klokken. Se kapittel 5
Klokken viser feil tidspunkt etter strømbrudd	Klokkebatteriet er tomt for strøm	Klokkebatteriet lades opp over lang tid. Batteriet bør lade i minst 4 dager før man tar ut strømmen
Enheten virker ikke	Strømforsyningen er ikke tilkoblet	Kontroller at strømforsyningen står i en kontakt som har strøm og at den er plugget helt inn i enheten.
Kommer ikke inn i Innstillings-menyen.	Bryter nr. 5 i den lille bryterrekken på baksiden står i posisjon OPP.	Skyv bryteren NED.
Kan ikke still lydstyrken	Bryter nr. 5 i den lille bryterrekken på baksiden står i posisjon OPP.	Skyv bryteren NED.
Talende klokke virker ikke	Funksjonen er slått av i innstillinger.	Se kap. 5 og Klokketale.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

11. Tilbehør

MÅNE kan samvirke med produkter i FlexiBlink LIFE-serien for å gi brukeren ekstra betjeningshjelp.

Fjernstyrt opplest tale

For brukere som har begrenset motorikk eller bevegelseshemming, kan det være nyttig å få opplest klokke uten å måtte ta på skjermen. Følgende alternativer kan benyttes:

Armbåndssender (ARM-L)

Armbåndssender for fjernstyrt opplesing av klokke.



FLEXIKNAPP (FLEXI-L)

Trykknapp for fjernstyrt opplesing av klokke.



Automatisk opplest tale

Brukere som har problemer med tid på døgnet, og som kanskje har en tendens til utilsiktet vandring om natten, kan få klokken lest opp automatisk ved hjelp av en sender med bevegelsessensor.

Tidsstyrt aktivitetsvarsler med pargard (PASSAKT-L)

Tidsstyrt aktivitetsvarsler med PIR for fjernstyrt automatisk opplesing av klokke.



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12

3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

Tlf.: +47 33 47 33 47

