

IRIS LIFE SOL

Elektronisk talende klokke-kalender med dag/døgn og påminnelser



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	3
I pakken	3
Kontakter i siden	4
Framsiden	4
Baksiden	4
3. Komme i gang	5
Plassering	5
Tilkobling	5
4. Daglig bruk	5
Klokken	5
Lydstyrke	5
Påminnelser	5
5. Legge inn påminnelser	6
6. Endre en påminnelse	8
7. Slette en påminnelse	8
8. Innstillingsmeny	8
Tilgang	8
Klokke	9
Visning	10
Påminnelse	11
9. Grunninnstillinger	13
Åpne for volumkontroll og innstillinger	13
Sammenkobling med FlexiBlink LIFE	13
Sammenkoble enheter	13
10. Viktig informasjon	14
Sikkerhet	14
Rengjøring	14
Resirkulering	14
Bruksbegrensninger:	15
11. Samsvarserklæring	15
12. Tekniske data	15
13. Feilsøking	16
14. Tilbehør	16

1. Innledning

Kalenderen IRIS SOL LIFE (SOL) er en elektronisk kalender med talende klokke og valgbar visning av informasjon som dag, dato og tid på døgnet.

SOL har kalenderfunksjon der man kan legge inn påminnelser på dato/dag/tidspunkt.

Påminnelser varsles med lyd, lysblink, symboler og talemelding om man vil.

SOL har også valgbare skjerminnstillinger med bakgrunnsbilder og fargekombinasjoner.

SOL kommer ferdig til bruk, og man trenger kun å koble den til strømmen med den medfølgende strømforsyningen.

Ved oppstart, hvis klokken ikke er satt, vil skjermen gå rett til siden for justering av tid og dato.

Alle grunnleggende innstillinger er låst for brukeren, og man må låse opp innstillingsmenyen (bryter nr. 5) for å komme til menyer for innstillinger. Se kapittel 9.

SOL har innebygget batteri som holder på innstillingene.

SOL kan også fungere med utvalgte Vestfold Audios FlexiBlink LIFE produkter for: fjernstyrt start av opplest klokkeslett, brannvarsling og påminnellesvarsling i FlexiBlink LIFE mottakere i boligen. For mer informasjon se kap. 14.

2. Oversikt

I pakken




SOL LIFE
Med avtakbar fot og
festebrakett for vegg



Strømforsyning

Kontakter i siden

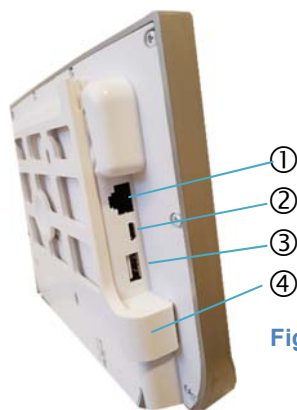

Figur 1 Høyre side

- ① Ethernet (for tilkobling til ruter)
- ② Ikke i bruk
- ③ USB (for minne-pinne)
- ④ Veggbrakett


Framsiden



Figur 2 Framsiden

- ① Varsellys (Høyre og venstre side)
- ② Skjerm med touch
- ③ HJEM knapp
- ④ Mikrofon for taleinnspilling
- ⑤ Høytaler
- ⑥ Volum opp/ned (+/-)
- ⑦ Avtakbar fot

Baksiden

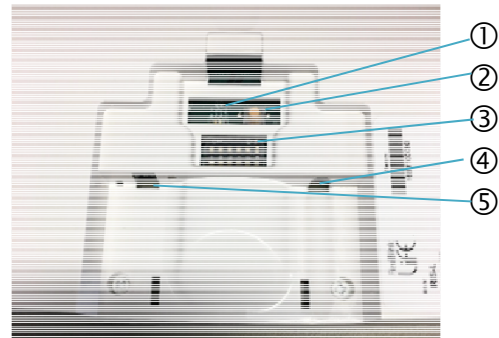

Figur 3 Baksiden

- ① Lysindikator
- ② LIFE-knapp (Sammenkobling)
- ③ Funksjonsbryter
- ④ Lydutgang for teleslynge / streamer
- ⑤ Tilkobling strømforsyning

3. Komme i gang

Plassering

SOL kan stå på et bord i den medfølgende foten, eller skrues opp på vegg med den medfølgende veggbraketten.



Tips

Ikke monter veggbraketten før du har kontrollert at strømledningen er lang nok

Tilkobling

Sett strømforsyningen i kontakten på veggen og plugg ledningen inn på baksiden av SOL. Du vil nå se at skjermen starter.

SOL er nå klar til bruk, men det kan være nødvendig å stille klokke og dato, eller tilpasse produktet til brukeren. Se kapittel 8 og 9.

4. Daglig bruk

Klokken

Brukeren trenger ikke å gjøre noe med produktet selv.

Hvis man tar på skjermen, vil klokkeinformasjon (tid/dato/tid på døgnet) leses opp. Det er mulig å velge opplesing av kun den informasjonen som vises på skjermen.

Lydstyrke

For å justere lydstyrken, må man først slå av låsebryteren. Se kapittel 9. Skyv bryter 5 ned.



Når bryteren er i stilling ned, vil volumknappene (pluss/minus) på høyre fremside fungere. Når riktig nivå er oppnådd, bør man låse funksjonen igjen.

Påminnelser



Påminnelser vises på et eget skjermbilde samtidig som det spilles av en lyd. Hvis man har spilt inn en talemelding, vil denne spilles av, og hvis lysblink er slått på, blinker det i varslingslysene. Hva som vises på siden, bestemmes av innstillingene. Se kap. 8. Påminnelsen blir stående på skjermen i 30 minutter. Hvis man tar på skjermen, vil klokken vises med symbol for at en påminnelse er der. Trykk på nytt for å spille av meldingen igjen. Nye påminnelser i denne perioden vil «ta over».

5. Legge inn påminnelser

Trykk på HJEM-knappen så kommer det opp et Påminnelser-ikon nede til venstre på skjermen.



Trykk på ikonet for å få fram listen med påminnelser. Ikonet kan skjules for å låse påminnelserfunksjonen. Se kap. 8.

Det kan være flere sider med påminnelser, der det vises 5 per side.




1) Trykk på **+Legg til** øverst i høyre hjørne for å legge til en påminnelse.

SOL har noen ferdige forslag til påminnelser man kan ta utgangspunkt i, eller man kan velge en «Generell».



2) Trykk på et av ikonene. Du får nå fram bildet for å legge inn en påminnelse.

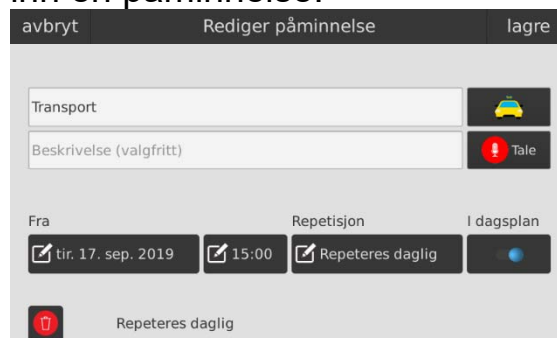

Det er to linjer for tekst – linje 1 må alltid fylles inn.

Trykk på **Symbol-feltet** til høyre for linje 1 for å velge et symbol som vises sammen med teksten.

Trykk på **Tale-feltet** for å snakke inn din egen talemelding.



For å spille inn en ny talemelding, må en evt. gammel slettes først.

Trykk på **Datofeltet** for å legge inn dato for påminnelsen.

Trykk OK.


NB! I datofeltet er det mulig å velge 5 år framover.



Trykk på **Tidsfeltet** for å legge inn klokkeslettet for påminnelsen.


Trykk OK.

3) Hvis påminnelsen skal repeteres trykker du på **Repetisjonsfeltet**:

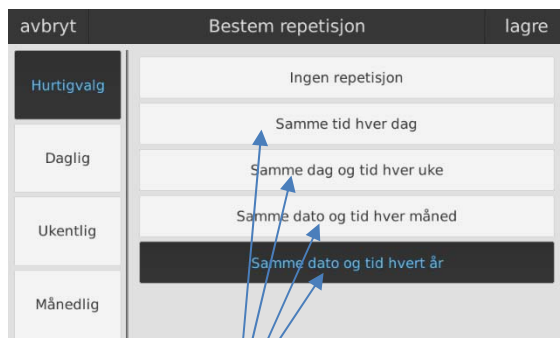

Her finnes 4 hurtigvalg for repetisjon som benytter tidspunktet som er lagt inn som utgangspunkt.

Alternativt kan man velge Daglig, Ukentlig eller Månedlig repetisjon.

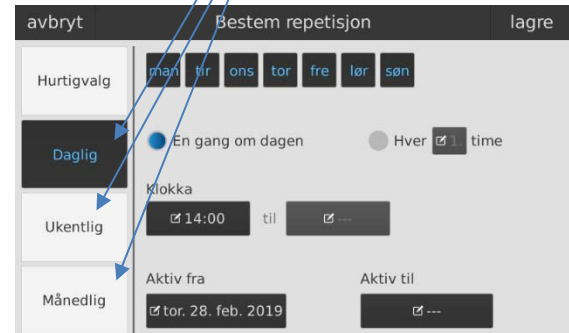

Velg hvilke dager påminnelsen skal repeteres og eventuelt intervall.

Man kan også tidsbegrense varslingene innenfor klokkeslett og dato.

4) Bruk skyvebryteren for å velge om påminnelsen skal vises i dagsplanen (se eget avsnitt «Dagsplan»).

Trykk **Lagre** eller **Avbryt**.

5) Man kan slå påminnelsen av og på med den blå skyvebryteren til høyre i listen.



6. Endre en påminnelse


Trykk på HJEM-knappen så kommer det opp et Påminnelser-ikon nede til venstre på skjermen. Trykk på ikonet for å få fram listen med påminnelser. Det kan være flere sider med påminnelser, der det vises 5 per side.

Trykk på den påminnelsen du ønsker å endre på. Gjør de endringene du ønsker (se kap. 5) og trykk lagre

7. Slette en påminnelse

Trykk på HJEM-knappen så kommer det opp et Påminnelser-ikon nede til venstre på skjermen. Trykk på ikonet for å få fram listen med påminnelser

Trykk på den påminnelsen du ønsker å slette.

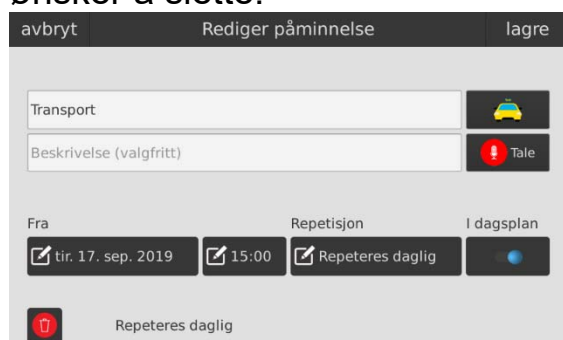

Trykk på den røde søppelbøtten for å slette. Bekreft ved å velge *Slette*.

8. Innstillingsmeny

Tilgang

SOL har innstillingsmenyer som er låst for brukeren med låsebryteren som beskrevet i kapittel 9.


Skyv bryter 5 **ned** for å åpne for innstillinger.




Trykk på HJEM-knappen så kommer det fram et ikon med teksten Innstillinger i nedre venstre hjørne på skjermen.



Trykk på ikonet og innstillingsmenyene vil nå vises som ikoner på skjermen.

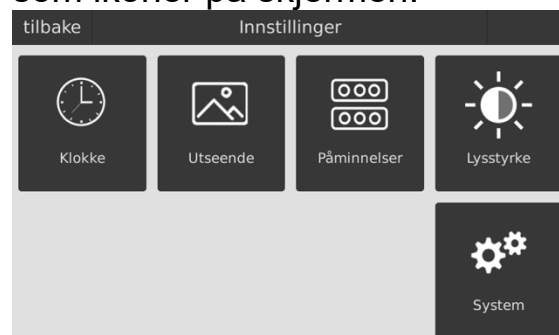


Klokke

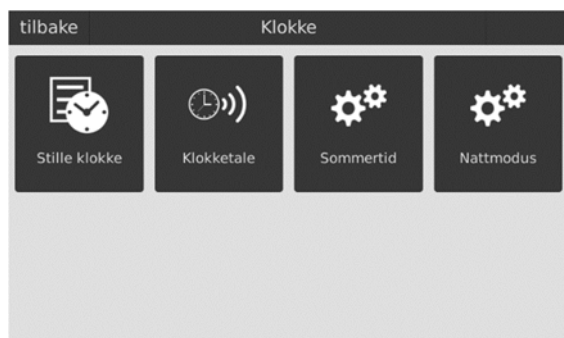

På denne siden finner man innstillinger av klokke, dato og relaterte funksjoner

Stille klokke

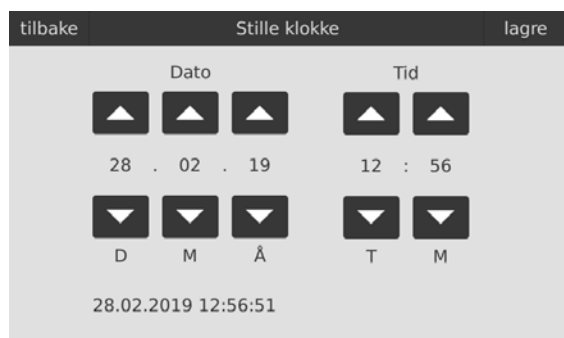

Bruk pilknappene for å endre. Trykk på *Lagre* for å lagre innstillingen eller *Tilbake* for å avbryte.

Klokketale



Slå talende klokke på eller av. Velg om informasjon i talemeldingen skal begrenses til det som vises på skjermen.

Sommertid

SOL skifter automatisk mellom sommer- og vintertid.



For å være klar til et forventet internasjonalt opphør av skifte mellom sommer- og vintertid, er det her en bryter for å slå av denne funksjonen.

Nattmodus

Med denne funksjonen kan du selv definere dag- og nattestid. Funksjonen benyttes først og fremst for de som vil ha symboler for døgnorientering i stedet for klokkevisning. Valg av symbolvisning gjøres under visningsinnstillingene (se eget avsnitt «Visning»).


Standardinnstillingene for nattestid er kl. 00:00 til kl. 06:00. (Gyldig valg for start av nattestid er mellom kl. 18:00 og 00:00. Gyldig valg for start av dagtid er mellom kl. 05:00 og 10:00).



Utseende (klokkeutseende)



På denne siden finner man innstillinger av skjermbildet. **Bakgrunn**

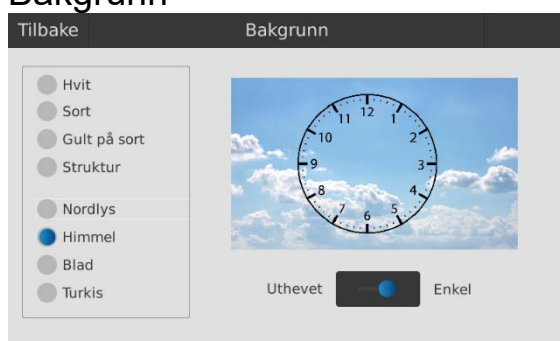

Her velges utseendet til klokken. Hvert utseende består av en bakgrunn og tekst/klokke i utvalgte farger for best mulig kontrast.

Klokkeskiven har to valg. Det utseendet som velges markeres med en blå prikk. Innstillingen lagres automatisk når du trykker på *Tilbake*.

Visning



Man kan velge mellom 4 oppsett for hvordan klokken skal framstå:

1. Kun tekst
Her vises tiden bare i form av informativ tekst.
2. Enkel Klokke
Her vises en stor klokke med valgbar informasjon i underkant.
3. Informativ
Her vises klokken med valgbare informasjon i 4 felt.
4. Dagsplan
Her vises klokken sammen med oversikt over dagens kommende påminnelser.

Alle 4 oppsettene kan tilpasses spesielt.

Velg først oppsettet og trykk så på *Tilpass*.

Nå vises forsidebildet med blå «penn-ikoner» på de plasseringen som kan endres.



Når du trykker på et «penn-ikon», vises en liste over hva som kan vises i denne posisjonen på skjermen. Valgene inntreffer umiddelbart, slik at man kan prøve seg fram til det bildet som passer brukeren best.


Alle oppsettene har visning som skiller mellom dag og natt.

Trykk på de hvite pilene øverst på skjermen for å bla mellom hva som skal vises på dagtid og nattestid.




Dagsplan

Dagsplan viser oversikt over dagens kommende påminnelser, dersom dette er valgt under registreringen av selve påminnelsen(e).

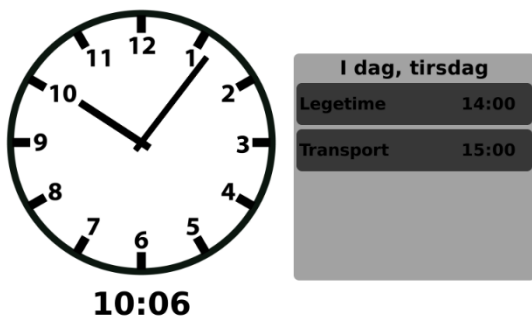

Dersom man ikke benytter Dagsplan som fast visning på skjermen, kan man enkelt få oversikt over kommende aktiviteter ved å trykke på «Hjem»-knappen og deretter velge «Kalender». For å få tilgang til «Kalender» må knapp for denne være slått på (se avsnitt «Påminnelse»).

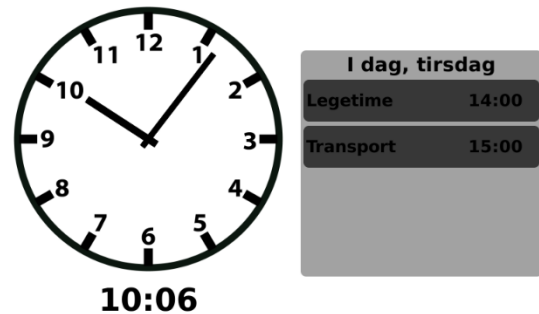

Lysstyrke



Her velges skjermens lysstyrke og varsling av påminnelser med blinkende LED.


Innstillingen lagres automatisk.

Påminnelse



Her kan du velge om tidspunkt skal vise i påminnelsbildet, om meny-knappen (ikonet) og menyknapp for kalender skal vises på skjermen, og om klokken skal leses opp.

System

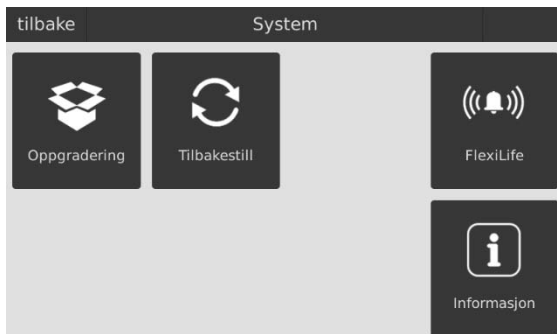

SOL er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, og det er ingen lisenser el. som må fornyes. Programvaren (software) er lagt fast i produktet. I tilfelle det finnes ny versjon av programvaren fra Vestfold Audio som man ønsker å ta i bruk, kan denne fritt lastes ned via Internett.

Hvis man har fått spesialtilpasset programvare, kan denne legges inn via USB minnepinne som beskrevet under.

Oppgradering


Programvaren (SW) kan oppdateres herfra. Enten via kabel til internett-ruter eller via USB.

Kontakt Vestfold Audio AS ved behov for hjelp.

Tilbakestill

SOL kan tilbakestilles til fabrikkinnstilling her.

FlexiBlink LIFE

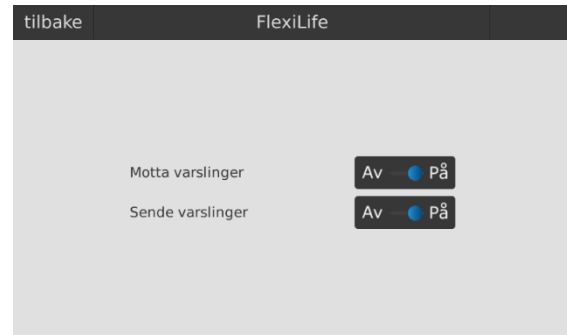

Her kan man velge om SOL skal kobles til FlexiBlink LIFE-serien i boligen.

Når *mottak* står på, vil SOL motta fjernstyrt opplasing av klokken samt at den vil varsle brannalarm fra røykvarslere og brannsendere i FlexiBlink LIFE-serien.

Når *sende* står på vil det sendes varsel til FlexiBlink LIFE mottakere når en påminnelse inntreffer.

Informasjon

Her vises informasjon om programvareversjon med mer. Dette er informasjon som kun benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS.

9. Grunninnstillinger

Åpne for volumkontroll og innstillinger



Skjermlås – bryter 5

Bryter 5 er for låsing av volum og menyer. Ved å skyve bryter 5 opp, låses volum til gjeldende nivå. Denne innstillingen holdes selv etter strøbrudd, og ved forsøk på volumjustering eller systeminnstillinger vil det komme beskjed på skjermen at funksjonene er låst.

Sammenkobling med FlexiBlink LIFE


Hvis du ønsker å benytte SOL sammen med varslingsprodukter i FlexiBlink LIFE-serien, må du sammenkoble enhetene.

Sammenkoble enheter


Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finnes under baklokket på SOL.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

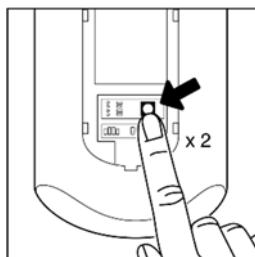

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

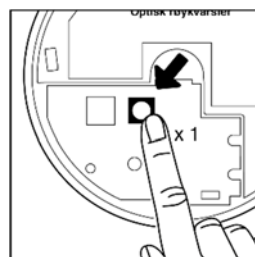

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

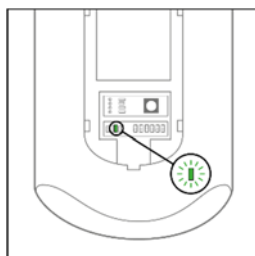

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får grønt og deretter rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den. Vennligst nullstill enheten.

Hvis indikatorlampen lyser fast rødt, betyr det at enheten allerede er koblet til et annet nett. Vennligst nullstill enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

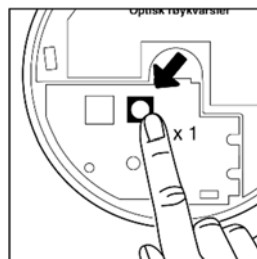

Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

10. Viktig informasjon

Sikkerhet

Unngå å eksponere produktet for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrus fra hverandre.

Produktet må ikke nedsenkes i vann eller utsettes for vannsprut/regn.

Rengjøring

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

11. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at SOL er i overensstemmelse med direktiv (RED) 2014/53/EU og (RoHS 2) 2011/65/EC.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

12. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 220x165x40mm
(uten veggfeste og fot)
Effektforbruk: 5W
Spenning inn: 15VDC
Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: 0°C – 40°C -
ikke kondenserende
Innendørs bruk

13. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Klokken viser feil tidspunkt eller dato	Klokke eller dato er ikke justert	Still klokken. Se kapittel 8
Klokken viser feil tidspunkt etter strømbrudd	Klokkebatteriet er tomt for strøm	Klokkebatteriet lades opp over lang tid. Batteriet bør lade i minst 4 dager før man tar ut strømmen
Enheten virker ikke	Strømforsyningen er ikke tilkoblet	Kontroller at strømforsyningen står i en kontakt som har strøm og at den er plagget helt inn i enheten.
Kommer ikke inn i Innstillings-menyen.	Bryter nr. 5 i den lille brytterrekken på baksiden står i posisjon OPP.	Skyv bryteren NED.
Kan ikke still lydstyrken	Bryter nr. 5 i den lille brytterrekken på baksiden står i posisjon OPP.	Skyv bryteren NED.
Talende klokke virker ikke	Funksjonen er slått av i innstillinger.	Se kap. 8 og Klokketale.
Påminnelser varsles ikke / kommer ikke opp	Påminnelsen er ikke aktiv.	Slå på påminnelsen med skyveknappen. Se kap. 5.
	Tidspunktet er feil.	Kontroller at påminnelsen er satt til korrekt dato og tid. Se kap. 6.
Påminnelsen repeteres ikke	Repetisjonen er ikke satt til riktig dag / dato / klokkeslett.	Kontroller at påminnelsen er satt med riktig repetisjon. Se kap. 5

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse. For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

14. Tilbehør

IRIS SOL LIFE kan samvirke med produkter i FlexiBlink LIFE -serien for å gi brukeren ekstra påminnelser og betjeningshjelp.

Fjernstyrt opplest tale

For brukere som har begrenset motorikk eller bevegelseshemming, kan det være nyttig å få opplest klokke uten å måtte ta på skjermen.

Følgende alternativer kan benyttes:

ARM-L

Armbåndssender for fjernstyrt opplesing av klokke.



FLEXI-L

Trykknapp for fjernstyrt opplesing av klokke.



Automatisk opplest tale

Brukere som har problemer med tid på døgnet, og som kanskje har en tendens til utilsiktet vandring om natten, kan få klokken lest opp automatisk ved hjelp av en sender med bevegelsessensor.

PASSAKT-L

Tidsstyrt aktivitetsvarsler med PIR for fjernstyrt automatisk opplesing av klokke



Ekstra påminnelse

Brukeren vil ikke alltid befinne seg i nærheten av den elektroniske kalenderen når en påminnelse inntreffer, og det er alltid en mulighet for at brukeren ikke ser på skjermen før tiden er forbi. Ved å benytte en eller flere Aurora mottakere i boligen, vil brukeren få beskjed om at det har kommet en påminnelse på den elektroniske kalenderen.

AURORA-L

Varslingsmottaker for fjernmelding om at det er påminnelse på elektronisk kalender.



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

Tlf.: +47 33 47 33 47

