

Gravity Chair Air-Breathe

model : GC2-001AB

USER'S MANUAL

BRUKSANVISNING



—Hodestøtte—

Et ergonomisk bølgeformet skum holder hodeposisjonen stabil og forhindrer at hodet faller sidelengs.

—Seteforing—

Air-mesh stoff med vattert pute på innsiden holder ryggen tørr og komfortabel.

—Wedge Mat—

En Wedge Mat gjør sittevinkelen justerbar til den mest komfortable posisjonen.

—Trekk—

Brannhemmende og vannavvisende behandling gjør vedlikehold av trekket enkelt.

—Seat Depth Spacer (ikke vist på bildet)—

En skumavstandsholder under trekket gjør sittehøyden justerbar.

—Sidelomme—

Oppbevar denne bruksanvisningen og små eiendeler inni.

■ GRAVITY STØTTER DEG

Når du sitter i Gravity Chair vil stolen automatisk pakke seg rundt kroppen din og holde kroppsposisjonen stabil og komfortabel. Ved å legge ryggen bakover ved hjelp av Triangle Mat, vil kroppen støttes mer.

Albuene skyves litt fremover i stolen som automatisk får skuldrene til å posisjonere seg i en mer naturlig og avslappende stilling.

■ SEKUNDÆR STOL

Gravity Chair kan brukes som din sekundære stol for avslappende formål, mens stolen du bruker i oppreist sittestilling for daglige gjøremål som spising og lekser, som primærstol. Men for de som har problemer med å bruke vanlige stoler, kan Gravity Chair brukes som primær stol, da den har en enestående evne til å posisjonere menneskekroppen.

■ BAKOVERLENT

Ved å bruke Wedge Mat, kan du justere stolvinkelen til den mest komfortable posisjonen for hvert formål, som f.eks å se på TV og /eller slappe av. Selv i bakoverlent stilling forblir vinkelen mellom sete og rygg rettvinklet slik at tyngdekraften alltid holder seg rett under hoftene, hvilket gjør kroppsposisjonen i stolen alltid stabil.



For de som har tonus og /eller refleksbevegelse i stolen, er ekstra tilsyn fra omsorgsperson nødvendig for å unngå å falle ut.



For de som har en tendens til å vippe mot siden, kan du forsiktig legge Triangle Mat på den andre siden av stolen.

■ LENGDE PÅ BRUKSTID



Selv om det er avslappende å bruke Gravity Chair, kan samme stilling i over 30 minutter forårsake smerter. Vi anbefaler deg å endre sittestilling av og til, eller gå ut av stolen. For personer som har problemer mer å endre kroppsstilling selv, er det nødvendig med ekstra oppmerksomhet fra omsorgsgiver.



Gravity Chair er hovedsakelig laget av urethanskum og polyuretanskinnstoff. Spør din distributør hvordan du skal avfallshåndtere stolen.




Bruk en myk klut med mild såpe for å tørke av trekket. IKKE vask trekket i vaskemaskinen.

Hvordan bruke belteholderen



Gummisnorer på kanten av armlenene er for å hekte på belteendene slik at man enkelt kan sette seg i stolen uten at beltene floker seg.

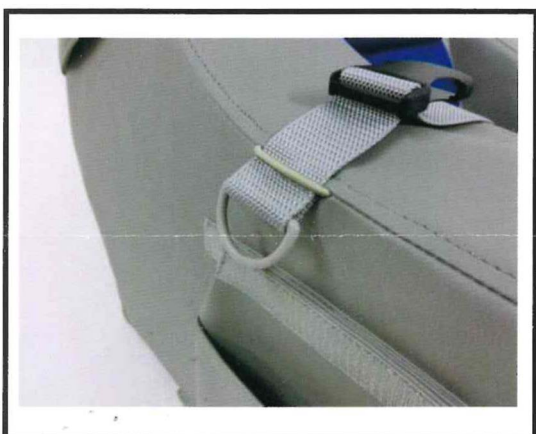

Ta opp beltet og før belteenden gjennom gummisnoren.



Pass på at beltet er helt åpnet til sidene slik at brukeren kan sette seg i stolen uten at beltene faller under.
