



medemagruppen



**Bruksanvisning**  
**- SINA Comfort XXL dusjvogn**

## Gratulerer med valget av SINA Comfort XXL dusjvogn!

SINA Comfort XXL dusjvogn er en praktisk og elegant mobil dusjvogn for større voksne. Dusjvognens konstruksjon og utforming gir en enkel tilgang og god arbeidsstilling for pleiepersonell.

SINA Comfort XXL dusjvogn leveres med batteridrevet hev/senk funksjon.

Høydejusteringen som er lineær fra 72 til 102 cm, gir god ergonomi for hjelpepersonell i enhver pleiesituasjon.

For riktig bruk ber vi dem lese denne bruks- og vedlikeholdsanvisningen nøye.

Ta kontakt med leverandøren straks dersom dusjvognen er skadet eller leveransen er mangelfull.

Husk at tilkobling av strøm kun skal gjøres i godkjent stikkontaktuttak for å unngå skade på mennesker og installasjoner.

### Informasjon

SINA Comfort XXL dusjvogn:

Varenummer:	Varenavn:	Dimensjoner:
4100-1039	Dusjvogn Vario-Line Sina Comfort XXL EL 250 kg	L: 2040 mm, B:100 mm H: 720 - 1020 mm SWL: 250 kg



Typeskilt plassert på underramme:

Dette skiltet inneholder informasjon om produktet, som type/modell og serienummer (SN)

Husk å oppgi type og serienummer ved alle henvendelser!

## Sikkerhetsforanstaltninger

Les de følgende sikkerhetsforanstaltninger nøye, og kun bruk produktet til det formål som er beskrevet. Produsent og leverandør er ikke ansvarlig for skader på produkt, liv og eiendom forårsaket av feil bruk av produktet, eller at det er brukt til formål det ikke er konstruert for.

- SINA Comfort skal kun benyttes til dusj og stell av personer.
- Produkter med skader eller feil skal ikke benyttes før de er sjekket av kyndig personell.
- Produktet skal kun betjenes av instruert personell.
- Sjekk at sidegrinder er forsvarlig låst før bruk, for å forhindre at pasienten faller av dusjvognen.
- Dusjvognen skal desinfiseres etter bruk for å forhindre kryss-smitte.
- Ved forflytning av dusjvognen med pasient/bruker i skal det alltid være to pleiere til stede for å sikre mot fall.
- Før dusjvognen høydereguleres skal personalet sjekke at det ikke er noen hindringer eller objekter over eller under dusjvognen som kan hinder fri bevegelse.
- Før all bruk av dusjvognen skal den funksjonstestes og visuelt kontrolleres for feil eller skader.
- Personell må forsikre seg om at pasient/bruker er korrekt plassert i dusjvognen for å sikre mot fall eller skader.
- Forlat aldri pasient/bruker i dusjvognen uten tilsyn!
- Det er ikke tillat å sitte oppreist på hode- eller fotenden av dusjvognen, dette medfører tipperisiko.
- For å forhindre klemfare, påse at pasient/bruker har ben og armer innenfor dusjvognens sidekanter.
- Sjekk alltid vanntemperatur i hånddusjen før bruk for å forhindre skoldingsfare!

## Bruksanvisning

Betjeningsselementer:

### SINA Comfort XXL



1. Hjultrinser med brems
2. Fellbare sidegrinder
3. Fotgrind avtagbar
4. Avløpspropp
5. Dusjmatte med avløpsventil og avløpsslange
6. Fellbar hodegrind
7. Utløserhendel for vinkeljustering
8. Håndtak

## SINA Comfort XXL



1. Håndkontroll
2. Styringsboks med nødstop
3. Batteri
4. Løftemotor

## Sidegrinder



Utløserknapp



For å felle ned sidegrinder, trekk ut utløserknappen




Løft samtidig sidegrinden opp, ut og ned.

For å felle opp sidegrinden igjen, følg prosedyre i omvendt rekkefølge, påse at utløserknappen går i lås for å forebygge fall.

## Hode- og fotgrind



Hodegrinden felles ved å løfte opp, ut og ned (bilde 7).

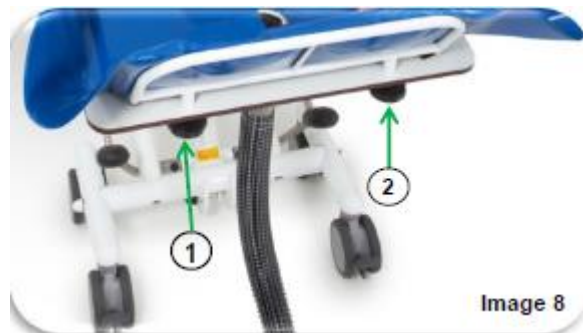

Fotgrinden kan tas av ved å skru ut festeskrue (1&2) som vist på bilde 8.

## Høydejustering av SINA Comfort XXL

### **SINA Comfort XXL**



SINA Comfort XXL er utstyrt med en 24V motor som får sin spenning fra batteriet. Motoren er selvlåsende slik at den ikke kan sige ned ved funksjonssvikt eller feil. Trykk på knappen med pil opp for å heve dusjvognen til ønsket høyde, og på knapp med pil ned for å senke dusjvognen.

## Vinkeljustering av liggeflate



Klem og holde inne utløserhendel for vinkeljustering.



Juster liggeflaten til ønsket posisjon for stell eller drenering av dusjmatte.

**Bruk av vinkeljustering med pasient/bruker i på dusjmatte er kun tillatt med hode- og fotgrind montert i oppfelt posisjon!**

## Nødstop



Nødstop kan benyttes hvis motoren ikke stopper når knapper på håndkontroll slippes. For å aktivere nødstop trykkes knappen inn. For å deaktivere nødstop, vri knappen i pilens retning slik at den løser ut.

Du kan aktivere nødstop for å hindre utilsiktet bruk av dusjvognen, eller hvis den skal lagres over lengere tid med batteriet montert på.

## Lade batteri

Batteriet lades enten med den medfølgende batteriladeren eller i ekstern ladestasjon (tilbehør). Ta batteriet ut fra holderen under dusjvognen, plugg inn ladekontakten fra batteriladeren. Ved ekstern ladestasjon, sett batteriet inn i ladestasjonen. Påse at ekstern ladestasjon er tilkoblet strømuttak.

## **Rengjøring og desinfisering**

Daglig rengjøring foretas med lunket såpevann og en myk klut, benytt gjerne standard husholdningsmidler uten skuremidler som er egnet for plast. Husk å rengjøre under dusjmatte. La alle flater tørke for bruk.

Ved behov eller mellom bruk av forskjellige pasienter/brukere skal dusjmatte og sidegrinder desinfiseres med et middel som ikke skader plastoverflater. Bruk gjerne klorbaserte midler.

Husk å rengjøre hjultrinser regelmessig for å unngå samling av hår og annet som hindrer hjulene i å rulle lett.

#### Forflytning av pasient/bruker fra seng til dusjvogn:

1. Aktiver bremsen på seng
2. Hev sengen til en komfortabel arbeidshøyde
3. Senk sengens sidegrinder på forflytningsside
4. Senk dusjvognens sidegrind på forflytningsside
5. Forflytt pasient/bruker i posisjon for overflytting
6. Vend pasient/bruker på siden vekk fra forflytningssiden
7. En pleier sikrer pasienten i posisjon
8. Den andre pleieren kjører dusjvognen så nærme sengen som mulig
9. Aktiver bremsen på dusjvogn
10. Juster høyden på dusjvognen så den er lik som sengen
11. Vend pasienten/brukeren til ryggeleie
12. Forflytt pasienten/brukeren til midten av dusjvognen
13. Legg puten under hode på pasient/bruker
14. Løs ut bremsen på dusjvognen
15. Påse at en pleier sikrer pasienten slik at denne ikke kan vende seg før sidegrind er sikret i oppfelt posisjon
16. Flytt dusjvognen vekk fra sengen slik at sidegrinden kan felles opp og sikres
17. Dekk over pasientens/brukers kropp med et teppe e.l.
18. Juster høyden på dusjvognen til komfortabel høyde for forflytning

#### Forflytning av pasient/bruker fra dusjvogn til seng:

1. Aktiver bremsen på seng
2. Hev sengen til en komfortabel arbeidshøyde
3. Senk sengens sidegrinder på forflytningsside
4. Senk dusjvognens sidegrind på forflytningsside
5. Påse at en pleier sikrer pasienten slik at denne ikke kan vende seg før sidegrind er sikret i oppfelt posisjon
6. Den andre pleieren kjører dusjvognen så nærme sengen som mulig
7. Aktiver bremsen på dusjvogn
8. Forflytt pasienten/brukeren til midten av sengen
9. Vend pasient/bruker på siden vekk fra forflytningssiden
10. Sjekk at pasient/bruker ikke lenger hviler på dusjvognen
11. En pleier sikrer pasienten i posisjon
12. Løs ut bremsen på dusjvognen
13. Flytt dusjvognen vekk fra sengen
14. Vend pasienten/brukeren til ryggeleie
15. Hev sengens sidegrinder
16. Dekk over pasient/bruker med dyne e.l.

## **Tekniske data**

Nettspenning: 230V  
Driftsspenning: 24V  
Strøm: 2A  
Kapsling: IPX4  
Driftstemp.: 10 – 40 °C  
Klassifisering: Klasse II

Dette produktet importeres og omsettes av:

**Medema Norge AS**  
**Postboks 133**  
**1483 Skytta**

**Telefon: 67 06 49 00**

**Telefaks: 67 06 49 90**

**e-post: [firmapost@medema.no](mailto:firmapost@medema.no)**

**Web: [www.medema.no](http://www.medema.no)**

*Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og de skader dette måtte medføre på personer og eiendom.*