

Knop RX 901B-4 Mottager
Bruker- og vedlikeholds veiledning



DENNE BRUKERVEILEDNING GJELDER FOR SOFTWARE VERSJON 3.3.X

KNOP RX901B-4



Mottager Knop RX901B-4

HMS art. nr.:

Best. nr.: 2223331

KNOP ELEKTRONIK A/S

Fabriksvej 20 ● 7600 Struer ● Mail: knop@knop.dk ● Web: www.knop.dk ● Tlf.: 9784 0444 ● Fax.: 9784 0666

Innholdsfortegnelse

Tiltenkt bruk	3
Ta i bruk	4
Startskjerm	5
Mottak av alarm	6
Nød anrop	7
Batterialarm	8
Hovedmeny	9
Hovedmeny – Siste anrop	10
Hovedmeny – Av (dvalemodus).....	11
Hovedmeny – Gruppevalg.....	12
Hovedmeny - Vibrator.....	13
Hovedmeny - Lyd.....	14
Hovedmeny - Innstillinger	15
Hovedmeny - Innstillinger - Klienter	16
Hovedmeny - Innstillinger – Grupper.....	33
Hovedmeny - Innstillinger – Still klokke	37
Hovedmeny - Innstillinger – Tastelyd.....	39
Hovedmeny - Innstillinger – Navn.....	40
Hovedmeny - Innstillinger – Adgangskode.....	41
Hovedmeny - Innstillinger – Utgående	42
Hovedmeny - Innstillinger – System meny.....	43
Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner	45
Hovedmeny - Innstillinger – Språk.....	52
Hovedmeny – Innstillinger – Slå av	53
Vedlikehold	54
Oppdatering av RX901B	54
Rengjøring	54
Avhending	54
Kontroll av dekningsområde	54
Tilbehør	54
Tekniske data RX901B:.....	55

Tiltenkt bruk

RX901B er en mottaker som er designet for å fungere med Knop's trådløse enheter i 90X-serien. Enheten kan brukes i lommen eller i en ledning rundt halsen.

Inntil 4 sendere kan kodes, som du kan tildele et navn du velger.

De siste 50 anropene lagres i en liste der du kan se tidspunktet for anropet, samt hvor anropet har kommet fra, og om det er kvittert.

For eksempel, med en RX901B, er det følgende: mulig å dele klienter (beboere) av et omsorgssenter i grupper, f.eks. i tilfelle av tidsplaner der for eksempel et nattskift er flere kunder enn dagskiftet.

RX901B er med posisjonsleser, slik at de kan brukes i knops posisjonssystem.

Med RX901B er det mulig å foreta et nødanrop til en annen kollega med ett enkelt Trykk.

Menyen bygget i en grafisk skjerm og betjenes på tastaturet.

RX901B er med et oppladbart batteri og trådløs lading.

Produktet er vanntett (IP65).

Ta i bruk

Det anbefales at RX901B belastes 100 % før den tas i bruk.

Den medfølgende trådløse laderen er koblet til adapteren via USB-kabelen.

RX901B er plassert på toppen av ladeplaten, og displayet på RX901B slås på og viser batteriladestatusen som en prosentandel.

Hvis enheten er helt utladet, kan det ta opptil 5 minutter før skjermen slås på.

Innhold i pakken:





RX901B på laderen:



Første gang produktet slås på, velger du ønsket språk.




Trykk   for å flytte den grønne pilen til ønsket språk.

Trykk  for å bruke språket

Startskjerm




Første gang enheten slås på etter utpakking, plasserer du den på laderen.
Når RX901B ikke er på laderen, slås skjermen av omtrent 10 sekunder etter siste operasjon.

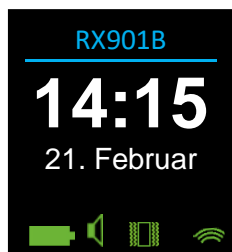Hvis du trykker på en av tastene, slås displayet på, og klokken og datoen vises.
Øverst vises navnet på brukeren hvis dette er lagt inn.





Betydning av symbolene på statuslinjen:



Batteri tilstand:

-  Batteri ok.
-  Lading anbefales.
-  Batteriet er nesten utladet, må lades så snart som mulig.





Alarmlyd:

-  Alarmlyden er på.
-  Alarmlyden er slått av.

Vibrator:


-  Vibrator er på.
-  Vibrator er av.

System – vises kun hvis system er tilkoblet:

-  Systemet er tilkoblet.
-  Kobler til systemet.
-  Systemsignal avbrudd.
-  Systemsignal mangler.

Mottak av alarm

Når mottakeren mottar en alarm fra en kodet sender, vises navnet, typen og mottakstidspunkt, i tillegg til en hvilken som helst posisjon.

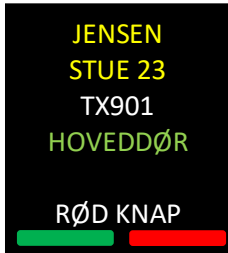

JENSEN Navnet på bruker.

STUE 23 Teksten til bruker.

HOVEDDØR Posisjonen til senderen.

TX901 Produktet eller den kodede teksten som sendte alarmen.

RØD KNAP Type alarm.

Tekst vises bare hvis den er lagt inn eller kjent.


Trykk **Ent** for å bekrefte alarmen.

Trykk **Esc** for å avvise.

Merk: I "frittstående" systemer håndteres alarmen på samme måte, enten anropet godtas eller avvises i stedet for som i Knop's repeatersystem, der alarmen automatisk videresendes til andre mottakere.

Hvis alarmen ikke er kvittert, vil det komme korte bep lyder omtrent hvert 5. Minutt.

Når en melding mottas fra en sender som for eksempel har dårlig batteri, vises meldingen nedenfor.

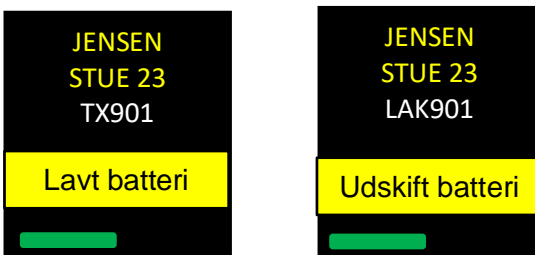

Trykk **Ent** for å bekrefte alarmen.

Merk: " Siste anrop" vil du se meldingen "Lagt batteri" for senderen som trenger nytt batteri.

Nød anrop

Det er mulig å sende et nød anrop (eller en alarm) fra mottakeren til for eksempel en annen kollega til å indikere "Jeg trenger hjelp" med en bruker eller som en overfallsalarm.

Nød anropet aktiveres ved å trykke på KNOP-logoen.




Når nød anropet sendes, vibrerer mottakeren én gang, og når nød anropet mottas fra en annen kollega, vibrerer den 3 ganger.



Batterialarm

Mottakeren angir statusen til batteriene på skjermen, så vel som når batteriet er lavt, med lyd som indikerer.

Batteri tilstand:

-  Batteri ok.
-  Lading anbefales.
-  Batteriet er nesten tomt, må lades så snart som mulig.

Hvis symbolet endres til rødt, plasserer du enheten på laderen umiddelbart. Samtidig kommer noen korte bep-lyder omtrent hvert 5. som indikerer lavt batterinivå mens det viser følgende skjermbilde:



Hvis mottakeren fortsatt ikke lader, vises skjermen nedenfor når batterispenningen blir kritisk. RX901B slås av og kan bare slås på ved å bli plassert på laderen.




Hovedmeny


Ved å trykke på  og  samtidig, enten på skjermen eller på startskjermen, vises hovedmenyen.


Den grønne pilen på venstre side viser hvilken linje i menyen som kan velges.



Betjening:

Trykk  for å flytte den grønne pilen enten opp eller til høyre for menyen.


Trykk  for å flytte den grønne pilen enten ned eller til venstre for menyen.

Trykk  for å forlate menyen.

Trykk  for å velge menyelementet der den grønne pilen vises.

Merk: Etter ca. 15 sekunder uten aktivitet blir menyen automatisk forlatt.

Hovedmeny – Siste anrop

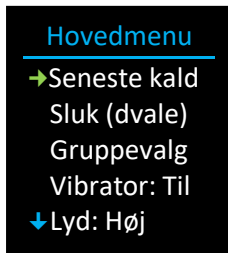

Fra hovedmenyen velger du elementet "Siste anrop". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk på **Ent**. Trykk **Esc** for å forlate menyen.



ten kan vises opptil de 50 siste samtalene med det siste øverst.

GRØN Betyr at samtalen ble akseptert.
RØD Betyr at samtalen ble avvist.
GUL Betyr at samtalen ikke ble besvart.

Trykk **Ent** for mer informasjon om klienten.



Trykk **↕** **🏠** for å vende mellom andre alarmanrop.

Trykk **Ent** for mer informasjon.


Trykk **Esc** for å gå tilbake til forrige meny.

Hvis du vil at anropslisten skal slettes, plasserer du den grønne pilen på menyelementet "Slett alle" og trykk **Ent**.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Hovedmeny – Av (dvalemodus)

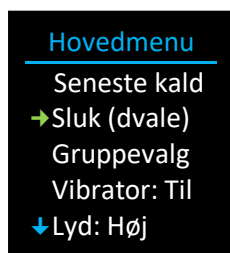

Fra hovedmenyen velger du menyen "Slå av (dvalemodus)" fra hovedmenyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.


RX901B-mottakeren slås på enten ved å trykke på en av tastene eller ved å plassere enheten på laderen. Hvis du vil at mottakeren skal slås helt av, kan dette gjøres i menypunktet "Innstillinger ➔ Slå av".

Dvalemodus kan brukes hvis du for møte, pause eller så ut som ingen samtaler er mottatt.

Dvalemodus bruker mer strøm enn å slå av funksjonen.

Hovedmeny – Gruppevalg

Grupper brukes for eksempel til å bruke grupper. for 24-timers skift, hvor et nattskift, for eksempel, har flere grupper å betjene enn et dagskift.

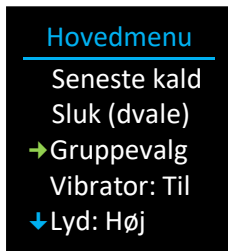

Fra hovedmenyen velger du elementet "Gruppevalg". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**. Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å melde deg på eller oppheve valget av gruppe.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Trykk **↓** **↑** for å flytte pilen til gruppen du vil endre.


1 Gruppe valgt.

1 Gruppe valgt bort.

Programmering av hver gruppe/gruppetekst gjøres i menyen "Innstillinger ➔ Gruppe" og "Innstillinger ➔ Klient".

Det er praktisk å navngi gruppen.



Hovedmeny - Vibrator

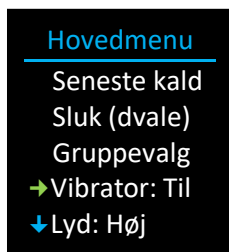

Ig fra hovedmenyen elementet "Vibrator". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å melde deg på eller velge bort vibrator-funksjonen.


Trykk **Esc** for å forlate menyen.

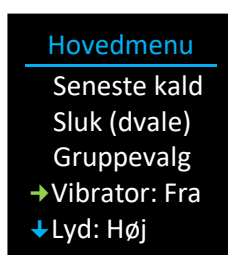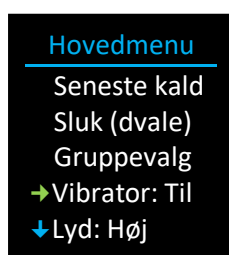




Vibrator-funksjonen gjør at produktet kan vibrere når en alarm mottas.


Trykk **Esc** for å forlate menyen.


Hovedmeny - Lyd

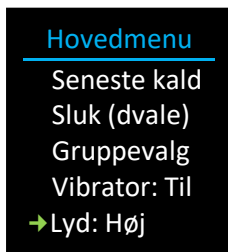

Velg fra hovedmenyen elementet "Lyd". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.
Trykk **Ent** for å velge mellom høy, lav eller av lyd når et alarmanrop mottas.

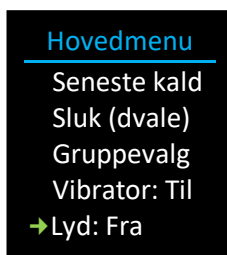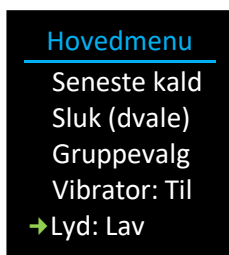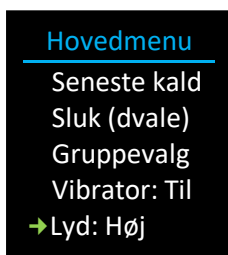

Trykk  for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk  for å flytte den grønne ned menyen.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.


Trykk **Ent** for å endre lyden.

Det lagres automatisk.

Hovedmeny - Innstillinger




Velg fra hovedmenyen "Innstillinger". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.
Innstillingsmenyen vises nå:

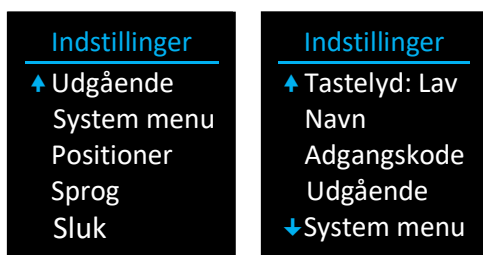



Programvareversjon og ID vises i de to første linjene, disse kan ikke endres.

Ver: 3.4.0 er programvareversjonen på produktet som vises.

ID: 56330 er produkt-ID og serie.

Trykk  for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk  for å flytte den grønne ned menyen.

Trykk  for å forlate menyen.


Hovedmeny - Innstillinger - Klienter

Klienter er for eksempel bruker eller annet personell som har en sender eller flere sendere som du ønsker å motta et nød anrop fra.



Velg fra "Klienter"-menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Klienter-menyen vises nå:

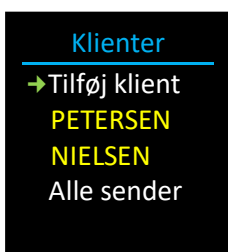

Listen viser de lagrede klientene som det kan velges mellom med piltastene.

Trykk **↑** for å flytte den grønne pilen opp menyen.


Trykk **↓** for å flytte den grønne ned menyen.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Instillinger – Klienter – Legg til klient



Velg fra "Legg til klient" -menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

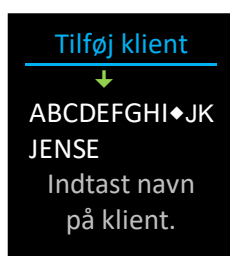

Skriv inn et navn på den nye klienten, her vises "JENSEN".


Trykk **←** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **→** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.


Trykk **Esc** for å slette den siste bokstaven.

Trykk **Esc** og hold inne tasten i 2 sekunder for å forlate menyen.

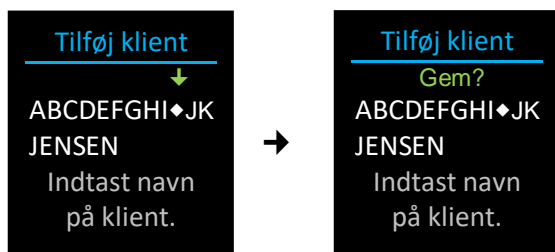

For å lagre navnet velges symbolet ♦ og trykk **Ent**.

Det vil nå være mulig å skrive inn en tekst for klienten, for eksempel være "Stue 21". Teksten er valgfri.

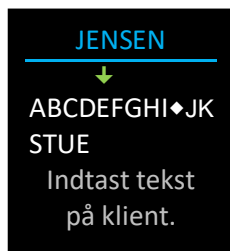

Hvis du vil lagre navnet, velger du symbolet ♦ og trykk **Ent**.


Hvis det ikke ønskes tekst, velge symbolet ♦ og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn:

Endring av klientens innstillinger og kodede sendere gjøres ved å velge klientens navn fra menyen.




I dette eksemplet velger du fra menypunktet "JENSEN". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.

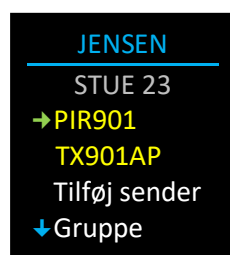


JENSEN Klientnavn

STUE23 Valgfri tekst

PIR901 **TX901AP** Produkter som allerede er lagt inn.


Trykk  for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk  for å flytte den grønne ned menyen.

Trykk  for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Legg itl sender

Legg til ny sender til klienten.

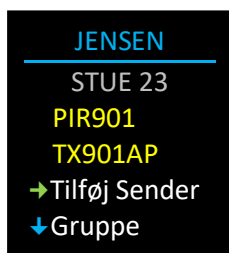

Velg fra "Legg til avsender"-menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.



Aktiver nå ønsket sender.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Hvis senderen allerede er kodet, vises følgende meny, noe som gjør at en sender kan flyttes mellom klienter.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Ved bekreftelse bytter sjernbildet automatisk til menyelementet.


Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Grupper

Grupper brukes for eksempel for 24/7 tidsplaner for et slikt nattskift, for eksempel har flere grupper å betjene enn et dagskift.

Legg til klient i de ønskede gruppe(r). For ny koding blir alle grupper automatisk fjernet.



Velg fra "Grupper"-menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

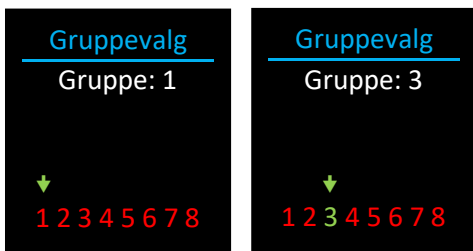

Trykk **Ent** for å melde deg på eller oppheve valget av gruppen.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Trykk **↓** **↑** for å flytte pilen til gruppen du vil endre.

1 Gruppe valgt.


1 Gruppe valgt bort.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – Klientnavn – Navn

Endre klientens navn.



Velg fra "Navn" -menyen. Sett den grønne pila på menyelementet, og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

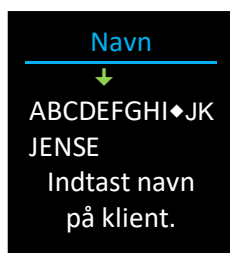

Skriv inn et navn på klienten, her vises "JENSEN".


Trykk **↑** for å flytte den grønne pila til bokstaven til venstre.

Trykk **↓** for å flytte den grønne pila til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.

Trykk **Esc** for å slette den siste bokstaven.

Trykk **Esc** og hold inne tasten i 2 sekunder for å forlate menyen.

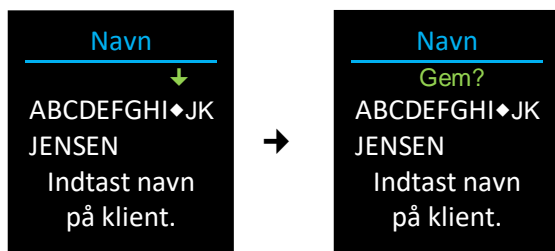


Hvis du vil lagre navnet, velger du symbolet ♦ og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – Klientnavn – Tekst

Endre klientens navn.



Velg fra "Tekst" -menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

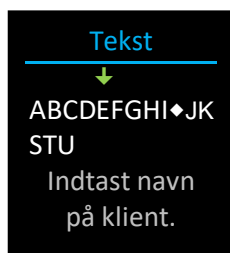

Skriv inn et navn på klienten, her vises "JENSEN".


Trykk **←** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **→** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.

Trykk **Esc** for å slette den siste bokstaven.

Trykk **Esc** og hold inne tasten i 2 sekunder for å forlate menyen.

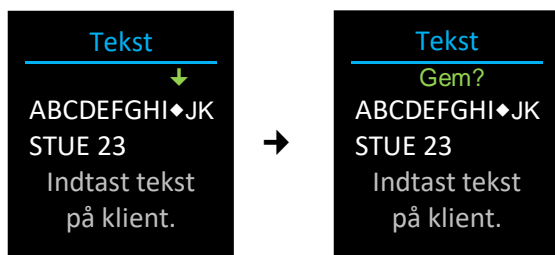

Hvis du vil lagre navnet, velger du symbolet ♦ og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – Klientnavn – Slett klient

Slett klienten, hvis klienten slettes, slettes også de kodede senderne på klienten.



Velg fra "Slett klient"-menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet

Endre innstillingene på den kodede senderen.




I dette eksemplet velger du menypunktet "PIR900" og en grønn pil på menyelementet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



De første linjene viser informasjon om senderen:

PIR901 Senderens produktnavn.
ID: 60023 Senderens ID.
Ver.: 1.0.0 Senderens programvareversjon.
Signal tone 1 Den valgte signaltonen når senderen mottas.

Trykk  for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk  for å flytte den grønne ned menyen.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Tekst

Endre produktets tekst, som vises på informasjonsskjermen når du ringer en alarm. Som standard er for eksempel kodet Knops produktnavn TX901.



Velg meny punkt "Tekst" og en grønn pil på meny punkt, og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Skriv for eksempel inn et produkt navn "DØR SENSOR".


Trykk **↑** for å flytte den grønne pila til bokstaven til venstre.

Trykk **↓** for å flytte den grønne pila til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.

Trykk **Esc** for å slette den siste bokstaven.

Trykk **Esc** og hold inne tasten i 2 sekunder for å forlate menyen.

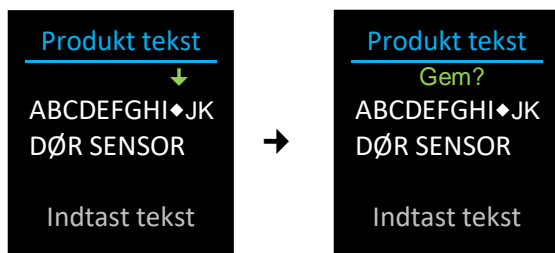

Hvis du vil lagre teksten, merker du symbolet ♦ og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Endre signal

Endre signaltonen på alarm. Signaltone 1 er som standard valgt.



Velg menyelementet "Signaltone". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Velg en ny signaltone ved å flytte pilen, den nye signaltone som spilles av når du beveger deg.

Trykk **↓** **↑** for å velge ny signaltone.

Trykk **Ent** for for å velge signaltone.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.


Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Anropstekster

Det er mulig å endre anropsteksten som vises på nød anrop. Anropsteksten viser hvilken alarm som er sendt fra senderen. Antall anropstekster varierer avhengig av produktet som er kodet.



Velg menyelementet "Anropstekster". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**. Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Følgende eksempel viser en TX901.

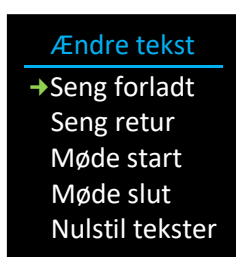

Trykk **Ent** på teksten du vil bruke.

Trykk **↓** **↑** for å velge anropsteksten du vil endre.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Gjeldende merket tekst vises i menyelementet.

Trykk **Ent** for å lagre ny anropstekst.

Trykk **↓** **↑** for å endre anropsteksten.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Merk: Det er mulig via KNOptool å lage tilpassede tekster og endre tekster.

Note: Eldre produkter i 900-serien har begrenset funksjonalitet.

Note: Endrer teksten når mottakeren er en del av et KNOP repeatersystem, teksten endres for alle mottakere.


Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Anropsstekster – Tilbakestill

Tilbakestill tekst angir at all innringingstekst endres tilbake til fabrikkinnstillingene.



Velg menyelementet "Anropsstekster". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Følgende eksempel viser en TX901.

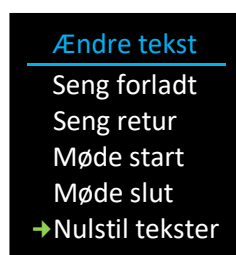

Velg menyelementet "Tilbakestill tekster". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for at avvise.

Merk: Endrer teksten når mottakeren er en del av et KNOP repeatersystem, teksten endres for alle mottakere.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Anrop: Normal

Alle nød anrop fra denne klienten er gjort på nød anrop. Som standard er normalen valgt. Produkter med nød anrop valgt i KNOP-logoen sendes alltid som nød anrop.



Trykk **Ent** for bytte mellom "Normal" og "Nød!".

Trykk **Esc** for å forlate menten.

Forskjellen imellom normal og nød anrop er at nød anrop kommer først, eventuelt andre anrop i KNOP's repeatersystem sendes et nød anrop til alle mottagere i motsetning til et normal anrop som videresendes imellom de enkelte mottagere avhengig av innstillingene.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhe – Tidsstyrt

Tidsstyring av senderen.

Det er mulig å til- og frakoble senderen i to forskjellige tidsrom. Som standard er funksjonen frakoblet.



Velg meny punkt "Tidsstyrt". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å skifte mellom "Fra" og "Til".

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Trykk **↓** **↑** for at velge mellom meny punktene.

Eksempel på innkodning av aktivt tidsrom imellom 16:00 og 8:00 (neste dag).



Velg meny punkt "Start 1". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.





Trykk **↓** **↑** for å endre timer.


Trykk **Ent** for å skifte til minutter.

Trykk **Esc** for å avbryte.



Trykk   for å endre minutter.

Trykk  for å lagre.

Trykk  for å avbryte.

Gjenta det samme for ”Stopp 1” menypunktet.



Timeren på sender som er tilknyttet i dette tilfelle ”JENSEN” er nå innstillet imellom 16:00 og 8:00 hver dag.

Trykk  for å avbryte.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Slett sender

Sletting til sender hos klienten.



Velg meny punkt "Start 1". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Hovedmeny - Innstillinger – Grupper

I gruppemenyen kan gruppene navngis og eventuelt tidsstyring kan legges til. Som standard er gruppene navngitt 1 til 8 og tidsstyring avslått.



Velg menyunktet "Grupper". Sett den grønne pilen på menyunktet og trykk **Ent**. Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Gruppemenyen vises nå:



Trykk **↓** **↑** for å flytte den grønne pilen imellom gruppene.


Trykk **Ent** for å velge den ønskede gruppe.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Fortsetter i neste menyunkt.

Hovedmeny - Innstillinger – grupper – gruppenavn – Tidsstyrt

Automatisk innkobling av gruppen i det innprogrammerte tidsrom.

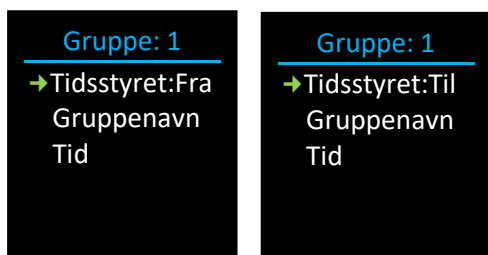


Trykk **Ent** for å skifte mellom "Fra" og "Til".

Trykk **Esc** for å forlate menyen.


Tip: Husk å stille inn tidspunkt i menypunkt "Tid".

Hovedmeny - Innstillinger – grupper – gruppenavn – Gruppenavn

Det er mulig å endre gruppenavn som vises på informasjonsskjermen ved alarmmottak. Som standard vises f.eks. "Gruppe 1" men kunne f.eks. omprogrammeres til "NATTEVAKT".

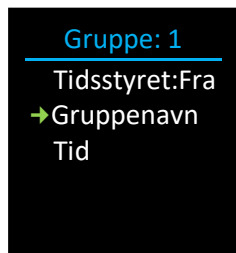

Velg meny punkt "Gruppenavn". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

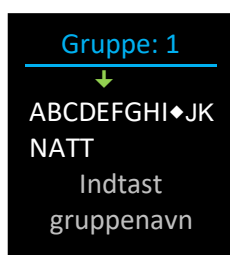

Legg inn et gruppenavn f.eks. "NATTEVAKT".


Trykk **←** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **→** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstav.

Trykk **Esc** for å slette det siste bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for at forlate menyen.

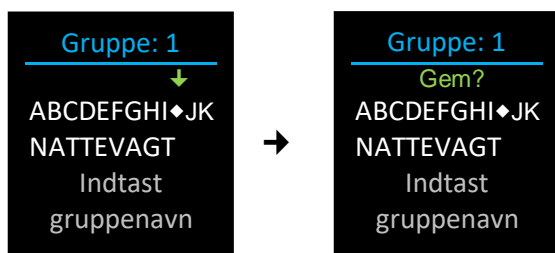

For å lagre gruppenavnet velges symbolet ♦ og trykk **Ent**.


Gruppenavnet er nå endret.



Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – grupper – gruppenavn – Tid

Aktiveri Aktiveringstidspunkt, hvis tidsstyring er aktivert, kan denne innstilles i menyen "Tid".

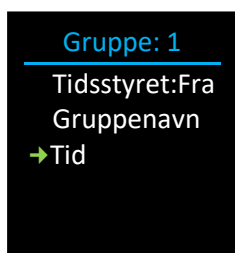

Velg menyen punktet "Tid". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **↓** **↑** for å endre timer eller minutter.
Trykk **Ent** for å skifte imellom timer og minutter.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – Still klokke

Det er viktig å klokkeslett og dato er innstilt korrekt slik at tidsstyringer fungerer korrekt.



Velg menyen punktet "Still klokke". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **↓** **↑** for å endre årstall.
Trykk **Ent** for å godkjenne.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.




Trykk **↓** **↑** for å endre måned.
Trykk **Ent** for å godkjenne.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.




Trykk **↓** **↑** for å endre dagen.
Trykk **Ent** for å godkjenne.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.






Trykk   for å endre timer.


Trykk  for å godkjenne.

Trykk  for å forlate menyen.



Trykk   for å endre minutter.

Trykk  for å godkjenne.

Trykk  for å forlate menyen.

en inntastede dato og klokkeslett vises deretter i en kort stund.

Merk: Når mottageren benyttes i et KNOP system (MR902/RP902) oppdateres klokken automatisk i alle medtagere.

Hovedmeny - Innstillinger – Tastelyd

Det kan velges imellom lav, høy eller avslått tastelyd ved trykk på knappene.



Trykk **Ent** for å skifte mellom "Lav", "Høy" og "Avslått".

Trykk **Esc** for å forlate menyen.


Hovedmeny - Innstillinger – Navn

Navn på denne RX901B kan endres til et mer forståelig navn f.eks. "BIRTHE", som i dette eksempel er brukeren av denne mottageren. Det er en valgfri funksjon, som kan benyttes. Som standard vises RX901B.



Velg menyen punktet "Navn". Sett den grønne pilen på meny punktet og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

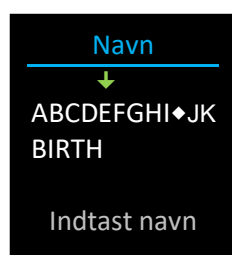

Tast inn et navn i dette eksempel "BIRTHE".


Trykk **←** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **→** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstav.

Trykk **Esc** for å slette det siste bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

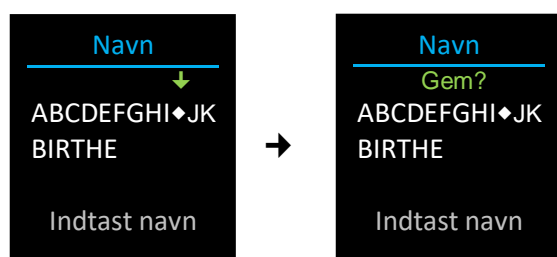

For å lagre navnet velges symbolet **◆** og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – Adgangskode

For å unngå utilsiktet endring i innstillingene, kan menyen beskyttes med en adgangskode. Adgangskoden er en fire sifferet kode.


Koden "0000" betyr ingen kode!

Når det er opprettet en adgangskode, skal denne inntastes, før det gis adgang til innstillingsmenyen.



Velg menyen punktet "Adgangskode". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

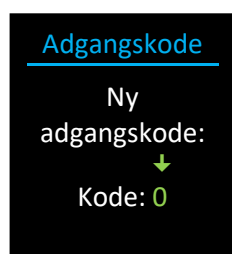

Trykk **↑** **↓** for å endre verdien (0 til 9).

Trykk **Ent** for å velge sifferet.

Trykk **Esc** for å slette det siste sifferet.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å lagre adgangskoden.


Merk: Det kan først lagres, når alle fire sifferene er valgt.

Hovedmeny - Innstillinger – Utgående

KNOP logoen på medtageren kan benyttes som oppkall til andre, hvis denne er innprogrammerte på deres mottager. Knappen kan enten sende en normal alarm, nød alarm eller frakoblet.



Velg menyen punktet "Utgående". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

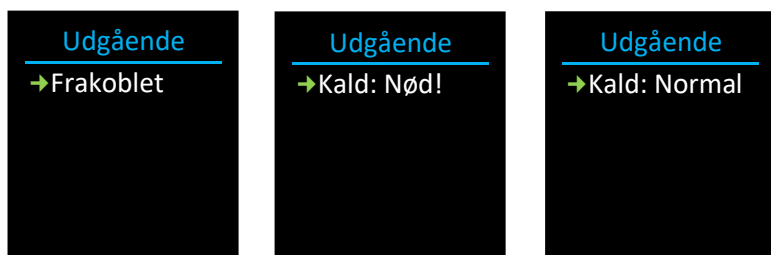


Trykk **Ent** for å skifte imellom "Frakoblet", "Kall: Nød!" og "Kall: Normal".
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – System meny



Når mottageren er tilkopleet til KNOP's repeatersystem er enhetene konstant i kontakt med hverandre. Masteren sørger for å sende den innkommende alarm til den mottager, som den mener, kan være nærmest klienten. Besvares den ikke, videresendes alarmen. Så snart alarmen er kvitteret avbrytes alarm i eventuell andre medtagere.

System meny benyttes til å tilkoble RX901 til KNOP's repeatersystem MR902/RP902. Som ved å inntastet system ID'et, typisk serienummeret på masteren i system, MR902. Deretter velge system "Til".


Som standard er dette frakoblet.

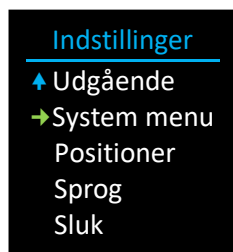


Velg menyen punktet "System meny". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**. Trykk **Esc** for å forlate menyen.

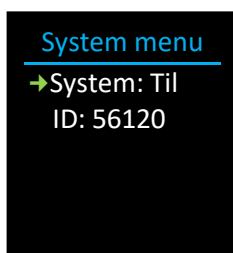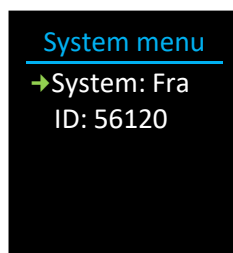

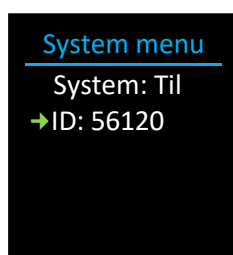


Trykk **Ent** for å skifte imellem "System: Fra" og "System: Til". Trykk **Esc** for å forlate menyen.

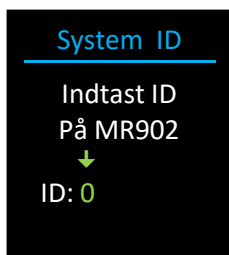


Velg menyen punktet "ID:". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**. Trykk **Esc** for å forlate menyen.




Trykk   for å endre verdien (0 til 9).



Trykk  for å velge tallet.

Trykk  for å slette det siste sifferet.


Trykk  og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

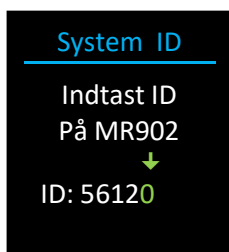Fortsett til alle sifrene er valgt.



Trykk   for å endre verdien (0 til 9).





Trykk  for å slette det siste sifferet.

Trykk  og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

Trykk  for å lagre adgangskoden.

På skjermens hovedside vises nå symbol som viser kvaliteten på linket til KNOP's repeatersystem.

Når systemet er tilkoblet vises det på start skjermen et tilkoplingsymbol.

-  Systemet er tilkoplek.
-  Kopler til systemet.
-  Systemet signal utfall.
-  Systemet signal mistet.


Tips: Husk både riktig ID og tilkoble.

Info: Mister mottageren forbindelsen til systemet, f.eks. hvis man går utenfor rekkevidde, vises først et gult symbol og deretter et rødt symbol. Kortvarig etter mottageren igjen har kommet innenfor rekkevidde, koples mottageren automatisk til igjen.

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner

Posisjoner benyttes til å definere lokaliteten fra enten klient eller brukeren. Man f.eks. få en alarm hvis en dement går ut av døren. Systemet kan også brukes i forbindelse med overfall. Systemet presisjon er bestemt av hvor mange posisjoner som er på systemet.

Posisjons meny innkodes posisjons stave POS901 i mottageren eller i KNOP repeatersystemet MR902. Posisjoner kan settes ved dør, gang, gulv, loft, utendørs kun fantasien setter begrensinger, posisjons system kan benyttes både til klienter og bruker.

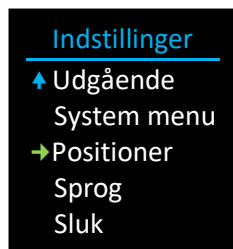

Velg menyen punktet "Posisjoner". Sett den grønne pilen på meny punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.




Hoveddør Nåværende posisjon, vises hvis man er innen rekkevidde av en posisjonsstav POS901.
Bagdør Allerede innkodet posisjoner.

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Vis posisjon

Funksjoner viser de samlede informasjonen omkring den nåværende posisjonen.



Velg menyen punktet "Vis posisjon". Sett den grønne pilen på meny-punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

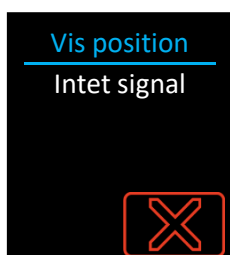

Hvis mottageren ikke er innenfor rekkevidde av en posisjonsstav POS901 vises "Ingen signal". Innenfor rekkevidde sees posisjonsnummeret (Pos.) i dette tilfelle 580. Er posisjonen navngitt vises denne også, i dette tilfelle "Hoveddør".

Trykk **Esc** for å forlate menyen


Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Legg til posisjon

Funksjonen legger til ny posisjon.



Velg menyen punktet "Legg til posisjon". Sett den grønne pilen på menyunktet og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

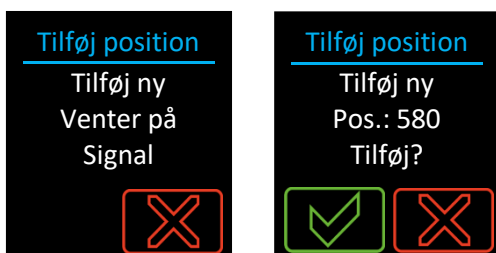


Mottageren skal være innenfor rekkevidde av posistionsstav, POS901. Når en ny posisjon sees, kan denne tilføyes, merk det er posisjons ID på staven der vises.

Såfremt posisjonen allerede er lagt inn, kan den ikke tilføyes igjen og kan naturligvis ikke tilføyes.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Trykk **Ent** for å lagre posisjonen.

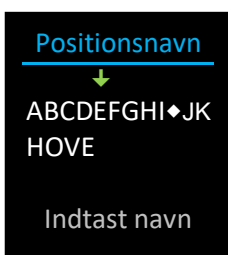

Legg inn et forståelig navn i dette eksempel "HOVEDDØR".


Trykk **↑** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **↓** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstav.

Trykk **Esc** for å slette det siste bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

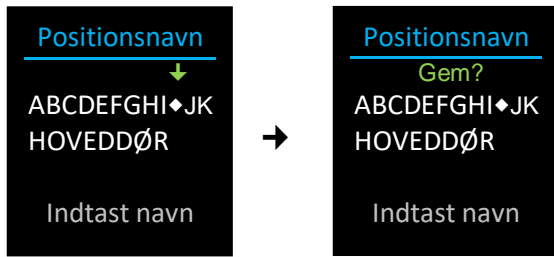

For å lagre navnet velges symbolet ♦ og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Posisjonsnavn

Funksjonen endre navnet på en allerede innkodet posisjon.



Velg i menyen en posisjon f.eks. i dette tilfelle "Hoveddør". Sett den grønne pilen på "Hoveddør" og trykk **Ent**. Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Det fortsettes automatisk til menypunktet "Hovedmeny-Innstillinger-Posisjoner-Posisjonsnavn-Rett posisjon".

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Posisjonsnavn – Navn

Rett posisjonsnavnet.



Velg meny punkt "Navn". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Rett teksten i dette eksempel til "HOVEDDØR".


Trykk **↑** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **↓** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstav.

Trykk **Esc** for å slette den siste bokstaven.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

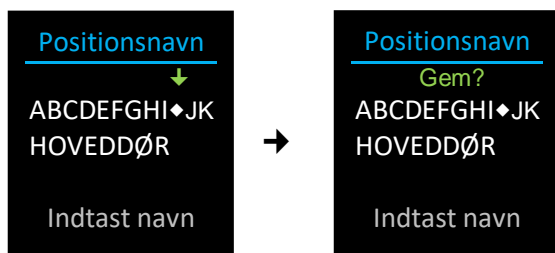

For å lagre navnet velges symbolet ♦ og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Posisjonsnavn – Slett

Sletter posisjonen.



Velg meny punkt "Slett". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.




Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Trykk **Ent** for å slette posisjonen.

Hovedmeny - Innstillinger – Språk

Still inn det ønskede språk i mottageren RX901.

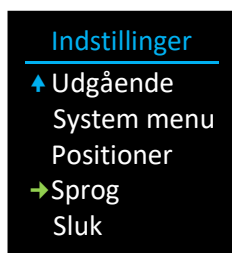

g menyunktet "Språk". Sett den grønne pilen på menyunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **↑** for å flytte den grønne pilen til det ønskede språk.


Trykk **↓** for å flytte den grønne pilen til det ønskede språk.

Trykk **Ent** for å velge språket.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny – Innstillinger – Slå av

F Funksjonen slå av produktet og kan slås på hvis den ligger på laderen.

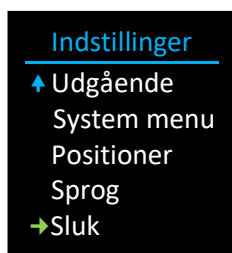

Velg meny punkt "Slå av". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Ønskes mottageren RX901 kun i dvale, kan dette gjøres i meny punkt " Innstillinger ➔ Alå av".

Merk: Klokke og dato blir nullstilt.

Vedlikehold

Oppdatering av RX901B

Det er mulig å oppdatere softwaren i RX901B, samt laste ned og laste opp oppsett med KNOPTool. For nærmere beskrivelse vises det til veiledningen for KNOPTool.

Rengjøring

Produktet kan rengjøres med en fuktig klut eller spritsserviett.

Avhending

Produktet må ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall, men behandles etter kommunens anvisning for elektronikkavfall.



Kontroll av dekningsområde

En person aktiverer en sender (f.eks. TX901) med korte mellomrom, mens en annen går systematisk rundt i området og merker på en skisse over bygningen og området, hvor det er dekning. Skissen legges på kontoret, så alle, som skal betjene systemet, kan se, hvor der er dekning. Utenfor dekningsområdet kan det ikke mottas alarmer. Dekningsområdet kan økes ved bruk av KNOP's repeatersystem. Kontakt din forhandler for nærmere opplysning.

Tilbehør

Trådløs lader og halssnor kan bestilles hos Cantec AS

Tekniske data RX901B:

Batteri:	1 stk. Li-Ion 3,7V 450 mAh
Drift tid på batteri:	Ca. 3 døgn med 50 alarm oppkall pr. døgn.
Lading:	Trådløst, ca. 4 timer.
Frekvens:	869.2125 MHz
Rekkevidde:	Opptil 1500 m mellom 2 stk. RX901B *)
Display:	Grafisk LCD.
Meny tekster:	3 språk: Dansk, Norsk, Svensk.
Log funksjon:	Lagrer de siste 50 alarm oppkall.
Minne:	4 sendere 150 posisjonsstav POS901
Omgivelse miljø:	Innendørs bruk. <90 % fuktighet ikke kondenserende.
Omgivelse temperatur:	0-40° C
Kabinett type:	Hvit ABS
Kabinett dimensjoner:	45 x 90 x 16 mm. Inkl. halssnor med sikkerhetslås, som bryter ved trekk.
Tetthet:	IP65
Vekt inkl. Batterier:	56g

Retten til endringer forbeholdes.

*) Målt utendørs med fri sikt mellom sender og mottager. I bygninger, er rekkevidden redusert. Kontrollere dekningsområdet som beskrevet i avsnittet. Dekningsområdet kan økes med en repeater fra KNOP's repeater system MR902/RP901 serie.

