




KINETIC BALANCE

<i>Abduksjonssele</i> <i>Art.nr.</i>	<i>Hms art.nr.</i>	<i>Størrelse</i>
9.70001.0	216540	XS
9.70001.1	216541	S
9.70001.2	216542	M
9.70001.3	216543	L

Kinetic Balance

Abduksjonssele

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Sele abduksjon # 9.70001

Innhold

4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 abduksjonssele
1 bruksanvisning

Bruk

Sele for bekkenposisjonering.

Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel

Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering

Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.

Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fastsett plasseringen av klemspennene på hver side for bånd 1 og 2. Fest båndene 3 og 4 bak på stolen ved å strekke dem gjennom klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og materialer.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter.
Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
4b. Plasser setet i ønsket stilling i stolen, slik at sittebeinsknutene hviler midt på setet. Vær oppmerksom på retningen som er indikert på setet. Indikasjonen må være synlig og peke forover.
5. La brukeren sette seg i setedelen i stolen.
6. Trekk båndene 1 og 2 gjennom klemspennene, og fest disse i riktig retning.
7. Juster båndene 1 og 2. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller (rulle)stolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
10. Under bruk kan abduksjonsåpningen åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på bånd 1 og 2.

Vedlikehold

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel. Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no