

ACHEEVA BRUKSANVISNING



 a division of The Helping Hand Company

Denne håndboken gjelder Graduate-modeller med serienummer GRAD19003 og oppover, og Student-modeller med serienummer STU19004 og oppover.

Serienummer: _____

Produksjonsdato: _____

1. Garanti.....	3
2. Introduksjon.....	3
3. Sikkerhet.....	4
4. Batterisystem.....	5
5. Brukerkontroll.....	8
6. Justeringer.....	8
7. Posisjoneringspakke.....	11
8. Montering og rengjøring.....	12
9. ACHEEVA® reset.....	12
10. Teknisk data Acheeva.....	13

Kontaktinformasjon

Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22
1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70

E-post: firmapost@hm-spes.no

Webside: www.hm-spes.no.no

1. Garanti

ACHEEVA® Learning Station-garantien inkluderer polstring og madrass, mot defekte materialer og mangelfull utførelse i en periode på tolv måneder fra kjøpsdatoen.

Denne garantien er kun gyldig for slitasje og ikke gyldig i tilfeller av misbruk eller annen bruk enn de som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Vi garanterer ikke tekstiler mot krymping, så vær nøye med rengjøringsinstruksjonene på side XXXXXXXX.

Hvis du trenger å bestille reservetrekk til madrassen eller barnesengene etter den opprinnelige bestillingen, kan vi ikke garantere en eksakt fargetilpasning da fargestyrken varierer. Vi forbeholder oss retten til å velge mønstre eller farger fra sortimentet, men vil alltid prøve å finne den nærmeste matchen som er tilgjengelig.

Visse bevegelsesmønstre og bruk kan påvirke tekstilslitasje, dette kan ikke dekkes av garanti. Selv om elektriske komponenter er nøye valgt for det tiltenkte miljøet (tørr/innendørs), kan vi ikke garantere komponentene mot skade fra inntrengning av væske.

Det anbefales en månedlig inspeksjon av ACHEEVA®, samt en full årlig service for å sikre at den fungerer som den skal.

For mer informasjon, kontakt oss gjerne på: 66 81 60 70

2. Introduksjon

ACHEEVA® læringsstasjoner

ACHEEVA® læringsstasjoner har vist seg å være svært inkluderende, slik at elever og studenter som må tilbringe tid i liggende stilling kan delta i alle klasseromsaktiviteter - noe som gir trygghet og støttet liggstilling.

ACHEEVA® Student er den mindre versjonen for brukere opp til 155 cm høye og 120 kg, ACHEEVA® Graduate er den større modellen og har 208 cm sengelengde og 120 kg løftekapasitet, noe som gjør at den passer for høyere mennesker.

3-veisfunksjonen (høyde, tilt og bakvinkel) gjør det enkelt å finne en komfortabel posisjon. Kombinert med Symmetrisleep-tilbehør for avslapning, balanse og forbedret funksjon liggende eller sittende. ACHEEVA kan heves til 50° for langtidssitting eller senkes med 10° for liggende stilling. Ved liggende stilling er det bare å bruke Tilt in Space for den mest balanserte posisjonen.

Med ACHEEVA® Student og Graduate kan eleven/studenten komme opp i riktig høyde for å samhandle med klassekameratene og klassemiljøet. Plattformens høydeområde er 60 cm - 100 cm på begge modeller, og delte sideskinner gir tilgang til det valgfrie bordet for bruk i sideleie. Alternativt kan bordet monteres på hodeenden for utsatte brukere.

ACHEEVA® Student og Graduate har flere nyttige funksjoner:

Student & Graduate

- Anti-kollisjonsbeskyttelse
- Horisontal auto-utjevning
- Kick bar-bremser
- Symmetrisleep® tilbehørspose
- Fotbrett
- Batteribeskyttelse og hørbar indikasjon ved lavt batteri

Kun Graduate

- Femte hjul for rettere styring

3. Sikkerhet

Sikker bruk av din ACHEEVA® læringsstasjon

Bruk av ACHEEVA® under transport anbefales IKKE og vil ugyldiggjøre garantien.

Ved utvelgelse av utstyr er det terapeutens ansvar å utføre en risikoanalyse av bruken. Dette er spesielt relevant for ikke-ambulante brukere som kan kreve assistert overføring.

Krav til posisjonering kan endres. Brukeren bør vurderes regelmessig for å sikre at stasjonen justeres riktig. Feil justering kan forårsake ubehag og varige problemer.

Det anbefales at terapeuter og omsorgs- og helsepersonell fyller ut følgende sjekklister når de vurderer riktig bruk av produktet:

- Er brukerens stilling/holdning akseptabel i ACHEEVA®?
- Er det bekymringer om press, og blir de adressert?
- Anses brukeren for å være trygg i ACHEEVA®, eller vil det være nødvendig å sikre brukeren? Et sikkerhetsbelte anbefales til enhver tid.
- Har brukeren eller andre rundt brukeren oppførsel som kan gjøre produktet usikkert?
- Er ACHEEVA® egnet for det foreslåtte miljøet?
- Når man bruker ACHEEVA® for å gi forskjellige stillinger, skal brukerens respirasjonsevne alltid kontrolleres.

Sikkerhetsrestriksjoner

Fokus på sikkerhet og komfort er tatt med i utformingen og designet av ACHEEVA®, for å sikre at det er i samsvar med sikkerhetslovgivning. ACHEEVA® læringsstasjon er i samsvar med BS7177. Sørg for at alle ansatte er kjent med følgende restriksjoner. Det anbefales at denne bruksanvisningen alltid oppbevares sammen med ACHEEVA® læringsstasjon.

VIKTIG!

- **Aldri la barn leke med ACHEEVA®.**
- **Ikke tillat kjæledyr i nærheten ACHEEVA® mens den brukes.**
- **Barn skal overvåkes i nærheten av ACHEEVA®.**
- **Slå av enheten når den ikke er i bruk.**
- **Varsle besøkende med barn for den potensielle risikoen.**
- **Ikke sitt på verken front- eller fotenden på ACHEEVA® da det kan forårsake ustabilitet og skade.**

Feil bruk at dette produktet kan forårsake ulykker

- Ikke tillat noen å sitte, stå eller legge for mye vekt på endene av sengen eller skyvehåndtakene på ACHEEVA®.
- Brukeren må alltid være plassert innenfor hjulbasen til ACHEEVA®, og et sikkerhetsbelte kan være nødvendig for å oppnå dette til enhver tid.
- Ikke bruk ACHEEVA® i våte omgivelser - den er beregnet for bruk i tørre og innendørsforhold.
- Vær oppmerksom når du hever, senker eller tilter ACHEEVA®, at det ikke er noen hindringer i veien.
- Det anbefales at begge bremsene aktiveres hvis enheten er i en tilfredsstillende, stasjonær posisjon.

4. Batterisystem

Stell og bruk av batterisystemet

Batteripakken er fulladet før levering og vil vare i over 100 operasjoner. Når batteriet når minimumsnivået og krever lading, vil man høre en advarsel hver gang en knapp trykkes på. Vi anbefaler at batteriet lades minst en gang i uken, og at man ikke venter på at minimumsnivået oppnås.

Å lade batteriet

Koble ladekabelen fra krokene og koble laderen til en passende strømforsyning. En full ladning tar ca. 8 timer. Hvis batteriet når en minimumsladingsnivå, slås systemet av for å forhindre skade. Laderen kan være koblet til stømnettet, men det anbefales å oppbevare den på enheten når batteriet er fulladet.



ADVARSEL!

Unngå å utsette kablene for mekaniske belastninger. Dersom noen kabler blir skadet, må de byttes ut for å forhindre farer.

ACHEEVA® skal ikke brukes konstant i mer enn ett minutt under belastning etterfulgt av en hviletid på 19 minutter.

Lagringstemperatur: -10°C / +40°C

Driftstemperatur: +5°C / +30°C

Atmosfærisk trykk: 700 til 1060 hPa

Vinkelmåler

Vinkelmålere er festet til både hode- og benseksjonene på Graduate® og Student®, som hjelper til med å kalibrere enheten hvis klienten har spesifikke posisjoneringskrav.



ADVARSEL!

Når brukeren på ACHEEVA® flyttes fra en liggende til en mer oppreist stilling, er det viktig at dette gjøres sakte og forsiktig. Selv om ACHEEVA® er designet for å unngå det, kan friksjon mellom brukerens rygg og hodeseksjon føre til at brukerens ryggrad blir komprimert nedover. For å unngå dette, flytt nakkestøtten noen få grader av gangen og frigjør friksjonen ved å forsiktig trekke brukerens skuldre fremover.

5. Håndkontroll

Hvordan bruke håndkontrollen

De tre hovedmekanismene betjenes av håndkontrollen som er vist til høyre. Følg guiden på neste side for hvordan man justerer hodet, tilt og høyde ved å bruke kontrollen.

Hvis ACHEEVA® senkes og tiltingen er aktiv, kan et potensielt sammenstøt skje. Hvis dette skjer, vil den justere seg selv før man fortsetter å senke.



Håndkontroll isolasjon

Håndkontrollen kan isoleres via en bryter for å stanse uautorisert bruk av fjernkontrollen. Denne bryteren er plassert på venstre side av enden av sengen under kromhåndtakene.

For å isolere håndkontrollen trykker man på knappen "0" ned. Hvis man trykker på en hvilken som helst knapp på håndkontrollen, høres et pip som indikerer at håndkontrollen er isolert. For å gjenopprette bruken av håndkontrollen, trykk "I" ned. Når håndkontrollen først brukes, vil man høre et pip i et sekund. Hold knappen inne for å initialisere håndkontrollen. Batteriet kan lades med bryteren i begge posisjoner.



Hodet




For å heve eller senke hodet på ACHEEVA®, bruk de to øverste knappene som vises på fjernkontrollen.



Tilt



For å tilte ACHEEVA®, bruk de to midterste knappene på fjernkontrollen.

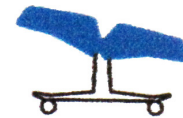

Hev/senk



For å senke eller heve ACHEEVA®, bruk de to nederste knappene på fjernkontrollen.



6. Justeringer

Reposisjonering - femte hjul (kun Graduate)

Det femte hjulet er plassert i Graduate baseramme og kobles inn/ut av et sett med pedaler på hver side av ACHEEVA®. Det ekstra hjulet øker manøvreringsevnen og reduserer innsatsen som kreves for å flytte enheten rundt.



Hjulet kobles inn ved å trykke ned på pedalen, slik at hjulet kommer i kontakt med gulvet.



Hjulet kobles ut ved å trykke på den andre pedalen og hjulet vil løftes opp. Den holdes magnetisk på plass, er fjærbelastet og krever kun minimalt trykk for å fungere.

Merk at fargen på pedalene er utsatt for endring.

Slå ned eller sette på plass sidestøttene

Dette gjør at det komplette sidestøtten kan senkes ned, slik at overføringen kan oppnås eller en slynge kan settes på plass. I standardposisjon er sidestøttene vertikale og er låst med en dreietapp.

For å "låse opp", dra sidestøtten opp, og roter deretter nedover/utover slik at den henger fritt. For å sette sidestøttene tilbake til vertikal stilling, settes sidestøtten tilbake igjen og skyve den forsiktig ned for å sikre at den låser seg på dreietappen.



Stasjonær stilling

For å låse ACHEEVA® slik at den ikke beveger seg, er det mulig å låse begge hjulene.



For å låse hjulene, trykk helt ned med den ene foten på bremsestangen, til du hører et "klikk".



For å løsne, løft bremsestangen opp med den ene foten, slik at den løsner.

Bord for mageliggende

ACHEEVA® har mulighet for å feste et bord i hodeenden når man er i mageliggende stilling.



For å feste bordet, sett inn både venstre og høyre arm inn i festeåpningene. Den røde utløserknappen skal gi et "klikk" når bordet er festet på plass. For å løsne bordet, trykk de røde knappene inn og trekk bordet forsiktig ut.

Bord for sideliggende

Sidebordet kan plasseres i hvilken som helst side på ACHEEVA® når sidestøttene er senket.



Når du kobler til sidebordet, sett begge armene inn i festeåpningen og sørg for at bordet er låst på plass. Den røde utløserknappen vil "klikke" når den er satt inn riktig. For å løsne bordet, trykk de røde knappene inn og trekk sidebordet forsiktig ut.

Bordhøyde og vinkel

Når man bruker bord i mageliggende eller sideliggende stilling, kan bordets høyde justeres for å tilpasses brukeren. For å justere høyden, løsne de to klemmehåndtakene på sidene av den vertikale rammen og skyv bordet opp eller ned for å plassere det i ønsket posisjon. Forsikre deg om at bordet er i vater og at det er låst på plass ved å trekke i de to klemmehåndtakene.

Bordet kan også vinkles ved å trykke på de svarte knappene på hver side av brettet og slippe dem når den er i ønsket posisjon/vinkel.



7. Posisjoneringspakke

Basert på Symmetrisleep®-systemet sørger ACHEEVA® posisjoneringspakker for støtte i rygg-, side- eller mageliggende stilling.

Systemet består av en pute, en sideliggende benstøtte, rull i str. medium og et antall posisjonsbraketter.

Madrassen har et Velcro®-vennlig trekk som sørger for fast og sikker plassering, og flytting av brakettene. Brakettene kan festes til madrassen og enkelt trekkes av og byttes om nødvendig.

Den sideliggende benstøtten er festet til madrassen på samme måte som brakettene og alt av tilbehøret kan oppbevares i nettingposen under ACHEEVA®.

Kontakt gjerne fysioterapeut hvis du er i tvil om hvilke tilbehør som er riktig.



ACHEEVA® posisjoneringspakke

8. Montering og rengjøring

Rengjøring av den "pustende" madrassen

Tørk av med en myk klut fuktet med vann og et nøytralt vaskemiddel. **IKKE** bruk blekemiddel eller sterke rengjøringsmidler. Kan maskinvaskes opptil 40°C (NB: Noe krymping kan forekomme, men dette har ingen negativ innvirkning på stof fets kvalitet). Husk å fjerne skuminnsatser fra madrassen før vask. For tørking: henges opp eller trommeltørkes (på kaldtørk).

Avtakbart Velcrolaken med glidelås

- Vaskes på 40°C (104°F)
- Skal **IKKE** tørkes i tørketrommel
- Bruk **IKKE** blekemiddel
- Skal **IKKE** strykes
- Skal **IKKE** vaskes med andre farger



Metallrammer, plast og sidebord

Om nødvendig bør disse tørkes av med mildt vaskemiddel og tørkes grundig.

9. ACHEEVA® reset

ACHEEVA® RESET

Etter en service kan det hende av ACHEEVA®-kontrollene må kalibreres på nytt. Følg instruksjonene for å tilbakestille ved å bruke fjernkontrollen.

Bruk følgende trinn for å tilbakestille:

- Hold (opp+ ned- pilene) sammen i omtrent 5 sekunder.
- Hold (opp pilen) til maksimum høyde.
- Hold (ned pilen) til fotenden er på lavest mulig tilt.

10. Teknisk data Acheeva


Mål: Student og Graduate

Beskrivelse	Student		Graduate	
	Cm	Inches	Cm	Inches
A- Total lengde	165	64,96	218	85,82
B- Lengde madrass	155	61,02	208	81,89
C- Bredde madrass	60	23,62	60	23,62
D- Totalbredde	70	27,56	70	27,56
E- Totalhøyde	76-116	29,9-45,7	76-116	29,9-45,7
F- Totalhøyde kun Acheeva	60-100	23,6-39,4	60-100	23,6-39,4
G- Bakkeklaring	4	1,57	4	1,57
H- Tilting	+/- 20°		+/- 20°	
I- Ryggtilt	+50°, -10°		+50°, -10°	
Maks. belastning	120 kg/264 lbs		120 kg/264 lbs	
Produktvekt	75 kg/165,35 lbs		75 kg/165,35 lbs	

Merk:

Minimum korridorbredde som kreves for å svinge i hjørner er 130 cm for Graduate og 110 cm for Student (når hodeseksjonen er helt hevet.)

Mål

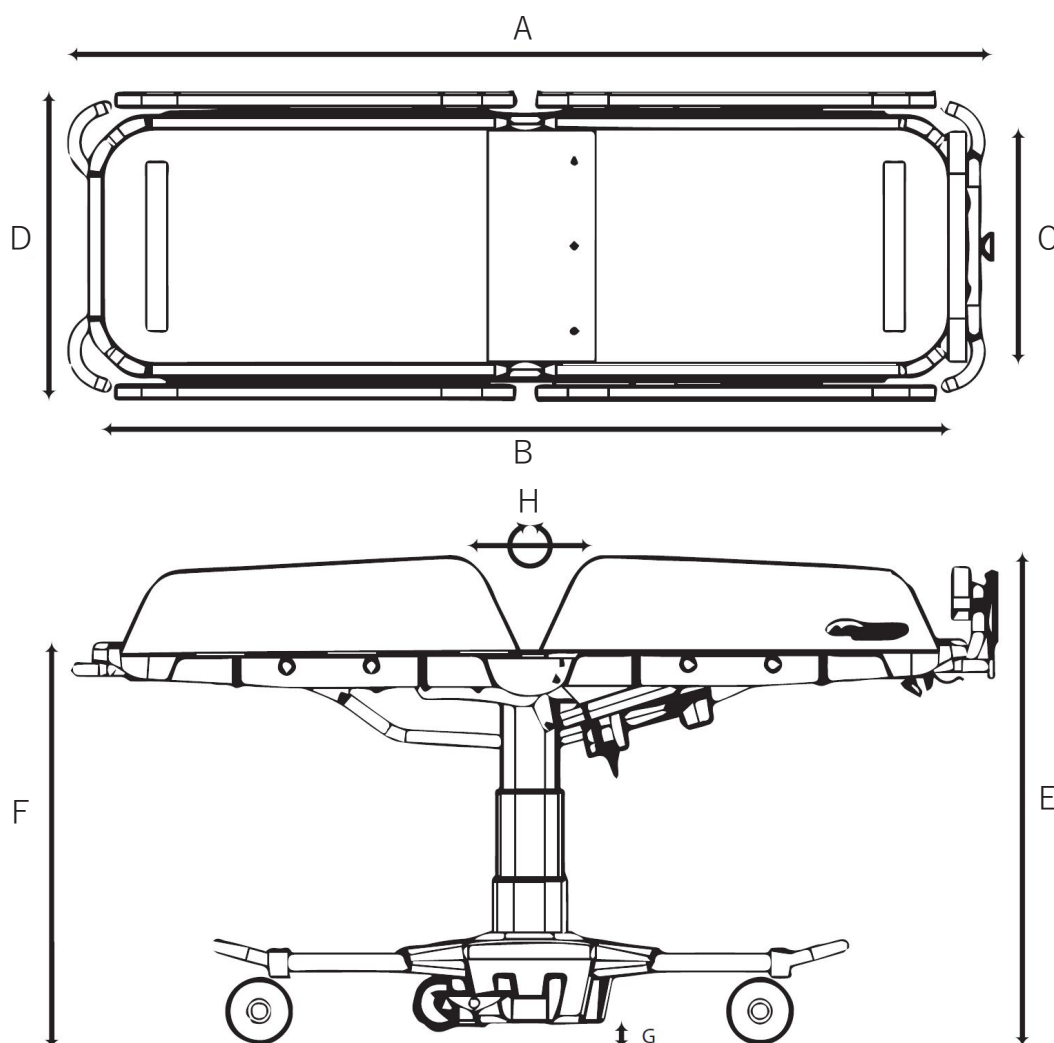



 a division of The Helping Hand Company

Tlf: 01531 635388
www.symmetrikit.com
sales@symmetrikit.com

The helping Hand Company
Bromyard Road, Ledbury
Herefordshire HR8 1NS
Tlf: 01531 635678
sales@helpinghand.co.uk



HjelpeMiddeLspesialisten as

HjelpeMiddeLspesialisten AS
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tlf: 66 81 60 70
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no