



Brukermanual
Dynamisk madrass

ProCell 834

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

Viktig

Når du bruker elektroniske produkter, spesielt når barn er til stede, bør du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende:

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

ADVARSEL

For å redusere risikoen for elektroshjokk:

- Trekk alltid ut dette produktets stikkontakt umiddelbart etter bruk
- Ikke bruk mens du bader
- Ikke plasser eller oppbevar produktet der det kan falle ned i eller trekkes inn i et badekar eller kum
- Ikke legg produktet i vann eller andre væsker
- Ikke strekk deg etter et produkt som har falt i vann. Koble fra strømmen umiddelbart!

For å redusere risikoen for forbrenning, elektroshjokk, brann eller personskade:

- Et produkt skal aldri etterlates uten tilsyn når det er koblet til
- Tett tilsyn er nødvendig når dette produktet brukes av, på eller i nærheten av barn eller funksjonshemmede
- Bruk bare dette produktet til den tiltenkte bruken som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk andre tilbehør enn de som er anbefalt av produsenten
- Bruk aldri dette produktet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har falt eller skadet eller falt i vann. Returner produktet til et servicesenter for undersøkelse og reparasjon
- Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater
- Blokker aldri produktets luftåpninger eller plasser det på en myk overflate, for eksempel en seng eller sofa, der luftåpningene kan være tilstoppet. Hold luftåpningen fri for lo, støv, hår og lignende.
- Ikke slipp eller stikk gjenstander i åpning eller slange
- Ikke bruk utendørs eller bruk der aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen administreres

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE

INNHALDSFORTEGNELSE

UTTRYKK OG SYMBOLER.....	5
INTRODUKSJON.....	6
PAKKENS INNOLD.....	7
PRODUKTFUNKSJONER.....	8
PUMPE.....	8
MADRASS.....	9
INSTALLASJON.....	10
BRUK.....	11
GENERELT.....	11
PUMPEINSTRUKSJONER.....	12
HLR FUNKSJON.....	13
PRESSURE & CYCLE TIME SETTING.....	14
ADVARSEL FOR LAVT TRYKK.....	14
RENGJØRING.....	14
PUMPE.....	14
MADRASS.....	15
HÅNDTERING OG LAGRING.....	15
VEDLIKEHOLD.....	16
GENERELT.....	16
LAVT TRYKK.....	16
FJERNING AV ENHETEN.....	16
FEILSØKING.....	16
SPESIFIKASJONER.....	17
SYSTEM.....	17
PUMPE.....	18
MADRASS.....	18
PRODUSENTINFORMASJON.....	19
OFFISIELL FORHANDLER NORGE.....	20

UTTRYKK OG SYMBOLER

Merk, forsiktig, advarsel & fare uttrykk

MERK

Indikerer noen råd eller informasjon som brukeren bør være oppmerksom på.

FORSIKTIG

Indikerer riktig drifts- eller vedlikeholdsprosedyre for å forhindre skade på eller ødeleggelse av utstyret eller annen eiendom.

ADVARSEL/FARE

Retter oppmerksomhet mot en potensiell fare som krever riktige prosedyrer eller fremgangsmåter for å forhindre personskaade.



LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK

INTRODUKSJON

Denne manualen skal brukes til den første installasjonen av systemet og til referanseformål.

Generelt

ProCell IV-serien er et høykvalitets- og prisgunstig vekseltrykksystem som egner seg til trykksårbehandling og forebygging ved medium til høy risiko. Den er designet for å forebygge liggesår og gir en prisgunstig løsning for 24 timers trykkavlastning.

ProCell IV-serien er testet og samsvarer til alle CE-standarder.

Tiltenkt bruk

ProCell IV-serien er tiltenkt til å redusere tiffeller av trykksår mens den optimaliserer pasientkomfort. Den sørger i tillegg for:

- Individuell hjemmeomsorg og langvarig omsorg
- Smertebehandling som foreskrevet av en lege

Kontraindikasjon

Pasientforholdene der bruk av trykkavlastende behandling på et alternerende system er kontraindisert, er som følger:

- Nakke- eller rykkprolaps
- Ustabile ryggmargsskader

PAKKENS INNHOLD

Kontroller pakkens innhold. Dersom noe av følgene skulle mangle eller være skadet, kontakt din lokale forhandler for umiddelbar erstatning.

Pumpe

Påse at pumpen er lik den du har bestilt.
Funksjoner kan variere fra modell til modell.



Madrass

Kontroller celletypene. Madrassene 250, 305, 412, 512 og 512-T krever en underliggende madrass. En madrass av cell-on-cell typen, som 623- og 834-madrassene krever ikke en underliggende madrass.



Trekk

Avtagbart trekk for enkel rengjøring.



Manual

Les alltid denne manualen før bruk.

PRODUKTFUNKSJONER

PUMPE

Q2K-03 AUTO - Lock

1. Strømbryter
2. Komfort innstilling
3. Syklustid
4. Alarm reset
5. Statisk/alternerende
6. Auto firm (Hold 3 sekunder)
7. Lås (Hold 3 sekunder)



➤ **Strømbryter (1)**

Bryteren er på pumpens høyre side. Skru AV/PÅ strømmen og pumpen vil STARTE/STOPPE.

➤ **Komfort innstilling (2)**

Syv komfortnivåer på panelet som trykkvalg ved hjelpa v enkle tastetrykk.

➤ **Syklustid (3)**

Alternerende syklustid kan velges på tabellen. Velg mellom 10, 15, 20 eller 25 minutter. Et sett med to synlige indikatorer kumulerer når tidsverdien økes.

➤ **Alarm reset (4)**

En audiovisuell alarm skrus på når trykket er lavt. For å skru av alarmen, trykk på reset knappen. Den visuelle alarmen vil blinke. Trykk på reset knappen igjen for å reaktivere alarmen.

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

➤ **Statisk/alternerende (5)**

Trykk for å sette madrassen enten statisk eller dynamisk modus.

➤ **Auto Firm (6)**

Trykk for å sette luftmadrassen i hurtig oppblåsningsmodus, noe som letter pleie og stell. Pumpen går automatisk tilbake til forrige innstilling etter 30 min.

➤ **Auto Lås (7)**


Innstillingene blokkeres automatisk etter 5 min. uten endringer, eller når knappen holdes inne i 3 sekunder. For å låse opp holder du 3 sekunder.

MADRASS

ProCell serien kommer med celletype madrasser av ulike materialer (Nylon/PVC, Nylon/PU or PU) med tilhørende pumpe. Vennligst se i spesifikasjonene for detaljer.

834 - madrass

1. Hurtigkobling til pumpen
2. Elastiske stropper og løkker på basen for feste til underlaget
3. HLR for hurtigtømming
4. Hurtigkobling til cellene på alle celler
5. Rask utløserplugg (valgfritt)

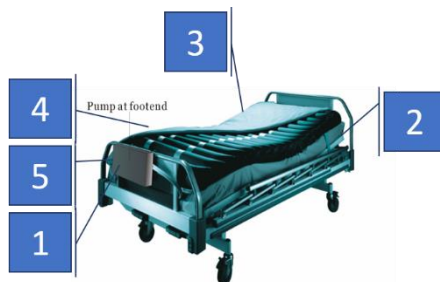

INSTALLASJON

Steg 1 ► Plasser madrassen flatt på sengerammen.

Oppblåsingsrøret skal være mot foten, slik at det kan kobles til pumpens dyser. Se figur nedenfor for referanse.



Steg 2 ► Ha på laken for å unngå direkte kontakt mellom madrass og hud og reduser dermed friksjon

Steg 3 ► Heng pumpen over rammen eller gavli i sengens fotende. Påse at pumpen sitter godt festet.

Steg 4 ► Koble luftlangene fra madrassen til pumpens dyser. Påse at de festes ordentlig.

MERK !

Forsikre deg om at luftslangene ikke er bøyd eller gjemt under madrassen.

Kontroller også at HLR-ventilen er riktig festet og lukket.

Steg g ► Koble strømledningen til en stikkontakt.

MERK !

Før du setter støpselet i stikkontakten, må du kontrollere at spenningen er kompatibel.

Steg 6 ► Slå på strømmen ved å trykke på strømbryteren på høyre side av pumpen, og strømbryteren er i PÅ ("I") posisjon.
Fortsett til delen BRUK.

Steg 7 ► Sørg for å trekke ut stikkontakten når den ikke er i bruk.

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

BRUK

GENERELT

Dette produktet er designet for å gi maksimal komfort for pasienter som trenger behandling med trykksår. Forsikre deg om at du bruker dette produktet på en riktig måte for å optimalisere verdien. Her gir vi litt generell informasjon du bør være oppmerksom på.


For produkter: IKKE bruk en annen pumpe med andre spesifikasjoner enn beskrevet i denne håndboken. Det er farlig å bruke en pumpe med trykkapasitet større enn 120 mmHg. Dette kan resultere i cellepunktering.

IKKE skift noen komponenter selv. Hvis det er behov for utskifting eller reparasjon, må du alltid kontakte din lokale forhandler eller servicesenter.

For pasienter: Påse at madrassen er oppblåst helt. Avhengig av madrassens dimensjon tar det 30-45 minutter for 85 cm og 90 cm bredde, det tar 45-60 minutter for 120 cm bredde. Når den første oppstartsseskvensen er oppfylt, er trykket justert til ønsket fasthetsnivå, og madrassen er klar til bruk.

Vennligst dekk madrassen med et laken for å unngå direkte hudkontakt og for pasientens komfort.


En fast overflate vil gjøre det lettere for pasienten å flytte eller repositionere seg. Benytt deg av funksjonen Statisk modus. Det kan støtte pasienten ved å holde madrassen fra bunnen når pasienten er i sittende stilling. Se figur nedenfor.

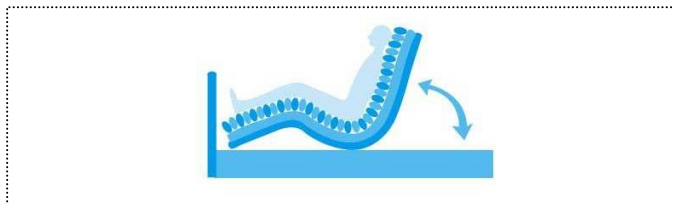

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

Håndsjekk: I alternerende modus, sjekk om trykket er riktig justert ved å skyve den ene hånden mellom luftmadrassen og pasienten, over en mindre oppblåst celle, for å føle pasientens rumpe.

Brukerne skal kunne føle mellomrommet mellom, og det akseptable området er omtrent 25 til 40 mm. Denne håndsjekkprosedyren er utstedt av AH CPR.

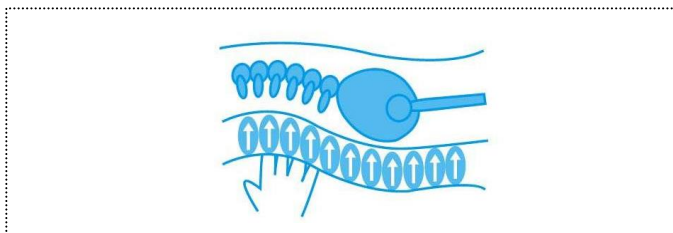

PUMPEINSTRUKSJONER

Q2K-03 AUTO - Lock

Steg 1 ► Skru på strømmen. Et pip vil indikere at systemoperasjonen er igangsatt. Pumpen begynner å blåse opp madrassen.

Steg 2 ► Pumpen vil først gå i statisk modus når systemet skrues på. Den vil innledningsvis blåse opp madrassen til 15 mmHg og deretter bytte til alternerende modus. Dersom 15mmHg ikke nås før det har gått 70 minutter vil alarmen pipe og Alarm Reset knappen vil skrues på.

Trykk Alarm Reset for å skru av lyden på alarmen – indikatoren vil fortsatt lyse. Trykk Alarm Reset igjen for å skru på alarmen.

MERK!

Dersom alarmen ikke utløses, vennligst referer til feilsøkingsskjemaet lenger bak i manualen.

Steg 3 ► Alternerende syklustid og komfortnivå er forhåndsinnstilt på moderate nivåer. Trykk for å velge ønskede nivåer på panelet.

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

MERK!

For passende trykk, vennligst referer til Bruk seksjonen lenger opp og gjennomfør håndsjekk prosedyren.

Steg 4 ► For å bytte til statisk modus, trykk på Static/Alternating knappen og indikatoren vil lyse. Trykk en gang til for å bytte til alternerende modus.

MERK!

I statisk modus, vil madrassen gi en fast overflate som tilrettelegger pasienttransport og repositionering. Statisk modus forhindrer at bruker bunner ut i sittende posisjon.

Steg 5 ► Under normal drift vil pumpen overvåke trykkendringer. Hvis trykket er under et brukerdefinert nivå, vil pumpen automatisk begynne å blåse opp madrassen. Pumpen stopper når det brukerdefinerte trykknivået er nådd.

Hvis trykket er konstant lavt, vil alarmer pipe og indikatoren vil komme til å gjøre oppmerksom på lavtrykksforhold. Hvis det skulle være åpenbar lekkasje, for eksempel forårsaket av løs tilkobling av luftcelle, aktiveres den audiovisuelle alarmer.

Trykk Alarm Reset for å skru av lyden på alarmer – indikatoren vil fortsatt lyse. Trykk Alarm Reset igjen for å skru på alarmer.

Steg 6 ► For pleie- og stell, trykk på Auto Firm-knappen for automatisk å blåse opp madrassen til det maksimale trykknivået i 30 minutter. Trykknivået vil automatisk gå tilbake til det tidligere brukerdefinerte nivået etter 30 minutter. Trykk på Auto Firm-knappen igjen for å bytte tilbake til alternerende / statisk modus når Auto Firm-funksjonen må skrues av.

I tilfelle det er en dårlig forbindelse av slangen eller luftlekkasje fra madrassen, vil det føre til lavtrykkstilstand og den hørbare / synlige alarmer vil bli aktivert.

HLR FUNKSJON

Når det er en nødsituasjon for å utføre HLR på pasienten, trekker du HLR-stroppen umiddelbart for å frigjøre luften raskt fra madrassen.

HLR-stroppen er plassert på høyre side av madrassen.

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

PRESSURE & CYCLE TIME SETTING

Brukere kan justere trykknivået på luftmadrassen til ønsket fasthet selv eller i henhold til forslaget fra helsepersonell. Madrasser på 85 cm og 90 cm brede vil utføre på alle innstillinger for vekt mellom 30-200 kg. For 120 cm madrass anbefales det å øke syklusstiden til 25-25 minutter for høyere vekt. Se tabellen nedenfor for foreslåtte innstillinger for syklusstid for bredde / vekt:

<u>Madrassbredde</u>	<u>Pumpe</u>	<u>Syklustid</u>	<u>Brukervekt</u>
85cm - 90cm	Q2K-03	10-15-20-25 minutter	30<200kg.
120cm	Q2K-03	20-25 minutter	120<200kg.

ADVARSEL FOR LAVT TRYKK

Når unormalt trykk oppstår, vil lavtrykksindikatoren lyse. Den hørbare alarmen vil bli aktivert for å gjøre oppmerksom på lavtrykksforhold. Sjekk om tilkoblingene er sikret og riktig installert i henhold til relevante instruksjoner.

MERK !

Hvis trykket er konstant lavt, må du kontrollere om det er lekkasje (i rør eller tilkoblingslanger). Kontakt om nødvendig din lokale forhandler eller servicesenter for å bytte ut eventuelle skadede celler eller slanger.

RENGJØRING

I denne delen beskriver vi prosedyrene for å rengjøre og dekontaminere pumpen. Det er viktig å følge disse prosedyrene før du bruker systemet på pasienter.

Rengjøringsoppgaven kreves minst en gang i uken for å opprettholde personlig hygiene.

PUMPE

- ▶ IKKE senk pumpen i vann eller gjør den våt.
- ▶ Sjekk for ekstern skade og flytt pumpen til rengjøringsområdet.
- ▶ Plasser pumpen på en arbeidsflate og spray eller tørk av utsiden av pumpehuset med kvartær ammoniumsoppløsning.
- ▶ IKKE spray noen rengjøringsløsninger direkte på overflaten av pumpen.
- ▶ IKKE bruk en Hypo-karbonat- eller fenolbasert rengjøringsløsning, da dette kan skade pumpehuset. La løsningen inkubere i 10 minutter eller følgelig som angitt av rengjøringsproduktet som brukes.
- ▶ Tørk av pumpehuset med en ren klut. Forsikre deg om at alle områdene er

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

rene (topp og bunn, begge sider).

- ▶ Spray klut med rengjøringsmiddel og rengjør frontplaten. IKKE tillat overflødig rengjøringsløsning på frontplaten eller kontrollpanelet. (Hvis løsningen kommer inn, vil det oppstå skader). La overflaten tørke grundig etter rengjøring.
- ▶ Etter at pumpen er grundig rengjort og tørket, fortsetter du å plugge inn pumpen og teste for å se om den går normalt.
- ▶ Trekk ut pumpen og oppbevar den med riktig identifikasjonsmerke.

MADRASS

- ▶ Tørk av overflatene på trekket med såpe og vann før du våter med noe flytende desinfeksjonsmiddel.
- ▶ Eventuelle åpenbare blodflekker bør våtes grundig med 1: 9 hypoklorittoppløsning (1-del blekemiddel til 9 deler vann) og la tørke i minst 10 minutter. Tørk deretter med en ren, fuktig klut.
- ▶ Ta av toppdekelet fra madrassen.
- ▶ Tørk av alle overflater med såpe og vann før du påfører væske.
- ▶ Trekk senkes ned og dynkes i desinfeksjonsmiddel for den nødvendige inkubasjonstiden.
- ▶ Etter forvarming skylles trekket gjennom en vanlig syklus i en vaskemaskin uten såpe og vaskes deretter med mildt vaskemiddel (vasketemperatur 35°C, skylletemperatur 25°C eller på den kaldeste innstillingen).
- ▶ Trekkene lufttørkes til de er helt tørre. (Tørketemperaturområde 30-50°C eller på den kaldeste innstillingen.)
- ▶ Luftcellene klikkes av på den ene siden og sprøytes på alle sider med et desinfeksjonsmiddel. La den sitte i ønsket inkubasjonstid og tørk den av med en ren klut. (Sørg for å koble fra alle luftcellene, en etter en, og spray desinfeksjonsmidlet på alle sider, inkludert alle koblingsrør og slanger. La det sitte i minst 10 minutter.)
- ▶ Hvis det er en base etter at du har fjernet alle luftcellene, må basen sprayes ned med desinfeksjonsmiddelet, innvendig og utvendig. La den sitte i ønsket inkubasjonstid og tørk av med en klut.
- ▶ Gjenta prosessen med slangesettet: spray, inkuber, og tørk av.
- ▶ Transportbagen skal vrenses og tørkes helt av med desinfeksjonsløsningen.
- ▶ La det tørke grundig. Når innsiden er tørr, snur du den tilbake: Tørk av utsiden av bagen med desinfeksjonsmiddel.
- ▶ Tørk madrassen på et SOLFRITT område etter rengjøring.

HÅNTERING OG LAGRING

- ▶ Legg madrassen flatt og opp ned.
- ▶ Rull fra fotenden mot hodeenden; Fotstroppen kan deretter strekkes rundt den rullede madrassen for å forhindre utrulling.
- ▶ Ikke brett eller stable madrassen.
- ▶ Følg nasjonale retningslinjer for avfall hvis du kaster pumpen.

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

VEDLIKEHOLD

GENERELT

- ▶ Kontroller strømledningen og støpselet for å se om det er slitasje eller skade.
- ▶ Sjekk madrassstrekket for tegn på slitasje eller skade. Forsikre deg om at madrassstrekket og cellene er riktig tilkoblet.
- ▶ Plugg inn pumpen og kontroller luftstrømmen fra slangetilkoblingsporten. Luftstrømmen skal veksle mellom porter hver halvsyklus.
- ▶ Kontroller luftslangene for å se om det er knekk eller brudd. Ta i så fall kontakt med din lokale agent eller forhandler for utskifting.
- ▶ Forsikre deg om at madrassslangen er godt tilkoblet.
- ▶ Kontroller pumpen og sørg for at både strøm- og strømindikatorene er av når bryteren er slått av.

LAVT TRYKK

Sjekk om det er luftlekkasje mellom pumpen og madrassforbindelsene eller fra luftmadrasslangene :

- ▶ Kontroller kontaktene mellom luftmadrassen og pumpen. Hvis det er frakobling, må du koble den til igjen.
- ▶ Kontroller HLR-ventilene. Forsikre deg om at uttakene er forseglet.
- ▶ Kontroller lufttilkoblingsrørene. Forsikre deg om at hver enkelt celle ikke er ødelagt.
- ▶ Vri trykkjusteringsknappen til Fast. Hold rørene oppblåst og inspisér for luftlekkasje.
- ▶ Sjekk om det er luftlekkasje fra celler. Forsikre deg om at det ikke oppstår lekkasje. Ta kontakt med din lokale agent eller forhandler hvis det oppstår lekkasje.

FJERNING AV ENHETEN

Følg nasjonale retningslinjer for avfall hvis du kaster enheten.

FEILSØKING


Problemer	Løsninger
Pumpen virker ikke	<ol style="list-style-type: none">1. Sjekk om stikkkontakten er ordentlig koblet til uttaket.2. Skru på strømbryteren igjen <ul style="list-style-type: none">▶ Dersom strømindikatorene viser PÅ og pumpen fortsatt ikke virker, kontakt din lokale forhandler.▶ Dersom strømindikatorene viser AV, kan det være feil med strømuttaket. Prøv å koble til et annet uttak.

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

	Dersom strømindikatorene fortsatt viser AV, kontakt elektriker for kontroll av hovedstrømmen.
Ufullstendig inflatning (Lavt trykk)	1. For en rask sjekk, juster trykket til Fast. 2. Sjekk om rørene er vridd eller om det er lekkasje. ▶ Hold alltid rørene rette. ▶ Bytt rør hvis det er lekkasje. ▶ Forsikre deg om at HLR-ventilene er lukket. Forsikre deg om at hver eneste celle ikke er ødelagt.
Langsom luftstrøm	Et skittent filter kan redusere luftstrømmen. Vask filteret med mildt vaskemiddel for å holde det rent. ▶ Kontroller luftfilteret på baksiden av pumpen minst en gang i måneden.

SPESIFIKASJONER

SYSTEM

System	Spesifikasjon
Klassifisering	Klasse II; IPXO, No AP/APG; Type  BF**
Anvendt del	Madrass
Input	230V AC / 50Hz 12W, 1A
Sikring	250V, T1A
Miljøkrav	▶ Temperatur: Drift 50 ° F ~ 95 ° F (10 ~ 35 ° C) Lagring 5 ° F ~ 122 ° F (-15 ~ 50 ° C) Frakt 5 ° F ~ 158 ° F (-15 ~ 70 ° C) ▶ Fuktighet: Drift 20% ~ 80% ikke-kondenserende Oppbevaring 10% ~ 90% ikke-kondenserende
Sikkerhetsstandarder	CE

* På grunn av den kontinuerlige utviklingen av ovennevnte produkter, kan spesifikasjonene endres uten forvarsel.

Brukermanual ProCell 834 dynamisk madrass

MERK !

Ovennevnte spesifikasjoner gjelder også for de områdene som opererer med samme strømforsyningsområde. AP / APG NO indikerer at enheten IKKE er egnet for bruk i nærvær av brennbar anestesiblanding med luft eller med oksygen eller lystgass. Type BF-symbol angir graden av beskyttelse mot elektrisk støt. Instruksjoner eller referanseinformasjon for reparasjon av utstyrsdeler er gitt av produsenten. Ta kontakt med lokal forhandler for mer informasjon.



MEDICAL EQUIPMENT
WITH RESPECT TO ELECTRIC SHOCK,
FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY
IN ACCORDANCE WITH UL 2601-1, AND
CAN/CSA C22.2 NO. 601.1

PUMPE

Pumpe	Spesifikasjon
Dimensjoner	Q2K-03: 28.0 x 10.0 x 20.5 cm (11.0 x 3.9 x 8.1 inch)
Vekt	Q2K-03: 2.6 kg
Trykkområde	Q2K-03: 15 ~ 60 mmHg
Syklustid	Q2K-03: 10, 15, 20, 25 min. selectable

MADRASS

Art. No.	Kombinasjon	Dimensjon	Maks. vekt
PC4-085200-MA	834-mattress, N/PU Cells, PU-cover	83x200x20cm	200 kg
PC4-085210-MA	834-mattress, N/PU Cells, PU-cover	83x210x20cm	200 kg
PC4-085220-MA	834-mattress, N/PU Cells, PU-cover	83x220x20cm	200 kg
PC4-090200-MA	834-mattress, N/PU Cells, PU-cover	88x200x20cm	200 kg
PC4-090210-MA	834-mattress, N/PU Cells, PU-cover	88x210x20cm	200 kg
PC4-090220-MA	834-mattress, N/PU Cells, PU-cover	88x220x20cm	200 kg
PC4-120200-MA	834-mattress, N/PU Cells, PU-cover	118x200x20cm	200 kg
PC4-120220-MA	834-mattress, N/PU Cells, PU-cover	118x220x20cm	200 kg

PRODUSENTINFORMASJON

Prime Medical Solutions BVBA
Windmolenstraat 11/B,
3941 Eksel - BELGIUM

info@primemedicalsolutions.eu

www.primemedicalsolutions.eu

PRIME
Medical Solutions

OFFISIELL FORHANDLER NORGE

SOFIES AS
Grensesvingen 7,
0661 Oslo

post@sofies.no

www.sofies.no

