



Basis Top - forebyggende overmadrass

**Brukerveiledning**

# Innhold

Innledning .....	2
Produktbeskrivelse .....	4
Utpakking av madrassen .....	4
Rengjøring - Klargjøring .....	5
Generelle opplysninger .....	6
Symbolforklaring .....	7



## VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER OG KONTRAINDIKASJONER



### Les alle instruksjonene før bruk



Madrassen må kun anvendes til det tiltænkte formål som beskrevet i denne vejledning. Madrassen må ikke kombineres, samles eller repareres med andre dele, andet tilbehør eller andre reservedele end dem, der er beskrevet i denne vejledning eller i anden dokumentation fra ZiboCare.



MADRASSEN KAN IKKE STÅ ALENE VED BEHANDLING. Pasientens stilling må regelmessig endres iht. vnderutine.



MADRASSEN MÅ IKKE BRUKES i nærheten av eller i forbindelse med brannkilder/varme overflater som f.eks brann, brennende sigaretter eller varmelamper. Selv om produktet er branntestet, kan den bli skadet hvis det kommer i kontakt med brannkilder.



Plasser og bruk madrassen på en slik måte at den ikke blir klemt eller skadet. MERK! Vær spesielt oppmerksom på risikoen for at madrassen kan komme i klem ved bruk av sengegrinder.



Sjekk alltid at madrassen er i korrekt størrelse.



Bruk av sengens funksjoner: Vær oppmerksom på at når hjertebrettet heves, så vil dette føre til ekstra trykk ved seteområdet. Dette trykket kan reduseres ved å heve bendelen.



Inkontinensstrekket er væskebestandig og lufttett, men er gjennomtrengelig for fuktighet. Sørg for at brukeren plasseres korrekt for å unngå kvelningsrisiko.



Madrassen er beskyttet av et inkontinensstrekk. Unngå å bruke flere inkontinensstrekk samtidig. Dermed unngår man risikoen for at fuktgjennomtrengeligheten ødelegges.



Hvis det benyttes et tekstillaken over inkontinensstrekket, må man sørge for at dette trekket er fleksibelt og strekkbart for å unngå trykkskader.



Unngå skarpe gjenstander som kan skade inkontinensstrekket.



Madrassen kan kun brukes med én side opp. Det er tydelig merket på madrassen hvilken side som skal vendes oppover.

# Innledning



Les alltid hele brukerveiledningen før bruk.

## Erklært formål og bruk

Madrassene er forebyggende madrasser og kan anvendes i alle slags behandlingsmiljøer for forebygging av trykksår og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår til og med sårkategori 3.

Det anbefales at pasientens stilling endres regelmessig. Tidsintervallet skal vurderes av ansvarlig personale ut fra pasientens status, diagnose og allmenntilstand.

## Kliniske fordeler

Madrassen kan brukes til å:

- forebygge og behandle trykksår/shear.
- reduserer smerter.
- gir rolig og uforstyrret søvn, samt hurtigere rehabilitering.
- reduserer innleggelsestiden.

## Tiltenkt målgruppe

Pasienter med risiko for eller under behandling for trykksår. Brukervekt 0-150 kg.

## Andre opplysninger

Behandlingsplan for forebygging av trykksår: For å oppnå best mulig resultat med dette produktet, anbefales det å bruke et godt planlagt og godt strukturert arbeidsmiljø.

# Produktbeskrivelse

Basis Top har en skumbase i viskoelastisk spesialsikum som sikrer trykkavlastning for pasientene. Basis-madrassen er lagd for å forebygge trykksår. Madrassen kombinerer dermed to gode egenskaper – høy kvalitet og komfort i forebyggende pleie.

Basis Top er en utskiftingsmadrass. Overmadrassen skal alltid plasseres oppå en madrass.

**Madrassen fås i følgende varianter:**

Produktnavn	Dimensjoner	Art.nr.	HMS-nr.
Basis Top overmadrass	200 × 85 × 7 cm	622724	314477 <sup>1</sup>
Basis Top overmadrass	200 × 90 × 7 cm	622720	314478 <sup>1</sup>
Basis Top overmadrass	200 × 120 × 7 cm	622727	314479 <sup>1</sup>
Basis Top overmadrass	220 × 85 × 7 cm	622726	-
Basis Top overmadrass	220 × 88 × 7 cm	622722	-

<sup>1</sup> = 1. valg på rammeavtale med NAV f.o.m. 1. februar 2024.

Ta kontakt med Varodd Velferdsteknologi hvis du trenger andre størrelser.

Kontakt Varodd Velferdsteknologi på +47 38 14 48 00, hjelpemidler@varodd.no eller besøk vår nettside [www.hjelpemidler.varodd.no](http://www.hjelpemidler.varodd.no) for mer informasjon.

## Inkontinestrek

Alle trekk er inkontinestrek. De er enkle å håndtere og bruke. De oppfyller også de høyeste standarder for rengjøring og hygiene. Trekkene er gjennomtrengelige for fuktighet, noe som reduserer risikoen for hudmaserasjon.

Trekk – et trekk med beskyttet glidelås på tre sider.

Farge: blå

## Rotering av madrassen

Madrassen er laget som en roterbar skummadrass (på den ene siden) slik at levetiden forlenges ytterligere ved å bruke et dreieregime regelmessig. Trekk og madrass er tydelig merket «bunn» og «topp».

# Utpakking av madrassen

Alle madrasser leveres innpakket i gjenvinnbar plastemballasje.

Start med å kontrollere at emballasjen er uskadet. Fjern plastposen og eventuelt beskyttende materiale. Unngå å bruke kniv når du åpner emballasjen da dette kan skade inkontinestrek.

1. Sjekk alltid at madrassen vender riktig vei i trekket. Se etiketten.
2. Rett trekket ut.

# Rengøring og klargøring

Det er viktig å følge instruksjonene nedenfor før du bruker produktet til en ny bruker. Hvis du er i tvil, kontakt hygieneansvarlig eller leverandøren for hjelp og ytterligere instruksjoner.

## VIKTIG!

Sjekk inkontinenstrekker ved hver rengjøring. Hvis trekket er skadet, må det fikses eller repareres. Følg nøye de lokale rutinene og følg brukerveiledningen til rengjøringsmidlene.



### Inkontinenstrekk inkludert innvendig trekk

Inkontinenstrekk kan tørkes av med en mild rengjøringsløsning eller desinfiseres med en løsning til nevnt formål, f.eks. alkohol med eller uten overflateaktive stoffer, isopropanol 70 %, en oksiderende løsning eller maks 1 % klor. Når du bruker et annet rengjøringsmiddel, velg et som ikke påvirker plast.

Avføring og blodflekker må fjernes umiddelbart med kaldt vann. Følg nøye de lokale rutinene og brukerveiledningen til rengjøringsmidlene.

Trekk med flere lag skal skilles før vask. Må vaskes med lignende farger.



Klor- og fenolbaserte rengjøringsmidler kan ha en negativ effekt på PU-overflaten og bør unngås. Ved bruk av klor anbefales en blanding med maks 1 %.



### Madras skjerte

Inkontinenstrekket beskytter skumkjernen fullstendig, så det sjeldent nødvendig å rengjøre kjernen. Hvis det av en eller annen grunn er nødvendig å rengjøre kjernen, må man bruke en mild rengjøringsløsning og vann (som sprayes på). Klem forsiktig ut vannet.

La skumkjernen tørke på et varmt, ventilert sted hvor den ikke utsettes for direkte sollys. Skumkjernen må være helt tørr før den brukes igjen. Bruk eventuelt en mild rengjøringsløsning eller desinfiser med en løsning til dette formålet, f.eks. alkohol med eller uten overflateaktive stoffer, isopropanol 70 %, en oksiderende løsning eller maks 1 % klor.

Følg nøye de lokale rutinene og brukerveiledningen til rengjøringsmidlene.

## Vaskeanvisning



# Symbolforklaring



Advarsel



Referansenummer



Produsent



Fabrikant



Artikkelnummer



Medisinsk utstyr



Les brukerveiledning



CE-merket i henhold til Medical Device Regulation 2017/745 om medisinsk utstyr



Maskinvaskes ved 90° C



Tørketrommel ved lav temperatur



Ingen rens



Stryking ikke tillatt

# Generelle opplysninger

Denne madrassen er et medisinsk utstyr, klasse I og CE-merket i henhold til Medical Device Regulation 2017/745 om medisinsk utstyr.

## Oppbevaring

Oppbevar madrassen på et flatt underlag eller forsiktig sammenrullet/foldet med glidelåsen lukket. Madrassen skal alltid oppbevares på et tørt sted. Sørg for at madrassen oppbevares på et sted hvor den ikke vil bli utsatt for støt, slag eller annet som kan skade den. Unngå å utsette madrassen i direkte sollys. Hvis madrassen skal lagres i mer enn 3 måneder, anbefales det å oppbevare den på et flatt underlag (ikke foldet eller sammenrullet).

## Merking

Madrassene er merket med produktnavn, produksjonsdato, ref. nr., størrelse, pleie- og vaskeanvisning og LOT.nr.

## Garanti

Garanti: 2 år (standard utenfor anbud).

Garantien dekker produksjonsfeil. Garantien dekker ikke normal slitasje, forringelse av produktet eller skade som følge av uforsiktig håndtering eller stell av produktet.

## Levetid

Produktets forventede levetid med baving av de trykkavlastende egenskapene er 4 år. Madrassen kan ha en forventet levetid opptil 10 år, men da må madrassen brukes til pasienter som ikke har en direkte risiko for trykksår. Holdbarhet på trekket er 2 år, vurdert ut fra forventet daglig belastning av trekket.

## Service og vedlikehold

Madrassen krever ingen service eller vedlikehold annet enn rengjøring, som beskrevet i denne brukerveiledningen.

### 1.1 Reparasjon

Kontakt leverandøren for å få opplysninger om reparasjon.

### 1.2 Gjenvinning

Alle sengetøyprodukter er fullt resirkulerbare og bør resirkuleres som «brennbart avfall». Madrassen må ikke demonteres før resirkulering.

### 1.3 Retur og reklamasjon

Klager skal sendes til leverandøren. Retur av et produkt skal skje i henhold til leverandørens anvisninger og kan først skje når reklamasjonen er meldt. Skader som oppstår under transport skal meldes til transportselskapet.

## Ulykker og hendelser

I henhold til myndighetenes forskrifter om medisinsk utstyr er det produsentens og helsepersonells plikt å melde fra om ulykker og hendelser som involveres deres produkter. Vi ber derfor om at all informasjon om eventuelle ulykker og hendelser knyttet til våre produkter rapporteres til produsenten ZiboCare.

– Vi gjør hverdagen enklere!



#### Leverandør

Varodd Velferdsteknologi AS  
Rigedalen 41 | 4626 Kristiansand  
+47 38 14 48 00 | [hjelpemidler@varodd.no](mailto:hjelpemidler@varodd.no)  
Org.nr. 919 571 039 | [www.hjelpemidler.varodd.no](http://www.hjelpemidler.varodd.no)

#### Produsent

ZiboCare Denmark ApS  
Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens  
+45 70 50 04 07 | [post@zibocaredenmark.dk](mailto:post@zibocaredenmark.dk)  
Org.nr. 344 83 175 | [www.zibocare.dk](http://www.zibocare.dk)