

Bruksanvisning

Zitzi Flipper Flex G2 undersell





FLIPPER FLEX G2



Bruksanvisning

Zitzi Flipper Flex G2

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	3	Vadstöd	15
Reglerbar sitthöjd - Gaskolv	4	Fotlåda	16
Reglerbar sitthöjd - Ställdon	5	Ramförlängning	17
Laddning av batteri	6	Tippskydd fram	17
Inkoppling av elektronikbox	6	Sittdel	18
Tiltningsfunktion	7	Underhåll & Skötselanvisning	20
Körbåge	8	Rekonditionsanvisning	22
Parkeringsbroms	9	Anpassning och specialanpassning	24
Montering av drivhjul	10	Försäljningsvillkor	25
Montering av tippskydd & tramprör	11	Tekniska data	26
Färdriktningsspärr	11		
Transportkit	12		
Transport i bil	13		
Fotstöd	14		


Produkten är tillverkad av Anatomic SITT AB

Postadress	Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping
Besöksadress	Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-post	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Instruktionsfilmer	youtube.com/anatomicsitt
Följ oss på	facebook.com/anatomicsitt



Kryssa i rutan vid eventuell specialanpassning av produkten.

CE-märkningen **upphör** att gälla vid specialanpassad produkt.

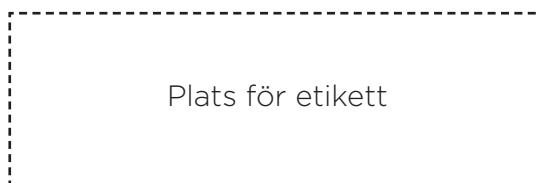

Plats för etikett

Säkerhetsföreskrifter

Inledning

För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Flipper Flex G2 till fullo är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet. Produkten är avsedd för brukare med sittproblematik och passar många olika typer av diagnoser. Anpassning/inprovning av Zitzi Flipper Flex G2 ska alltid utföras av medicinskt behörig person. Om ni behöver kompletterande uppgifter är ni välkomna att kontakta Anatomic SITT AB.

Användningsområde

Produkten är avsedd att användas som ett underrede tillsammans med ett sittsystem producerade av Anatomic SITT AB. Om önskemål om annan användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.
Max belastningsvikt är 95 kg.

Korrespondens

Zitzi Flipper Flex G2 med dess tillbehör är en CE-märkt produkt.
Du hittar serienumret på undersidan av sittplattan.
Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Krocktestad & godkänd

Zitzi Flipper Flex G2 är krocktestad och godkänd enligt 7176-19 för 75 kg i bil, samt hållbarhetstestad enligt Hi.

Om ett allvarligt tillbud uppstår bör det rapporteras till Anatomic Sitt AB och landets behöriga myndighet.



OBS!

Glöm ej att hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren ska balansera in den valda sitsen för att säkerställa att ev tipprisk utesluts. Se avsnitt om Ramförlängning på sidan 17. Extra tippskydd kan beställas om behovet finns.

Reglerbar sitthöjd - Gaskolv

Sitthöjden är reglerbar mellan **29-65** cm.


Sitthöjden justeras enkelt med hjälp av fotpedalen (se bild nedan).

Tänk på att alltid hålla en hand på sittsystemet (eller körbygeln) vid justering.

- Aktivera gaskolven genom att trycka ned fotpedalen.
- Justera sittsystemet till önskad höjd.
- Släpp fotpedalen när du har nått önskad höjd. Höjden är nu låst.



OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.

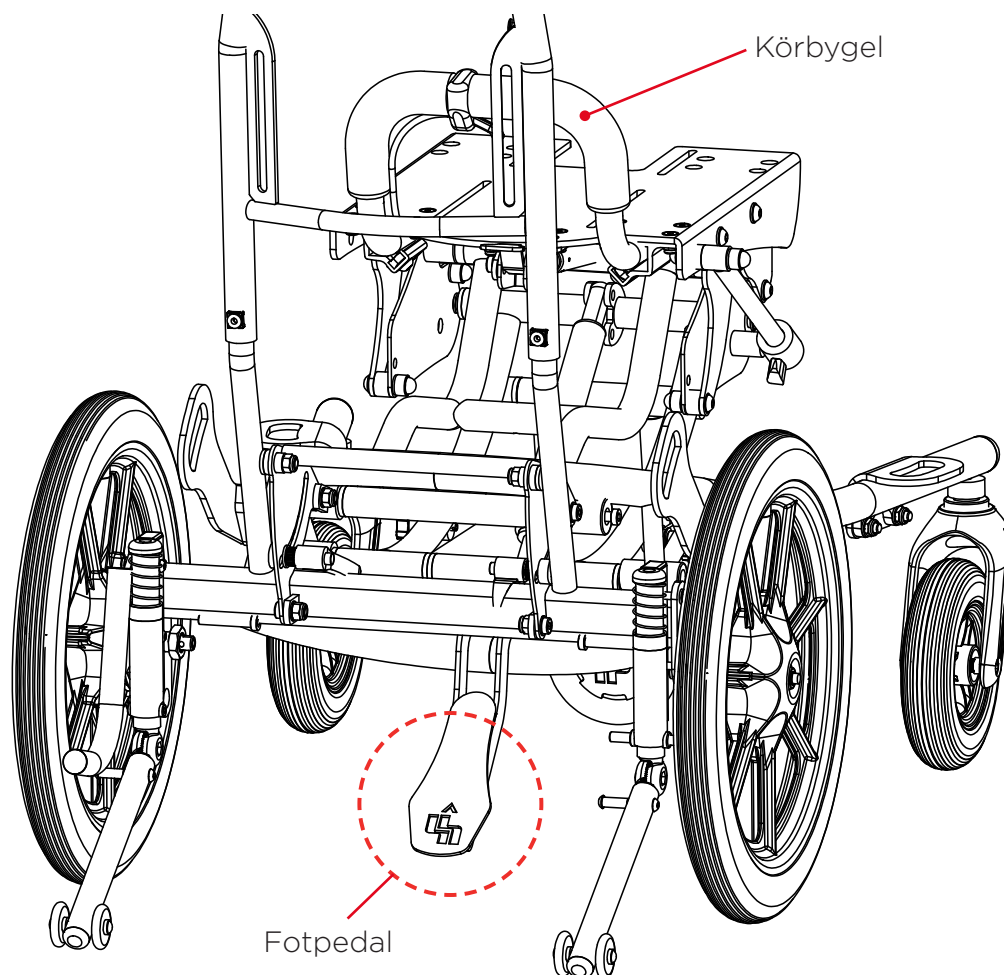


Reglerbar sitthöjd - Ställdon

Sitthöjden är reglerbar mellan 29-65 cm.

Sitthöjden justeras med en elektrisk handkontroll.


Tänk på att alltid hålla en hand på sittsystemet vid justering.

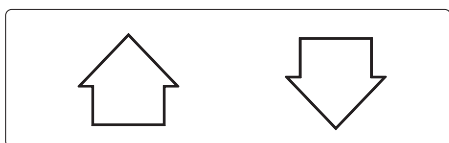

- Uppåtpil (A) höjer sittplattan
- Nedåtpil (B) sänker sittplattan



OBS! Var uppmärksam
på eventuell klämrisk.

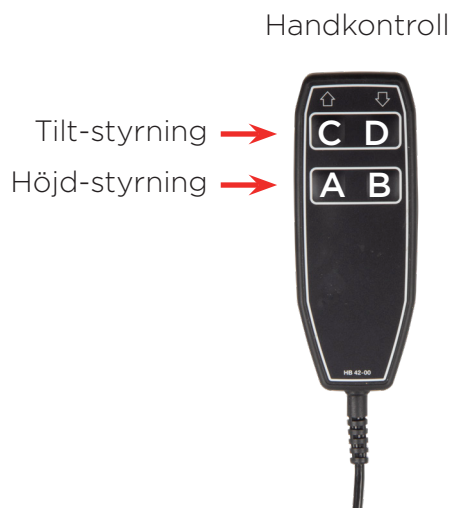

Höjdjustering:



Hög



Låg


Laddning av batteri

Anslut laddarens strömkabel till ett vägguttag (220 V).

Anslut sedan laddarens kontakt till uttaget på sidan av handkontrollen.

Första gången du laddar batteriet måste det ske i minst 24 timmar.

Det är mycket viktigt att batteriet aldrig laddas ur helt, eftersom att det då kan förstöras.

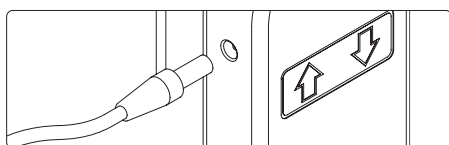

Kontakt för laddning sitter på sidan av handkontrollen.



Första laddningen skall vara i 24 timmar.
Laddning därefter rekommenderas ske varje natt.
Batteriet får aldrig laddas ur helt.

Inkoppling av elektronikbox

Vid inkoppling av elektronikboxen ska kontakten för lyftdonet kopplas till boxens kontakt märkt 1.

Vid tillval av elektronisk tiltfunktion måste elektronikboxen och den elektroniska handkontrollen bytas ut till en ny handkontroll och elektronikbox.

Tiltfunktionens ställdon kopplas då till boxens kontakt märkt 2.




HANDKONTROLL



STÄLLDON (TILT) tillval




STÄLLDON (LYFT)

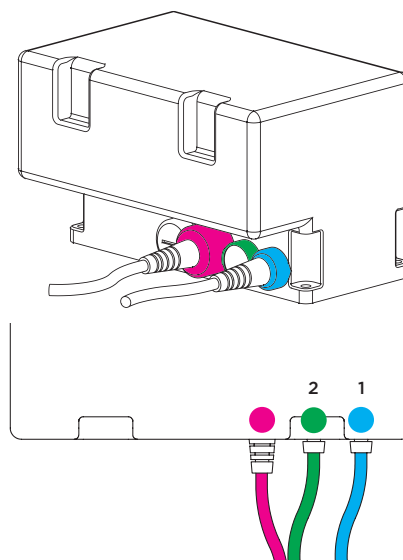

Tiltningsfunktion


Tiltningsfunktion

Flipper Flex G2 har två olika lägen för tilt vilket ställs in med hjälp av hål vid sidan om sittplattan. I standardutförande är infästningen i nedre hålet. Önskas mer negativ tilt kan man flytta infästningen till övre hålet.

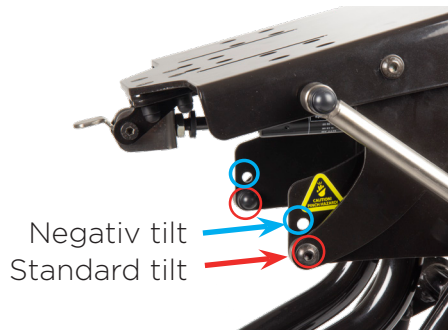

Tiltfunktion med gaskolv

Sittplattans vinkel justeras genom att lossa fingervredet (A) och trycka spaken på aktiveringshuset nedåt (Sitter i bakkant på sittplattan). för att sedan trycka sittplattan nedåt och framåt. Släpp handspaken (B) för att låsa önskad vinkel och dra sedan åt fingervredet (A) för att säkerställa att vinkeln är låst.

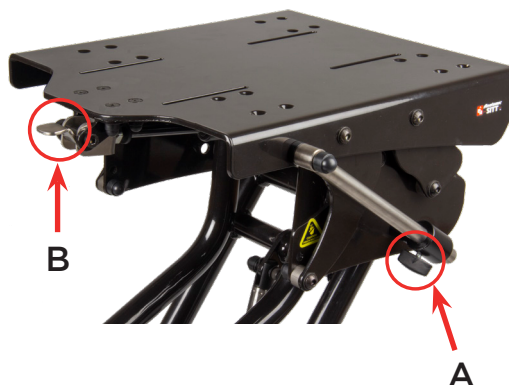

OBS! För att återställa sitsvinkeln till ursprungsläge, lossa fingervredet (A), tryck ner handspaken och dra sittplattan uppåt och bakåt genom att dra i körbygeln.

Kontroll

Kontrollera alltid att tiltningen är låst när du uppnått önskad vinkel.

Låsning

Fingervreden (A) måste alltid låsas efter eventuell justering.

Tiltfunktion med ställdon

Justera tiltpositionen genom att hålla ned tryckknapp (C) för framåttilt respektive tryckknapp (D) för bakåttilt. Släpp tryckknappen på handkontrollen när önskad tiltposition är uppnådd.

Handkontroll

Tilt-styrning →
Höjd-styrning →



OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.



Körbåge

Vinkeljustering - Handtag (A)

För att ändra vinkel på körbågens handtag, lossa vreden enligt bild (A). Lås vreden när önskad vinkel är uppnådd.


Vinkeljustering - Körbåge (B)

För att ändra vinkel på körbågen, lossa vreden enligt bild (B). Lås vreden när önskad vinkel är uppnådd.

Höjdjustering - Körbåge (C)

Körbågen alternativt körhandtagen kan höjdjusteras i tre olika höjder. Var noga med att dra åt skruvarna (C) ordentligt efter önskad position är uppnådd.

Översikt Körbåge

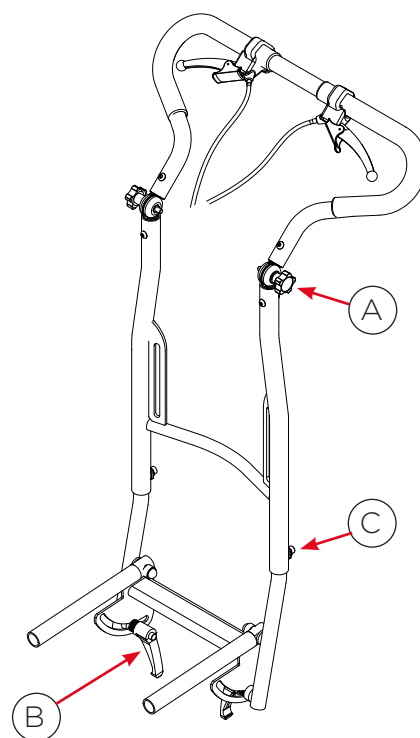

OBS! Vreden ska alltid låsas efter justering.



OBS! Körbågen skall alltid ligga an mot sitt-systemets rygg vid transport i fordon.


Parkeringsbroms

Låsa upp bromsen

Frigör parkeringsbromsen genom att trycka in bromshandtaget (A) så att den röda låsningen (B) släpper.

Låsa bromsen

Lås parkeringsbromsen genom att trycka in bromshandtaget (A) och haka i den röda låsmekanismen (B) i lämpligt hack. Släpp sedan bromshandtaget.

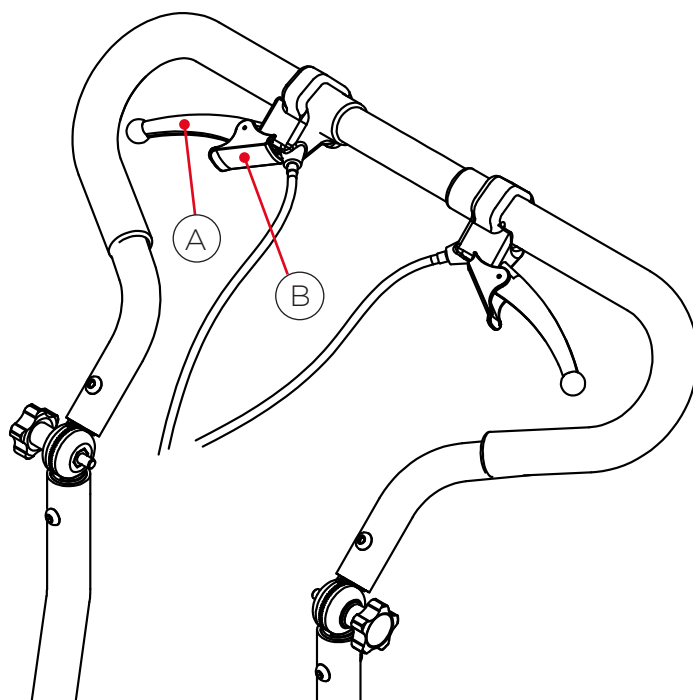

OBS! Lås alltid parkeringsbromsen när underredet står på lutande underlag.

Montering av drivhjul


Drivhjulen kan enkelt monteras och tas bort. Detta kan vara användbart vid t.ex. transport.

Borttagning

Lösa parkeringsbromsen först. Tryck och håll in knappen i mitten av hjulet. Dra sedan ut hjulet.

Fastsättning

Tryck och håll in knappen och skjut sedan in quick-release-axeln i navet. När drivhjulet skjutits hela vägen in är det OK att släppa knappen.

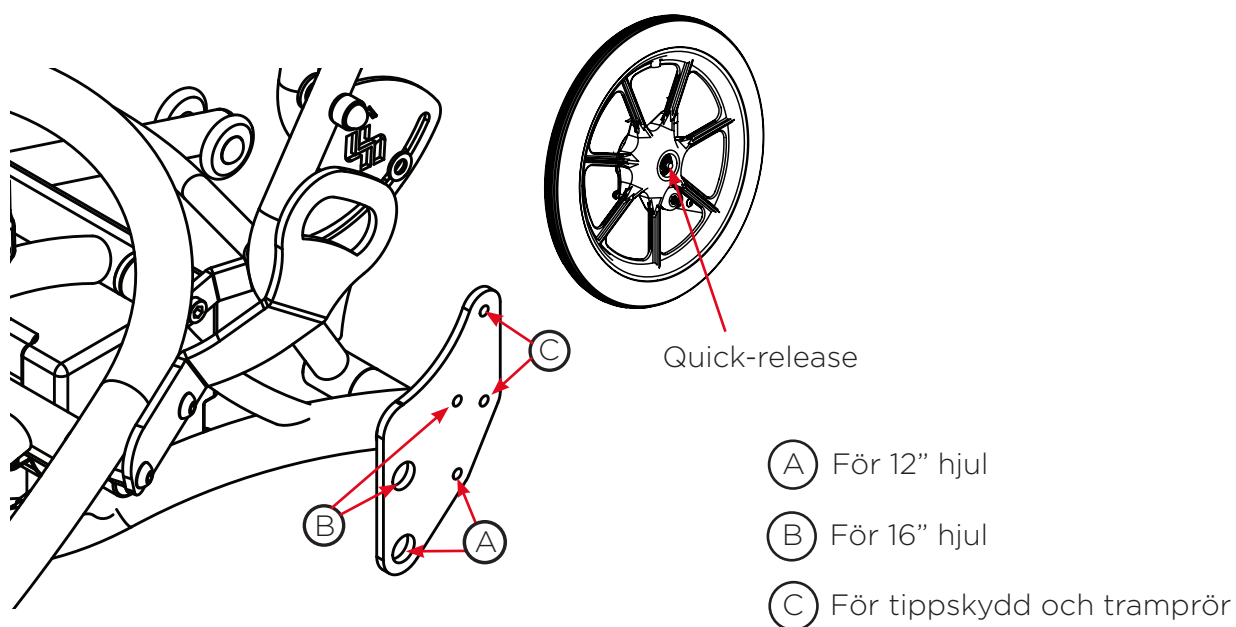

OBS! Säkerställ att hjulet blir låst!

Montering av tippskydd & tramprör


Tippskyddet & trampröret monteras med gemensamma skruvar, brickor och muttrar enligt bild. Trampröret placeras på utsidan och tippskyddet på insida av hållplattan.

Tippskydd - Snabbguide

Tippskyddet har till uppgift att förhindra att underredet tippas okontrollerat bakåt. Tippskyddet kan enkelt vikas undan för att inte vara i vägen.

Trampa ned tippskyddet och vrid det åt sidan. Se till att vrida in det ända tills du hör ett klick, som indikerar att tippskyddet är på plats. Försök att trampa så långt in som möjligt på tippskyddet. Detta för att delarna ska ha längsta möjliga livslängd.

Omvänt viker man ut tippskyddet tills det hörs ett klick.

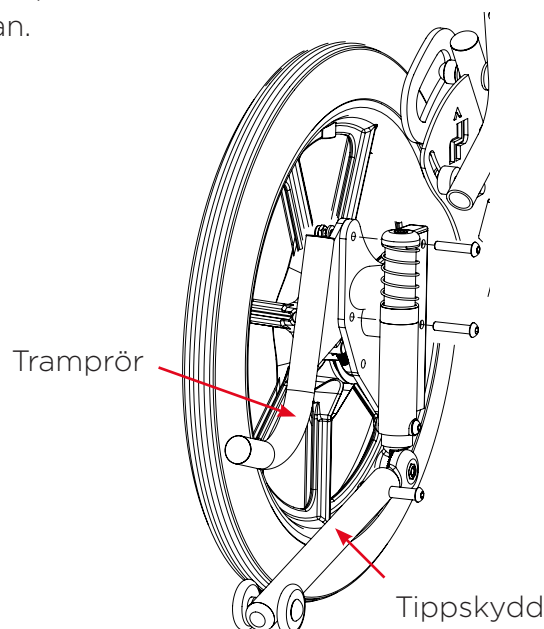


OBS! Zitzi Flipper Flex G2 bör alltid utrustas med tippskydd med tanke på dess stora möjligheter till höjdjustering

Tramprör - Snabbguide

Tramprör används för att underlätta uppresning av underredets framhjul, exempelvis vid trottoarkanter.



Hål för tippskydd och tramprör

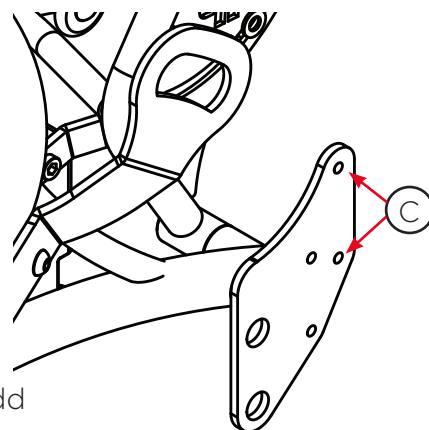

Färdriktningsspärr

Färdriktningsspärr

För att aktivera färdriktningsspärren; dra upp snäpplåset vid länkhjulet och vrid 90°. Snäpplåset fastnar automatiskt i rätt läge.

Transportkit


Montering av stödbygel

Monteras med medföljande skruvar och vred enligt bild.

Loc-tite skall användas på skruvarna (A) vid montering.

Stödbygeljustering - Snabbguide


- Lossa vreden på båda sidor och dra sedan ut bygeln till yttersta läget.
- Säkerställ att vreden hakar i ytterkant på spåret och lås sedan vreden.

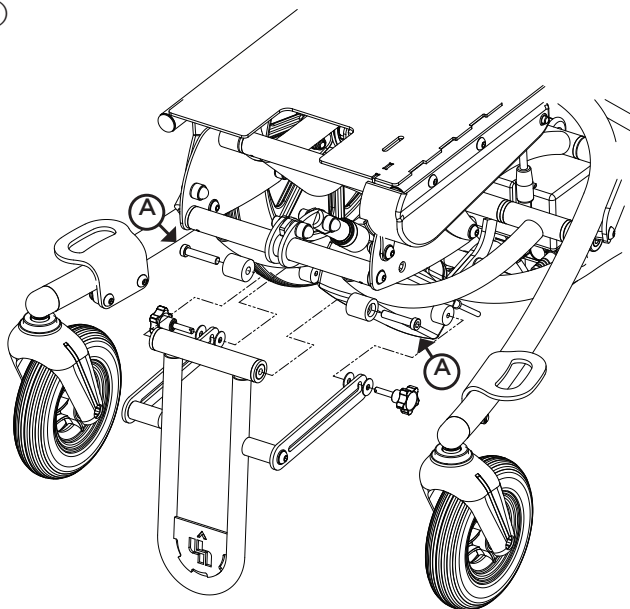

OBS! Stödbygeln ska alltid vara i nedfällt läge och i kontakt med fordonets golv vid transport.




OBS! Körbågen skall alltid ligga an mot sittsystemets rygg vid transport i fordon.

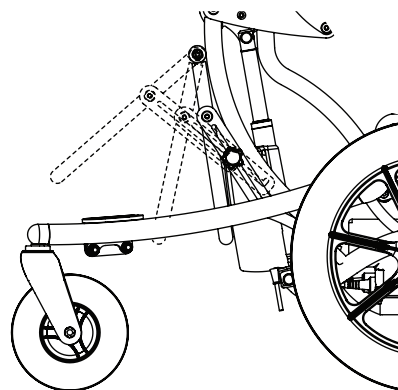


Montering av främre & bakre transportfästen

Monteras med medföljande skruvar, brickor och muttrar enligt bild. Notera att öglan på det bakre fästet ska peka bakåt.

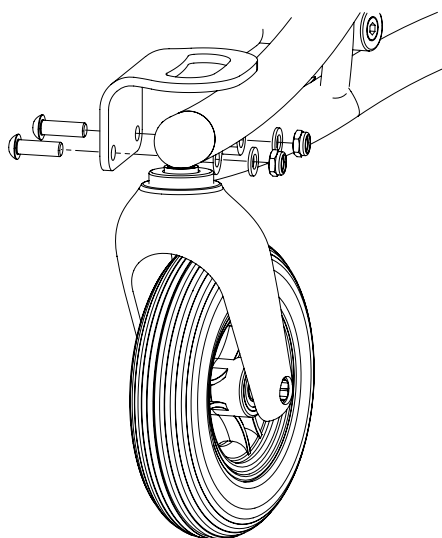

Främre transportfästen

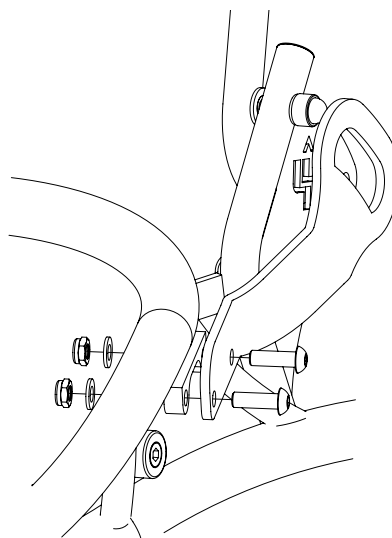

Bakre transportfästen

Transport i bil

Anvisningar för transport i bil

Underredet är krocktestat och godkänt enligt 7176-19 för 75 kg i bil, samt HI testad.

Infästning ska ske med spännband, godkända enligt ISO 10542, i avsedda transportfästen.



OBS! Det är viktigt att endast sträcka banden, och inte spänna dem för hårt. För hård spänning av banden kan orsaka att underredet blir skevt.



Notera! Krockgodkännande gäller belastningsvikter upp till 75 kg.

Fotstöd

Montering av fotstöd

För att montera de båda fästena till fotstöden används medföljande skruvar (C). Fästena monteras enligt bild med fyra skruvar/fäste i framkant på sittdelsplattan. Observera att låsskruvarna (B) ska peka inåt/nedåt. Montera fotstödens fyrkantsrör (A) i fotstödsfästena under sittdelsplattans främre del. Lås fast fotstödet med låsskruvarna (B) på båda sidor.

Säkerhetsstopp

Säkerhetsstopp (D) i form av en sargsprint finns monterad i botten av fotstödsprofilen. Säkerhetsstoppet kan även användas för att hitta tillbaka till en förinställd höjdposition.





Tips! Montera ett extra säkerhetsstopp ovanför fotstödet i fotstödsprofilens spår för att enkelt hitta tillbaka till en alternativ höjdposition (exempelvis med eller utan skor).

Justering av vinkel vid knäleden

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att vinkeljustera fotstödet vid knäleden. Lossa vreden (E) något och justera till önskad vinkel. Dra sedan åt vreden.

Justering av fotstödet höjd

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att höjdjustera fotstödet vid fotleden. Lossa vreden (F) något och justera till önskad höjd. Dra sedan åt vreden.

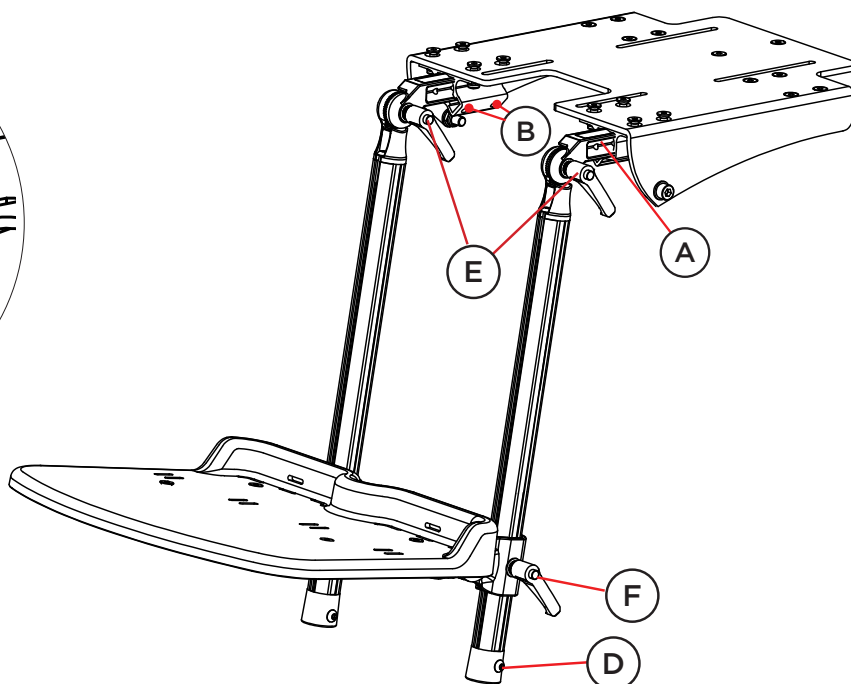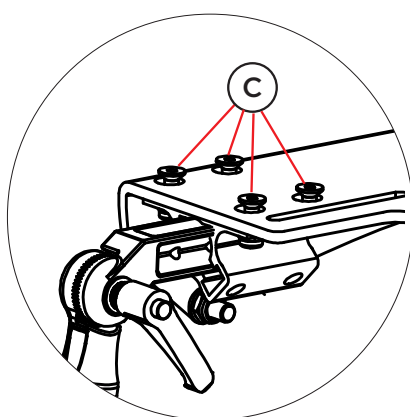

Vadstöd

Montering av vadstöd

Innan montering av vadstöd kan utföras måste du först ta bort eventuella fotstöd. Börja med att ta bort ändavslutet (G) och lossa sedan på spakvredet (F) som håller fotstödet på plats på fotstödsstaget. Dra sedan fotstödsplattan och dess beslag nedåt.


Montera vadstödet genom att skjuta i sargsprinten (C) i fotstödsstaget, justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (E). Montera därefter tillbaka fotstödet och ändavslutet (G).

Höjdjustering av vadstöd

För att höjdjustera vadstödet lossar du skruvarna (E) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (E).

Breddjustering av vadstöd

För att breddjustera vadstödet lossar du skruvarna (A) något för att sedan justera till önskad bredd. Dra sedan åt skruvarna (A).

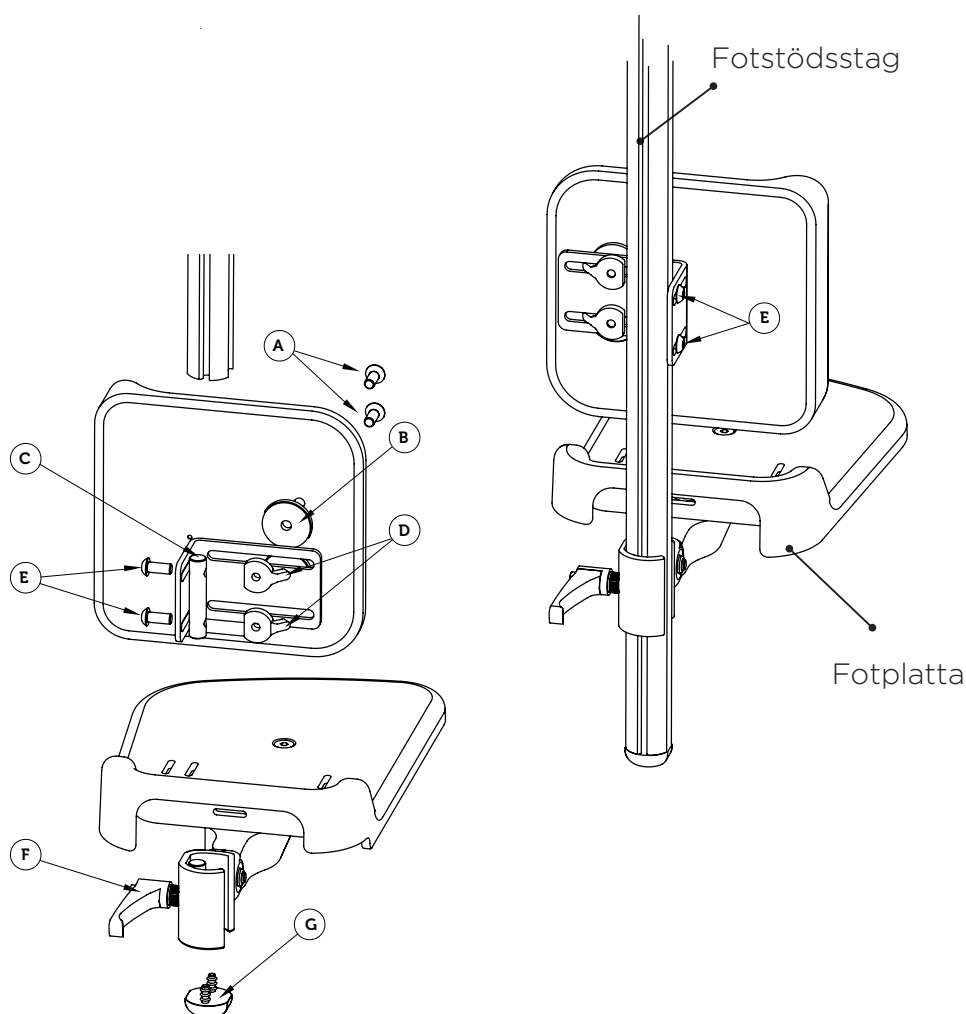


Fotlåda

Fotlåda dubbelstag

För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan (B) i fotstödsstaget (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt spakvredet (E).

Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och (G). Plaststaget (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan. Avsluta med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

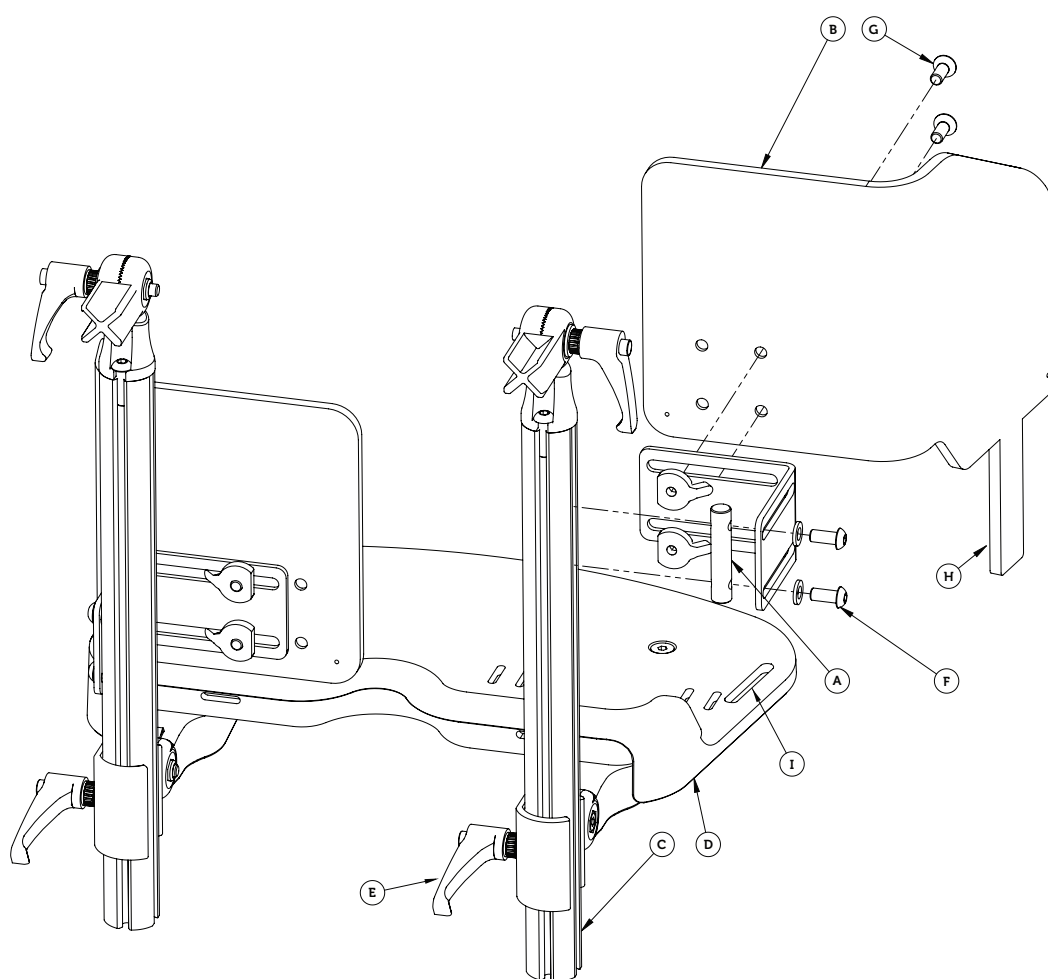

Notera!

Plaststaget (H) kan efter injusterings av önskad höjd kapas eller värmas in under fotstödsplattan enligt egna önskemål.

Ramförlängning

Montering av ramförlängning

Montering av ramförlängningen görs genom att först lossa skruv (A) och ta bort hjulet från ramen. Ta sedan bort ändplugg (B) på ramröret. Skjut i ramförlängning (C) och skruva fast förlängningsdelen med den bifogande skruven (D) med bricka. Skruva åter fast hjulet i förlängningsdelen med skruv (A).



OBS! När Active sits används på Flipper Flex måste ramförlängning användas pga. tipprisk framåt. Detsamma gäller för andra sittsystem som monteras långt fram. Vid behov kan även tippskydd fram monteras för ökad säkerhet.

Tippskydd fram

Montering av tippskydd

Montering av tippskyddet (A) görs genom att först lossa skruven som håller hjulet. För därefter upp tippskyddet över hjulbussningen mot ramröret. Lås tippskyddet i riktning framåt i ramens riktning med hjälp av de tre skruvarna (B). Skruva åter fast hjulet.




Sittdel

Montering av sittsystem

Sittsystemets fästplatta monteras enkelt på underredet genom fyra (4) skruvar, brickor och muttrar i markerade spår (A) på underredets sittplatta.



OBS! För ytterligare information kring fästplattor, se respektive bruksanvisning för valt sittsystem.

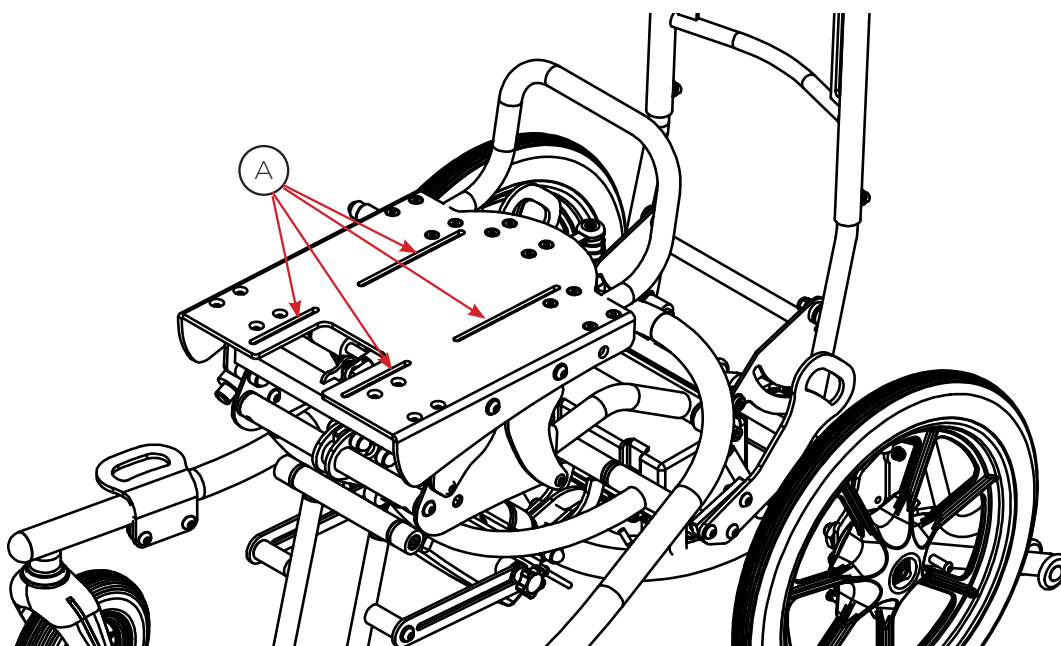

Underhåll och skötselanvisningar

Serviceintervall

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer med avseende på slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Rengöring och tvätt

Plast- och metalledar kan torkas av med en fuktig trasa, alternativt tvättas med antibakteriell vätska eller liknande. Tänk grönt, tänk på miljön!
Använd gärna biologiskt nedbrytbart tvättmedel.

Kontrollera hjälpmedlets skick regelbundet och utför underhåll vid behov.

Gaskolv

Gaskolven bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstängan är riktad nedåt. Annars kan gaskolvens tätning gå sönder och gaskolven sluta fungera.



OBS! Gaskolven måste aktiveras regelbundet

Batteriskötsel



Första laddningen måste vara i 24 timmar.
Laddning därefter rekommenderas ske varje natt.
Batteriet får aldrig laddas ur helt, vilket kan innebära att batteriet slutar att fungera.

Kombinationer

Zitzi Flipper Flex G2 och dess tillbehör är en CE-märkt produkt som kan kombineras med samtliga tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning. Zitzi Flipper Flex G2 passar bl.a. ihop med sittsystem som Zitzi Delfi Pro, Zitzi Active, Zitzi Sharky och Anatomic Sits. För övriga kombinationer vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Reservdelar

För att Zitzi Flipper Flex G2 ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB.

Märkning

Zitzi Flipper Flex G2 med dess tillbehör är en CE-märkt produkt. Ett unikt serienummer är placerat på en etikett som sitter under sittplattan. Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Återvinning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna ska sedan separeras efter materialtyp, metall, plast och brännbart (textilier). Gaskolv sorteras som farligt avfall.



OBS! Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.

EI

Elektroniken är IP klassad: IPX0. Detta innebär att den bara får göras ren med fuktad trasa.

Rekonditionering

Inledning

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer med avseende på slitage. Rekonditionering av hjälpmedlet får endast ske med originaldelar från Anatomic SITT AB.

Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal.

Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Behovet av rekonditionering varierar och måste bedömas utifrån fall till fall.

Samtliga punkter bör utföras minst en gång per år eller vid behov och funktionskontrollen bör utföras inför varje gång underredet ska användas.

Rengöring

Lackerade ytor, drivhjul, länkhjul och handtag rengörs med rengöringsmedel utan lösningsmedel. Använd absolut inte lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.

Efterbehandling

Efter tvätt ska alla leder, trånga utrymmen och dräneringshål blåsas torra och spraysmörjas med tunnflytande olja.

Märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att tyda.

På Flipper G2 sitter denna märkning under sittplattan.

Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan missljud.

Lack

Kontrollera skador i lacken genom att syna av underredet.

För att förhindra korrosionsskador och bättra på repor.

Bättringsfärg kan beställas från Anatomic SITT AB.

Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att inte finns någon skevhet i chassit.

Rörstomme och detaljer

Svets och skruvförband kontrolleras. Grindbussningar och gångjärn ska fungera utan missljud. Smörj vid behov. Kontrollera även vred, skruvar och övriga monteringsdetaljer. Byt dessa vid behov.

Bromsar

Kontrollera att parkeringsbromsen fungerar korrekt på respektive hjul.

Funktionskontroll

Funktionskontroll innebär att du går igenom Hjul, Stabilitet, Bromsar och ev. tillbehör.



OBS! Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.



OBS! Vid varje rekondtillfälle bör det säkerställas att produktens funktioner är tillförlitliga och att den är säker att användas. Om det finns brister som inte kan åtgärdas genom rekonditering, ska produkten tas ur bruk och återvinnas.

Anpassning och specialanpassning

Rekommendationer

Varje gång Zitzi Flipper G2 ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.

Tillåtna anpassningar

Notera att en riskbedömning alltid bör göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning, av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använda efter anpassning.

Kapa fotstödsprofiler

Fotstödsprofilens längd får kortas ned för att bättre passa brukaren.

Risikanalys

Notera att en riskbedömning alltid skall göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använda efter anpassning.

Märkning

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.

Försäljningsvillkor

Garanti

Garanti gäller ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

Reklamation

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Returer

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. Ange orsak till retur av dina varor. Returblankett finns på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde

Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde

Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde



Senare än 360 dagar från leveransdatum

Varorna återtages ej

 **Specialanpassade produkter återtages ej**

SE

Tekniska data Flipper Flex G2

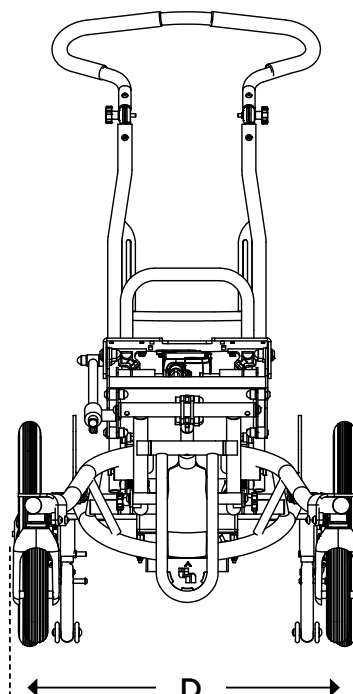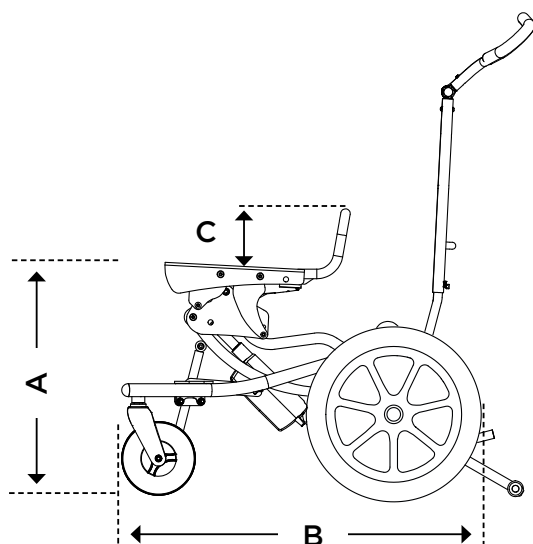


Produkt info - Flipper Flex G2

Max belastning	95 kg
Sittplatta	26x32 cm
Vikt	31 kg
Tiltning	0° till 30° / -5° till 25°


Flipper Flex G2 med 16" drivhjul

	A	B	C	D
Data	32-68 cm	83 cm	se sep. ruta	64 cm

FOTSTÖD

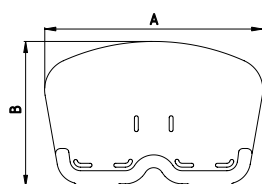


	A x B
Helt stl. 2	345 x 225 mm
Helt stl. 3	380 x 260 mm
Helt stl. 4	380 x 310 mm
Helt stl. 5	430 x 310 mm
Helt stl. 6	480 x 310 mm

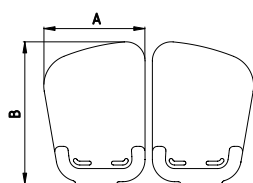

	A x B
Delat stl. 2	160 x 220 mm
Delat stl. 3	180 x 255 mm
Delat stl. 4	175 x 305 mm

Storlek	2-6
Fotstödsstag profilängd (cm)	35

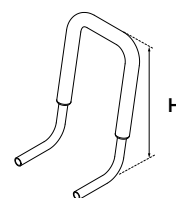

KÖRBYGEL

	Höjd
Körbygel stl.1	13 cm
Körbygel stl.2	35 cm

Djupet kan justeras 0-7 cm.
Höjdmått är från ovasidan av sittplattan till handtag.

SE

Anatomic SITT AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

FI

Rehaco OY

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Tel: +35 840 775 22 88

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt





bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 80 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus