

Bruksanvisning

Zitzi Flipper G2





FLIPPER G2



Bruksanvisning


Zitzi Flipper G2

Innehållsförteckning

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|----|
| Säkerhetsföreskrifter | 3 | Sittdel | 10 |
| Reglerbar sitthöjd - Gaskolv | 4 | Fotstöd | 11 |
| Reglerbar sitthöjd - Ställdon | 4 | Vadstöd | 12 |
| Laddning av batteri | 5 | Fotlåda | 13 |
| Inkoppling av elektronikbox | 5 | Underhåll & Skötselanvisning | 14 |
| Tiltningsfunktion | 6 | Rekonditioneringsanvisning | 16 |
| Körbågar | 7 | Anpassning & specialanpassning | 17 |
| Parkeringsbroms & riktningsspärr | 8 | Försäljningsvillkor | 18 |
| Ramförlängning | 9 | Tekniska data | 19 |
| Tippskydd | 9 | | |


Produkten är tillverkad av Anatomic SITT AB

| | |
|---------------------------|--|
| Postadress | Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping |
| Besöksadress | Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping |
| Telefon | 011-161800 |
| E-post | info@anatomicsitt.com |
| Web | anatomicsitt.com |
| Instruktionsfilmer | youtube.com/anatomicsitt |
| Följ oss på | facebook.com/anatomicsitt |

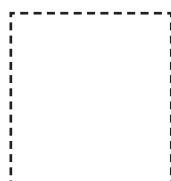

Kryssa i rutan vid eventuell specialanpassning av produkten.

CE-märkningen **upphör** att gälla vid specialanpassad produkt.

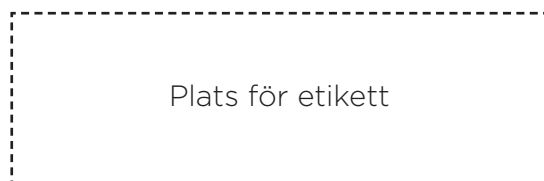

Plats för etikett

Säkerhetsföreskrifter

Inledning

För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Flipper G2 till fullo är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet. Anpassning/inprovning av Zitzi Flipper G2 ska alltid utföras av medicinskt behörig person.

Om ni behöver kompletterande uppgifter är ni välkomna att kontakta Anatomic SITT AB.

Användningsområde

Produkten är avsedd att användas som ett inomhus-underrede tillsammans med sittsystem producerade av Anatomic SITT AB (Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky Pro, Zitzi Active & Anatomic SITS). Om önskemål om annan användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Max belastningsvikt är: 50 kg (stl. 2), 75 kg (stl. 3) och 130 kg (stl. 4)

OBS!

Tänk på klämrisker vid sänkning och höjning av sitthöjden samt ändrad tiltning. Ha inga händer under sitsen vid justeringar.

Undvik att tilta sitsen maximalt bakåt när den är i lägsta läget för att minska risken för skador på sitsen/adaptorn.

Korrespondens

Zitzi Flipper G2 med dess tillbehör är en CE-märkt produkt.

Du hittar serienumret på undersidan av sittplattan.

Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

OBS!

Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig lämnas utan tillsyn när hjälpmedlet används.

OBS!

Glöm ej att hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren ska balansera in den valda sitsen för att säkerställa att ev tipprisk utesluts. Se avsnitt om Ramförlängning på sid. 9. Extra tippskydd kan beställas om behovet finns.

Om ett allvarligt tillbud uppstår bör det rapporteras till Anatomic Sitt AB och landets behöriga myndighet.

Reglerbar sitthöjd - Gaskolv

Sitthöjden justeras enkelt med hjälp av fotpedalen.

Tänk på att alltid hålla en hand på sittsystemet vid justering.

- Aktivera gaskolven genom att trycka ned fotpedalen.
- Justera sittsystemet till önskad höjd.
- Släpp fotpedalen när du har nått önskad höjd. Höjden är nu låst.




OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.

Reglerbar sitthöjd - Ställdon

Sitthöjden justeras med en elektrisk handkontroll.

Tänk på att alltid hålla en hand på sittsystemet vid justering.

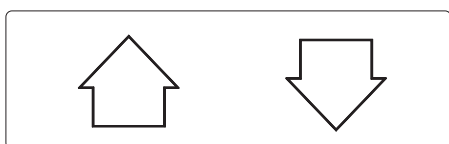

- Uppåtpil (A) höjer sittplattan
- Nedåtpil (B) sänker sittplattan



OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.

Handkontroll

Tilt-styrning →
Höjd-styrning →




Laddning av batteri

Anslut laddarens strömkabel till ett vägguttag (220 V).

Anslut sedan laddarens kontakt till uttaget på sidan av handkontrollen.

Första gången du laddar batteriet måste det ske i minst 24 timmar.

Det är mycket viktigt att batteriet aldrig laddas ur helt, eftersom att det då kan förstöras.

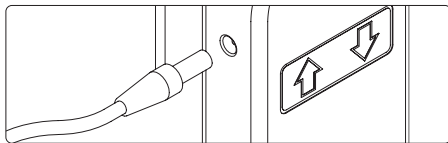

Kontakt för laddning sitter på sidan av handkontrollen.



**Första laddningen skall vara i 24 timmar.
Laddning därefter rekommenderas ske varje natt.
Batteriet får aldrig laddas ur helt.**

Inkoppling av elektronikbox

Vid inkoppling av elektronikboxen ska kontakten för lyftdonet kopplas till boxens kontakt märkt 1.

Vid tillval av elektronisk tiltfunktion måste elektronikboxen och den elektroniska handkontrollen bytas ut till en ny handkontroll och elektronikbox.

Tiltfunktionens ställdon kopplas då till boxens kontakt märkt 2.




HANDKONTROLL



STÄLLDON (TILT) tillval




STÄLLDON (LYFT)

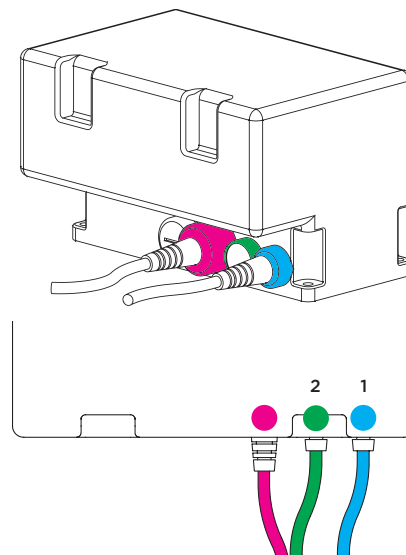

Tiltningsfunktion


Tiltningsfunktion

Flipper G2 har två olika lägen för tilt vilket ställs in med hjälp av hål vid sidan om sittplattan. I standardutförande är infästningen i nedre hålet. Önskas mer negativ tilt kan man flytta infästningen till övre hålet.

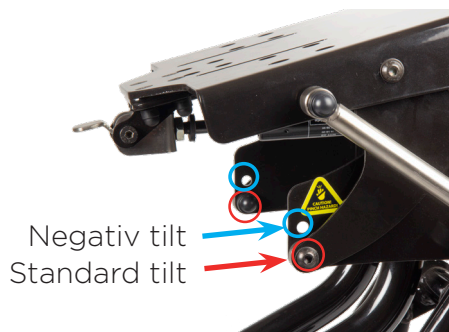

Tiltfunktion med gaskolv

Sittplattans vinkel justeras genom att lossa fingervredet (A) och trycka spaken på aktiveringshuset nedåt (Sitter i bakkant på sittplattan). För att sedan trycka sittplattan nedåt och framåt. Släpp handspaken (B) för att låsa önskad vinkel och dra sedan åt fingervredet (A) för att säkerställa att vinkeln är låst.

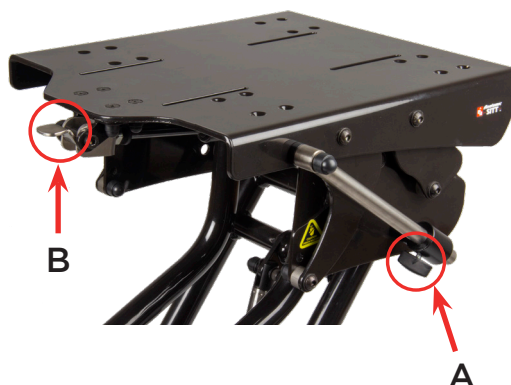

OBS! För att återställa sitsvinkeln till ursprungsläge, lossa fingervredet (A), tryck ner handspaken och dra sittplattan uppåt och bakåt genom att dra i körbygeln.

Kontroll

Kontrollera alltid att tiltningen är låst när du uppnått önskad vinkel.

Låsning

Fingervreden (A) måste alltid låsas efter eventuell justering.

Tiltfunktion med ställdon

Justera tiltpositionen genom att hålla ned tryckknapp (C) för framåttilt respektive tryckknapp (D) för bakåttilt. Släpp tryckknappen på handkontrollen när önskad tiltposition är uppnådd.

Handkontroll

Tilt-styrning → C D
Höjd-styrning → A B



OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.



Körbågar

Montering av körbygel

För in körbygeln i rörramen.
Dra åt skruvarna (A) ordentligt efter monteringen.



Montering av körhandtag

För in körhandtag i rörramen.
Dra åt skruvarna (A) ordentligt efter monteringen (se bild ovan).



Körhandtag

Parkeringsbroms och riktnings spärr

Låsa och låsa upp parkeringsbromsen

För att låsa hjulen i aktuell position trampa på pedalens bakre kant. För att låsa upp hjulen igen, trampa på pedalens främre kant.

Vid aktivering av låsningen, låses både **hjulens rullfunktion samt hjulens riktning**.



Låst broms



Öppen broms

Riktningsspärr


Riktningsspärr finns som tillval på stl. 2-3 (standard 4) och monteras på det högra, bakre hjulet (OBS! Ingen broms på detta hjul). Du aktiverar riktningsspärren genom att trampa på pedalens bakre kant. När hjulet är riktat framåt kommer riktningsspärren börja fungera. För att lossa riktningsspärren, trampa på pedalens främre kant.



Riktningsslås aktiverad



Riktningsslås avaktiverad

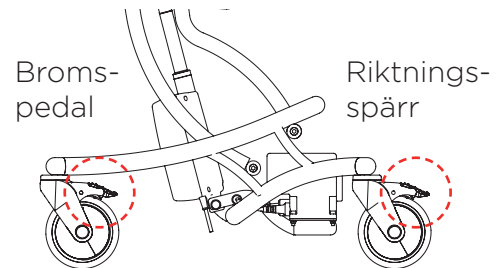

Snabbguide

- **Låsa**
Lås hjulen genom att trampa på pedalens bakre kant
- **Låsa upp**
Frigör låsningen genom att trampa på pedalens främre kant

Ramförlängning

Montering av ramförlängning

Montering av ramförlängningen görs genom att först lossa skruv (A) och ta bort hjulet från ramen. Ta sedan bort ändplugg (B) på ramröret. Skjut i ramförlängning (C) och skruva fast förlängningsdelen med den bifogande skruven (D) med bricka. Skruva åter fast hjulet i förlängningsdelen med skruv (A).



OBS! När Active sits används på Flipper G2 måste ramförlängning användas pga. tipprisk. Detsamma gäller för andra sittsystem som monteras långt fram. Vid behov kan även tippskydd monteras för ökad säkerhet.

Tippskydd

Montering av tippskydd

Montering av tippskyddet (A) görs genom att först lossa skruven som håller hjulet. För därefter upp tippskyddet över hjulbussningen mot ramröret. Lås tippskyddet i riktning framåt i ramens riktning med hjälp av de tre skruvarna (B). Skruva åter fast hjulet.




Sittdel

Montering av sittsystem

Sittsystemets fästplatta monteras enkelt på underredet genom fyra (4) skruvar, brickor och muttrar i markerade spår (A) på underredets sittplatta.



OBS! För ytterligare information kring fästplattor, se respektive bruksanvisning för valt sittsystem.

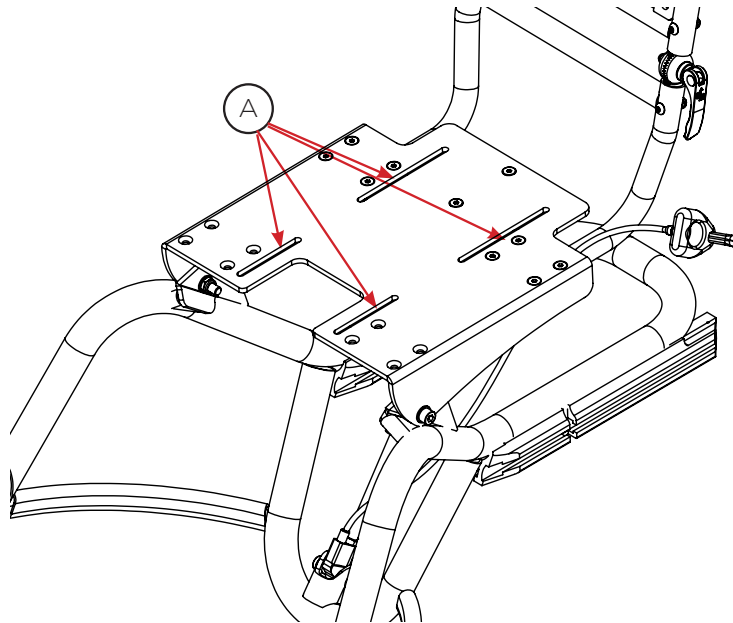

Fotstöd

Montering av fotstöd

För att montera de båda fästena till fotstöden används medföljande skruvar (C). Fästena monteras enligt bild med fyra skruvar/fäste i framkant på sittdelsplattan. Observera att låsskruvarna (B) ska peka inåt/nedåt. Montera fotstödens fyrkantsrör (A) i fotstödsfästena under sittdelsplattans främre del. Lås fast fotstödet med låsskruvarna (B) på båda sidor.

Säkerhetsstopp

Säkerhetsstopp (D) i form av en sargsprint finns monterad i botten av fotstödsprofilen. Säkerhetsstoppet kan även användas för att hitta tillbaka till en förinställd höjdposition.





Tips! Montera ett extra säkerhetsstopp ovanför fotstödet i fotstödsprofilens spår för att enkelt hitta tillbaka till en alternativ höjdposition (exempelvis med eller utan skor).

Justering av vinkel vid knäleden

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att vinkeljustera fotstödet vid knäleden. Lossa vreden (E) något och justera till önskad vinkel. Dra sedan åt vreden.

Justering av fotstödet höjd

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att höjdjustera fotstödet vid fotleden. Lossa vreden (F) något och justera till önskad höjd. Dra sedan åt vreden.

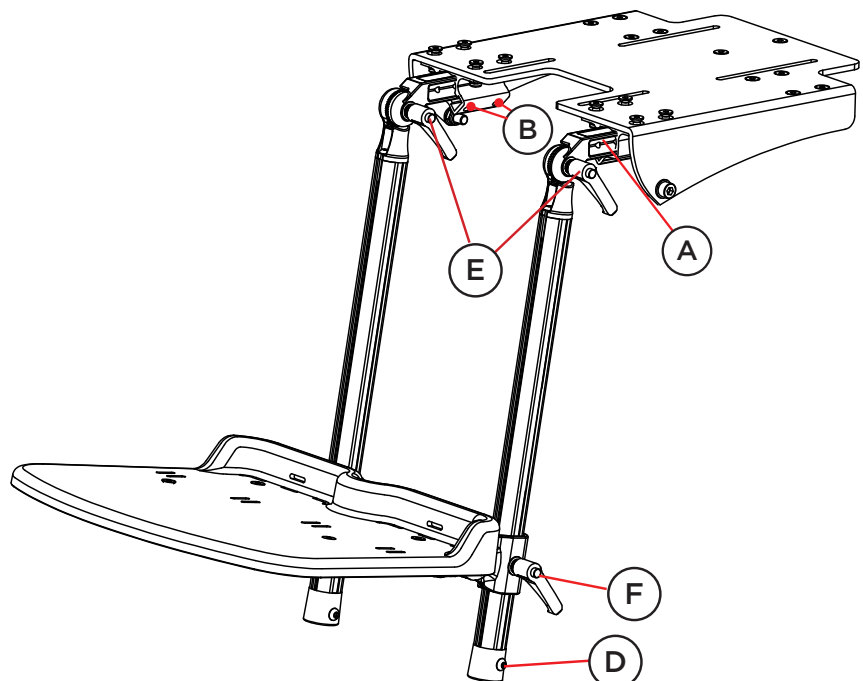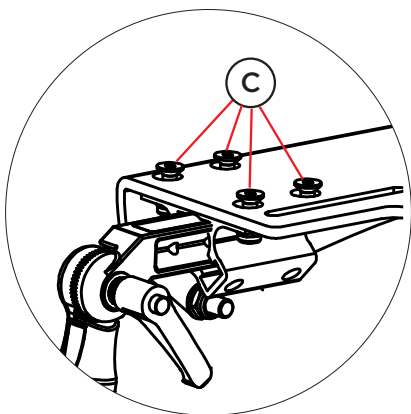

Vadstöd

Montering av vadstöd

Innan montering av vadstöd kan utföras måste du först ta bort eventuella fotstöd. Börja med att ta bort ändavslutet (G) och lossa sedan på spakvredet (F) som håller fotstödet på plats på fotstödsstaget. Dra sedan fotstödsplattan och dess beslag nedåt.


Montera vadstödet genom att skjuta i sargsprinten (C) i fotstödsstaget, justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (E). Montera därefter tillbaka fotstödet och ändavslutet (G).

Höjdjustering av vadstöd

För att höjdjustera vadstödet lossar du skruvarna (E) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (E).

Breddjustering av vadstöd

För att breddjustera vadstödet lossar du skruvarna (A) något för att sedan justera till önskad bredd. Dra sedan åt skruvarna (A).

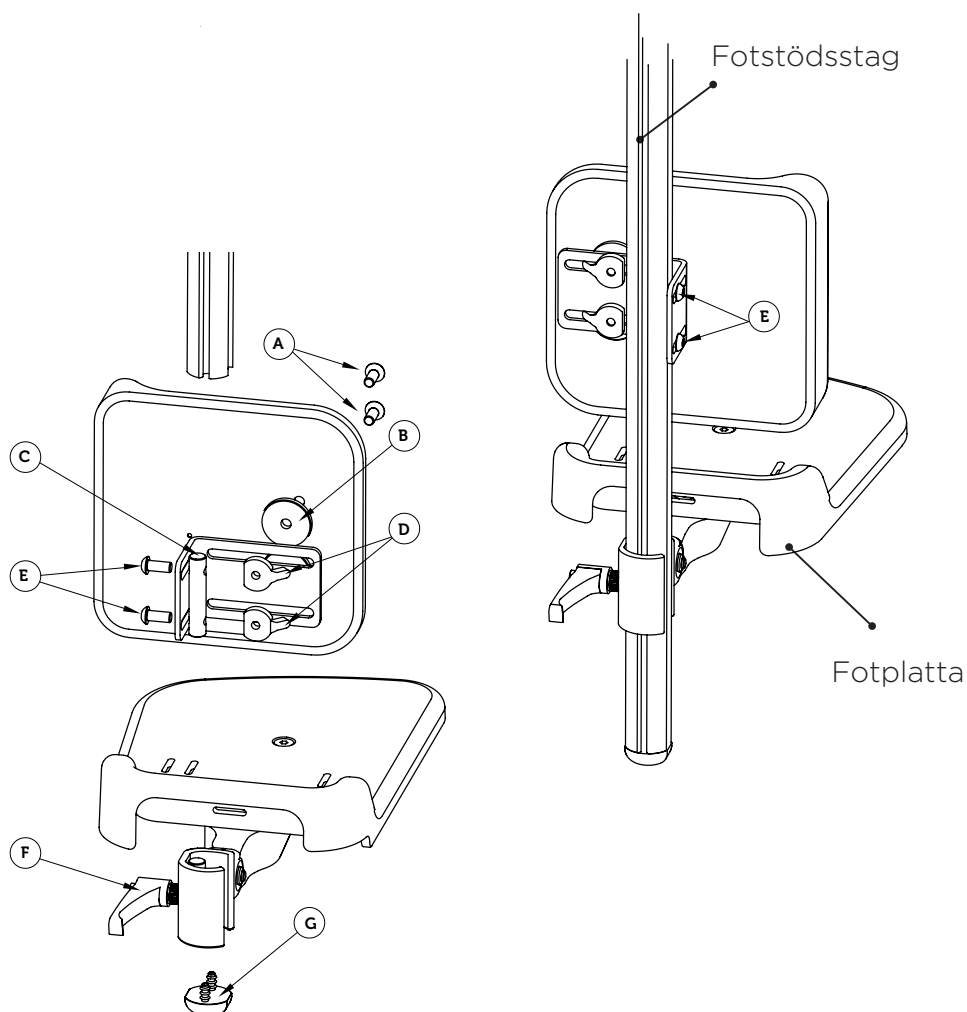


Fotlåda

Fotlåda dubbelstag

För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan (B) i fotstödsstaget (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt spakvredet (E).

Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och (G). Plaststaget (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan. Avsluta med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

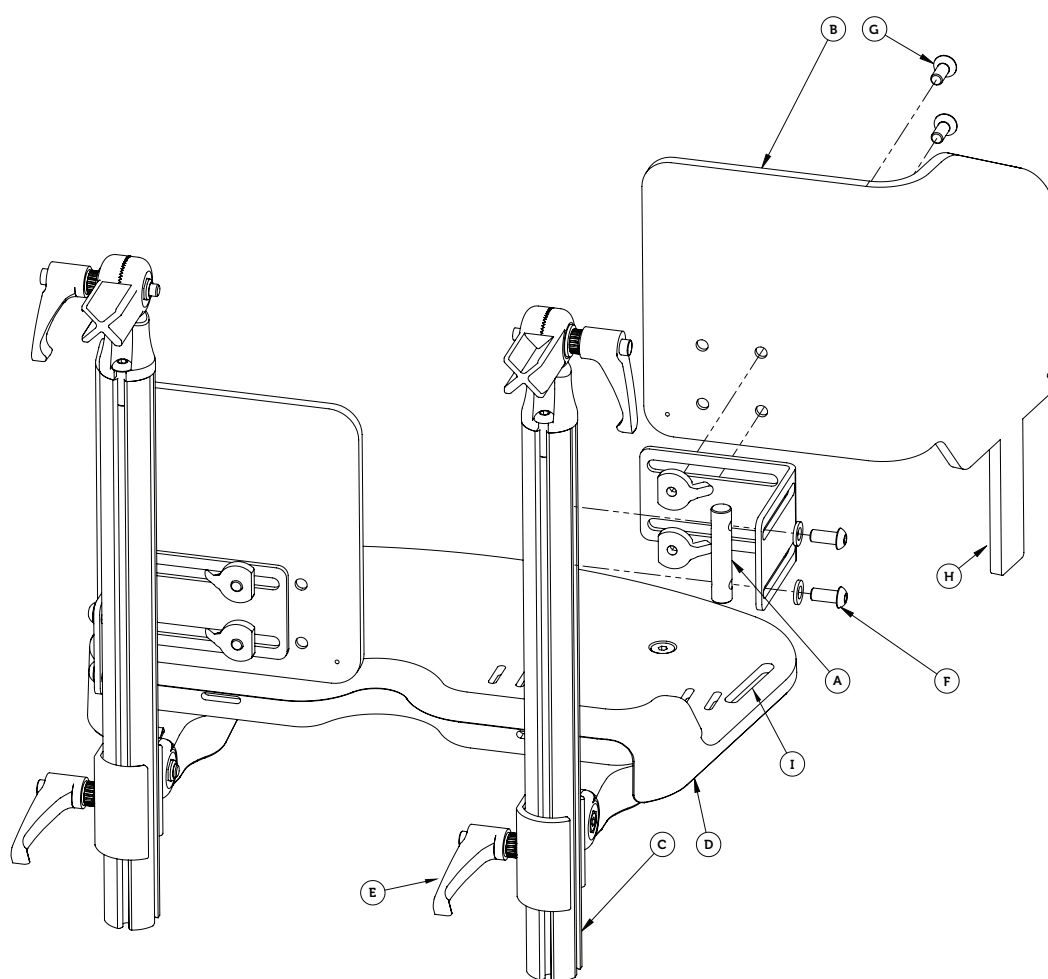

Notera!

Plaststaget (H) kan efter injustering av önskad höjd kapas eller värmas in under fotstödsplattan enligt egna önskemål.

Underhåll och skötselanvisningar

Serviceintervall

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer med avseende på slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Rengöring och tvätt

Plast- och metalldelar kan torkas av med en fuktig trasa, alternativt tvättas med antibakteriell vätska eller liknande. Tänk grönt, tänk på miljön! Använd gärna biologiskt nedbrytbart tvättmedel.

Kontrollera hjälpmedlets skick regelbundet och utför underhåll vid behov.

Gaskolv

Gaskolven bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstången är riktad nedåt. Annars kan gaskolvens tätning gå sönder och gaskolven sluta fungera.



OBS! Gaskolven måste aktiveras regelbundet

Batteriskötsel



Första laddningen måste vara i 24 timmar.
Laddning därefter rekommenderas ske varje natt.
Batteriet får aldrig laddas ur helt, vilket kan innebära att batteriet slutar att fungera.

Kombinationer

Zitzi Flipper G2 och dess tillbehör är en CE-märkt produkt som kan kombineras med samtliga tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning. Zitzi Flipper G2 passar bl.a. ihop med sittsystem som Zitzi Delfi Pro, Zitzi Active, Zitzi Sharky och Anatomic Sits. För övriga kombinationer vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Reservdelar

För att Zitzi Flipper ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB.

Märkning

Flipper med dess tillbehör är en CE-märkt produkt. Ett unikt serienummer är placerat på en etikett som sitter under sittplattan. Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Återvinning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna ska sedan separeras efter materialtyp, metall, plast och brännbart (textilier). Gaskolv sorteras som farligt avfall.



OBS! Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.

EI

Elektroniken är IP klassad: IPX0. Detta innebär att den bara får göras ren med fuktad trasa.

Rekonditionering

Inledning

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer med avseende på slitage. Rekonditionering av hjälpmedlet får endast ske med originaldelar från Anatomic SITT AB.

Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal.

Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Behovet av rekonditionering varierar och måste bedömas utifrån fall till fall. Samtliga punkter bör utföras minst en gång per år eller vid behov och funktionskontrollen bör utföras inför varje gång underredet ska användas.

Rengöring

Lackerade ytor, drivhjul, länkhjul och handtag rengörs med rengöringsmedel utan lösningsmedel. Använd absolut inte lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.

Efterbehandling

Efter tvätt ska alla leder, trånga utrymmen och dräneringshål blåsas torra och spraysmörjas med tunnflytande olja.

Märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att tyda.

På Flipper G2 sitter denna märkning under sittplattan.

Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan missljud.

Lack

Kontrollera skador i lacken genom att syna av underredet.

För att förhindra korrosionsskador och bättra på repor.

Bättringsfärg kan beställas från Anatomic SITT AB.

Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att inte finns någon skevhet i chassit.

Rörstomme och detaljer

Svets och skruvförband kontrolleras. Grindbussningar och gångjärn ska fungera utan missljud. Smörj vid behov. Kontrollera även vred, skruvar och övriga monteringsdetaljer. Byt dessa vid behov.

Bromsar

Kontrollera att parkeringsbromsen fungerar korrekt på respektive hjul.

Funktionskontroll

Funktionskontroll innebär att du går igenom Hjul, Stabilitet, Bromsar och ev. tillbehör.



OBS! Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.



OBS! Vid varje rekondtillfälle bör det säkerställas att produktens funktioner är tillförlitliga och att den är säker att användas. Om det finns brister som inte kan åtgärdas genom rekonditering, ska produkten tas ur bruk och återvinnas.

Anpassning och specialanpassning

Rekommendationer

Varje gång Zitzi Flipper G2 ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.

Tillåtna anpassningar

Notera att en riskbedömning alltid bör göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning, av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använda efter anpassning.

Kapa fotstödsprofiler

Fotstödsprofilens längd får kortas ned för att bättre passa brukaren.

Riskanalys

Notera att en riskbedömning alltid skall göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använda efter anpassning.

Märkning

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.

Försäljningsvillkor

Garanti

Garanti gäller ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

Reklamation

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Returer

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. Ange orsak till retur av dina varor. Returblankett finns på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde

Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde

Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde

Senare än 360 dagar från leveransdatum


Varorna återtages ej

 **Specialanpassade produkter återtages ej**

SE

Tekniska data

Flipper G2

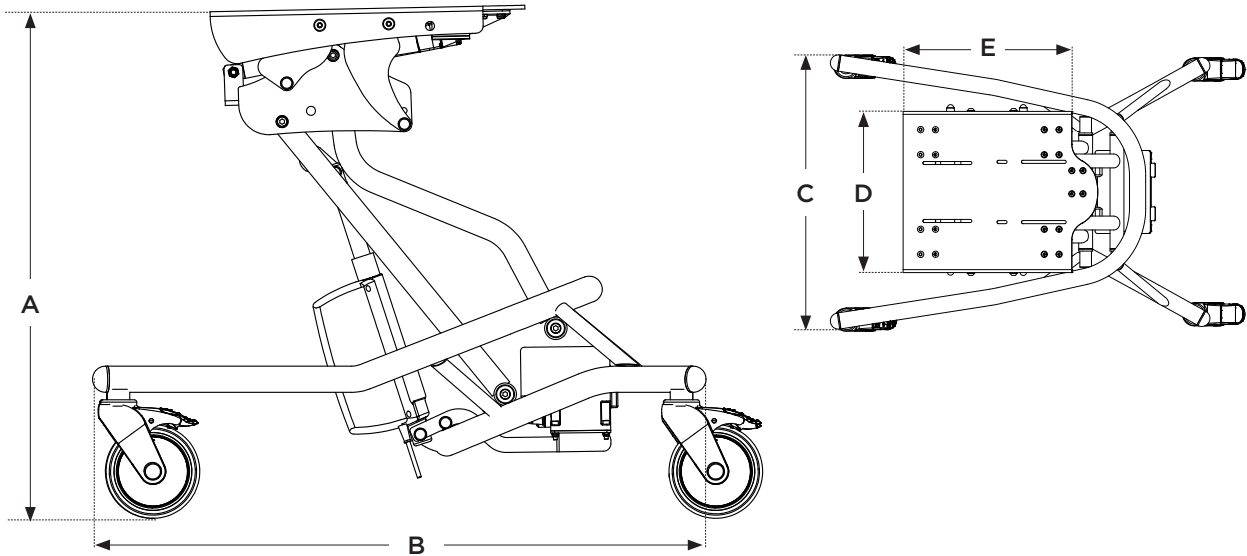

| | Höjd A | Längd B | Bredd C | Sittplatta D x E | Belastningsvikt | Vikt Manuell | Vikt Elektrisk | Tilt |
|------------------|----------|---------|---------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| Storlek 2 | 28-64 cm | 65 cm | 59 cm | 26 x 32 cm | Max 50 kg | 18 kg | 21 kg | 0° till 30° alt. -5° till 25° |
| Storlek 3 | 28-64 cm | 77 cm | 59 cm | 26 x 32 cm | Max 75 kg | 19 kg | 22 kg | 0° till 30° alt. -5° till 25° |
| Storlek 4 | 35-71 cm | 82 cm | 59 cm | 34 x 35 cm | Max 130 kg | -- | 26 kg | 0° till 30° alt. -5° till 25° |

FOTSTÖD

| A x B |
|--------------------------|
| Helt stl. 2 345 x 225 mm |
| Helt stl. 3 380 x 260 mm |
| Helt stl. 4 380 x 310 mm |
| Helt stl. 5 430 x 310 mm |
| Helt stl. 6 480 x 310 mm |

| A x B |
|---------------------------|
| Delat stl. 2 160 x 220 mm |
| Delat stl. 3 180 x 255 mm |
| Delat stl. 4 175 x 305 mm |

| Storlek | 2-6 |
|------------------------------|-----|
| Fotstödsstag profilängd (cm) | 35 |

KÖRBYGEL

KÖRHANDTAG

| | Höjd |
|-----------------------|-------|
| Körbygel stl.1 | 13 cm |
| Körbygel stl.2 | 35 cm |
| Körhandtag | 50 cm |

Djupet kan justeras 0-7 cm.
Höjdmått är från ovasidan av sittplattan till handtag.

SE

Anatomic SITT AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

FI

Rehaco OY

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Tel: +35 840 775 22 88

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt



Produsent

Anatomic Sitt AB
Terminalgatan 1
603 61 Norrköping
Sverige
Tlf: +46 011-16 18 00
E-post: info@anatomicsitt.com
Nettside: www.anatomicsitt.com

Videreforsandler

Bardum AS
Håndverksveien 8, 1405 Langhus
Norge
Tlf: +47 64 91 80 60
E-post: Post@bardum.no
Nettside: www.bardum.no

The logo for Bardum, featuring the word "Bardum" in a dark blue, serif font. The letter "y" is stylized with a curved underline that extends to the right.

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus

A decorative graphic element in the bottom right corner, consisting of a light blue curved shape that resembles a page corner or a stylized wave.