

Bruksanvisning Regntrekk Sigma

Lett og pustende regntrekk som dekker brukeren fra midjen og ned. Leveres i barn- og voksenstørrelser. Produsert i et mykt vind- og vanntett kvalitetsmateriale.

Vanntett



Vindtett



Pustende



Vaskbar








Kjære kunde,

Takk for at du valgte et produkt fra Varodd Velferdsteknologi AS og DARO. Vi håper du liker det og får mange gode opplevelser utendørs.

Les denne bruksanvisningen før du bruker regntrekket.



Sikkerhetsregler

-  Bruk bare et regntrekk som passer til brukerens størrelse.
-  Bruk **aldri** regntrekket hvis deler er løse, i stykker eller mangler. Det er fare for at de kan sette seg fast i hjulene.
-  Immobile eller pleietrengende brukere må **IKKE** etterlates alene eller være uten oppsyn når regntrekket er på.
-  Vær oppmerksom på brukerens temperatur og reguler påkledningen etter forholdene. Dette for å unngå overoppheting.
-  Brukes det sikkerhetssele skal denne **alltid** være påspennet når regntrekket brukes, slik at bruker ikke sklir ut av sete.

Garantibetingelser

Det er 2-års garanti på produktet. Det inkluderer material- og produksjonsfeil. Gjelder **IKKE** ved:

- Feil bruk.
- Feil vask.
- Feil vedlikehold.
- Ikke godkjente endringer.
- Vanlig bruksslitasje.

Regntrekkets funksjoner

- Vanntett opp til 10.000 mm.
- Pustbarhet på 5.000g/m².
- Lukkes rundt livet med et regulerbar gripebånd.
- Romslig fasong som dekker brukeren fra midjen og ned rundt føttene.
- Innsydd strikk rundt nederste kant, slik at den sitter tett rundt føttene.
- Sikkerhetsrefleks foran for bedre synlighet i mørke.
- Pose til oppbevaring.



Lukkes lett rundt livet med regulerbar gripebånd.

Slik brukes regntrekket

1. Plasser regntrekket over bena og ned rundt føttene. Dette slik at regntrekket blir plassert **mellom** brukerens føtter og rullestolens fothviler.
2. Lukk regntrekket rundt livet med det justerbare gripebåndet.
3. Kontroller at regntrekket sitter godt og **ikke** går inn i hjulene.

OBS! Regntrekket skal være helt tørt før det pakkes ned i posen.



Regntrekkets bund skal plasseres **mellom** brukerens føtter og stolens fothviler.

Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisningen **SKAL** følges. Vaskes produktet feil er det fare for skade og redusert levetid.
- ⚠ Bruk **IKKE** skyllemiddel, bløtemiddel eller vaskemiddel med blekestoff.

TIPS! Den mest skånsomme måten å vaske et regntrekk på er å skylle av synlig smuss under rennende vann. Dermed beholder regntrekket egenskapene så lenge som mulig. Ikke bruk en børste eller klut ved synlig sand på regntrekket, da dette kan skade det vanntette belegget. La regntrekket lufttørke.

Vask i maskin

1. Skyll løst smuss og skitt av under rennende vann. Luk gripebåndene og legg regntrekket i vaskemaskinen med innsiden ut.
2. Bruk bare en liten mengde flytende vaskemiddel **uten** blekemiddel.
3. Vask regntrekket på **max. 40°C** og unngå sentrifugering.
4. Regntrekket må **IKKE** tørkes i tørketrommel, men lufttørkes.



Ingen blekemiddel



Finvask max. 40°C



IKKE tørketrommel



Luft/drypp tørking



Rens er mulig

MERK! For hver maskinvask brytes en liten del av det vanntette belegget ned, noe som vil forkorte regntrekkets levetid.

Vedlikehold

- Sjekk jevnlig regntrekket for skader.
- Bruk **aldri** regntrekket hvis det er løse deler, i stykker eller mangler.
- Sørg for at regntrekket er helt tørt før det pakkes ned.

Materiale

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.



- 100% polyester med PU-coating.

Teknisk info

- Vannsøyletrykk: 10.000 mm.
- Pustbarhet: 5.000g/m².
- Kvadratmetervekt: 135g/m².

PRODUSENT:

DARO

by able 

able nordic a/s
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk
www.daro.dk

FORHANDLER:

 **Varodd**
Velferdsteknologi

Varodd Velferdsteknologi AS

Besøksadresse:
Rigedalen 41
4626 Kristiansand
Norge

Postadresse:
Postboks 8343
4676 Kristiansand

Tlf. (+47) 38 14 48 00
hjelpemidler@varodd.no
www.hjelpemidler.varodd.no

DARO - dansk produsent av tøy til alle typer funksjonshemming.

Hos DARO brenner vi for å lage klær for alle typer funksjonshemminger – klær som kan gi deg økt livskvalitet, komfort og lette hverdagen din. DARO har mer enn 35 års erfaring med å designe og sy fasjonable og funksjonelle klær for både barn og voksne. Vi kan tilpasse klærne akkurat for deg og hjelper deg gjerne med nye løsninger hvis du har spesifikke behov. Se DAROs hele produktsortiment på www.daro.dk.

DARO er klær for DEG og klær med omtanke. 