



# Zippie

## Varmepose

BRUKERVEILEDNING



zippie®

# Tiltenkt bruksområde

Produktet er ment brukt i rullestol, vogn og lignende til å beskytte mot kaldt klima utendørs.

## Bruk

Varmeposen åpnes med funksjonelle glidelåser på hver side av posen.

Varmeposen er klargjort for belter, seler, vester, sidestøtter og fotstropper. Legg varmposen flatt på et fast underlag. Beskytt underlaget om nødvendig. Benytt en skarp kniv for å åpne mellom de sydde forsterkningene.

Vær forsiktig slik at du ikke skjærer utenfor forsterkningene.



Vær varsom med fingre!

Varmeposen kan festes i rullestol, vogn eller lignende ved hjelp av festebånd på bakstykkets øvre del. Før festebåndet rundt ryggen på rullestolen/vognen og fest med plastspennen. Fest varmposen i fotenden ved hjelp av festesnorer som knytes rundt egnet struktur på rullestol/vogn. Vær obs på plassering av festesnorene dersom produktet skal sitte i vognen mens denne slås sammen.

Monter eventuelle belter/seler før begge glidelåser lukkes. Reguleringsmuligheter ved hjelp av snorstrammer i øvre og nedre del av varmposens åpning.

Ved opphold innendørs over tid, kan frontstykke på varmposen løsnes helt og oppbevares separat.

## Vedlikehold

Kontroller produktet jevnlig for slitasje på trekk og glidelås.

### Daglig renhold:

Børst av varmposen ved behov. Tørk over varmposen med en ren klut og mildt såpevann. Tørk over med fuktig fille for å fjerne såperester. Maskinvask 40°. Må ikke tørkes i tørketrommel.



## Tekniske spesifikasjoner

**Yttermateriale:** : Nylon Ripstop coated 2 times, vanntett, vannsøyle 1000 mmH<sub>2</sub>O. Anti-skli materiale på undersiden. Vindtett.

**Fyll:** Polyesterfiber.

| Art.nr. | Størrelse | Farge | Lengde fremside | Lengde bakside | Livvidde |
|---------|-----------|-------|-----------------|----------------|----------|
| 555100  | 100       | Svart | 78cm            | 100cm          | 106cm    |
| 555110  | 110       | Svart | 88cm            | 110cm          | 110cm    |
| 555125  | 125       | Svart | 103cm           | 125cm          | 114cm    |
| 555135  | 135       | Svart | 110cm           | 135cm          | 120cm    |
| 555145  | 145       | Svart | 120cm           | 145cm          | 120cm    |
| 555160  | 160       | Svart | 130cm           | 160cm          | 126cm    |
| 555180  | 180       | Svart | 150cm           | 180cm          | 126cm    |



**Garanti:** Produktet er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Produktet garanteres mot fabrikkasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt som tiltenkt. Dersom det oppstår en fabrikkasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte produktet uten omkostninger for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på produktet.

