



Kinetic Balance

Raindek ETX Junior
Raindek ETX

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Tiltenkt bruksområde

Produktet er ment brukt til å beskytte rullestolbrukere fra livet og ned til og med føttene mot regnvær og kaldt klima utendørs.

Bruk

Hvordan vi velger å kle på oss vil variere, blant annet ut fra muligheter og preferanser. I denne bruksanvisningen finner du et forslag, som også forteller om de ulike mulighetene i plagget. Du kan forbli sittende i stolen under hele prosessen.

Benytt de funksjonelle glidelåsene for å åpne posen i fotenden. Plasser føttene i posen og lukk glidelåsene. Varmeposen festes rundt livet ved hjelp av spennen. Stram til etter eget ønske. Det er lange reguleringsbånd, noe som fasiliterer for at festespennen kan plasseres i siden. Fest i knehasen ved hjelp av spennen og stram til etter ønske. Sørg for at sidestykkene dekker hoftene på begge sider. For ytterligere reguleringer kan du benytte snorstrammer i midje og på hver side.

Vedlikehold

Kontroller produktet jevnlig for slitasje på trekk og glidelås.

Daglig renhold:

Tørk over varmeposen med en ren klut og mildt såpevann. Tørk over med fuktig fille for å fjerne såperester. Maskinvask 30°. Må ikke tørkes i tørketrommel.



Tekniske spesifikasjoner

Yttermateriale: GEO TECH ® Storm 3. 100% polyester.

Pustende, vindtett, vanntett, vannsøyle 10.000 mmH₂O.

Forsterket med Cordura® på delen som går under føttene for økt holdbarhet.

Fyll: Thermolite® T3/T-Down

Resirkulerte fibre, pustende, svært god isoleringsevne, lav egenvekt, gode egenskaper i forhold til kompresjon. Produsert av 100% resirkulert PET fibre. Utviklet som erstatning for dun.

Art.nr.	Størrelse	Farge	Lengde fremside	Lengde bakside	Livvidde
KBRDETX.BLK.110	110	Svart	84cm	47cm	fra 40-104cm
KBRDETX.BLK.140	140	Svart	102cm	53cm	fra 40-108cm
KBRDETX.BLK.002	S	Svart	111cm	57cm	fra 40-114cm
KBRDETX.BLK.003	M	Svart	137cm	59cm	fra 44-114cm
KBRDETX.BLK.004	L	Svart	139cm	59cm	fra 44-116cm
KBRDETX.BLK.005	XL	Svart	145cm	62cm	fra 44-122cm
KBRDETX.BLU.110	110	Blå	84cm	47cm	fra 40-104cm
KBRDETX.BLU.140	140	Blå	102cm	53cm	fra 40-108cm
KBRDETX.BLU.002	S	Blå	111cm	57cm	fra 40-114cm
KBRDETX.BLU.003	M	Blå	137cm	59cm	fra 44-114cm
KBRDETX.BLU.004	L	Blå	139cm	59cm	fra 44-116cm
KBRDETX.BLU.005	XL	Blå	145cm	62cm	fra 44-122cm

Garanti: Alle Kinetic Balance produkter er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Alle Kinetic Balance produkter garanteres mot fabrikkasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt som tiltenkt. Dersom det oppstår en fabrikkasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte produktet uten omkostninger for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på produktet.

