

# NORA FlexiWatch LIFE

## Digital varslingsklokke



# Brukerhåndbok

---

## Innholdsfortegnelse

<b>1. INNLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2. OVERSIKT</b> .....	<b>3</b>
<b>3. VARSLING</b> .....	<b>4</b>
<b>4. LADING</b> .....	<b>4</b>
<b>5. ARMBÅND</b> .....	<b>4</b>
<b>6. INNSTILLINGSMENYEN</b> .....	<b>5</b>
<b>7. SAMMENKOBLING</b> .....	<b>5</b>
TILKOBLINGSSTATUS .....	5
KOBLE NORA-L TIL ET EKSISTERENDE FLEXIBLINK LIFE-SYSTEM .....	6
DELE ELLER STARTE LIFE-NETT FRA NORA-L .....	6
AVBRYTE SAMMENKOBLING .....	6
NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN .....	6
<b>8. AUTOMATISK KLOKKESTILLING</b> .....	<b>6</b>
<b>9. FORLENGE REKKEVIDDEN</b> .....	<b>7</b>
<b>10. INNSTILLINGER</b> .....	<b>7</b>
VARSLINGSINNSTILLINGER .....	7
<i>Daglige signaler/Kun alarmer</i> .....	7
<i>Nabovarsling</i> .....	7
INNSTILLINGER FOR DATO OG TID .....	7
FABRIKKNINSTILLING .....	7
<b>11. VIKTIG INFORMASJON</b> .....	<b>7</b>
<b>12. RESIRKULERING</b> .....	<b>8</b>
<b>13. TEKNISKE DATA</b> .....	<b>8</b>
<b>14. FEILSØKING</b> .....	<b>8</b>

## 1. Innledning

NORA-L er en armbåndsklokke som varsler FlexiBlink LIFE alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd.

Klokkevisning aktiveres med et enkelt trykk på skjermen.

Ved alarm vises et symbol og tekst på skjermen, samtidig med vibrasjon og lydvarsel for den aktuelle alarmen. Både lyd- og vibrasjonsvarsling benytter ulike varslingsmønstre til ulike alarmer. Slik kan hørselshemmede og synshemmede enkelt skille mellom daglige varslinger og alarmer.

NORA-L lades med den medfølgende USB-laderen.

### Nøkkeldata

- Enkel installasjon og bruk.
- Sprutsikker (dusj - ikke bad)
- Signalrekkevidde innen normal husstand
- Enkelt å tilpasse lengde på reimen
- Oppladbar med god batterilevetid
- Utbyttbar reim

## 2. Oversikt



**Klokken må kobles til laderen for at den skal slå seg på første gang.**

### 3. Varsling

---

Varslingssystemet FlexiBlink LIFE skiller mellom to alarmtyper:

1. Daglige varslinger: dørklokke, telefon, o.l.
2. Alarm: brann, epilepsi, o.l.

NORA-L varsler med vibrasjon, lyd, symbol og tekst når den mottar en varsling/alarm.

Alarmer varsles med hurtig vibrasjon og lyd.

Daglige varslinger varsles med roligere vibrasjon og lyd.



### 4. Lading

---


NORA-L bør lades helt opp før bruk.

Bruk den medfølgende laderen. Enheten lades ved at ladekontakten «klipses» på ladekontaktene på baksiden av NORA-L. Kontakten holdes fast med magneter. Når disse «klipses» inn ligger ladekontakten rett vei.

Husk å sett strømadapteret i stikkontakten.



Batteriindikatoren øverst i venstre hjørnet på displayet indikerer kapasiteten på batteriet. Et grønt batterisymbol vises på skjermen når batteriet er fulladet.

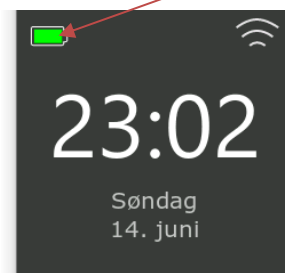

NORA-L kan motta varslinger mens enheten lades.

### 5. Armbånd

---

NORA-L kommer med armbåndsreimene ferdig festet. Disse kan skiftes ved å holde låseknappen inne og skyve reimen ut av festet.

Klips-feste er tilgjengelig som tilbehør.



## 6. Innstillingsmenyen

Sveip sideveis på skjermen for å komme til menyen.


Her får du fire valg:

Velg «Innstillinger» for å endre varslingsklokkens innstillinger.

Velg «Slå av» for å slå av klokken.

Velg «Lyd» for å slå av/på lyd.

Velg «Varslinger» for å sette mottak av varslinger av eller på.

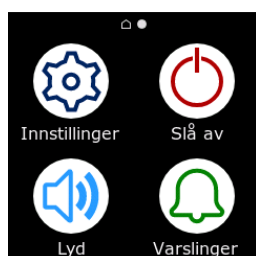


Innstillinger:

**Tilkobling:** FlexiBlink LIFE innstillinger

**Klokke:** Still klokke og dato

**Varslinger:** Varslingsinnstillinger


**Nullstill:** Sletter alle innstillinger og setter klokken i fabrikkinnstilling.

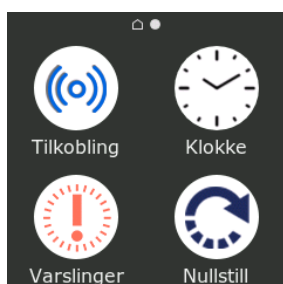

## 7. Sammenkobling


Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen må sammenkobles før bruk.

NORA-L går automatisk til meny for sammenkobling når du kobler til USB-laderen første gang. De fleste FlexiBlink LIFE produkter benytter en egen LIFE-knapp for sammenkoblingen. LIFE-knappen finner du som regel under lokket på enheten. (Se bruksanvisning for gjeldende produkt hvis du ikke finner LIFE-knappen).

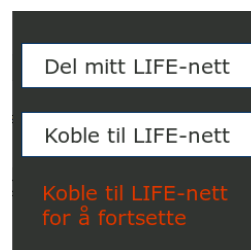


## Tilkoblingsstatus

Status for LIFE-tilkobling vises med radiosymbolet øverst til høyre på skjermen.

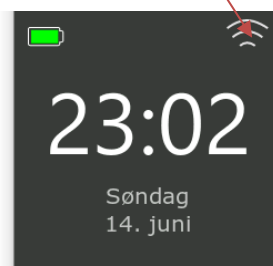

Ved rød strek over radiosignalet er ikke klokken sammenkoblet med annen enhet i LIFE-systemet.

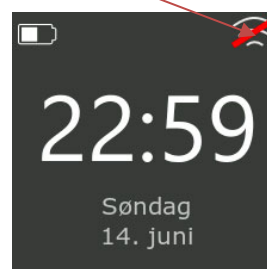

## Koble NORA-L til et eksisterende FlexiBlink LIFE-system

Et system kan bestå av en eller flere sendere og mottakere som er sammenkoblet.

1. Velg «Innstillinger» og deretter «Tilkobling».
2. Velg «Koble til LIFE-nett».
3. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet i et system som NORA-L skal sammenkobles til.
4. Sammenkoblingen bekreftes av klokken.



5. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

## Dele eller starte LIFE-nett fra NORA-L

NORA-L kan dele nettverket den er koblet opp i, og kan da benyttes til å koble sammen nye enheter til samme nett.

1. Velg «Innstillinger» og deretter «Tilkobling».
2. Velg «Del mitt LIFE-nett».
3. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.

4. Sammenkoblingen bekreftes av klokken.



5. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

## Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk én gang på LIFE-knappen på en enhet, eller trykk «Avbryt» på klokken.

## Nullstille sammenkoblingen

1. Velg «Innstillinger» og deretter «Tilkobling».
2. Velg «Forlat LIFE-enhet».
3. Nullstilling bekreftes ved at teksten «Ikke tilkoblet LIFE-nett» vises.

## 8. Automatisk Klokkestilling

Denne funksjonen forutsetter at du har en AppSender i ditt varslingsystem. Velg «innstillinger» deretter «klokke» og skyv bryter til høyre («PÅ») for å slå på funksjonen.

Klokken søker etter appsender. Funksjonen slår seg automatisk på. (Klokken gir beskjed om den ikke kobles til AppSenderen).



## 9. Forleng rekkevidden

---

Der man har behov for å forleng rekkevidden mellom en NORA-L og andre FlexiBlink LIFE produkter, må det benyttes en eller flere videresendere av typen REPEATER-L.

## 10. Innstillinger

---

### Varslingsinnstillinger

**Daglige signaler/Kun alarmer**  
Du kan velge om du vil motta alle varslinger, eller kun alarmer. Velg «Innstillinger» og deretter «Varslinger». Når bryteren «Kun alarmer» er slått på, vil du ikke motta varslinger for daglige signaler som for eksempel dørklokke.

### Nabovarsling

Med denne funksjonen påslått kan du motta alarmer hos nabo(er) som har FlexiBlink LIFE varslingssystem installert. Funksjonen forutsetter at det er satt opp deling av nabovarsel mellom naboene. (Krever varslingsmottakeren IRIS LIFE)

Velg «Innstillinger» og deretter «Varslinger». Sett bryteren «Motta nabovarsel» PÅ.

### Innstillinger for dato og tid

Velg «Innstillinger» og deretter «Klokke» for å endre dato og tid.

Klokken stiller seg automatisk når «Automatisk klokkestilling» er påslått, og det er installert en appsender (APPS-L) i boligen.

### Fabrikkinnstilling



Fabrikkinnstilling sletter alle innstillinger og sammenkobling, og nullstiller enheten.

1. Velg «Innstillinger» og deretter «Nullstill».
2. Velg «Tilbakestill» og trykk deretter «OK».
3. Enheten settes til fabrikkinnstilling.

## 11. Viktig informasjon

---

- Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
- Armbåndsmottakeren vil varsle til FlexiBlink LIFE mottakere om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

## 12. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.



## 13. Tekniske data

Dim. (lxb): 260x43mm  
 Omkrets just.: 15-23 cm  
 Vekt m/ batteri: 52 g  
 Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz  
 Sendereffekt: 10 mW e.r.p.  
 Temperatur: -10 °C - +40 °C  
 Ladespenning: 5V

## 14. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i NORA-L.	Avstanden mellom NORA-L og sender er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	NORA-L er tom for strøm.	Lad opp NORA-L.
	NORA-L er ikke korrekt sammenkoblet.	Utfør sammenkobling. Se kap. 7.
	Feil på sender.	Se bruksanvisning for senderen.
	Feil med innstillinger.	Sjekk at varslinger er slått på. Sjekk at «kun alarmer ikke er valgt».
	Systemfeil.	Nullstill til fabrikkinnstillinger. Vekk klokken ved å sette den i laderen etter at skjermen har gått i sort.
Sammenkobling fungerer ikke.	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere.	Nullstill sammenkobling. Se kap. 7.
NORA-L vibrerer av seg selv uten at det varsles.	NORA-L er nesten tom for strøm.	Lad opp NORA-L.
NORA-L har kun sort skjerm.	NORA-L er i transportmodus.	Koble inn lader.
	NORA-L er helt tom for batteri.	Koble inn lader.
	Batteriet er utladet.	Lad batteriet med den medfølgende laderen.
Displayet blinker når Nora lades.	Dårlig kontakt ved ladeplugg.	Kontroller tilkoblingen på laderen. Rengjør ladekontaktene på klokken dersom nødvendig.



Vestfold Audio AS

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

