

VOX UNO

Stemmemforsterker

oppladbar med 2 mikrofonmottakere



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	3
3. Komme i gang	4
Koble til strømkabelen	4
Stille inn mikrofonkanal	4
4. Daglig bruk	5
Lading	5
5. Innstille mikrofonkanaler	5
6. Tilkoblinger	6
Lydingang	6
Lydutgang	6
7. Vedlikehold	6
8. Resirkulering	6
9. Tekniske data	7
10. Leverandør	7
11. Samsvarserklæring	7
12. Feilsøking	8


1. Innledning

Stemmeforsterkeren VOX UNO er spesielt utviklet for å gi best mulig gjengivelse av stemme. Med VOX UNO kan du prate til forsamlinger i store rom/klasserom, du kan bruke den i mindre møter og der du ellers sliter med å bli hørt.


VOX UNO er liten og kompakt og er lett å ta med seg.

VOX UNO kan brukes sammen med trådløse mikrofoner fra Vestfold Audio.


2. Oversikt

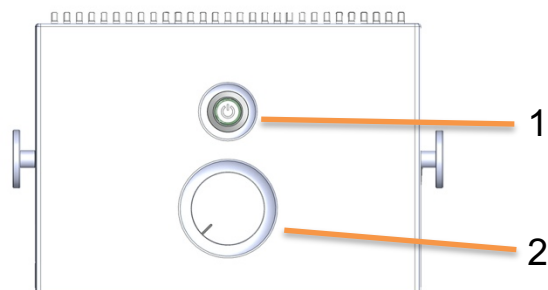

Topp

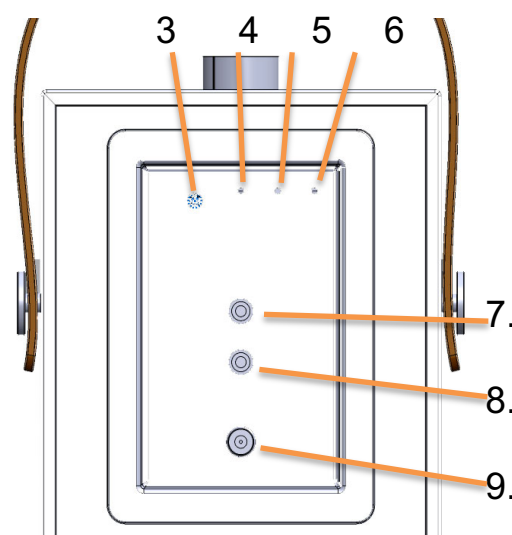

Bakside

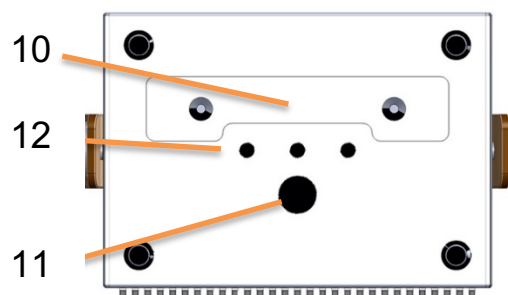

Underside

1. På/Av-knapp. Grønt lys: PÅ
2. Volumkontroll
3. Justering av signalnivå på linje ut (7) for tilpasning til eksternt utstyr.
4. Lading pågår – rødt lys
5. Batteri oppladet – grønt lys
6. Mikrofon på / signal mottatt – gult lys
7. Linje ut (stereo jack)
8. Linje inn (stereo jack)
9. Ladekontakt 15VDC (+ på senter)
Høytaleren kan brukes mens den lader.
10. Åpning til kanalvelger
11. Feste for stativ (3/8" UNC)
12. Ladekontakter for ladestasjon (tilbehør)

3. Komme i gang

Koble til strømkabelen

VOX UNO må lades før første gangs bruk. Benytt den medfølgende strømforsyningen og koble den til i kontakten (9). Når strømforsyningen tilkobles, vil den røde lampen (4) lyse mens VOX UNO lades. VOX UNO er fullt oppladet når den grønne lampen (5) lyser.

Du kan bruke VOX UNO normalt også når den er tilkoblet lading.

Stille inn mikrofonkanal

VOX UNO må stilles inn til samme kanal som på mikrofonen du skal benytte. Du kan enten endre kanal på VOX UNO eller på mikrofonen. Se avsnitt 5. under



Tips

Hvis du ikke vet mikrofonens innstilte kanal, kan du vri kanalvelgeren på VOX UNO sakte fra 0 til F. Når man kommer til riktig kanal vil lampen (6) lyse.

4. Daglig bruk

1. Slå på VOX UNO (1). Lampen (1) lyser grønt.
2. Behold lydvolument på minimum.
3. Slå på mikrofonen du skal benytte.
4. Lampen (6) lyser når mikrofonen er koblet til.
5. Pass på at du har mikrofonen i riktig avstand til munnen. Se bruksanvisningen for mikrofonen.
6. Juster lydstyrken til et behagelig lydnivå oppnås for tilhørerne.



Viktig


Hvis du opplever piping (feedback) er lydnivået stilt inn for høyt i forhold til hvordan mikrofonen benyttes eller hvor du står i forhold til VOX UNO. Forsøk å skru ned lydstyrken, flytte deg utenfor VOX UNOs "nærfelt" og bruk mikrofonen nærmere munnen.

Lading

VOX UNO er beregnet for kontinuerlig lading, og den kan stå tilkoblet strømforsyningen når den ikke er i bruk. Da er du sikker på å alltid ha en fulladet VOX UNO klar til bruk.

5. Innstille mikrofonkanaler

På undersiden av VOX UNO. Løsne de to skruene og vipp opp lokket som sitter over kanalvelgerne. Bruk en liten flat skrutrekker og skru til riktig bank og kanal.

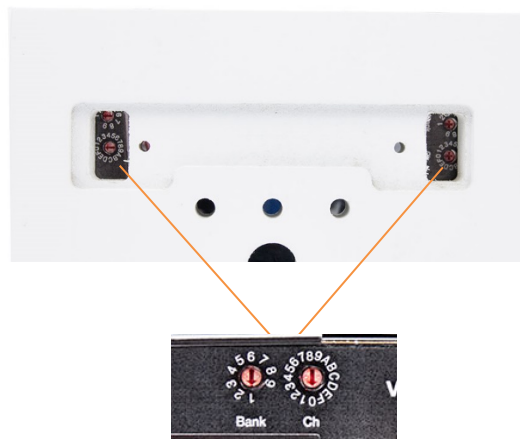

Gyldige kanalvalg:

- Bank 1
Kanal 0-F
- Bank 2
Kanal 0-F
- Bank 3
Kanal 0-4
- Bank 4-9 er ikke i bruk.

6. Tilkoblinger

Lydinngang

VOX UNO har en kontakt (8) for tilkobling av eksterne lydkilder, som f.eks. en PC.

Du kan benytte 3-polet minijack-plugg.

Lydutgang

Lydutgangen (7) er justert til standard linjenivå fra fabrikken. Hvis linjenivået er for kraftig for den enheten du kobler til, kan nivået justeres ved å vri på kontrollen (3). Bruk en liten skrutrekker.

7. Vedlikehold

VOX UNO kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann.

Må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

8. Resirkulering

VOX UNO skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Front: Resirkulert aluminium
Kasse: Svanemerket MDF

9. Tekniske data

Dim (hxbxd): 188x132x96 mm
Vekt: 1,8 kg
Ladetid: 6t
Brukstid: 10t
Strømforbruk: 380mA, 15VDC
Frekvensområde: 125–16000 Hz
Uteffekt (max): 7W
Radio båndbredde: 823–832MHz

Må ikke utsettes for regn eller vannsøl.

10. Leverandør

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord
Tel. 3347 3347
Epost: post@vestfoldaudio.no

11. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.vestfoldaudio.no/samsvar

12. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Ingen lyd og ikke grønt lys i (1).	Batteriet er tomt.	Koble til strømforsyningen og se at ladelyset tennes,
Ingen lyd i høyttaleren, men grønt lys i (1).	Lydnivået står for lavt	Skru opp lyden (2).
Ikke gult lys i (6)	Mikrofonen er ikke påslått.	Skru på mikrofonen
Ikke gult lys i (6)	Mikrofonen er på feil kanal.	Still inn riktig mikrofonkanal. Se kap. 5.
Det lyser ikke rødt i (4) når strømforsyningen er tilkoblet.	Lading er ferdig hvis lampen (5) lyser grønt.	Alt er normalt.
	Strømforsyningen er ikke tilkoblet strøm (230VAC)	Koble strømforsyningen i kontakten på veggen.
	Strømforsyningen virker ikke.	Kontakt service.
Dårlig/ingen lyd i lydutstyr tilkoblet OUT (7).	Utgangsnivået er stilt for lavt eller høyt.	Juster nivået med potentiometer (3).



Vestfold Audio AS
 Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

