

**Knop TX901A Sender  
Bruker- og vedlikeholds veiledning**



**KNOP**



**Brukerveiledning for  
Armbåndssender  
TX901A**



**Mottager Knop RX901B**

**HMS art. nr.:**

**Best. nr.:2223296**

**KNOP ELEKTRONIK A/S**

Fabriksvej 20 ● 7600 Struer ● Mail: [knop@knop.dk](mailto:knop@knop.dk) ● Web: [www.knop.dk](http://www.knop.dk) ● Tlf.: 9784 0444 ● Fax.: 9784 0666

## Innhold

Tilsiktet anvendelse av TX901A .....	2
Kontroll av dekningsområde .....	3
Batteri alarm .....	3
Batteriskift .....	3
Utskiftning av armbånd eller halssnor .....	3
Rengjøring .....	3
Avskaffelse .....	4
Tekniske data TX901A .....	4

## Tilsiktet anvendelse av TX901A

TX901A er en liten batteridrevet vanntett sender, som både finnes som armbåndssender (TX901A) og sender, som kan bæres om halsen (TX901A-H).

TX901A-T er med en ekstra trykkplate, som er beregnet til personer, som f.eks. har gikt i fingrene eller har vanskelighet med å treffe den røde alarmknappen.

Såfremt senderen er innkodet i en mottager i KNOP's 901-serie, vises brukerens navn og eventuelle leilighetsnummer, når senderen aktiveres.


Kan også anvendes sammen med KNOP's 900 serie, dog med begrenset funksjon.

Ved aktivering av den røde knappen, blinker en LED indikator grønt, mens alarmen sendes.

Når alarmen er motta hos mottageren, lyser indikatoren konstant grønt kortvarig.

Hvis transmisjonen mislykkes, lyser indikatoren rød og senderen vil gjenta transmisjonen opp til 2 gangen med 30 sekunders intervall.

Hvis lysdioden blinker gul, skal batteriet skiftes.

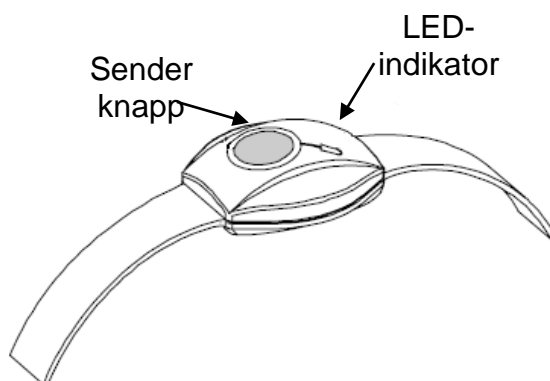

## Kontroll av dekningsområde

En person aktiverer TX901A (som beskrevet ovenfor) med korte mellomrom, mens en annen går systematisk rundt i området og avmerker på en skisse over bygningen og området, hvor det er dekning. Skissen legges på kontoret, så alle, som skal betjene systemet, kan se, hvor det er dekning.

Utenfor dekningsområdet kan det ikke mottas alarmer.

Dekningsområdet kan økes ved bruk av et repeatersystem fra Knop Elektronik.

Kontakt din forhandler for nærmere opplysning.

## Batteri alarm

Hver gang man har sendt en alarm kontrolleres batteriet.


Ved lav batterispennning blinker indikatoren "GULT" og det sendes også en batterialarm til mottageren f. eks. RX901B.

## Batteriskift

TX901A anvender et litiumbatteri, type CR2450.

Utskiftes ved å fjerne skruene på baksiden og adskille TX901A. Se figur B.

Batteriet skubbes forsiktig ut av holderen og et nytt monteres.

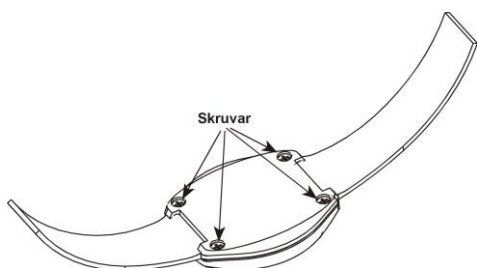

Figur A

## Utskiftning av armbånd eller halssnor

Utskiftning av armbånd eller halssnor skjer ved å fjerne skruene på baksiden og adskille TX901A. Se figur B.

Det finnes flere forskjellige typer armbånd eller halssnor, se tilbehør på [www.knop.dk](http://www.knop.dk)  
[www.cantec.no](http://www.cantec.no)

## Rengjøring

Produktet kan rengjøres med en fuktig klut eller spritsserviett.

## Avskaffelse



Produktet må ikke bortskaffes sammen med alminnelig husholdningsavfall.

## Tekniske data TX901A

<b>Bestillingsnr.:</b>	2223296 TX901A, Armbåndssender
<b>Frekvens:</b>	869.2125 MHz (FM)
<b>Rekkevidde:</b>	Opptil 500m i friskt til en RX901B. *)
<b>Batteritype:</b>	1 stk. 3V CR2450 type Lithium
<b>Drift tid (forventet):</b>	3 år ved 5 transmissioner pr. dag. Opptil 10 år, med en transmisjon pr. dag.
<b>Lavt batteri alarm/indikator:</b>	1/3 rest kapasitet.
<b>Omgivelse miljø:</b>	Ikke kondenserende omgivelser.
<b>Omgivelse temperatur:</b>	0-40° C
<b>Kabinett type:</b>	Hvit plast
<b>Kabinett dimensjoner:</b>	42x47x16mm. (ikke inkl. armbånd)
<b>Tetthet:</b>	IP67
<b>Tilslutninger:</b>	Ingen
<b>Vekt inkl. Batterier:</b>	28g
<b>Tilbehør:</b>	2220021 halssnor for TX901A 2220022 TK101 lettryksknapp

Rett til endringer forbeholdes

\*) Målt utendørs med friskt mellom sender og mottager.  
I bygninger, er rekkevidden redusert.  
Kontrollere dekningsområdet som beskrevet i avsnittet **Kontroll av**  
Dekningsområdet kan økes med en repeater fra KNOP's 900/901 serie.

