

Bevegelse Sensor 869 (61005/35)

Installasjonsguide



Contents

1. Features and Introduction.....	3
Your Motion Sensor 869	4
Motion Sensor 869 Illustration	4
2. Getting Started	5
What's in the Box?	5
How to Install	5
3. Assigning the Motion Sensor 869 to the Tunstall Home Unit	8
4. Modes of Use.....	9
Walk Test Mode	9
Auto Low Battery (ALB) and Auto Presence (AP) Mode Overview	10
Auto Low Battery (ALB) and Auto Presence (AP) Configuration Mode	10
5. Notes and Warnings.....	11
Service Information.....	11
Changing the Battery	11
6. Compliance and Standards.....	12
Declaration of Conformity	12

5. Merknader og Advarsler

Service informasjon

Bevegelsessensoren inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Den inneholder et EVE ER14505V 3.6V batteri med opptil 2 års levetid (vanlig bruk). Dette batteriet kan skiftes ut av brukeren, og når det er utløpt, skal det kastes i henhold til gjeldende lokale forskrifter.

Bytte av Batteri

For å bytte batteri på bevegelsessensoren:



1. Fjern frontdekselet.
2. Fjern det nåværende batteriet og kast det i henhold til lokale forskrifter.
3. Vent i tjue sekunder før du setter inn et nytt 3,6V AA litiumbatteri, og kontrollerer at polariteten er riktig.
4. Tunstall anbefaler å bruke EVE ER14505V. Reservennummeret på erstatningsbatteriet er S1004055.
5. Sett på frontdekselet, og forsikre deg om at det sitter ordentlig.
6. Når bevegelsessensoren slås på, gjenta gå-testen (se side 8) om nødvendig.

Merk: Husk å kontrollere at posisjonen til bevegelsessensoren fortsatt er relevant for brukeren etter et batteribytte.

Advarsel: Under utskifting av batteri vil ikke bevegelsessensoren kunne generere en alarm.

6. Standarder

Radio Frekvens:	869.2125MHz
Stråling:	Mindre enn 1 milliwatt
Bruksområde:	Europa
Miljøgruppe:	Gruppe 2 – Innendørs
EMC:	EN 55032 EN 301 489-1 EN 301 489-3
Radio:	EN300 220-3-1
Sikkerhet:	EN60950-1
Design, produksjon og service:	ISO 9001:2015

Samsvarserklæring

Tunstall erklærer at radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende adresse:
uk.tunstall.com/approvals



t: +46 (0)40 625 2500
e: info@tunstallnordic.com
w: tunstall.no
Version: IL1117

Tunstall