



Splashy Big

Bruksanvisning



Family Freedom

Norsk



Vennligst les alle instruksjoner nøye før du bruker Splashy Big. Alle instruksjoner finnes også på vår nettside: **www.fireflyfriends.com** samt videoer og ofte stilte spørsmål.

Innhold

01 Tiltent bruk	s.03
02 Sertifisering	s.04
03 Advarsler og forsiktighetsregler	s.04
04 Vilkår for garanti	s.06
05 Sikkerhetsinstruksjoner	s.06
06 Forholdregler og kontraindikasjoner	s.08
07 Rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon	s.09
08 Produktinspeksjon og service	s.11
09 Viktige retningslinjer	s.12
10 Gjenbruke Firefly-produkter	s.12
11 Instruksjoner for bruk	s.13
12 Størrelse informasjon	s.32
13 Symboler	s.33

AVSNITT 01: Tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk

Badestøtter er ment for å støtte personer som har milde til komplekse posturale behov som forstyrrer evnen til å sitte uten ekstern støtte. Alle enheter er ment å brukes i badekar eller dusj for å lette personlig pleie. Splashy Big kan i tillegg brukes utendørs til rekreasjonsformål som bruk på en strand eller badeland.

Indikasjoner for bruk

Splashy Big er ment for å gi støtte til barn med nedsatt funksjonsevne som trenger hode- og kroppsstøtte mens de sitter i badekaret. For struktur, sikkerhet og støtte er det viktig at Splashy Big til enhver tid er festet til gulvbasen. Splashy Big er designet for barn i alderen fra ca. 1-8 år og med maksimal brukervekt på 55 kg (121lbs).

Vi anbefaler at en voksen fullfører produktinspeksjoner i samsvar med avsnitt 08 i denne bruksanvisningen for å sikre at produktet er trygt å bruke. Firefly Friends Ltd. og James Leckey Design Ltd. kan ikke akseptere noe ansvar dersom produktet brukes utenfor tiltenkt bruk. Hvis du er i tvil, kontakt Firefly kundeservice på UK 0800 318265 eller ROI 1800 626020.

Daglige aktiviteter som er testet og godkjent av Firefly Friends Ltd. og James Leckey Design Ltd. er:

1. I badekar eller i dusjen.
2. For vannlekeaktiviteter.

Bruk av Splashy Big utenfor badet (i hagen eller på stranden) bør vurderes først. Vær oppmerksom på at Splashy Big er festet til gulvbase hvor låsen kan påvirkes av små partikler som jord, sand eller gress. Hvis Splashy Big kommer i kontakt med slikt, er det viktig å skylle grundig etter bruk.

Se avsnitt 05 for sikkerhetsinstruksjoner og avsnitt 07 for ytterligere veiledning om rengjøring og vedlikehold.



Barn bør aldri etterlates uten tilsyn i Splashy Big, da de kan risikere å drukne eller skade seg.

AVSNITT 02: Sertifisering

Splashy Big er klassifisert som et medisinsk utstyr i klasse I i henhold til EU og UK regelverk. Som produsent, erklærer James Leckey Design Limited, at dette produktet er i samsvar med Medical Device Regulation (2017/745), UK Medical Device Regulations 2002, Medical Device Directive (93/42 EEC) og EN 12182:2012 hjelpemidler for personer med funksjonshemming, generelle krav og testmetoder.

Merknad til brukeren og/eller pasienten:

Enhver alvorlig hendelse som oppstår i forbindelse med enheten skal rapporteres til produsenten og myndighetene i området der brukeren og/eller pasienten bor.

Merk:

Generelle brukerråd.

Ved å ikke følge disse instruksjonene kan føre til fysisk skade, skade på produktet eller skade på miljøet!

AVSNITT 03: Advarsler og forsiktighetsregler

Advarsel velfare:

- Aldri bruk Splashy Big på ujevnt underlag.
- Kontroller at seteryggen er sikret før brukeren settes i Splashy Big og at sikkerhetsstroppene for føttene settes på så snart brukeren har satt seg.
- Aldri etterlat et barn uten tilsyn i Splashy Big.

Advarsel daglige kontroller:

- Splashy Big skal kontrolleres daglig før bruk for å sikre at alle seler og seteelementer er godt festet.
- Inspiser alltid produktet visuelt før bruk. Hvis du er i tvil, stopp å bruke produktet umiddelbart. Hvis du mistenker eller vet at produktet eller en del er defekt, stopp å bruke produktet. Kontakt vår kundeserviceavdeling eller din lokale forhandler så snart som mulig.

Advarsel fingerklemmingsfare:

- Vær forsiktig når du monterer eller justerer posisjonen til setekomponentene, at fingrene ikke kommer i klem.
- Pleieren skal ikke berøre noen bevegelige ledd som ikke er låst.

Advarsel fingerfellefare:

- Pass på at fingrene til pleieren eller barnet ikke blir klemt i mellomrommet mellom setet og rammen.

Advarsel brukersikkerhet:

- Før du plasserer brukeren i produktet, må du justere produktet og kontrollere stabiliteten.
- Brukeroverføringer inn og ut av produktet må gjøres med egnet utstyr og personell.
- Sørg for at brukeren er sikret med selene så snart de er satt i produktet. Det bør utvises forsiktighet ved justeringer av seteryggen slik at man ikke setter fingre i klem mellom setet og rammen. Aldri forlat et barn uten tilsyn i Splashy Big.

- Risiko for velt!
Hvis beltene må løsnes under aktiviteten, kan barnet skli ned, eller, på grunn av manglende brystkontroll, velte med ansiktet fremover.
- Merk drukningsrisiko ved tilbakelemt ryggstøtte.
- Hvis bruker viser noen form for ubehag, ta barnet ut av produktet umiddelbart.

Advarsel rengjøring:

- Rengjør produktet regelmessig for å forhindre oppbygging av smuss. Oppsamlet smuss kan slite på setet og forårsake korrosjon i rammen. Bruk kun ikke-slipende husholdningsrengjøringsmidler og fuktige kluter.

Advarsel vannslange/kraftvasker:

- Ikke bruk vannslange eller kraftvasker på rammekomponentene, rammen er ikke forseglet mot vann og kan bli skadet av vanninntrengning.

Advarsel oppbevaring:

- Produktet bør holdes unna alle direkte varmekilder, inkludert åpen ild, sigaretter, elektriske- og gassvarmere.

Advarsel ved resirkulering:

- Kun resirkuler Splashy Big ved å følge reglene i ditt område.

Advarsel ta i bruk:

- Når du tar Splashy Big i bruk etter lagring, la den akklimatisere seg til romtemperatur.

AVSNITT 04: Vilkår for garanti

Garantien for Splashy Big gjelder kun når produktet brukes i henhold til tiltenkt bruk og ved å følge instruksjonene i denne bruksanvisningen. Det gis ett års garanti fra produsenten.

Varer kan returneres til oss ved garanti, reparasjon eller erstatning opptil 12 måneder fra mottak. Når du kontakter oss, avtaler vi henting av varene for vår regning, og når de er returnert til oss, vil vi reparere eller erstatte varen og returnere tilbake innen 14 dager. I alle tilfeller er det kundens ansvar å sørge for at varene som returneres er forsvarlig pakket, fortrinnsvis i originalemballasje.

AVSNITT 05:

Sikkerhetsinstruksjoner

1. Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk.
2. Barn bør aldri forlates i Splashy Big uten tilsyn.
3. Hvis du bruker Splashy Big på stranden, la aldri barnet være uten tilsyn.
4. Kontroller at alle komponentene er forsvarlig montert i henhold til bruksanvisningen før bruk. Splashy Big må til enhver tid være montert til gulvbasen og stå på en fast og jevn overflate. Bruke aldri Splashy Big på en skrående overflate.
5. Maksimal brukervekt for Splashy Big er 55 kg (121lbs).
Dette bør aldri overskrides.
6. Splashy Big inneholder deler som kan utgjøre en kvelningsfare for små barn. Kontroller at alle komponentene er stramme og godt festet før bruk.
7. **Ikke** modifier eller bruk andre komponenter enn Firefly-godkjente komponenter på noe tidspunkt. Dette kan sette barnet i fare og kan også gjøre garantien ugyldig.



Å ikke følge disse instruksjonene kan sette barnet i risiko for skade.

8. Når du bruker Splashy Big i miljøer hvor det er jord, sand, gress eller små komponenter, sørg alltid for at du rengjør der setet er montert til gulvstøtten etter hver bruk. For å montere gulvstøtten til setet, se avsnitt 11.2.6.
9. La Splashy Big tørke grundig etter bruk, før du oppbevarer den. Splashy Big bør holdes unna alle direkte varmekilder, inkludert åpen ild, sigaretter, elektriske- og gassvarmere.
10. Rengjør produktet regelmessig i samsvar med avsnitt 07 i denne bruksanvisningen.
11. Gjennomfør vedlikeholdskontroller med **jevne** mellomrom for å sikre at produktet er i god stand. Splashy Big bør ikke brukes hvis noen deler er defekte.
12. Hvis du er i tvil om sikker bruk av Splashy Big eller gulvbasen, eller hvis noen deler er defekte, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt Firefly kundeservice UK 0800 318265 eller ROI 1800 626020.
13. Eventuelle artikler som leveres med Splashy Big bør ikke brukes uten tilsyn.

AVSNITT 06: Forholdsregler of kontraindikasjoner

Forholdsregler

- Faste ryggdeformiteter som skoliose eller kyfose.
- Alvorlige muskelkontrakturer.
- Alvorlig muskel- eller skjelettasymmetri inkludert hofteluksasjon.
- Progressive og muskelsvinnende forhold.
- Høy risiko eller nylig historie med benbrudd.
- Høy risiko for trykkrelatert skade eller åpne sår.
- Sterke, ukontrollerte bevegelsesmønstre.
- Dårlig kontrollert anfallsaktivitet.
- Barn som er avhengig av perkutan endoskopisk gastrostomi.
- Medisinsk ustabilitet inkludert kompromittert åndedretts- eller kardiovaskulær funksjon.
- Avheng av tredjeparts livsopprettholdende apparater som oksygentanker.

- Betydelige lærevansker og/eller atferdsproblemer.

Kontraindikasjoner

Det er ingen kontraindikasjoner knyttet til badeutstyr. Instruksjoner for bruk indikerer at for alle produkter skal aldri brukes etterlates uten tilsyn.

Alle forholdsregler og kontraindikasjoner tas etter foreldres eller terapeutens skjønn.

AVSNITT 07: Rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon

Hvordan vedlikeholde

- Når du rengjør Splashy Big anbefaler vi at du kun bruker varmt vann og et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Bruk aldri organiske løsemidler eller rensevæsker.
- Ikke vask i vaskemaskin eller damprens Splashy Bigs skumkomponenter, da det kan føre til at skummet mister sin form og kan deformeres.
- Vi anbefaler at du ikke bruker noen form for foreskrevet medisinkrem i badevannet da det kan ødelegge materialet på Splashy Big.
- Tørk av badekarets overflate for rester eller smuss før du fester gulvstøtten, og sørg for at gummiføttene er godt festet til badekarbunnen.
- For å fjerne sand, jord, gress eller små partikler som kan kile seg fast mellom gulvstøtten og setet, kan lett banking gjøre at partiklene faller ut. Skyll grundig for å sikre at det ikke samler seg partikler i koblingene.
- Hvis Splashy Big skulle komme i kontakt med saltvann, skyll alle delene grundig med friskt, rent vann.

5-punktssele

Splashy Bigs 5-punktssele kan tas av og rengjøres med såpevann.

Gulvstøtteenhet

1. Sørg for at bunnen av gulvstøtteenheten er rengjort etter hver bruk for å sikre at den griper fast i bunnen av badekaret.
2. Såpe og vann kan brukes som daglig rengjøring.
3. Ikke bruk løsemidler til å rengjøre gulvbasenheten.


Splashy Big setebase, ryggstøtte og støtter

1. Såpe og vann kan brukes til daglig rengjøring.
2. EVA-skumdekslene tas av og vaskes med jevne mellomrom for å unngå oppsamling av smuss.




Splashy Bigs EVA-skumtrekk kan tas av og vaskes ca. hver andre måned.





1. EVA-trekkene er festet med åtte kroker, to på seteryggen og seks på setebasen.
2. Løsne alle kroker for hånd (ikke bruk verktøy).
3. Vask med såpevann.
4. Sørg for at trekkene er helt tørre før de settes på igjen.
5. Sørg for at alle kroker er festet når du setter trekket på igjen.

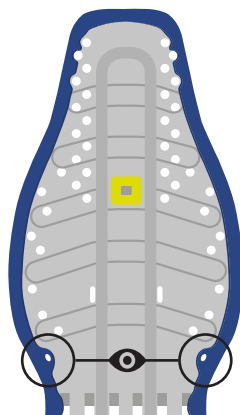

Krokplasseringer

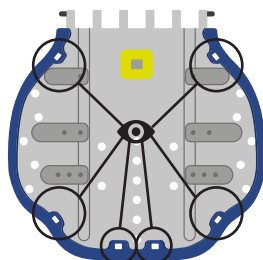

Hvis Splashy Big brukes i miljøer utenfor badet (som f. eks stranden eller hagen) er det viktig å skylle den etter hver bruk slik at den er fri for partikler/hindringer som kan påvirke mekanismene. For å montere gulvstøtten til setet, se avsnitt 11-2.8

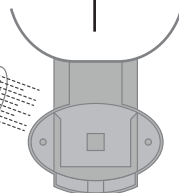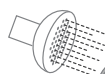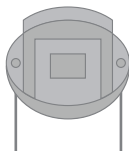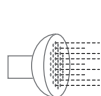

AVSNITT 08: Produktinspeksjon og service

Vi anbefaler at det utføres ulike kontroller av Splashy Big før hver bruk for å sikre at produktet er trygt.

Anbefalte kontroller er:

1. Forsikre deg om at Splashy Big sin ryggstøtte og setebase er **satt riktig sammen** som beskrevet i avsnitt 11 i denne bruksanvisningen.
2. Sjekk at Splashy Big er **riktig festet til gulvbaseenheten** og sørg for at den er stabil og sikker i badekaret før du setter barnet oppi Splashy Big. (NB: Stabilisator er ikke nødvendig for bruk av Splashy Big i badekaret.)
3. Sørg for at 5-punktsselen og støtteputene er **godt festet** til Splashy Big ved hjelp av festene.
4. Sjekk 5-punktsselen og støtteputene for **tegn på slitasje**.
5. Sjekk spenner og låser for sprekker eller skader.
6. Kontroller at Splashy Big, gulvbaselåsene og koblingene er fri for skitt og rusk og **uten tegn til slitasje**.



Hvis du er i tvil om sikker bruk av ditt Firefly-produkt, eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst slutt å bruke produktet og kontakt vår kundeserviceavdeling så snart som mulig.

For alle servicerelaterte problemer, se nettsiden til Firefly: **www.fireflyfriends.com** eller kontakt Firefly på: **customer.enquiries@fireflyfriends.com**

AVSNITT 09: Viktige retningslinjer

Sørg for at Splashy Big sitter trygt i badekaret. Len ryggstøtten bakover til midtstilt stilling for barn som kan hjelpe til med forflytning eller som løftes opp i badekaret. Vennligst se avsnitt 11.6.

Fullt tilbakeleent stilling bør brukes for barn som skal heises inn i badekaret. Dette bør gjøre overføringen til Splashy Big enklere.

Vi anbefaler at du monterer 5-punktsselen og sidestøttene til Splashy Big før du setter barnet i setet, men du kan gjøre justeringer mens barnet sitter i badekaret. Vær oppmerksom og overvåk barnet ditt nøye mens du gjør endringer på Splashy Big.

Å løfte et barn inn og ut av badekaret er en aktivitet som kan forårsake skade på ryggen. Vi anbefaler deg å søke råd fra din terapeut med hensyn til trygge løft av barnet ditt.

AVSNITT 10: Gjenbruke Firefly-produkter

Før du utsteder et produkt på nytt, anbefales det at det desinfiseres ved å bruke en av følgende prosedyrer:


Merk: Rengjør alltid produktet først for å fjerne akkumulert smuss før desinfisering/rensing.

1. Der det er mulig, anbefaler vi bruk av automatisk "fogger" desinfeksjonsmiddel som brukes til å dekke produktets overflater fullstendig med et desinfeksjonsmiddel. Produsentens instruksjoner for det valgte systemet bør henvises til før bruk og følges nøyaktig.
2. Der et automatisert desinfeksjonssystem ikke er tilgjengelig, bør alle produktoverflater tørkes over med desinfiserende servietter eller flytende desinfeksjonsmiddel på en myk klut. Egnede produkter er 70% IPA, 70% alkohol eller fortyntet blekemiddel. Produsentens instruksjoner for det valgte produktet bør følges. Produkttrekk og tekstiler bør rengjøres grundig i samsvar med avsnitt 07, rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon, i denne bruksanvisningen.

Sørg for at en kopi av bruksanvisningen følger med produktet. Hvis du er i tvil om fortsatt sikker bruk av Firefly-produktet ditt eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst slutt å bruke produktet og kontakt vår kundeservice så snart som mulig på: UK 0800 318265 eller ROI 1800 626020.

AVSNITT 11: Instruksjoner for bruk

11.1 Splashy Bigs deler

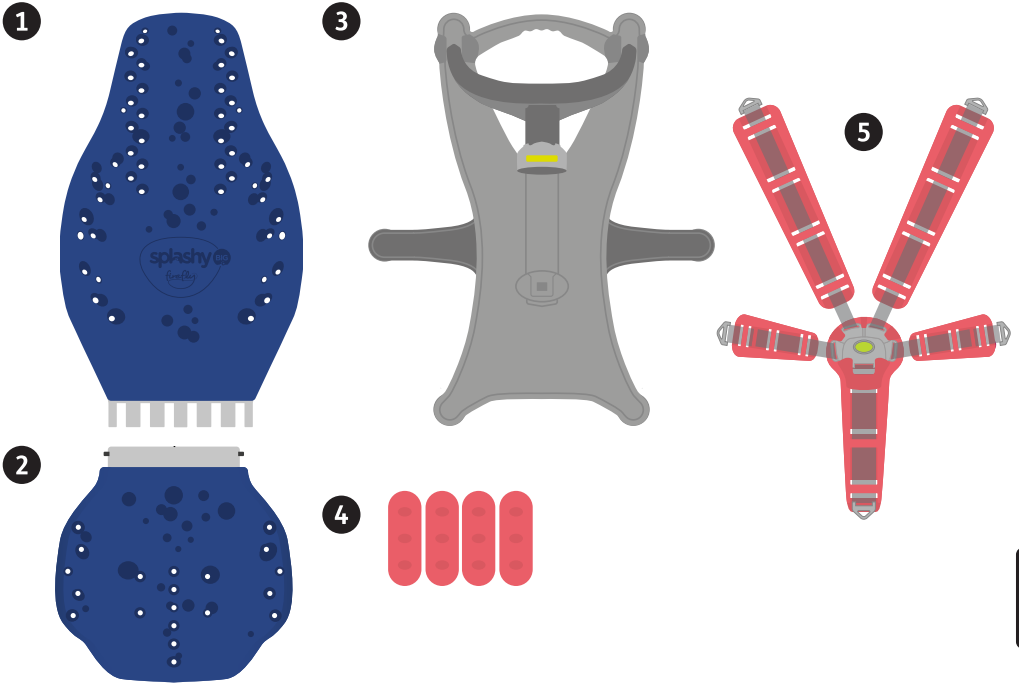

Din Splashy Big leveres med følgende deler:

- 1 1x Ryggstøtte
- 2 1x Setebase
- 3 1x Gulvbaseenhet
- 4 4x Sidestøtter
- 5 1x Lyskestropp & 4x selestropper




11.2 Montere Splashy Big

- Vi anbefaler på det sterkeste at du kjører en pretest uten vann, mens barnet har på seg lette klær for å sikre riktig plassering av sele og støtter.
- Sørg for at badekaret ditt er rent før gulvstøtten settes inn i badekaret.
- Din Splashy Big MÅ monteres før du fyller badekaret med vann. Vi anbefaler at du fyller badekaret med lunkent vann for å unngå skade på Splashy Big.
- Se avsnitt 11.6.1 for veiledning om hvordan du plasserer ryggstøtten på Splashy Big.

11.2.1 Plassering av gulvstøtten

Gulvstøtten skal alltid være plassert på en fast og solid overflate. Når du plasserer gulvstøtten, er det viktig at gummføttene er i kontakt med overflaten. Selv om stabilisatoren ikke er nødvendig når du bruker Splashy Big i badekaret, er det viktig å sikre at den er helt rotert til sin "låste" posisjon når den er utenfor badekaret.

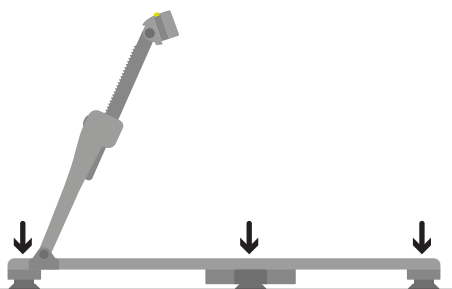


Fortsettelse →

11.2.2 Bruke stabilisatorfunksjon




Bruk alltid stabilisatoren når Splashy Big brukes utenfor badekaret for å begrense eventuell velterisiko.

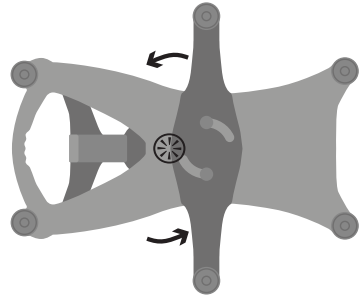

Lytt etter et hørbart klikk ved låsing av stabilisator.

11.2.3 Plassering av gulvstøtten

Når gulvstøtten er på plass, sørg for at ryggstøtten er innstilt på sin høyeste posisjon.

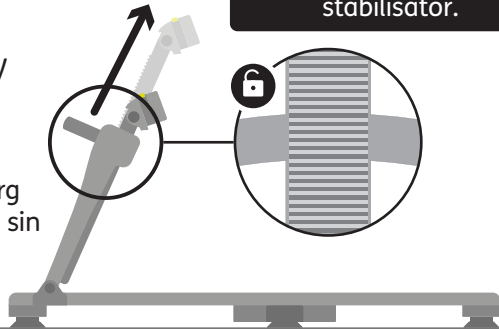

11.2.4 Montere Splashy Big setet


1

Før du monterer Splashy Big til gulvstøtten, må ryggstøtten og gulvbasen monteres.

2


Hold ryggstøtten på Splashy Big opp vertikalt med sporene øverst. Bruk den andre hånden til å stikke setebasen inn i sporene på ryggstøtten.

Snu setebasen i motsatt retning for å låse sammen. Sett deretter inn hengsleklaffen under ryggstøtten.

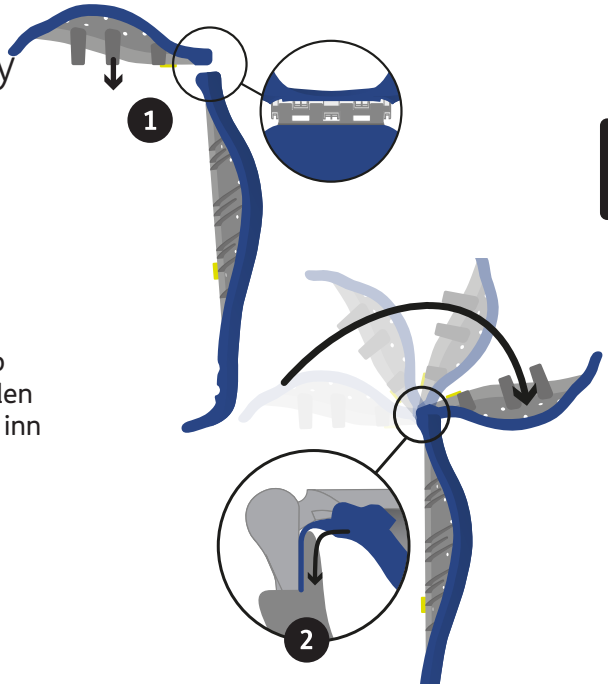


11.2.5 Feste og konfigurere selen og støttene


- 1 For å feste støttestroppene og støttene på Splashy Bigs setebase og ryggstøtte, plasserer du den relevante stangen gjennom hullet.
- 2 Sikre ved å vri bryteren sidelengs under setet.

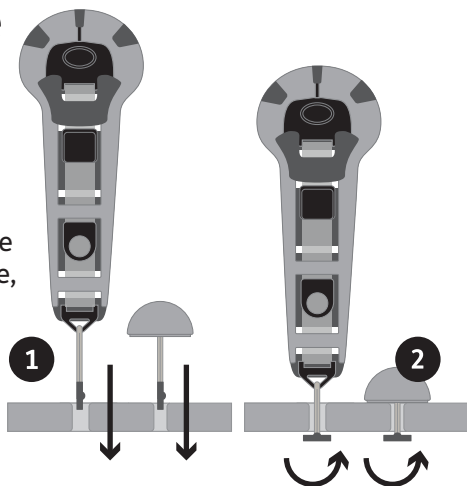

For å koble skulder- og sidestøtter, se bildet.

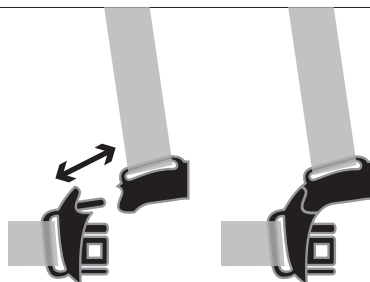


For å sikre at du plasserer stroppene på riktig side av Splashy Big, skal spennen se ut som på bildet.

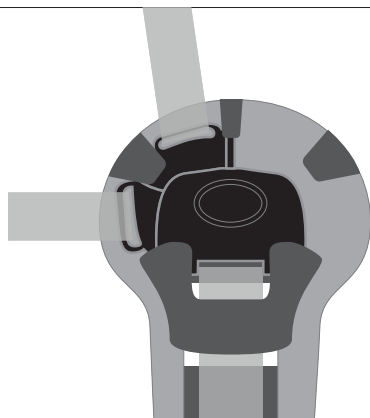


11.2.6 Konfigurere -punktsssele

- 1 Sett inn tappen på lyskestroppen inn i Splashy Big sin setebase.
- 2 Sett tappen på venstre skulderstropp gjennom hullet ved riktig høyde for barnet.
- 3 Sett inn tappen for venstre skulderstropp inn i et hull på sidepanelet på ryggstøtten.
- 4 Gjenta prosessen for høyre skulderstropp og sidestøtter.
- 5 Når alle stroppene er sikkert på plass, koble alle stroppene sammen ved å bruke spennen for å lage en 5-punktsssele.
- 6 Stroppene kan justeres ved å løsne klemmen som gjør stroppen strammere eller løsere, avhengig av hva du ønsker. Sørg for at klemmen er låst når stroppen er justert.

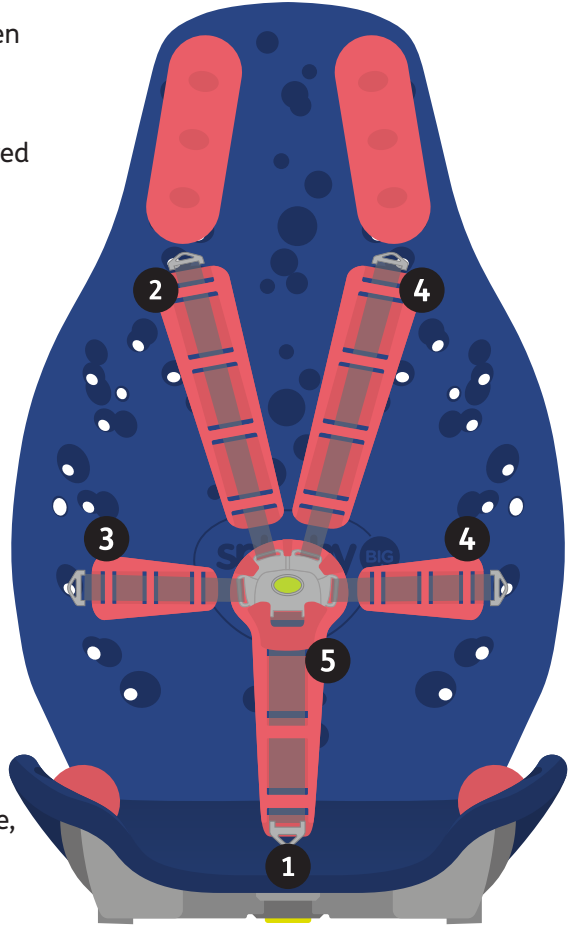


Tips – Når du er fornøyd med justeringen kan du tre den gjenværende delen av stroppen gjennom selen for å holde det ryddig.

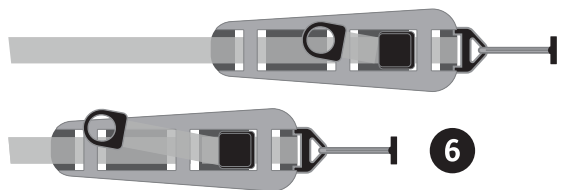

11.2.7 Konfigurer 3-punktsselen


- 1 Sett inn tappen på den venstre sidestroppen inn i et hull på sidepanelet på ryggstøtten.
- 2 Repeter prosessen for den høyre sidestroppen.
- 3 Når alle stroppene er sikkert på plass, koble alle stroppene sammen ved å bruke spennen for å lage en 3-punktsselle.

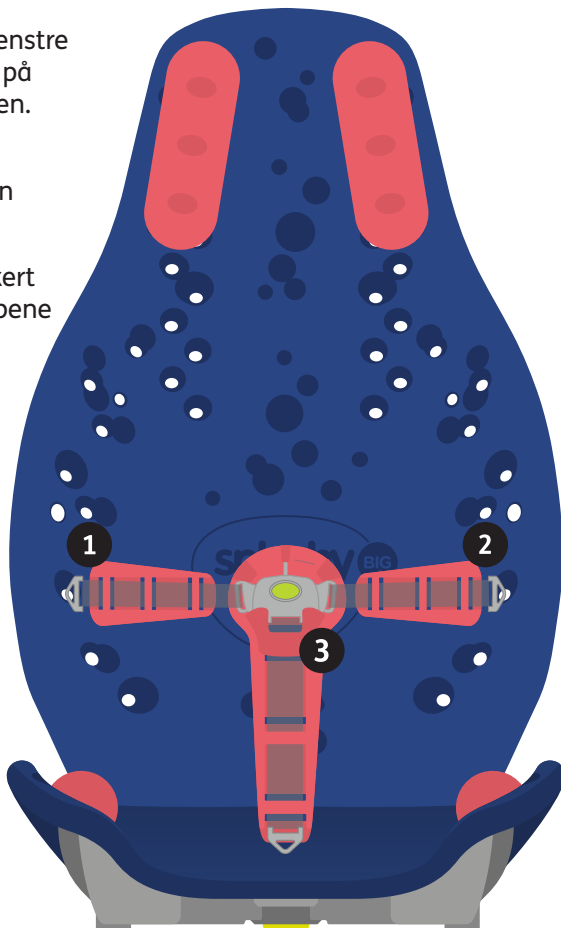


Ikke juster konfigurasjonen fra en 5-punktsselle til en 3-punktsselle mens barnet sitter i Splashy Big.

11.2.8 Montere Splashy Big setet til gulvstøtten

- 1 Senk Splashy Big med setebasen flatt på gulvstøtten.
- 2 For å sikre at setebasen er sentralt på linje med gulvstøtten, flytt setebasen fremover slik at setebasen glir inn i låsemekanismen.
- 3 Når setebasen låses inn i gulvstøtten vil du høre et klikk.

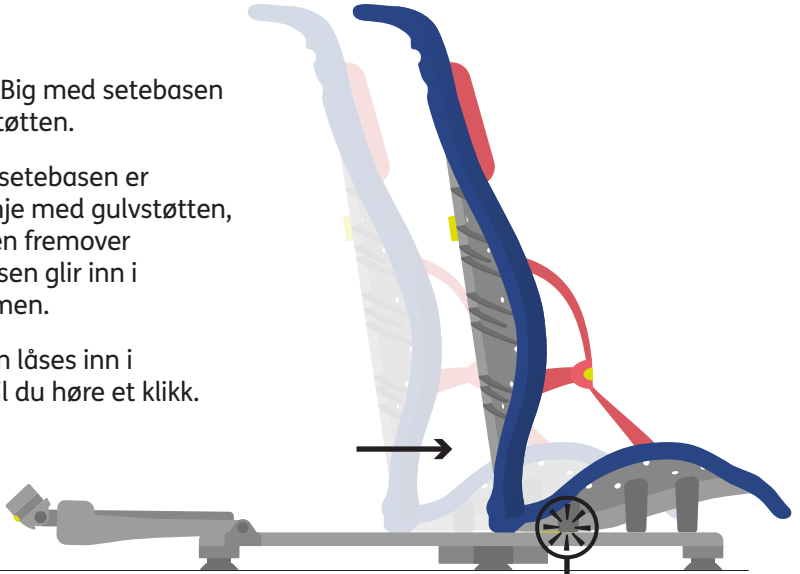


Lytt etter et hørbart klikk når du låser setebase og seterygg til gulvstøtten.

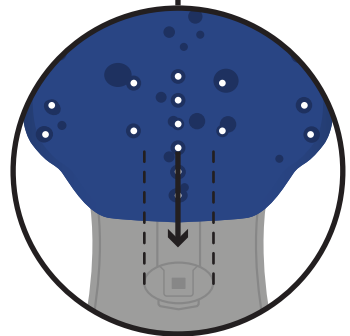


Før du fester ryggvinkelen til ryggstøtten, sørg for at den er på den høyeste innstillingen.

Når den er riktig festet, vil du høre et klikk.

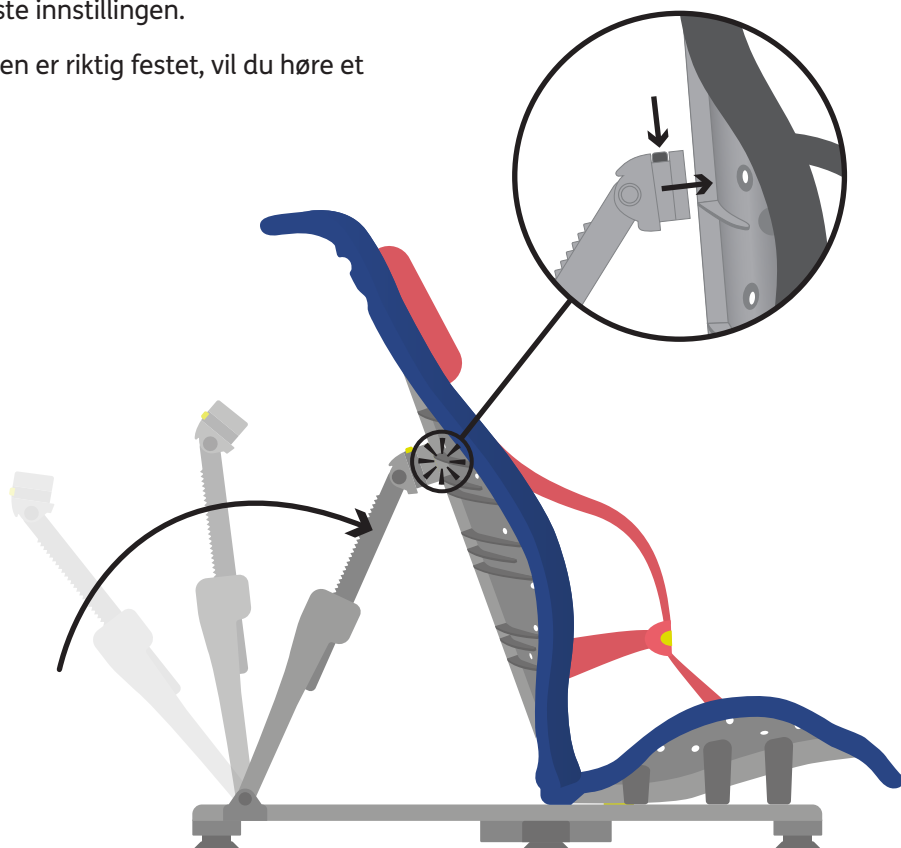

Dette bildet viser hvordan badesetet skal se ut når det er ferdig montert.


Det er nå trygt å sette barnet i Splashy Big.

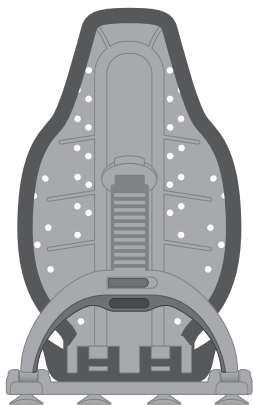

11.3 Støtter

Hvis du føler at barnet ditt trenger ytterligere støtte når de bruker Splashy Big, kan ekstra støtter kjøpes som tilbehør på Firefly sin nettside.

www.fireflyfriends.com/uk/our-products#accessories

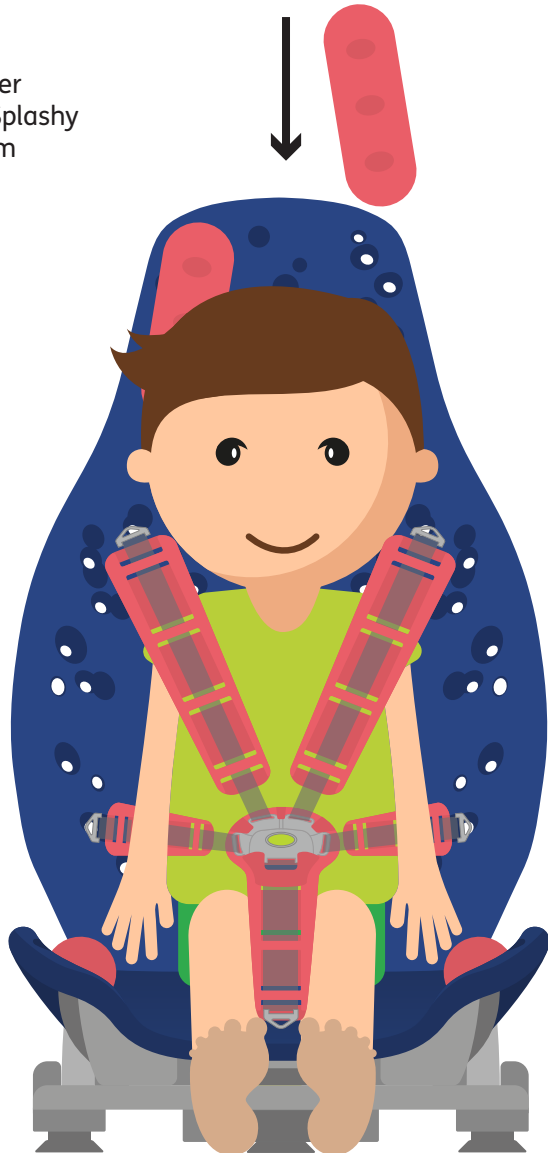



11.3.1 Justering av støtter for støtte på forskjellige steder

Støttene kan brukes som:



1. **Hodestøtte** – plasser en støttepute på høyre og venstre side av barnets hode.

2. **Nakkestøtte** – plasser en støttepute sidelengs i nakken til barnet.

3. **Mellom lår** – plasser en støttepute mellom bena (forhindrer kryssing av ben).

4. **Benføringer** – plasser en støttepute på høyre og venstre side av barnets ben (hjelper med å forhindre at de faller til siden på badesetet).

5. **Anti-skli** – plasser en støttepute sidelengs på bunnen av setet foran barnets bakdel (hjelper med å forhindre at barnet sklir fremover i setet). Noen barn synes det er mer behagelig å sitte i Splashy Big når en støttepute er plassert foran skrittstroppen.

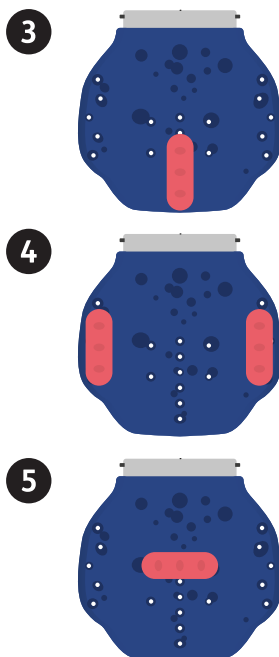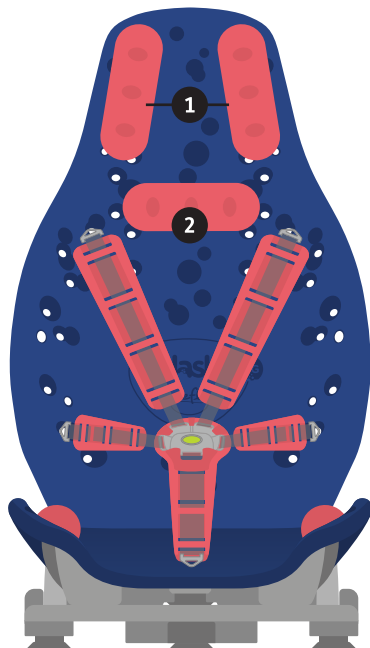

11.4 Justere selen for å vaske

Ta av en skulderstropp ved å lage en 4-punktssele for å få tilgang til å vaske barnet.

For å ta av skulderstroppen, trekk av fra baksiden av ryggstøtten.




Ta av en sidestropp ved å lage en 4-punktssele for å gjøre det enklere å vaske nedentil.

For å ta av sidestroppen, trekk av fra baksiden av ryggstøtten.



11.5 Forkorting av side- og skulderstropper

I noen tilfeller vil du kanskje redusere størrelsen på side- og skulderstroppene for å passe et mindre barn.

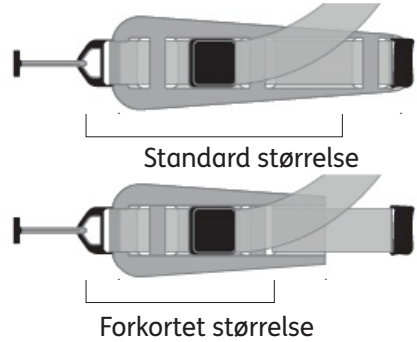


1 Når din Splashy Big blir levert, vil stroppene se ut som på bildet. For å justere stroppene til en mindre innstilling, vennligst følg disse instruksjonene.




2 Fjern den uthevede delen av stroppen fra polsteret.




3 Brett den tynnere enden av polsteret bakover og sørg for at åpningene er på linje.

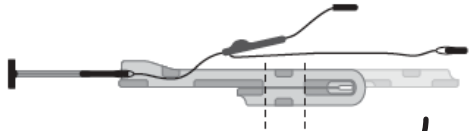

4 Før stroppene gjennom den første åpningen på den doble polstringen.

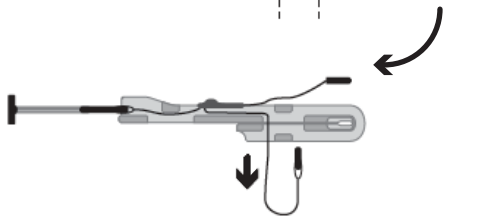

5 Når den er trukket helt gjennom, før opp gjennom den andre åpningen og stram til.

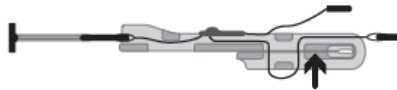



11.5.1 Forkorte lyskestropp


I noen tilfeller vil du kanskje redusere størrelsen på lyskestroppen for å passe et mindre barn.



1 Lyskestroppen vil se ut som på bildet når den leveres. For å justere stroppe til en mindre innstilling, følg disse instruksjonene.


2 Fjern den uthevede delen av stroppe fra polsteret.

3 Brett polstret bakover for å lage en mindre lyskestropp og trekk tilbake gjennom hullet i setebasen.

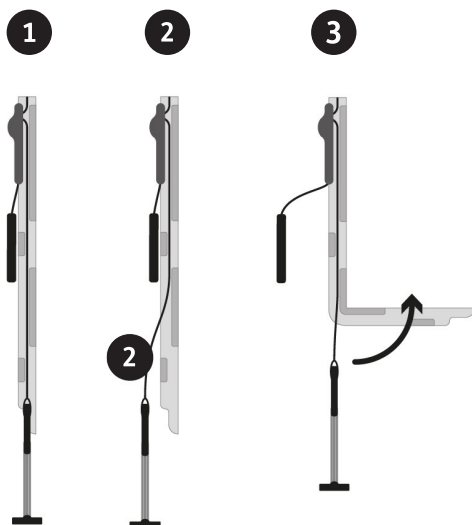


11.6 Anbefalte lenestillinger


Oppreist stilling – hvis barnet ditt har god sittetoleranse og kroppskontroll, kan de kanskje sitte i en oppreist stilling.

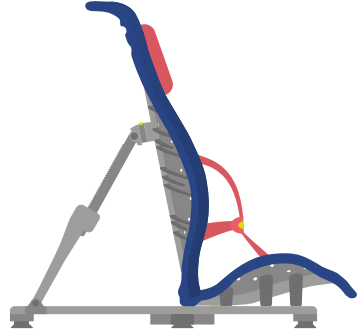

Midt tilbakeleent stilling – vi anbefaler at Splashy Big plasseres i en midtstilt tilbakeleent stilling hvis barnet ditt blir løftet opp i badesetet.

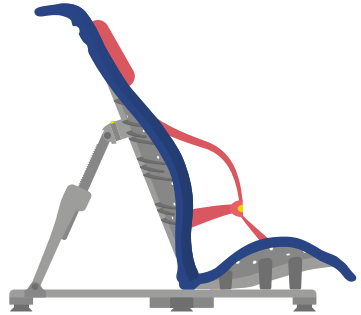

Fullt tilbakeleent stilling – vi anbefaler at Splashy Big plasseres i fullt tilbakeleent stilling for enkel forflytning hvis barnet ditt heises inn i badesetet.

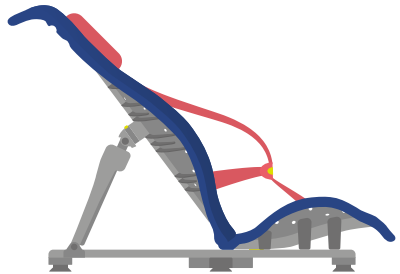



11.6.1 Bruke Splashy Big recline-funksjon

Når barnet ditt sitter trygt i Splashy Big, kan Splashy Big recline-funksjonen brukes.


Vær forsiktig når du endrer lenevinkelen. Du bør gjøre denne bevegelsen så jevn som mulig for å gjøre det behagelig for barnet.

For å få Splashy Big i en mer oppreist stilling, plasser den ene hånden på håndtak **A** på toppen av ryggstøtten for støtte, og den andre hånden på den grønne knappen på ryggjusteringen **B**



Slipp knappen og sett badesetet i en oppreist stilling som passer for barnet ditt. **A**

Fest klipsen på ryggjusteringen

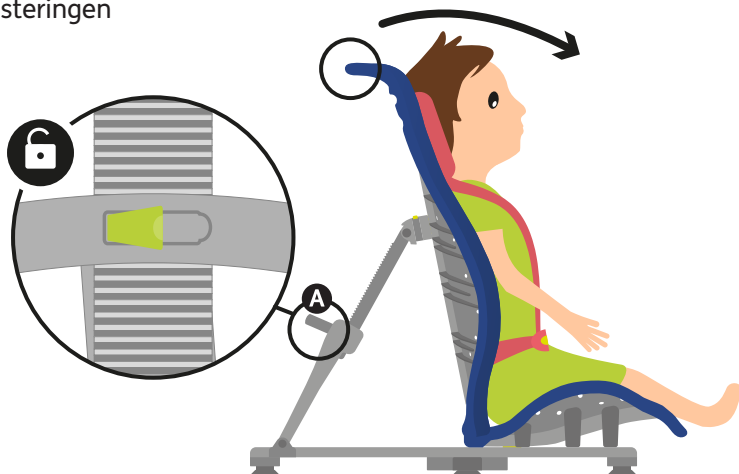

11.7 Ta ut Splashy Big fra badekaret etter bruk og demontering


Ikke ta ut Splashy Big fra badesetet før du har demontert setebasen fra gulvstøtten, da dette kan belaste tilkoblingene.

Ta barnet ut av Splashy Big og tøm badekaret.




Se avsnitt 9 for veiledning om hvordan du gjør dette trygt.

For å demontere Splashy Big fra gulvstøtten, trykk på den grønne knappen på ryggjusteringen og trekk ryggstøtten fremover.

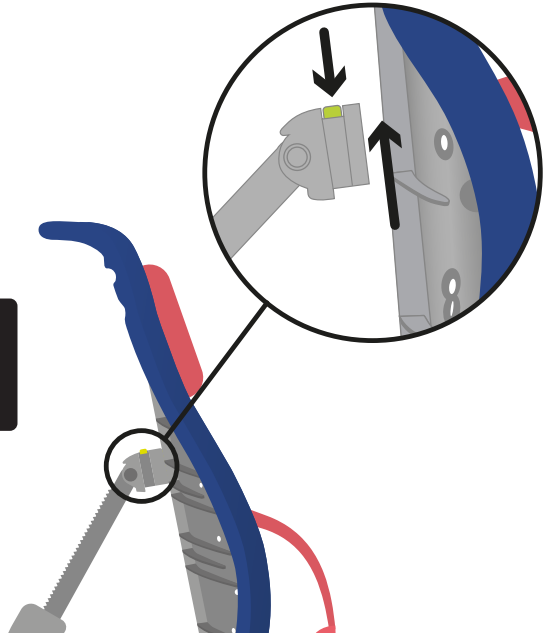


For å frigjøre setebasen, trekk i den grønne plasttappen **A**, skyv og løft Splashy Big av gulvstøtten **B**.

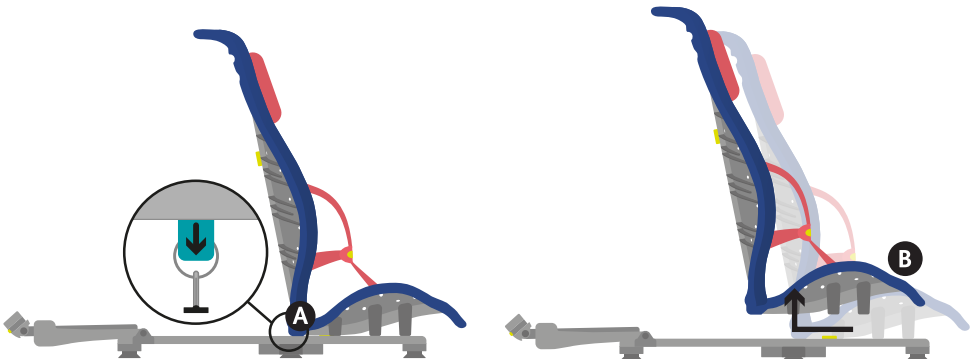


Pass på at du ikke presser rammen fra badekaret, da dette kan belaste koblingene.

For å fjerne gulvstøtten fra badekaret, skyv hånden forsiktig under gummeføttene slik at de løsner. **(ikke bruk verktøy)**

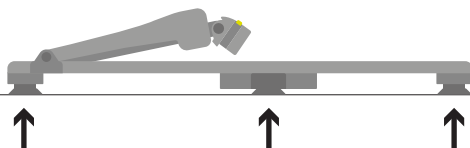

Plasser Splashy Big på siden og løsne setebasen fra ryggstøtten ved å bøye setebasen tilbake for å frigjøre hengslemekanismen.

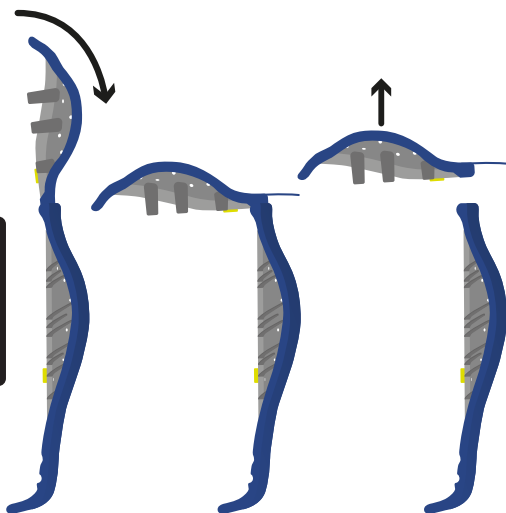

Ved å ikke følge disse instruksjonene, kan det føre til at garantien ikke er gyldig.

11.8 Tømming og tørking

Tørk alltid Splashy Big godt før du oppbevarer den for senere bruk.

Gulvstøtten kan tørkes av. (Se avsnitt 07 for ytterligere veiledning.)



For å oppbevare gulvstøtten når den ikke er i bruk, skyv lenearmen ned til laveste stilling og legg den flatt.


11.9: Gulvstøtte - for utendørs bruk



- 1** Fjern de 6 sugekoppene fra gulvstøtten.



- 2** Fest føttene for utendørs bruk ved å skru dem inn med klokken.

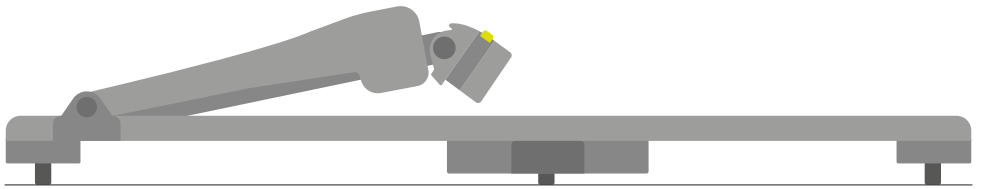

- 3** Sørg for at alle føttene er festet og at gulvstøtten ligger flatt.




Ikke bruk føttene for utendørs bruk i badekaret/dusjen. Vennslikt bruk originale sugekopper til gulvet.

AVSNITT 12: Størrelse informasjon

Splashy Big teknisk informasjon	
Høyde seterygg	72 cm (28,5 inches)
Bredde seterygg	45 cm (17.5 inches)
Setebase dybde	40 cm (15.5 inches)
Setebase bredde	45 cm (17.5 inches)
Gulvstøtte bredde	42 cm (16.5 inches)
Gulvstøtte bredde /stabilisator	66,5 cm (26 inches)
Gulvstøtte lengde	79,5 cm (31 inches)
Maksimum vekt	55 kg (121lbs)
Alder	7-14 år

AVSNITT 13: Symboler

Symbol	Betydning
	Medisinsk utstyr
	Les bruksanvisningen før bruk
	CE merking
	Advarsel
	Produsent
	Produktkode
	Serienummer
	Maks. brukervekt
	Produksjonsdato
	Lateksfri
	Unik enhetsidentifikasjon



Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com

USA Distributor / Canadian Distributor

Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

T: 0044(0)28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com

fireflyfriends.com

