

Fornøyde brukere

En spørreundersøkelse blant kvinner som har prøvd Ova viser at Ova er blitt svært godt mottatt. Kvinner som før har holdt sengen på grunn av store menstruasjonssmerter, kan nå gå på jobb som normalt. Alle reagerte på at Ova var liten og diskret, derfor lett å ta med seg i vesken. Dessuten var det et stort pluss at Ova var enkel i bruk.

Ordrebestilling



Jeg ønsker å bestille ___ stk
Ova TENS (inkl. batteri
og 4 stk hudelektroder) til kr 600,- eks.mva

Jeg ønsker å bestille ___ stk
å 5 batterier kr 100,- pr. pk.eks.mva

Jeg ønsker å bestille ___ stk
å 4 hudelektroder kr 150,- pr. pk.eks.mva

Betal til kontrnr. 4202 01 05903

Vitacon AS, Vegamot 8,
7048 Trondheim

Påfør navn hvis betaling skjer elektronisk.

Kopi av kvittering vedlegges bestilling.

Fornavn.....

Etternavn

Adresse.....

Postnr/sted

Telefon

E-post

Send denne blanketten til Vitacon AS
Vegamot 8 • 7048 Trondheim

Hvordan virker Ova?

Ova produserer elektriske signaler som lindrer smerte på to måter. For det første blokkeres smertesignalene slik at de ikke når fram til hjernen. For det andre stimuleres hjernen til å utløse endorfiner, som er kroppens naturlige smertestillende middel. De elektriske signalene bygger på en kjent medisinsk behandling som kalles TENS (transkutan elektrisk nervestimulering). Ova lindrer effektivt menstruasjonssmerter gjennom spesielt valgte frekvenser og pulsbredder, som sammen kalles "moduser" i bruksanvisningen.

Kliniske prøver har vist at TENS er svært effektivt, uten å ha noen bivirkninger som for eksempel kvalme og trøtthet som vanligvis forbindes med medikamenter mot menstruasjonssmerter.

Det er viktig at Ova får tid nok til å virke. Hver gang du velger en ny modus eller plasserer elektrodene på en annen måte, tar det en halv time før OVA fungerer optimalt. Dersom du da ikke er helt fornøyd med virkningen, bør du forsøke en annen modus eller plassere elektrodene annerledes. Selv om smertene lindres i tilfredsstillende grad, kan det likevel være nyttig å forsøke andre innstillinger.

Bestilling av Ova

Ønsker du å vite mer om Ova, kontakt Vitacon!

Ønsker du å bestille, benytt bestillingskupongen inne i brosjyren eller ring Vitacon 73 82 13 00

Du kan også sende forespørsel på e-mail:

sales@vitacon.com


Vitacon AS • Vegamot 8 • 7048 Trondheim,
Tlf.: 73 82 13 00 • Fax: 73 82 13 01 • E-mail: sales@vitacon.com
www.vitacon.no

ova™
mini elektrostimulator
mot menstruasjonssmerter



Klinisk testet, lett å bruke,
god effekt og diskret! Vitacon AS

Stort problem

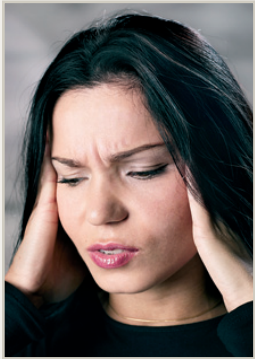

For noen kan menstruasjonssmerter være et stort problem med alvorlige følger for livskvaliteten. Fravær fra skole, studier og arbeid er en realitet for mange i denne situasjonen. For de fleste kvinner avtar menstruasjonssmertene med alderen. Men det er til liten trøst for jenter i skolealder som har behov for en pålitelig måte å lindre smertene på hver eneste måned, eller for kvinner som opplever at menstruasjonssmertene ikke avtar med alderen, eller at smertene kommer tilbake når de nærmer seg overgangsalderen.

Menstruasjonssmerter – eller dysmenoré – skyldes kramper i livmor. Smertene behandles vanligvis med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler eller p-piller, som begge fungerer på den måten at de reduserer aktiviteten i livmormuskelen. Ova bruker imidlertid TENS – transkutan elektrisk nervestimulering – for å lindre smerte. I stedet for å redusere aktiviteten i livmormuskelen, endrer TENS kroppens evne til å motta eller oppfatte smertesignaler.

Hva er Ova?

OVA Uten tabletter – ingen bivirkninger

Ova er utviklet spesielt med sikte på behandling av menstruasjonssmerter. Stimulus-frekvensen er innstilt for å kunne gi optimal lindring av slike smerter. Enheten er ergonomisk utformet og fremstår som en kompakt, mobil og diskret løsning.

Kliniske prøver har vist at TENS er svært effektivt til behandling av menstruasjonssmerter, uten å ha noen av de bivirkningene som vanligvis forbindes med smertestillende medikamenter, som for eksempel kvalme og trøtthet. Ova er lett å bruke og svært diskret. Den er liten og derfor grei å ha på seg hele dagen. Med Ova kan du holde på med de vanlige aktivitetene dine uten at smertene hindrer deg.



*Ova er liten og svært diskret.
Mål: 56x34x10 mm*

Hvordan brukes Ova?

Ova er utviklet til nytte for deg, uansett hva du driver med.

Når du vet at menstruasjonen kommer, setter du på elektrodene om morgenen samtidig som du kler på deg, og fester kontrollenheten på buksen, skjørtet eller trusen, eller legger den i lommen. Når du kjenner at menstruasjonssmertene kommer, slår du Ova på og skrur opp til du kjenner at den begynner å motvirke smertene. Så snart smertene er borte, slår du den av, men lar elektrodene og kontrollenheten sitte på plass i tilfelle smertene skulle komme tilbake.

