

Invacare® | **Carebed**  
Prisforhandlet\*



### Trykkfordeling basert på statisk temperert luft

Invacare **Carebed** sørger for effektiv trykkfordeling både ved forebygging og behandling av trykksår. **Carebed** kan brukes til pasienter med sår opp til grad 3.

Madrassen har individuell tilpasning, og er svært enkel i bruk, noe som sikrer en korrekt og enkel håndtering for pleiepersonalet. **Carebed** følger sengens innstillinger og er meget stabil og komfortabel.

\*Prisforhandlet:

- Post 5: Statisk overmadrass som må innstilles til bruker for barn og voksne




**Yes, you can.®**

### Trykkavlastning med statisk luft

Det er mange faktorer som må tas i betraktning når det gjelder utvikling av trykksår. En av de avgjørende faktorene er mottrykket underlaget gir mot kroppen over tid. Vanlige madrasser gir ofte et for høyt mottrykk. Ved immobilitet kan dette føre til at blodtilførselen stopper opp på utsatte steder, slik at vevet dør og trykksår oppstår. For å forebygge trykksår, må mottrykket reduseres.

### Optimal funksjon

**Carebed** består av mer enn 300 separate celler fylt med luft. Luften transporteres og fordeles mellom cellene, og tilpasser seg pasientens form og vekt. Madrassen er meget enkel i bruk. Luft pumpes inn i madrassen i ca. 1 minutt med brukeren liggende på madrassen. Ventilen lukker seg ved rett luftmengde, og det er derfor umulig å fylle for mye luft i madrassen. **Carebed** er en anerkjent og innarbeidet madrass med gode kliniske resultater.

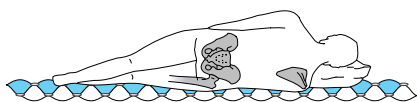

### Produktegenskaper



#### Folie

Carebeds folie er meget føyelig, og enkel å holde ren.



#### Pumpe

Den elektriske pumpen sørger for at madrassen fylles med rett mengde luft.



#### Vedlikeholdspumpe

Pumpen etterfyller madrassen automatisk (Tilgjengelig som tilbehør).

Invacare **Carebed** reduserer mottrykket ved at den lar pasienten synke godt ned i madrassen. Trykket fordeles over en større flate og blodtilførselen opprettholdes.

### Tekniske data



#### Carebed

Størrelse (mm):  
Std: 900 x1900 x100  
Op: 480 x1030 x100  
480 x1700 x100  
480 x2000 x100



Vekt:  
Std: 3,8 kg  
Pumpens vekt:  
1,6 kg



Maks brukervekt  
150 kg



Rengjøring:  
Se vaskeanvisning i  
bruksanvisningen

#### Caresit

400 x 400 x 60,  
450 x 400 x 60  
(400 x 450 x 60),  
450 x 450 x 60,  
500 x 450 x 60  
(450 x 500 x 60)

0,4 - 0,8 kg

Art. nr.	HMS nr.	Beskrivelse
671MFEKPL	155706	Overmadrass Carebed 70x160 cm (inkl. madrass, pumpe og trekk)
651MFEKPL	079562	Overmadrass Carebed 85x180 cm (inkl. madrass, pumpe og trekk)
650MFEKPL	014366	Overmadrass Carebed 85x190 cm (inkl. madrass, pumpe og trekk)
652MFEKPL	079563	Overmadrass Carebed 85x200 cm (inkl. madrass, pumpe og trekk)
653MFEKPL	079564	Overmadrass Carebed 85x210 cm (inkl. madrass, pumpe og trekk)
654MFEKPL	191103	Overmadrass Carebed 85x215 cm (inkl. madrass, pumpe og trekk)