


# RobinAir

Den trykkfordelende  
luftmadrassen  
med justeringsmulighet

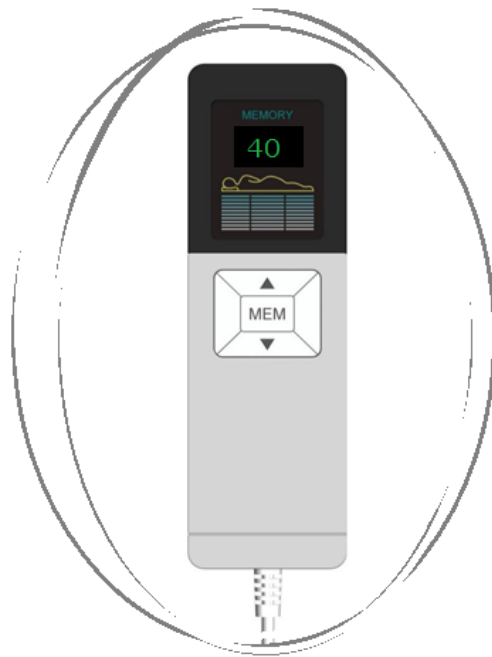

 *Sofies AS*

## Trykkfordeling

Kjernen i madrassen er et luftkammer med en unik konstruksjon, som gir optimal støtte og trykkfordeling.

## Justeringsmuligheter

Madrassens luftkammer justeres ved hjelp av håndpanelet til pumpen mens bruker ligger på madrassen. Håndpanelet har et display som viser fastheten i madrassen, og brukeren kan selv justere fastheten via håndpanelet.

Hos pasienter med smerter og sårproblematikk kan det være særlig behov for å forandre fastheten i madrassen til stadighet.

## Pumpen

Pumpen kan fylle inn og ut luft til ønsket trykk, samt memorere en foretrukken fasthet.


MEM-knappen (Memory) som stiller automatisk tilbake til innstilt trykk. På den måten er det lettere for pleiepersonell og bruker å stille tilbake madrassen etter bruk. Pumpen bruker kun strøm ved justering.

Det følger med pumpeoppheng som standard slik at den kan henges opp på sengen.

## Fukttransporterende trekk

Trekket er i polyester Coolmax® som er utviklet for å holde brukeren tørr og ha en jevn temperatur. Svette og fukt transporteres raskt bort fra brukeren, noe som er viktig for å forhindre liggesår.


Hver fiber har fire kanaler som har 20 % større overflate enn en vanlig rund fiber. Dette øker stoffets evne til å transportere bort fukten fra kroppen og raskt lede den til trekkets utside. På utsiden av trekket spres fukten over et større område og fordunster derfor raskere.

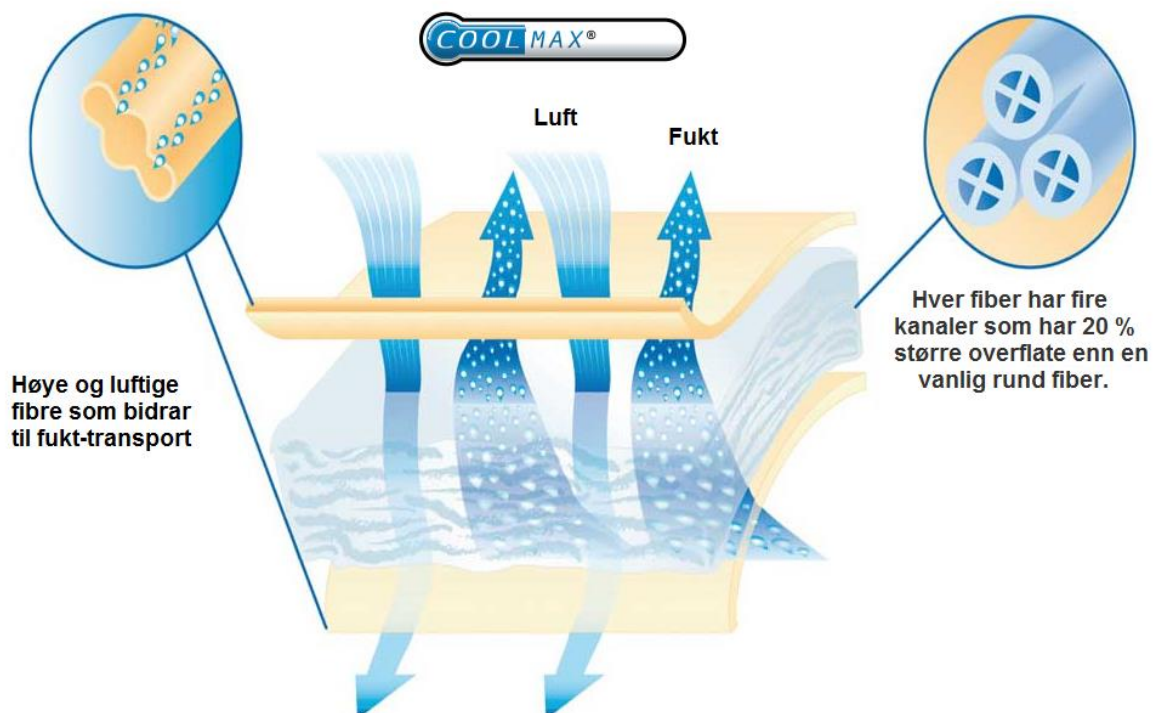

## Inkontinenslaken

Elastisk trekk som er flammehemmende, pustende og resistent mot bakterier. Kan vaskes på 95c°, tørketromles, renses, steriliseres med damp og desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel. Trekket kan monteres i stedet for eller i tillegg til eksisterende trekk.

Trekket er behandlet med Sanitized Silver teknologi. Denne innovative behandlingen av trekket benyttes på stoffet for å hindre veksten av mikroorganismer. Mikroorganismene drepes før de kommer i kontakt med brukeren. Det forhindrer spredning av mugg, lukt og bakterier. Inkontinenslaken kan bestilles som tilbehør.

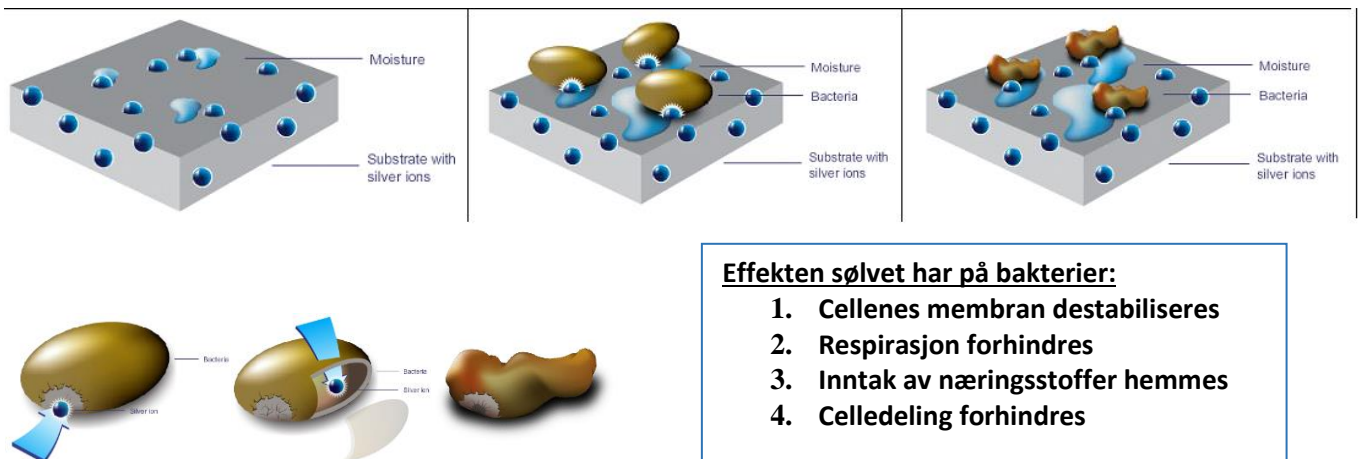

## Forflytningshjelpemiddel

Fra et mykt underlag, som avlaster og gir støtte, kan RobinAir justeres opp til et fast underlag ved forflytning og stell. Desto høyere tall på håndpanelet, desto fastere er madrassen. Man kan enkelt og raskt innstille på et høyt trykk, hvorav maksimalt trykk er 60. Man kan deretter tilbake stille madrassen via MEM-knappen.

## Målgruppe

Madrassen er rettet mot brukere med mindre trykksår, eller fare for sår, forflytningsproblematikk og/ eller smerteproblematikk. RobinAir egner seg også godt til tunge brukere da den har maksvekt på 340 kg.

## Størrelser

Bredden: 75, 80, 85, 90, 120.

Lengden: 190, 200, 210.

Vi tilbyr spesialmål på bestilling.

## Vask

Madrasstrekket vaskes på 85c° i 10 minutter. Luftkammer, skum og pumpe desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel.



## Vi tilbyr:

- Helsefaglig kompetanse
- Lang erfaring innen liggekomfort og hjelpemidler
- Produktdemonstrasjon og veiledning