

***Null- trykk system - Statisk funksjon
Innstilling av hodeceller - Komfort alternativer***



- ***Forebygging av trykksår i fra lav til høyeste pasientrisiko gruppe***
- ***Effektiv behandling av trykksår i alle stadier***
- ***Regelmessig nulltrykk gjennom rask og aktiv tømning av luftceller sikrer blodsirkulasjon til selv de mest trykksårutsatte områder***
- ***Tre komfort alternativer i både statisk og dynamisk funksjon***
- ***Automatisk trykkregulering***

MEDS NODEC S – BARI



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

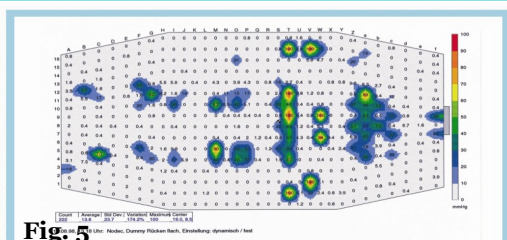


Fig. 5

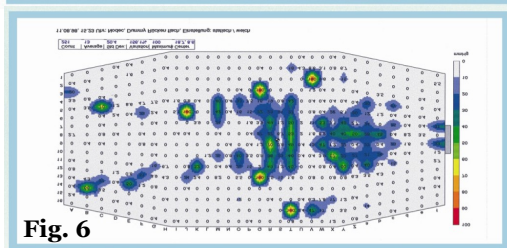


Fig. 6

Tekniske data

Pumpe:

Serienummer	Skilt på baksiden
Spennings	230V, 50Hz
Strømforbruk	Maks 100 Watt
Syklustid	15 minutter
Sykluskontroll	Mikroprosessorstyrte magnetventiler
Lydnivå maks. målt	Ca 32 dB
Vekt	6,8 kg
Mål	L48H22,5cm Br. 13 cm

Madress:

Vekt	8– 10 kg. etter mål
Brukervekt Nodex S	30-250 kg
Mål Nodex S (LxBxH)	200x82x25cm -190x90x25 cm, 210x90x25 cm
Brukervekt Nodex Bari	30-400 kg.
Mål Nodex Bari	200x120x25cm
Brukervekt	30-400 kg.

Pumpe

- Avansert helautomatisk microprosessorstyrt pumpe som automatisk justerer lufttrykk til korrekt nivå. Aktiv tømning av luftcellene 100% for rask oppnåelse av nulltrykk. 3– celle syklus. Syklustid 15 minutter.
- Dynamisk vekseltrykk. Total trykkavlastning (null trykk) mot kroppen i 20-30% av syklustiden. Sikrer tilfredsstillende blod og lymfe sirkulasjon til trykk utsatt vev. Luft celletrykk justeres automatisk etter vekt og ligge/sittstilling. Fig 5
- Statisk funksjon med automatisk trykkregulering. Tidsbegrenset i 2 timer, skifter automatisk til dynamisk når tiden er ute. Fig 6
- Statisk pleie/forflytnings funksjon. Tidsbegrenset til 20 min.
- Velg mellom fast, medium eller myk komfortinnstilling i både dynamisk og statisk funksjon.
- Brukervennlig betjeningspanel og skjerm med norsk tekst. Fig 4
- Funksjon for lufttømming av madrass.
- Visuell og hørbar alarm ved for lavt eller for høyt celletrykk og ved strømstans. Innebygget alarmbatteri

Madrassoppbygning

- Madrassen består av 18, 19 eller 20 tversgående patenterte luftceller. Luftcellene er produsert av elastisk mykt sterkt og komfortabel PU-film materiale med glatt overflate. Montert i ett eget tekstil innertrekk
- Cellene fylles og tømmes for luft i en fast 3 celle syklus, med unntak av 2 sidestøtter og de 3 øverste hodecellene som er konstant luftfylt. Side støttene sikrer en stabil madrass ved inn og utstigning.
- Ved regulering av sengebunn tilpasser luftcellene seg sengens posisjon og optimal sikkerhet oppnås.
- De tre øverste hodecellene kan ved hjelp av 2 monterte kraner helt eller delvis tømmes (ikke Bari): Mageleie - Inntubering - Hårvaske i seng. Fig. 3
- Todelt trekk. Bunntrekk har festestropper til sengebunn.
- Toveis elastisk, pustende, væsketett, PU belagt topptrekk. Glidelås på alle sider. Påtrykket fotavtrykk og vektklasse ved fotende.
- Enkelt renhold, topptrekk kan maskinvaskes på 90°C
- CPR ventil for rask tømning av madrass (15 sekunder) ved HLR.

CE According to 93– 42 EWG Medical Device Directive



BERGEN MEDIKAL AS

Gyldenprisveien 16 5056 Bergen Tlf. 55947700 Faks 55947701
E-post: post@bergen-medikal.no www.bergen-medikal.no