



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Rollator King

Stærk og funktionel rollator udviklet til den bariatriske bruger.

Rollator King er beregnet til bariatriske brugere, der vejer op til 325 kg. Rollatoren kan bruges udendørs og indendørs på institutioner, plejecentre og i private hjem. Findes i to bredder, 61 cm og 71 cm.



- Passer til mange døråbninger
- Stærk konstruktion
- Fungerer også som hvilestol
- Vægtkapacitet op til 325 kg



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

En af de stærkeste rollatorer på markedet

Rollator King har et funktionelt og let design. Med en vægtpacitet op til 325 kg er rollatoren én af de stærkeste på markedet.

Rollator King findes i to bredder, 61 cm og 71 cm. Tallet refererer til den åbning, der er ind til sædet og tilsvarende afstanden mellem håndtagene.

Begge modeller har en sædebredde på 51 cm, en sædehøjde på 51 cm og en sædedybde på 37 cm.

Konstruktion

Rollator King er udstyret med et stort polstret sæde, som gør det muligt at holde hvil undervejs.

Den meget stærke og holdbare konstruktion giver sammen med de massive hjul med stålgafler sikrer stor sikkerhed og støtte for brugeren.

Sikkerhedsrygbøjle

Når brugeren sætter sig tungt på rollatoren, sikrer rygbøjlen, at brugeren placeres rigtigt på

Rengøring og vedligeholdelse

Rollatorens stel, sæde, håndtag og sikkerhedsrygbøjle skal rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Bolte og møtrikker skal kontrolleres hver tredje måned. Spænd dem, hvis der er behov for det.

Desinfektion

Rollatorens stel, sæde, håndtag og rygbøjle kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70 % eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

Transport i bil

Rollator King kan let klappes sammen, hvis rollatoren skal transporteres i motoriseret køretøj.

1. Tag fat i sædets forkant med den ene hånd. Hold om ét af håndtagene med den anden hånd.

2. Løft op i sædet og fold nu rollatoren sammen.

Totalbredde på de to modeller er 13 cm mere end afstanden mellem håndtagene.

Vær opmærksom på, at modellen med en totalbredde på 84 cm kan have svært ved at komme igennem visse døråbninger.

Valg af model afhænger af brugers kropsform. Til brugere med meget fylde omkring bækken og lår anbefaler vi en størrelse 71 cm. Kontakt os på 7025 2522 for råd og vejledning inden bestilling.

Rollator King har stabile bremsesystemer, som både kan låse som parkeringsbremse eller bruges som manuel bremse. De to former for bremsesystemer sikrer kontrol og sikker manøvrering.


Rollatoren er forsynet med kurv og reflekser i håndtagene.

Hvilesædet. På den måde undgås fald bagover, og brugeren føler sig tryk ved at sætte sig ned.

Kontakt Cobi Rehab for yderligere vedligeholdelse af Rollator King.

Hvilesæde og rygbøjle kan skiftes ved overgang til ny bruger.

Hvis rollatoren skal fylde mindre, kan kurven og sikkerhedsrygbøjlen tages af.

 Rollator King må ikke bruges som sæde i motoriseret køretøj.

Specifikationer	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde	850 mm
Total bredde	740/840 mm
Bredde mellem håndtag	610/710 mm
Højdejusterbar i 2,5 cm interval	770,5 - 990 mm
Sædebredde	510 mm
Sædedybde	370 mm
Åbning ind til sædet	610/710 mm
Sædehøjde	510 mm
Vægt	15,7 kg
Vægt i kurv maks.	5 kg
Sammenklappelig	Ja
Hvilesæde	Ja
Massive hjul	Ja
Ramme	Stål/SAE4130
Sæde- og rygpulster	Polyuretan
Hjul	8" massive
Estimeret holdbarhed	7 år
ISO-klassifikation	ISO 12 06 06 - 11
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102490 (610 mm) / 5740000102506 (710 mm)
Grundlæggende UDI	5740000100007N8
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	

Model	Åbning ind til sædet	Totalbredde	Varenummer	HMI
Rollator King, 610 mm, inkl. kurv	610 mm	740 mm	0172-050-000	88144
Rollator King, 710 mm, inkl. kurv	710 mm	840 mm	0172-071-000	127850