



POSISJONERINGSPUTER


PRODUKTLISTE 2023



INKLUDERT PRISFORHANDLEDE PRODUKTER I
HJELPEMIDDELDATABASEN GJELDENE FRA 1. JUNI '23



VEILEDNING PÅ VIDEO

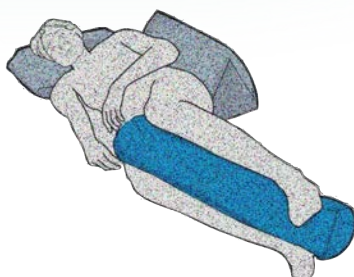

VEILEDNING POSISJONERING

PRINSIPPER

Målsettingene for en inngrepen i en brukers "posisjoneringshverdag" skal være å:

- Optimalisere funksjon
- Redusere og/eller fjerne risiko for sekundærskader
- Forbedre arbeidssituasjonen for omsorgspersonene

Prinsippene for posisjoneringstiltakene er:

- Bevegelse er grunnleggende
- Bevegelse, så vel aktiv som passiv, må være balansert og symmetrisk
- Postural stabilitet utgjør basis for funksjonell aktivitet
- Kroppsholdning vil ha innflytelse på de fleste kroppslige funksjoner
- Kroppsholdning påvirker nevrologiske symptomer som for eksempel spasmer
- Tyngdekraften kan påføre stor skade, men kan påvirkes ved adekvat posisjonering
- Ingen ledd skal befinne seg i ytterposisjon over lengre tid
- Fysisk og mental tilstand henger nøye sammen
- Stimulans gjennom aktivitet, både mentalt og fysisk, er viktig
- En god døgnplan gir best mulighet til gjennomføring i henhold til prinsippene
- Bruk bilder når en skal illustrere posisjoner, både med og uten hjelpemidler

Mangel på postural stabilitet og selvstendig bevegelse kan disponere for:

- Vevstilpasning (forkorting/forlenging) som fører til kontrakturer og deformiteter
- Vevsødeleggelse, inklusive trykkskader
- Redusert energitilførsel gjennom negativ påvirkning av respirasjon
- Infeksjoner i luftveier og urinveier
- Osteoporose
- Fordøyelsesbesvær
- Redusert funksjon

Pauline Pope sier at "det er sannsynlig at asymmetri i vevsstrukturer først oppstår med utgangspunkt i en liggende stilling med etablering av en "vanestilling". Denne blir så forsterket i en sittestilling."

I vår daglige hverdag ligger utfordringen i å kombinere de "riktige" tiltakene med det som er praktisk mulig. Funksjon og selvstendighet må alltid veie tyngre enn "korrekt" posisjonering. Når dette hensynet fører til at brukeren for ofte og for lenge inntar "vanestillingen", må vi kompensere med noen "mottrekk". Vi må forsøke å motarbeide den skadelige effekten av feilstillinger og kontrakturer ved for eksempel å legge følgende stillinger inn i dagsplanen:

- Daglig mageleie
- Stå/oppreist posisjoner
- Korrigert sideleie (30 og 120-graders leie)
- Sitteposisjon med frontalstøtte


Posisjoneringsarbeidet vårt vil avgjøre våre brukeres utvikling negativt eller positivt avhengig av kvalitet og gjennomføringsevne. Prosessen består av følgende elementer:

- Definerings av problemstilling
- Konsekvensutredning
- Motivering
- Planlegging
- Gjennomføring
- Evaluering


INNHOOLD




PRISFORHANDLEDE
PRODUKTER



ANDRE
PRODUKTER



CAREWAVE UNIVERSALPUTER	SIDE 4
CAREWAVE HALMÅNEPUTE	SIDE 4
CAREWAVE BUEPUTER	SIDE 5
CAREWAVE NAKKEPUTER	SIDE 6
CAREWAVE S-PUTER	SIDE 7
CAREWAVE SYLINDERPUTER	SIDE 8
CAREWAVE TREKANTPUTER	SIDE 9
CAREWAVE KILEPUTER	SIDE 9
CAREWAVE SEMI-FOWLERPUTER	SIDE 10
CAREWAVE HEMI-ARMPUTER	SIDE 11
CAREWAVE BUTTERFLYPUTER	SIDE 11
CAREWAVE T-PUTER	SIDE 11
CAREWAVE RESERVEDELER OG PUTETREKK	SIDE 12
CAREWAVE BASISPUTER	SIDE 13
CAREWAVE SPESIALPUTER	SIDE 14
CAREWAVE POSISJONERINGSKIT	SIDE 15
CAREWAVE/FITLEG HÆLAVLASTNING	SIDE 16
CAREWAVE UTPRØVINGSKIT	SIDE 17
CAREWAVE TILBEHØR	SIDE 18
VAKUUM SITTEPUTER	SIDE 19
VAKUUM RYGGPUTER	SIDE 20
VAKUUM HELE SITS	SIDE 21
VAKUUM ARM- OG HODESTØTTER	SIDE 22
VAKUUM MADRASSER OG HELSETER	SIDE 23
VAKUUM SPESIALPUTER	SIDE 24-25
VAKUUMPUTER TILBEHØR	SIDE 26-27
MEDCLINE REFLUX-PUTER	SIDE 28
UTGÅENDE PRODUKTER	SIDE 29
RENGJØRING	SIDE 30

CAREWAVE | UNIVERSAL

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG1636		UNIVERSALPUTE 3XL	100	40	12	
NEG0944		UNIVERSALPUTE 2XL	70	40	10	
NEG0605		UNIVERSALPUTE XL	60	40	11	
NEG0943		UNIVERSALPUTE L	60	30	8	
NEG0881		UNIVERSALPUTE M	45	30	9	
NEG0606		UNIVERSALPUTE S I TOPAKNING	40	30	10	KOMMER KUN PARVIS
NEG0945		UNIVERSALPUTE XS	35	20	5	
NEG0946		UNIVERSALPUTE 2XS	40	10	3	
NEG1103		UNIVERSALPUTE MED ØREHULL	30	30	5	STØRRELSEN PÅ ØREHULLET KAN VARIERE

CAREWAVE | HALVMÅNE



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	BREDDE CM	LENGDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0942		HALVMÅNEPUTE	46	22	5	

CAREWAVE | BUEPUTER

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0608		BUEPUTE XXL	180	30	11	
NEG0939		BUEPUTE XL	175	40	11	
NEG0940		BUEPUTE L	170	35	11	
NEG0882		BUEPUTE M	140	23	8	
NEG0947		BUEPUTE S	125	35	12	
NEG0948		BUEPUTE XS	105	25	9	
NEG0941		BUEPUTE MED HJØRNEKSTENSJON	195	30	13	SE BILDET NEDENFOR



CAREWAVE | NAKKEPUTER

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0612		NAKKEPUTE MED KNEPPING L	135	18	9	
NEG0880		NAKKEPUTE MED KNEPPING M	105	15	8	
NEG0949		NAKKEPUTE BUEFORM L	100	19	7	
NEG0950		NAKKEPUTE BUEFORM M	80	12	5	



CAREWAVE | S-PUTER

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG1030		S-PUTE XL	220	40	16	ANBEFALT FOR BRUKERE MED HØYDE FRA 180 CM
NEG0610		S-PUTE L	180	30	12	ANBEFALT FOR BRUKERE MED HØYDE MELLOM 165-180 CM
NEG0883		S-PUTE M	135	25	10	ANBEFALT FOR BRUKERE MED HØYDE MINDRE ENN 165 CM



CAREWAVE | SYLINDERE

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0613		SYLINDERPUTE L	75	20	20	DIAMETER 20 CM
NEG0884		SYLINDERPUTE M	48	17	17	DIAMETER 17 CM
NEG0614		SYLINDERPUTE S I TOPAKNING	35	20	20	DIAMETER 20 CM. KOMMER KUN PARVIS
NEG0609		SYLINDERPUTE FOTENDE	90	20	20	FESTEBÅND ER PÅSYDD



CAREWAVE | TREKANTER

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0607		TREKANTPUTE L	60	35	35	
NEG0887		TREKANTPUTE M	45	28	28	

CAREWAVE | KILEPUTER

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0615		KILEPUTE L	30	18	20	
NEG0888		KILEPUTE M	23	14	15	



CAREWAVE | SEMI-FOWLER

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG1391		SEMI-FOWLERPUTE XL	88	63	17	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 14 CM
NEG0611		SEMI-FOWLERPUTE L	70	50	13	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 12 CM
NEG2021		SEMI-FOWLERPUTE FORLENGET ABDUKSJON L	70	50	13	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 25 CM
NEG0886		SEMI-FOWLERPUTE M	55	40	11	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 8 CM
NEG2022		SEMI-FOWLERPUTE FORLENGET ABDUKSJON M	55	40	11	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 16 CM
NEG1743		SEMI-FOWLERPUTE S	41	30	9	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 6 CM



CAREWAVE | HEMI-ARM

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0732		HEMI-ARMPUTE L	60	26	35	TO PUTER SOM FESTES TIL HVERANDRE MED BORRELÅS
NEG0889		HEMI-ARMPUTE M	50	24	30	TO PUTER SOM FESTES TIL HVERANDRE MED BORRELÅS



CAREWAVE | BUTTERFLY

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0919		BUTTERFLYPUTE L	40	30	11	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 25 CM
NEG0890		BUTTERFLYPUTE M	30	20	8	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 20 CM

CAREWAVE | T-PUTER



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG3006		T-PUTE L	65	25	13	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 25 CM
NEG3007		T-PUTE M	49	20	11	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 20 CM

RESERVEDELER | TILBEHØR



ART.NR	HMS NR	POSISJONERINGSPUTE UTEN AVTAGBART TREKK	TREKK COMBI ART.NR	COMBI HMS NR	TREKK DARTEX ART.NR	DARTEX HMS NR	TREKK BOMULL ART.NR	BOMULL HMS NR
5-NEG1636	230506	UNIVERSALPUTE 3XL (BLÅ)	5-NEG1636HLEN		5-NEG1637	230507	5-NEG1638	230508
5-NEG0944	159114	UNIVERSALPUTE 2XL (BLÅ)	5-NEG0944HLEN		5-NEG0957	159118	5-NEG0970	166185
5-NEG0605	156858	UNIVERSALPUTE XL (BLÅ)	5-NEG0605HLEN		5-NEG0621	163546	5-NEG0628	159883
5-NEG0943	158653	UNIVERSALPUTE L (BLÅ)	5-NEG0943HLEN		5-NEG0956	164264	5-NEG0969	164249
5-NEG0881	154816	UNIVERSALPUTE M (GRØNN)	5-NEG0881HLEN		5-NEG0894	158674	5-NEG0904	161091
5-NEG0606	149197	UNIVERSALPUTE S I TOPAKNING (BLÅ)	5-NEG0606HLEN		5-NEG0692	148123		
5-NEG0945	158619	UNIVERSALPUTE XS (BLÅ)	5-NEG0945HLEN	269523	5-NEG0958	160596	5-NEG0971	158655
5-NEG0946	161392	UNIVERSALPUTE 2XS (BLÅ)	5-NEG0946HLEN	269524	5-NEG0959	164266	5-NEG0972	164265
5-NEG1103	174288	UNIVERSALPUTE MED ØREHULL (BLÅ)	5-NEG1103HLEN				5-NEG1381	242698
5-NEG0942	159115	HALVMÅNEPUTE (BLÅ)	5-NEG0942HLEN		5-NEG0955	159116	5-NEG0968	175577
5-NEG0608	145204	BUEPUTE XXL (BLÅ)	5-NEG0608HLEN		5-NEG0623	164269	5-NEG0630	145203
5-NEG0939	158944	BUEPUTE XL (BLÅ)	5-NEG0939HLEN		5-NEG0952	164250	5-NEG0965	158947
5-NEG0940	158945	BUEPUTE L (BLÅ)	5-NEG0940HLEN		5-NEG0953	164270	5-NEG0966	158940
5-NEG0882	158946	BUEPUTE M (GRØNN)	5-NEG0882HLEN		5-NEG0895	160601	5-NEG0905	158949
5-NEG0947	158654	BUEPUTE S (BLÅ)	5-NEG0947HLEN		5-NEG0960	164272	5-NEG0973	164271
5-NEG0948	160599	BUEPUTE XS (BLÅ)	5-NEG0948HLEN		5-NEG0961	160600	5-NEG0974	163782
5-NEG0941	163687	BUEPUTE MED HJØRNEKSTENSJON (BLÅ)	5-NEG0941HLEN		5-NEG0954	164273	5-NEG0967	163688
5-NEG0612	149196	NAKKEPUTE MED KNEPPING L (BLÅ)	5-NEG0612HLEN		5-NEG0626	163545	5-NEG0633	149215
5-NEG0880	158698	NAKKEPUTE MED KNEPPING M (GRØNN)	5-NEG0880HLEN		5-NEG0893	160598	5-NEG0903	164275
5-NEG0949	158696	NAKKEPUTE BUEFORM L (BLÅ)	5-NEG0949HLEN	254855	5-NEG0962	159117	5-NEG0975	164156
5-NEG0950	158697	NAKKEPUTE BUEFORM M (BLÅ)	5-NEG0950HLEN	254854	5-NEG0963	160597	5-NEG0976	161092
5-NEG1030	163689	S-PUTE XL (BLÅ)	5-NEG1030HLEN	267931	5-NEG1069	175578	5-NEG1051	163690
5-NEG0610	147073	S-PUTE L (BLÅ)	5-NEG0610HLEN		5-NEG0624	163544	5-NEG0631	158090
5-NEG0883	157712	S-PUTE M (GRØNN)	5-NEG0883HLEN		5-NEG0896	158671	5-NEG0906	164274
5-NEG0613	149194	SYLINDERPUTE L (BLÅ)	5-NEG0613HLEN		5-NEG0627	164276	5-NEG0634	149214
5-NEG0884	154818	SYLINDERPUTE M (GRØNN)	5-NEG0884HLEN		5-NEG0897	158672	5-NEG0907	161093
5-NEG0614	149195	SYLINDERPUTE S I TOPAKNING (BLÅ)	5-NEG0614HLEN		5-NEG0691	160595		
5-NEG0609	175581	SYLINDERPUTE FOTENDE (BLÅ)	5-NEG0609HLEN	243100				
5-NEG0607	146924	TREKANTPUTE L (BLÅ)	5-NEG0607HLEN		5-NEG0622	158620	5-NEG0629	163691
5-NEG0887	154817	TREKANTPUTE M (GRØNN)	5-NEG0887HLEN		5-NEG0899	158673	5-NEG0909	164155
5-NEG0615	150250	KILEPUTE L (BLÅ)	5-NEG0615HLEN		5-NEG0778	160671	5-NEG1052	166645
5-NEG0888	160602	KILEPUTE M (GRØNN)	5-NEG0888HLEN	254818	5-NEG0900	160603	5-NEG0910	164295
5-NEG1391	230193	SEMI-FOWLERPUTE XL (BLÅ)	5-NEG1391HLEN	254817	5-NEG1397		5-NEG1396	230194
5-NEG0611	153330	SEMI-FOWLERPUTE L (BLÅ)	5-NEG0611HLEN		5-NEG0625	159576	5-NEG0632	159575
5-NEG2021		SEMI-FOWLERPUTE FORLENGET ABD. L (BLÅ)	5-NEG2021HLEN		5-NEG2821		5-NEG2921	
5-NEG0886	158097	SEMI-FOWLERPUTE M (GRØNN)	5-NEG0886HLEN		5-NEG0898	159574	5-NEG0908	159573
5-NEG2022	301537	SEMI-FOWLERPUTE FORLENGET ABD. M (GRØNN)	5-NEG2022HLEN		5-NEG2822		5-NEG2922	
5-NEG1743	231899	SEMI-FOWLERPUTE S (GRØNN)	5-NEG1743HLEN	269525	5-NEG1744		5-NEG1745	231900
5-NEG0732	155132	HEMI-ARMPUTE L (BLÅ)	5-NEG0732HLEN		5-NEG0755	163749	5-NEG1053	163750
5-NEG0889	164262	HEMI-ARMPUTE M (GRØNN)	5-NEG0889HLEN		5-NEG0901	164268	5-NEG0912	164267
5-NEG0919	161660	BUTTERFLYPUTE L (BLÅ)	5-NEG0919HLEN		5-NEG0921	161743	5-NEG0923	163622
5-NEG0890	160604	BUTTERFLYPUTE M (GRØNN)	5-NEG0890HLEN		5-NEG0902	160605	5-NEG0911	164441
5-NEG3006		T-PUTE L (BLÅ)	5-NEG3006HLEN		5-NEG3806		5-NEG3906	
5-NEG3007		T-PUTE M (GRØNN)	5-NEG3007HLEN		5-NEG3807		5-NEG3907	

CAREWAVE | BASISPUTER

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV OG LEVERES UTEN AVTAGBARE TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	DIAMETER
5-NEG0619	149753	BASISPUTE 130 CM	130 CM
5-NEG0990	158617	DARTEX-TREKK MED HÅNDTAK TIL BASISPUTE 130 CM	
5-NEG1474		BOMULLSTREKK TIL BASISPUTE 130 CM	
5-NEG0618	153112	BASISPUTE 110 CM	110 CM
5-NEG0989	158616	DARTEX-TREKK MED HÅNDTAK TIL BASISPUTE 110 CM	
5-NEG1475		BOMULLSTREKK TIL BASISPUTE 110 CM	



CAREWAVE | SPESIALPUTER

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV OG LEVERES UTEN AVTAGBARE TREKK



KILEPUTE

TREKANTPUTE

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
5-NEG1079	175558	FORLENGET TREKANTPUTE	180	35	35	
5-NEG1079HLEN		COMBI-TREKK TIL FORLENGET TREKANTPUTE				
5-NEG1473		DARTEX-TREKK TIL FORLENGET TREKANTPUTE				
5-NEG1080		BOMULLSTREKK TIL FORLENGET TREKANTPUTE				
5-NEG0811	161762	FORLENGET KILEPUTE	95	30	45	
5-NEG0811HLEN		COMBI-TREKK TIL FORLENGET KILEPUTE				
5-NEG0812	175580	DARTEX-TREKK TIL FORLENGET KILEPUTE				
5-NEG1097	164263	BOMULLSTREKK TIL FORLENGET KILEPUTE				
5-NEG1075	170451	STABILEGS	80	70		SETT MED 4 PUTER
5-NEG1740		LÅRPUTE MED FLEKSIBEL HØYDE	90	40	15-35	SETT MED 4 INNLEGG



STABILEGS



LÅRPUTE

CAREWAVE | POS.KIT

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	EVENTUELT
5-NEG0658	153122	POSIJONERINGSKIT L	150	95	MADRASS MED 4 PUTER
5-NEG0620	159961	POSIJONERINGSKIT M	110	95	MADRASS MED 4 PUTER



CAREWAVE | HÆLAVLASTERE

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV OG LEVERES UTEN AVTAGBART TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
5-NEG0616	149146	HÆLBESKYTTER L (BLÅ)	32	25		
5-NEG0885	175136	HÆLBESKYTTER M (GRØNN)	25	20		
5-NEG1641		HÆLBESKYTTER HØY (LANG BLÅ)	40	25		
5-NEG774429	198454	HÆLAVLASTER FITLEG L	58	55	12	
5-NEG1386		BOMULLSTREKK TIL FITLEG L				
5-NEG777398	198457	HÆLAVLASTER FITLEG M	55	40	12	
5-NEG1628		BOMULLSTREKK TIL FITLEG M				
5-NEG774430	198455	HÆLAVLASTER FITLEG EVO	58	55	12	MED ABDUKSJON
5-NEG1385	292767	BOMULLSTREKK TIL FITLEG EVO				
5-NEG777161	198456	HÆLAVLASTER FITLEG NON-SLIP	58	55	12	TO DELER
5-NEG1387		BOMULLSTREKK TIL FITLEG NON-SLIP				



FITLEG



FITLEG EVO



FITLEG NON-SLIP



FITLeG

CAREWAVE | UTPRØV.KIT

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV OG LEVERES UTEN AVTAGBARE TREKK

ART.NR	INNHold I UKITV
5-NEG1056	BAG TIL UKITV
5-NEG0944	UNIVERSALPUTE 2XL
5-NEG0607	TREKANTPUTE L
5-NEG0608	BUEPUTE XXL
5-NEG0610	S-PUTE L
5-NEG0611	SEMI-FOWLERPUTE L
5-NEG0732	HEMI-ARMPUTE L
5-NEG0947	BUEPUTE S
5-NEG0949	NAKKEPUTE BUEFORM L



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	EVENTUELT
5-UKITV	166844	UTPRØVINGSKIT FOR VOKSNE	SETT MED 8 POSISJONERINGSPUTER I EGEN BAG
5-UKITV-COM		COMBI-TREKK UKITV	SETT MED 8 COMBI-TREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR VOKSNE
5-UKITV-INK		DARTEX-TREKK UKITV	SETT MED 8 DARTEX-TREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR VOKSNE
5-UKITV-BOM		BOMULLSTREKK UKITV	SETT MED 8 BOMULLSTREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR VOKSNE
5-UKITB	166843	UTPRØVINGSKIT FOR BARN	SETT MED 9 POSISJONERINGSPUTER I EGEN BAG
5-UKITB-COM	253531	COMBI-TREKK UKITB	SETT MED 9 COMBI-TREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR BARN
5-UKITB-INK		DARTEX-TREKK UKITB	SETT MED 9 DARTEX-TREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR BARN
5-UKITB-BOM		BOMULLSTREKK UKITB	SETT MED 9 BOMULLSTREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR BARN




ART.NR	INNHold I UKITB
5-NEG0891	BAG TIL UKITB
5-NEG0605	UNIVERSALPUTE XL
5-NEG0881	UNIVERSALPUTE M
5-NEG0882	BUEPUTE M
5-NEG0948	BUEPUTE XS
5-NEG0883	S-PUTE M
5-NEG0886	SEMI-FOWLERPUTE M
5-NEG0887	TREKANTPUTE M
5-NEG0888	KILEPUTE M
5-NEG0950	NAKKEPUTE BUEFORM M

CAREWAVE | TILBEHØR

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV




ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	EVT
5-NEG0891	158099	CAREWAVE BAG, GRØNN			STR M
5-NEG0617	149198	CAREWAVE BAG, BLÅ			STR L
5-NEG1056		CAREWAVE BAG TIL UTPRØVINGSKIT FOR VOKSNE, BLÅ			STR XL
5-SIDESTAB	163751	SIDESTABILISERINGSSTØTTE SKUM, TREKANT	200		

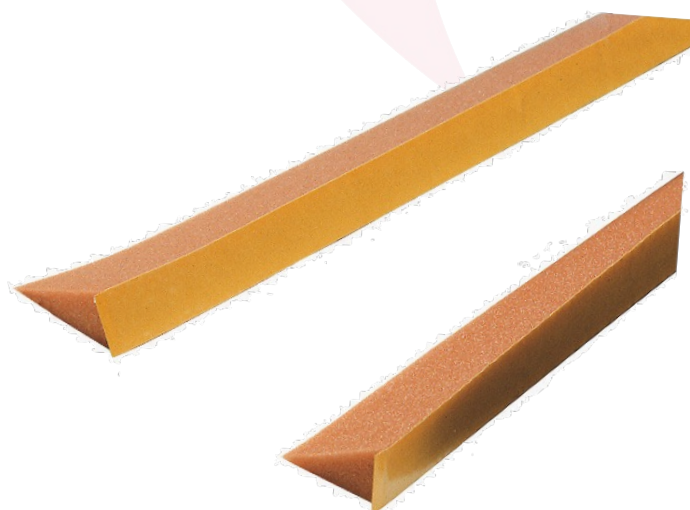

VAKUUM | SITTEPUTER



DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV

BASE

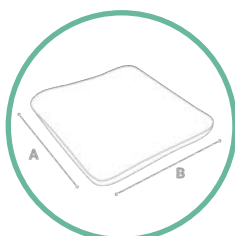


ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990583/V	269795	S	25	38		
5-STAB2990585/V	269797	S+	35	35		
5-STAB2990584/V	269796	M	40	40		
5-STAB2991160/V	202186	M+	45	45		
5-STAB2990586/V	269809	L	50	50		

BASE HILO

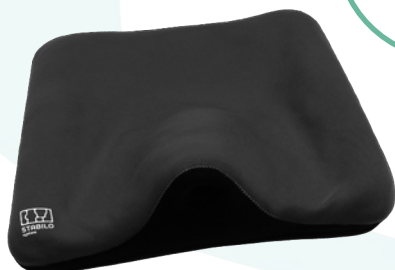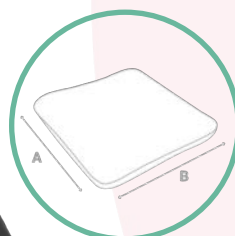

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990776/V		S	25	38		
5-STAB2990777/V		S+	35	35		
5-STAB2990778/V		M	40	40		
5-STAB2990779/V		M+	45	45		
5-STAB2990780/V		L	50	50		


BASE DORO

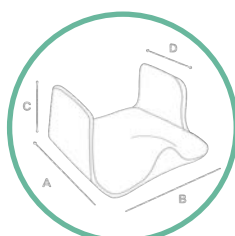

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990798/V		S	25	30	21	14
5-STAB2990799/V		S+	35	35	23	18
5-STAB2990800/V		M	40	40	27	20
5-STAB2990801/V		M+	45	45	30	29


VAKUUM | RYGGPUTER

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV

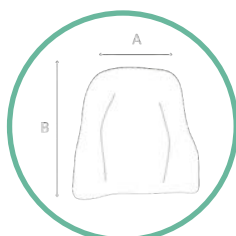

CONFORTABLE

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990587/V	202457	S	52	40		
5-STAB2990588/V	248813	M	56	50		
5-STAB2990589/V		L	70	50		

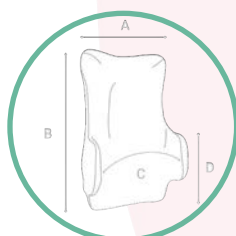


CONFORTABLE PLUS

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2991031/V	215542	S	30	50	58	28
5-STAB2991032/V	269953	M	35	60	65	28
5-STAB2991033/V	206861	L	40	75	75	35
5-STAB2991034/V	257024	XL	45	75	85	35




VAKUUM | HELE SITS

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV

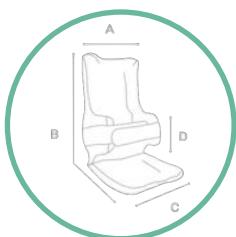


CONFORTABLE PLUS DUO

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2991035/V	213190	S	30	80	58	28
5-STAB2991036/V	192360	M	35	95	65	28
5-STAB2991037/V	209768	L	40	115	75	35
5-STAB2991038/V	213189	XL	45	120	85	35
5-STAB2990795/V		XXL	50	140	95	35

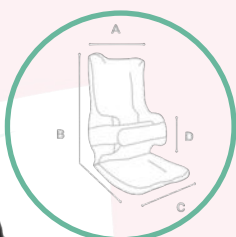

CONFORTABLE PLUS DUO HILO

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990781/V		S	30	80	58	28
5-STAB2990782/V		M	35	95	65	28
5-STAB2990783/V		L	40	115	75	35
5-STAB2990784/V		XL	45	120	85	35
5-STAB2990797/V		XXL	50	140	95	35

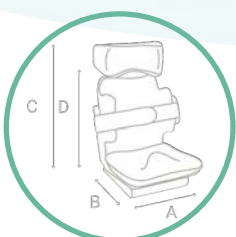


MULTISEAT

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2991296		M	38	35	53-62	49-58
5-STAB2991297		L	42	40	73-82	69-78


VAKUUM | STØTTEPUTER

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV

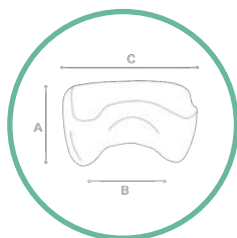


HEADREST

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990618/V	286488	M	15	30	32	
5-STAB2990708/V		L	20	35	42	

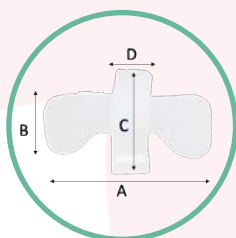

HEADREST WITH METAL PLATE

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990708MP	236404	M	45	16	31	10

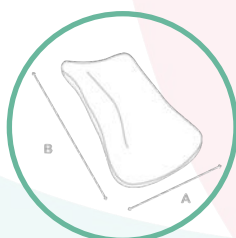


ARMREST

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2991261/V	207054	M	20	30		
5-STAB2991262/V	239751	L	25	45		
5-STAB2990700/V	254816	XL	25	65		




VAKUUM | MADRASS HELSETE

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV

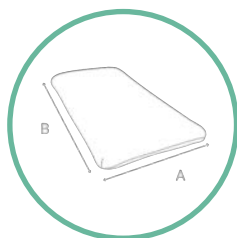

GRANDE

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990872/V	217271	M	70	160		
5-STAB2991163/V	201720	M+	90	200		
5-STAB2990591/V		L	130	200		

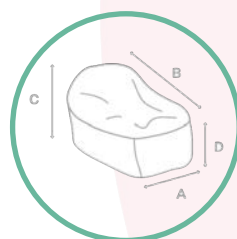


BEANSEAT

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2991281/V	211717	M	60	80	50	40
5-STAB2991282/V	213187	L	70	100	70	50
5-STAB2990796/V		XL	70	100	100	80




VAKUUM | SPESIALPUTER

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV

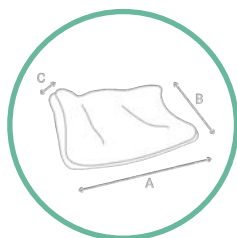


FLAT

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990745/V		M	80	50	6	
5-STAB2990746/V		L	100	50	8	

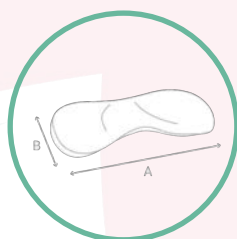

BANANA

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990737/V		S	50	25		
5-STAB2990738/V		M	55	35		
5-STAB2990739/V		L	80	35		

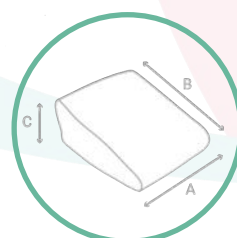


WEDGE

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990611/V		M	40	40	25	
5-STAB2990613/V		L	45	60	40	




VAKUUM | SPESIALPUTER

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV

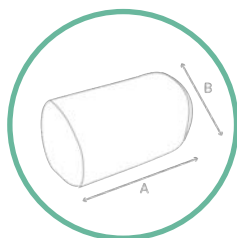

ROLL

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990740/V		S	50	25		
5-STAB2990741/V		M	50	35		
5-STAB2990742/V		M+	80	18		
5-STAB2990743/V		L	80	25		
5-STAB2990744/V		XL	80	35		

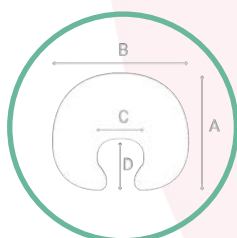


BATH BAGEL

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990755/V		S	30	35	10	12
5-STAB2990754/V		M	35	37	12	17
5-STAB2990768/V		M+	45	55	12	17
5-STAB2990723/V		L	45	60	17	22



VAKUUM | TILBEHØR

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV

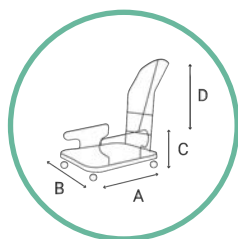

BEANROLLER, VOGN TIL BEANSEAT

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990770		M	80	60	44	66
5-STAB2990769	288291	L	100	70	50	66



SPIDY, TUBESETT

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990804			59	34	43	

VAKUUM | TILBEHØR

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV

STABILISERINGSSHORTS



FESTEBÅND NEOPREN



ELEKTRISK PUMPE



TUBO STØTTESTANG



SPLINT



STABILISERINGSVEST



FESTEBÅND NYLON



MANUELL PUMPE



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	EVT
5-STAB2990641		VAKUUMPUMPE, MANUELL			
5-STAB2990605	201721	VAKUUMPUMPE, ELEKTRISK			
5-STAB2990610		STABILISERINGSVEST TIL VAKUUMPUTER			
5-STAB2991263		SPLINT TIL FESTE AV VAKUUM ARMSTØTTE			
5-STAB2990784		TUBO STØTTESTANG TIL VAKUUMPUTER			
5-STAB2991269/V1		FESTEBÅND NEOPREN (MED VELCRO) TIL VAKUUM-PUTER	130	9	STR M
5-STAB2991269/V2		FESTEBÅND NEOPREN (MED VELCRO) TIL VAKUUM-PUTER	160	9	STR L
5-STAB2991273		FESTEBÅND NYLON (MED VELCRO) TIL VAKUUMPUTER	140	5	
5-STAB2990805		FRIKSJONSMATTE TIL VAKUUMPUTER	25	30	STR S
5-STAB2990806		FRIKSJONSMATTE TIL VAKUUMPUTER	35	35	STR M
5-STAB2990807		FRIKSJONSMATTE TIL VAKUUMPUTER	45	45	STR L
5-NEG2990730		SHORTS TIL STABILISERING AV BEKKEN, FOR VAKUUM-PUTER	40	28	STR M
5-NEG2990731		SHORTS TIL STABILISERING AV BEKKEN, FOR VAKUUM-PUTER	50	35	STR L

MEDCLINE | REFLUXPUTE

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV


MEDCLINE REFLUXPUTER VIL GI PASIENTER MED REFLUX-PROBLEMATIKK EN VESENTLIG FORBEDRET TILVÆRELSE NÅR DE SKAL SOVE.

PRODUKTET KAN OGSÅ BRUKES TIL PASIENTER SOM HAR BEHOV FOR VINKEL I HOFTE, OG PÅ DENNE PUTEN VIL DE HELLER IKKE GLI NED I SENGA.




ART.NR	HMS NR	PRODUKT	EVENTUELT
5-AH-1267-07		MEDCLINE L	SETT MED 2 PUTER
5-AH-1304-07		MEDCLINE M	SETT MED 2 PUTER
5-AH-1247-07		MEDCLINE S	SETT MED 2 PUTER

STØRRELSESANBEFALINGER

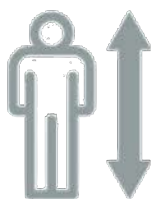


Høyde ca 146-165 cm
Maks vekt ca 80 kg

SMALL

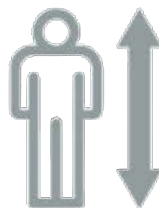

Høyde ca 166-180 cm
Maks vekt ca 102 kg

MEDIUM

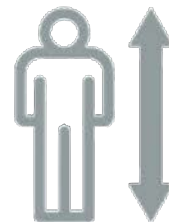

Høyde over 180 cm
Maks vekt ca 120 kg

LARGE


C&S SEATING | UTGÅENDE

DISSE PRODUKTENE ER IKKE PRISFORHANDLET MED NAV



OBS!
DISSE PRODUKTENE
ER UTGÅTT FRA VÅRT
SORTIMENT.

PRODUKTENE TILBYS
INNTIL LAGERHOLDET
ER TOMT.

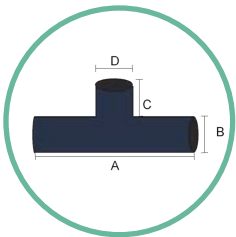

ART.NR	PRODUKT	HMS NR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-3WP	T-PUTE 3WP	149972	71	25	20	20
5-3WP-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 3WP					
5-2WP	T-PUTE 2WP	149971	71	20	20	20
5-2WP-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 2WP	267930				
5-6WP	T-PUTE 6WP	149975	71	20	20	15
5-6WP-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 6WP	217352				
5-1XL	T-PUTE 1XL	213313	71	15	20	15
5-1XL-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 1XL	213314				
5-1WP	T-PUTE 1WP	149970	51	15	15	15
5-1WP-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 1WP	231022				
5-7WP	T-PUTE 7WP	149976	46	10	15	10
5-7WP-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 7WP	265846				
5-APS-S	ADDUKSJONSPUTE S	149730	50	28		
5-APS-L	ADDUKSJONSPUTE L		57	34		



PRODUKTER | RENGJØRING



CAREWAVE-PUTER:

PUTENE KAN VASKES I VASKEMASKIN PÅ 60°C, MEN VÆR OPPMERKSOM PÅ AT TØRKETIDEN KAN TA OPP TIL FLERE DAGER FØR PUTEN OPPNÅR SIN NORMALE KONSISTENS. TØRKETROMMEL PÅ SVAK VARME KAN BENYTTES MEN ANBEFALES IKKE.

GRUNNET DEN LANGE TØRKETIDEN NEVNT OVENFOR ANBEFALER VI AT PUTENE I STEDET FOR VASK TØRKES AV UTENPÅ MED EN FUKTIG KLUT TILSATT ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL. EN ANNEN ÅRSÅK ER AT POLYURETANET I PUTENES TREKK KAN SMELTE I STERK VARME.



CAREWAVE AVTAGBARE PUTETREKK:

COMBI-TREKKET KAN VASKES I VASKEMASKIN PÅ 95°C OG KAN OGSÅ TØRKES I TØRKETROMMEL PÅ LAV VARME. VI ANBEFALER DOG DRYPPTØRKNING SIDEN POLYURETAN KAN SMELTE I STERK VARME.

EVENTUELLE EKSTRA PUTETREKK I BOMULLSFROTTÉ ELLER DARTEX POLYURETAN KAN VASKES I VASKEMASKIN PÅ 60°C (BOMULL) / 95°C (DARTEX POLYURETAN) OG KAN OGSÅ TØRKES I TØRKETROMMEL (DARTEX PÅ LAV VARME). VI ANBEFALER DRYPPTØRKNING FOR DARTEX-TREKKET SIDEN POLYURETAN KAN SMELTE I STERK VARME.



COMBI BOMULL DARTEX DARTEX

VACUSHAPE/STABILO VAKUUMPUTER:

- SKRU PÅ LUFTKORKEN FØR RENHOLD
- VANLIGE VASKEMIDLER KAN BENYTTES, DOG IKKE SYREBASERTE
- VANLIGE DESINFEKSJONSMIDLER KAN BENYTTES
- PUTENE KAN VASKES I VASKEMASKIN PÅ MAKS 60°C
- PUTENE TØRKES VED OPPHENG ELLER MED PAPIR/TEKSTIL. NB! SKAL IKKE TØRKES I TØRKETROMMEL



REFLUXPUTER:

PUTENE MED TREKK KAN VASKES I MASKIN PÅ OPPTIL 30°C. KAN OGSÅ TØRKES I TØRKETROMMEL PÅ LAV VARME.





TOGEMO AS
HALSETSVEA 18
2323 INGERBERG

TLF: 62 52 62 72
E-POST: POST@TOGEMO.NO



PRISFORHANDLEDE PRODUKTER FINNER MAN PÅ
WWW.HJELPEMIDDELDATABASEN.NO



VEILEDNING PÅ VIDEO

WWW.TOGEMO.NO



VEILEDNING POSISJONERING