

Elektriske  
scootere

HEPRO



Mestring- Trygghet - Trivsel  
Se og kjøp våre produkter på [hepro.no](https://hepro.no)

# Friheten til å dra hvor du vil, når du vil

Hepro leverer en rekke elektriske scootere som på hver sin måte bidrar til økt mobilitet for eldre og funksjonsnedsatte. Førerkort er ikke påkrevd da scooterførere regnes som gående i trafikken (les mer om dette på side 8-9). Våre kvalitetsscootere gir deg mulighet til å komme deg ut av huset for å handle, kjøre deg en tur, eller bare for å treffe venner og familie.

Scooterne egner seg først og fremst til ferdsel i ditt nærområde, til daglige gjøremål og til sosial omgang. Flere av modellene kan du også ta med på lengre reiser med tog og fly.



” Det er bare du som setter grenser for din neste destinasjon – Hepros elektriske scootere blir med deg på reisen.

# Innhold



## S17

Den rimelige scooteren med pent og moderne design.

Side 4



## S4

Den kraftige scooteren med god stabilitet, også i ulendt terreng.

Side 5



## S4 med kabin

Scooteren med romslig kabin som beskytter mot vær og vind.

Side 6



## S19+

Den sammenleggbare scooteren du enkelt tar med deg på ferie.

Side 7

# HEPRO S17

## Den eneste korte 4-hjuls scooteren i avtale med NAV

Hepro S17 er en rimelig kvalitetsscooter med et pent og moderne design. Fjæring på alle hjul og styredemper gjør at den er enkel og behagelig å kjøre. Med en kraftig motor gir den god fremkommelighet. S17 har god retningsstabilitet og senker farten ved svingning. Scooteren har en god seteløsning med et mykt og komfortabelt sete med seterotasjon og glideskinne. Ryggputen har også god komfort. LCD- displayet har mange funksjoner som klokke, temperatur, km-måler m.m.

Hepro S17 kan kjøres både med venstre og høyre hånd, og har en enkel og trinnløs innstilling av styret. Med sin korte lengde kommer du deg lett inn i heiser, den er lett å parkere, har meget god svingradius og er eneste scooteren i avtale med NAV som du kan ta med på fly. Hepro S17 har markeringslys på alle sider som slår seg automatisk på når man skrur på tenningen. LED-lysene gir godt kjørellys og den hvite fargen gjør at scooteren er godt synlig i trafikken.

Hepro S17 leveres med kurv, krykkeholder, 2 speil, 2 batterier og lader. For ytterligere tilbehør se side 11-15.



Art.nummer	10108
HMS-nummer	202814
NAV-avtale	Post 3 og 5 Rangering 1 og 3

Mål og vekt	Parameter
Høyde	116 cm
Bredde	67 cm
Lengde	132 cm
Setehøyde	46-56 cm
Setebredde	46 cm
Setedybde	46 cm
Seterygg høyde	56 cm
Bakkeklaring	10 cm
Maks helning	12
Svingradius	132 cm
Maks brukervekt	135 kg
Maks fart	10 km/h (7,5 m/h)
Batteri	12V 50Ah x 2
Motor	700 watt
Kjørelengde	35 km*
Vekt inkl batteri	122 kg

\*Avhengig av tempertur, terreng, brukervekt, batteritype og tilstand: Kaldt vær og motbakker reduserer batteritiden.

# HEPRO S4

En kraftig scooter med god retningsstabilitet og komfort, også i ulendt terreng

Hepro S4 er en elektrisk scooter med et fint og moderne design, beregnet for utendørs bruk. Den har meget gode kjøreegenskaper og god retningsstabilitet. S4 har meget god fjæring, og god benplass, som gir en fantastisk kjørekomfort.

Den kraftige motoren gir veldig god trekraft. Den gode fjæringen i setet og hjulene gir høy komfort over hinder og på ujevne underlag. Scooteren er utstyrt med et sete med høy rygg og faste sideputer, rotasjon og glideskinne. Det brede styret, med trinnløs innstilling, gjør at man bruker lite krefter på å svinge.

LED-lysene gir godt kjørellys som dimmes ned når du stopper. Bremselysene tennes når motoren bremses hastigheten. Scooteren er utstyrt med en LCD-skjerm med mange funksjoner som klokke, km-måler m.m.

Hepro S4 leveres som standard med kurv, krykkeholder, 2 speil, 2 batterier, 2 integrerte USB-ladeutganger og lader. For ytterligere tilbehør se side 11-15.



Art.nummer	10047
HMS-nummer	202812
NAV-avtale	Post 1 og 2 Rangering 3 og 2

Mål og vekt	Parameter
Høyde	142 cm
Bredde	68 cm
Lengde	165 cm
Setehøyde	44-50 cm
Setebredde	58 cm
Setedybde	42 cm
Seterygg høyde	61 cm
Nakkestøtte	19-29 cm
Bakkeklaring	12 cm
Brattest helning dynamisk	10
Bratteste helning statisk	15
Svingradius	220 cm
Maks brukervekt	200 kg
Maks fart	10 km/h (7,5 m/h)
Batteri	Concorde 12V 80Ah x 2
Motor	1400 watt
Kjørelengde	45 km*
Vekt inkl batteri	155 kg

\*Avhengig av temperatur, terreng, brukervekt, batteritype og tilstand: Kaldt vær og motbakker reduserer batteritiden.

# HEPRO S4 MED KABIN

Scooter med romslig kabin hvor du har god sikt og er godt beskyttet mot vær og vind

Hepro S4 med kabin er en elektrisk scooter med overbygg for å skjerme mot vær og vind. Den har et fint og moderne design med store vinduer som gir god oversikt og sikker kjøring. Kabinen har frontvindu i dugg- og ripesikkert polykarbonat. Kabinen er meget romslig og har gripehåndtak som gir god støtte ved inn- og utstigning.

Den kraftige motoren gir veldig god trekkraft. Den gode fjæringen i setet og hjulene gir høy komfort over hinder og på ujevne underlag. Scooteren er utstyrt med et sete med høy rygg og faste sideputer, rotasjon og glideskinne. Det brede styret, med trinnløs innstilling, gjør at man bruker lite krefter på å svinge.

LED-lysene gir godt kjørellys som dimmes ned når du stopper. Bremselysene tennes når motoren bremses hastigheten. Scooteren er utstyrt med en LCD-skjerm med mange funksjoner som klokke, km-måler m.m.

Hepro S4 med kabin leveres som standard med varmeapparat, krykkeholder, 2 utvendige speil, 1 innvendig speil, 2 batterier, batterilader, vareboks bak, vinduspusser, 2 integrerte USB-ladeutganger og spylers. For ytterligere tilbehør se side 11-15.



Art.nummer	10061
HMS-nummer	164820
NAV-avtale	Post 4 Rangering 4

Mål og vekt	Parameter
Høyde	165 cm
Bredde	79 cm
Lengde	165 cm
Setehøyde	50 cm
Setebredde	46 cm
Setedybde	47 cm
Seterygg høyde	53 cm
Nakkestøtte	19-27 cm
Bakkeklaring	12 cm
Bratteste helning dynamisk	10
Bratteste helning statisk	15
Svingradius	220 cm
Maks brukervekt	135 kg
Maks fart	10 km/h (7,5 m/h)
Batteri	Concord 12V 80Ah x2
Motor	1400 watt
Kjørelengde	45 km*
Vekt inkl batteri	212 kg

\*Avhengig av tempertur, terreng, brukervekt, batteritype og tilstand: Kaldt vær og motbakker reduserer batteritiden.

# HEPRO S19+

Den sammenleggbare scooteren du enkelt kan ta med deg på ferie.

Hepro S19+ er en liten og lett sammenleggbar elektrisk scooter. Den har mange finesser og en enkel mekanisme når scooteren skal legges sammen for f.eks transport.

Denne scooteren kan enkelt tas med i bagasjerom på personbil, i bobil, på tog og på fly. Sammen slått kan du trille scooteren med deg som en trillekoffert. Batteriet som veier bare 3,3 kg er svært enkelt å ta ut før sammenlegging og transport.

Hepro S19+ er både enkel å manøvrere, og å legge sammen og sette opp. Armlenene på scooteren kan enkelt slås ned om de ikke er i bruk. Scooteren er utstyrt med LED-lys både foran og bak, og svingsensor som reduserer farten når man svinger. De to forhjulene gir også god stabilitet.



” Jeg kan endelig bli med vennene mine i Operaen, være med på tur i byen og bare ta en vanlig taxi hjem sammen med de andre. Jeg trenger ikke spesial-taxi lenger, jeg putter bare scooteren i bagasjerommet.

- Siri ( 55 )

Art.nummer	10114
HMS-nummer	215110

Mål og vekt	Parameter
Høyde	94,5 cm
Bredde	48,5 cm
Lengde	93 cm
Setebredde	42,5 cm
Bakkeklaring	6 cm
Svingradius	82 cm
Bakkeklaring	6 cm
Maks anbefalt helning	6
Maks brukervekt	115 kg
Maks fart	6,5 km/h
Batteri	24V 14,5 Ah Li-Polymer
Motor	270 Watt
Kjørelengde	20 km*
Vekt inkl batteri	27,3 kg
Sammenlagt størrelse	75cm x 48,5 cm x45 cm

\*Avhengig av temperatur, terreng, brukervekt, batteritype og tilstand: Kaldt vær og motbakker reduserer batteritiden.

# Elektriske scootere i trafikken

NAV har utarbeidet opplæringsheftet "Elektriske rullestoler i trafikken: Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring" som kan være lurt å lese før du tar i bruk et elektrisk kjøretøy fra Hepro.

**Forskrift om kjørende og gående i trafikken § 2, nr. 3, bokstav b, fastsetter at rullestolbrukere anses som gående. Dermed kan rullestolbrukere gjøre som gående; bruke fortau, gang og sykkelvei.**

Alle Hepros scootere faller inn under kravene (lengde, bredde, vekt, fart) til å være rullestol.

## Hvor og hvordan skal du kjøre?

Som bruker av elektrisk rullestol må du rette deg etter de reglene som gjelder for fotgjengere i trafikken. Likevel er reglene så fleksible at de kan fravikes dersom plassforholdene er problematiske eller andre forhold gjør det farlig å følge fotgjenger-reglene. Noen ganger kan det også være mest hensiktsmessig for rullestolbrukere å benytte regler som egentlig er laget for syklister.

### Men:

Det beste er å kjøre rullestolen på fortau eller gangbane. Ikke kjør for langt ut mot fortauskanten. Hvis et hjul eller hjulpar kommer utenfor kanten, kan du risikere å velte. Vis hensyn overfor fotgjengere og vær oppmerksom, slik at du ikke kjører på noen.

**Sykkelfelt** skal brukes dersom det ikke finnes fortau eller gangbane. Hold godt ut til høyre, så du ikke hindrer sykklistene som kjører fortere enn deg. Se deg for dersom du må krysse banen.

## Kjøring på vei

Dersom du ikke har annen mulighet enn å benytte veien, så sier fotgjengerreglene at du må holde deg ytterst til venstre i kjørebane. Dersom det er forbundet med fare å kjøre på venstre side av veien, eller du av andre grunner finner det hensiktsmessig, kan du benytte høyre side av veien.

## Kryssing

I følge vegtrafikkloven skal du først og fremst benytte gangfelt, gangbro eller gangtunnel når du vil krysse veien. Dersom det ikke finnes gangfelt i nærheten, bør du krysse der det er veikryss. Når du kjører rullestolen på veien, bør du planlegge kjøringen på forhånd slik at du unngår å krysse for ofte. Ta dette med i vurderingen når du velger hvilken side av veien du vil kjøre på.



# Skiltene nedenfor forteller hvor du kan kjøre elektriske scootere fra Hepro



Gang- og sykkelvei



Sykkelvei



Gangvei



Sykkelfelt på vei



Gård/gatetun

## Les hele heftet

"Elektriske rullestoler i trafikken: Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring" ved å scanne QR-koden, eller besøk [kunnskapsbanken.net](https://kunnskapsbanken.net)



# Tilbehør

Scooterne fra Hepro kan leveres med en rekke ulike tilbehør.



**HEPRO**

HMS nr.	Artikkel nr.	Tilbehør	Modell
	10715	Bakdekk med grovmønster	S4
	10668	Bakhjul, komplett med grovmønster, høyre	S4
	10902	Bakhjul med brems, komplett med grovmønster, venstre	S4
202818	12852	Fotpedal, gasspedal	S4 / S4 med kabin
164821	11440	Fotplateforhøyer	S17 / S4
202826	11751	Krykkeholder m/ klikklås. For krykker med pigg	S17
202821	12847	Oksygenflaskeholder, monteres på seterygg	S17
007459	10526	Oksygenflaskeholder	S4
	10654	Piggdekk komplett, forhjul	S4
	11712	Pigghjul komplett, venstre bremsetrommel bak	S4
066514	10656	Pigghjul komplett, bakhjul høyre	S4
234528	12132	Pigghjul foran , komplett venstre	S17
234529	12133	Pigghjul bak, komplett venstre	S17
234530	12134	Pigghjul foran, komplett høyre	S17
234531	12135	Pigghjul bak, komplett høyre	S17
022120	10551	Presenning sete	S17
156323	11412	Presenning, top hat	S4 med kabin
80710	10549	Regntrekk, poncho	S17 / S4 / S19+
202822	12848	Rullatorholder	S17
217563	11790	Rullatorholder	S4
164846	11403	Rullatorholder, festes på bakvegg	S4 med kabin
	12834	Sete HW - bredde: 45 cm (standard på S17 )	S4 med kabin
202836	12833	Sete HW - bredde: 50 cm (standard på S4 med kabin)	S4
213011	10811	Sete HW - bredde: 55 cm (standard på S4 )	S17
011605	10753	Setebelte, topunks	S17 / S4 / S4 med kabin
	10130	Trillebag for transport	S19+
202827	12846	Varebag, bak	S17
	10917	Varebag	S17/ S4 / S4 med kabin
234527	12836	Varebag, monteres på seterygg	S19+
202828	12845	Vareboks med monteringskitt	S17
	12396	Vareboks med lås, 42 l. Inkl festebrakett	S4
209686	12397	Vareboks med nøkkellås, 21l. Inkl festebrakett	S4
153125	11345	Vareboks med nøkkellås, 21l Inkl festebrakett	S4 /S4 med kabin
	11351	Vareboks med lås, 42 l	S4
202829	12856	Vareboks i plast	S4
202830	12849	Varekurv bak	S17
232845	12894	Varekurv til seterygg	S4
	12850	Veske til lader, Medico	S17 / S4 / S4 med kabin
	11792	Vindskjerm, sotet. Komplet med feste	S17
	12880	Vindskjerm, sotet. Komplet med feste	S4

# Eksempler på tilbehør



Liten og romslig varebag som festes til seterygg på S19+. Enkel å ta av før sammenlegging av scooteren.

Art. nr: 12836  
HMS-nr: 234527



Vareboks i hardplast med kodelås. Komplet med festebrakett. S4.

Art. nr: 11351



Vareboks i plast. Monteres bak på S17. Leves med nøkler for trygg oppbevaring.

Art. nr: 12845  
HMS-nr: 202828



Stor og praktisk varekurv som monteres bak på S17.

**Art. nr: 12849**  
**HMS-nr: 202830**



Nett varekurv med plass til det du trenger i hverdagen. Monteres på seterygg til S4.

**Art. nr: 12894**  
**HMS-nr: 232845**



Lett og romslig varebag som monteres på seterygg til S17.

**Art. nr: 12846**  
**HMS-nr: 202827**

# Eksempler på tilbehør



Vareboks med lås. Inkl festebrakett.  
S4

Art. nr: 12396



Rullatorholder som passer for alle  
rullatorer. Monteres på seterygg.  
S4

Art. nr: 12848  
HMS-nr: 217563



Rullatorholder.  
Monteres bak på S17

Art. nr: 12848  
HMS-nr: 202822



Oksygenflaskeholder. Monteres på seterygg på S17 og S4.

S17: Art. nr: 12847 HMS-nr: 202821

S4: Art. nr: 10526



Fotplateforhøyer.

Gir bedre fotstøtte til korte brukere.

For S17, S4 og S4 med kabin

Art. nr: 11440

HMS-nr: 164821



Trillebag for enkel transport av

Hepro S19+

Art. nr: 10130

## Mestring Trygghet Trivsel

Se og kjøp våre produkter på [hepro.no](http://hepro.no)

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset dine individuelle behov.



RING OSS GRATIS PÅ

46 74 55 55



MARKED@HEPRO.NO