


## SLIMLINE™ EXTRA MYK SITTEPUTE LUFTIG KOMFORT OG MASKINVASKBAR TRYKKAVLASTNING

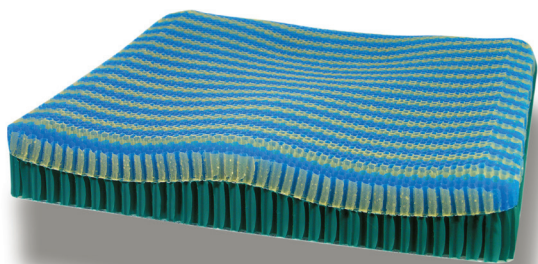

StimuLITE® Slimline™ Ekstra Myk er en trykksårforebyggende pute. Putens tolags cellekonstruksjon former seg etter kroppen og fordeler trykket over et maksimalt område. Konstruksjonen gjør at puten er meget luftig å sitte på. Puten er fremstilt til 100% av en avansert, medisinsk godkjent termoplastisk polyuretan og er naturlig antibakteriell, allergifri og motvirker soppdannelse. Puten veier bare ca. 1 kilo og kan vaskes med 40-60° i maskin og tørkes i tørketrommel på lav varme i vaskeposen som følger med (se separat vaskeanvisning). StimuLITE® Slimline™ Ekstra Myk er fremstilt av fleksible, sammensveidde celler med både myke og faste elementer.

Puten har en sittegrep i bakkant som gir en optimal bekkenstilling og dermed bedre holdning og stabilitet. Sittegrepen består av en mykere del for halebein og seteknuter. Beindelere og lårkiler er innebygd for å gi bedre komfort uten å skape problemer ved sideforflytninger. Trekket er pustende. StimuLITE® putene er punkterings sikre, har ingen ventiler, ingen pumpe, og ingen løse deler. Putens luftvolum eller konsistens endres ikke over tid eller ved skiftende temperatur. Puten leveres alltid komplett utstyrt og krever ingen tilleggskjøp for å oppnå optimal funksjon. StimuLITE®-putene er konstruert med tanke på minimale servicekostnader og vedlikeholdsbehov. Det gir stor trygghet for brukere og rekvirenter, og optimal kontroll med kostnadene.

Putens lårkile kombinert med det forsterkede nedre laget gir god støtte uten å hindre sideforflytning. Cellene i hvert av lagene har en høyde og konstruksjon som gjør at brukeren har god støtte også under selve forflytningen og ikke synker ned og mister stabilitet eller balanse.

Maks. brukervekt 130 kg. Min. brukervekt 25 kg.

### Total Pressure Management™

#### Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår. StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikakstruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.





Puster og fordamp fuktighet



Komplett ventilasjonssystem

#### Trykkavlastning og sidestabilitet


StimuLITE® sitteputen Slimline™ Ekstra Myk består av tre lag med ulik hardhet, og reduserer trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdeler. StimuLITE® sitteputer fordeler trykk fra sete- og lårknuter til mykdeler under lårene, og kan brukes med trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stilling samtidig som den omfordeler trykk.

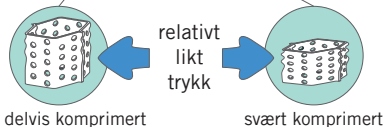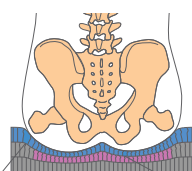

Fordeler trykk etter kroppsforn

#### Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITE®'s bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

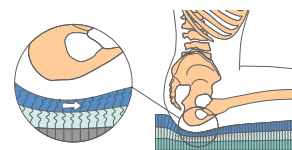

minimal skjærkraft mot venene

Diffus lateral skyvekraft





# STIMULITE®: SLIMLINE™ EKSTRA MYK SITTEPUTE

Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. Rund bunn anbefals for rullestol med hengeløkke dypere enn 2,5 cm.

Størrelse	StimulITE® Slimline™ Ekstra Myk						Pute med avrundet bunn						Passer alla puter	
	Pute med flat bunn			Pute (*)			Ekstra Cordura trekk			Tilbehør: Ull trekk			Ekstra Inkontinlegg	
	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.
b36 d36 h6	SMXS1414	207450	COVSM1414	207729	WCOVSM1414	207637	SMXS1414S	207451	COVSM1414S	207730	WCOVSM1414S	207638	IN1414	207498
b36 d41 h6	SMXS1416	207452	COVSM1416	207731	WCOVSM1416	207639	SMXS1416S	207453	COVSM1416S	207732	WCOVSM1416S	207640	IN1414	207498
b36 d46 h6	SMXS1418	207454	COVSM1418	207733	WCOVSM1418	207641	SMXS1418S	207455	COVSM1418S	207734	WCOVSM1418S	207642	IN1414	207498
b36 d51 h6	SMXS1420	207456	COVSM1420	207735	WCOVSM1420	207643	SMXS1420S	207457	COVSM1420S	207736	WCOVSM1420S	207644	IN1414	207498
b38 d41 h6	SMXS1516	207458	COVSM1516	207737	WCOVSM1516	207645	SMXS1516S	207459	COVSM1516S	207738	WCOVSM1516S	207646	IN1616	207499
b38 d43 h6	SMXS1517	207460	COVSM1517	207739	WCOVSM1517	207647	SMXS1517S	207461	COVSM1517S	207740	WCOVSM1517S	207648	IN1616	207499
b38 d46 h6	SMXS1518	207462	COVSM1518	207741	WCOVSM1518	207649	SMXS1518S	207463	COVSM1518S	207742	WCOVSM1518S	207650	IN1618	207500
b38 d51 h6	SMXS1520	207464	COVSM1520	207743	WCOVSM1520	207651	SMXS1520S	207465	COVSM1520S	207744	WCOVSM1520S	207652	IN1618	207500
b41 d41 h6	SMXS1616	207466	COVSM1616	198341	WCOVSM1616	207653	SMXS1616S	207467	COVSM1616S	207746	WCOVSM1616S	207654	IN1616	207499
b41 d43 h6	SMXS1617	207468	COVSM1617	207747	WCOVSM1617	207655	SMXS1617S	207469	COVSM1617S	207748	WCOVSM1617S	207656	IN1616	207499
b41 d46 h6	SMXS1618	207470	COVSM1618	207749	WCOVSM1618	207657	SMXS1618S	207471	COVSM1618S	207750	WCOVSM1618S	207658	IN1618	207500
b41 d51 h6	SMXS1620	207472	COVSM1620	207751	WCOVSM1620	207659	SMXS1620S	207473	COVSM1620S	207752	WCOVSM1620S	207660	IN1618	207500
b43 d41 h6	SMXS1716	207474	COVSM1716	207753	WCOVSM1716	207661	SMXS1716S	207475	COVSM1716S	207754	WCOVSM1716S	207662	IN1616	207499
b43 d43 h6	SMXS1717	207476	COVSM1717	207755	WCOVSM1717	207663	SMXS1717S	207477	COVSM1717S	207756	WCOVSM1717S	207664	IN1616	207499
b43 d46 h6	SMXS1718	207478	COVSM1718	207757	WCOVSM1718	207665	SMXS1718S	207479	COVSM1718S	207758	WCOVSM1718S	207666	IN1618	207500
b43 d51 h6	SMXS1720	207480	COVSM1720	207759	WCOVSM1720	207667	SMXS1720S	207481	COVSM1720S	207760	WCOVSM1720S	207668	IN1618	207500
b46 d41 h6	SMXS1816	207482	COVSM1816	207761	WCOVSM1816	207669	SMXS1816S	207483	COVSM1816S	207762	WCOVSM1816S	207670	IN1816	207501
b46 d43 h6	SMXS1817	207484	COVSM1817	207763	WCOVSM1817	207671	SMXS1817S	207485	COVSM1817S	207764	WCOVSM1817S	207672	IN1816	207501
b46 d46 h6	SMXS1818	207486	COVSM1818	207765	WCOVSM1818	207673	SMXS1818S	207487	COVSM1818S	207766	WCOVSM1818S	207674	IN1818	207502
b46 d51 h6	SMXS1820	207488	COVSM1820	207767	WCOVSM1820	207675	SMXS1820S	207489	COVSM1820S	207768	WCOVSM1820S	207676	IN1818	207502
b51 d41 h6	SMXS2016	207490	COVSM2016	207769	WCOVSM2016	207677	SMXS2016S	207491	COVSM2016S	207770	WCOVSM2016S	207678	IN1816	207501
b51 d46 h6	SMXS2018	207492	COVSM2018	207771	WCOVSM2018	207679	SMXS2018S	207493	COVSM2018S	207772	WCOVSM2018S	207680	IN1818	207502
b51 d51 h6	SMXS2020	207494	COVSM2020	207773	WCOVSM2020	207681	SMXS2020S	207495	COVSM2020S	207774	WCOVSM2020S	207682	IN2020	207503

(\*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinlegg og en vaskepåse

Tilbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilistøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5L (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vanntett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207541)



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S  
Postboks 157 1378 Nesbru  
Tel: 48 50 32 97  
email: ordre@rehabshop.com  
www.rehabshop.as

Alle StimuLITE sitteputer er  
branntestet og godkjent i henhold til  
ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006,  
NS-EN 597:2015 og CE-merket.



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.