

Nima EquaGel Allround

Bruksområder for Nima EquaGel Allround

Nima EquaGel Allround er en sikker og god sittepute med fremragende trykksårforebyggende egenskaper. Den kan med fordel brukes av personer som er i risikozonen for å utvikle trykksår, er smerteutsatt eller som behøver et ekstra mykt, behagelig og luftig sitteunderlag. Sitteputen er også god å ha hvis brukeren ikke er under kontinuerlig oppsikt, da man slipper å tenke på om puten for eksempel har for lite luft på grunn av feilinnstilling eller lekkasje.

Puten er lett å rengjøre, og kan derfor benyttes av pasienter som er inkontinente og samtidig har behov for en luftig pute.

1 Nima EquaGel Allround gir **svært lavt mottrykk** mot korsbeinet, da de myke cellene kollapser og gir etter. Dette gir puten svært gode trykkreduserende egenskaper (trykkavlastende og trykkfordelende) og gjør put svært god å sitte på.

2 Nima EquaGel Allround **minimerer forskyvning og friksjon** da den beveger seg sidelengs. Selve puten beveger seg sidelengs ved små hverdagslige bevegelser, istedenfor å skape skyvekrefte som gir hudrulling hos brukeren. Dette kan testes ved å bevege seg sidelengs når man sitter på puten.


3 Puten har **særdeles bra mikroklimate**. Den puster sannsynligvis bedre enn noen annen sittepute på markedet siden den er åpen og man kan se tvers gjennom den.

4 Nima EquaGel Allround er en **særdeles brukervennlig**, tidsbesparende og sikker pute da det er nesten umulig å gjøre noe feil med den. Den må ikke innstilles, den har ingen løse deler og den kan ikke lekke hverken luft eller gele.

5 Den er **svært enkel å rengjøre** – den skal bare skylles av, og lufttørker hurtig. Dette gjør den til et godt alternativ som dusjpute om man tar av trekket. Det gjør den også til en pute som egner seg godt for bruk ved risiko for inkontinens, i kombinasjon med et luftig trekk. Skulle det skje et uhell, kan trekket vaskes i maski mens puten skylles av i f.eks. dusjen.

Det kan være formålstjenlig å teste puten med og uten treplaten. Det er høyst subjektivt om man foretrekker puten med eller uten plate, og ingen av delene er riktig eller feil, men puten kjennes helt annerledes når den brukes med platen.

Vi håper at disse putene møter alle dine sitteputebehov. De er laget med et helt nytt gelemateriale som er formstabil nok til å holde fasongen. Dermed er det mulig å skape en "vokskakestruktur" med åpne celler i et mykt og føyelig materiale, noe som gir puten egenskaper ingen andre puter på markedet kan etterligne.

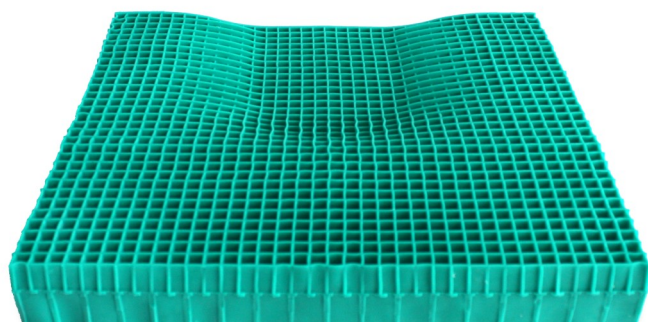

Nima EquaGel Allround



Trykkfordelende / trykkavlastende sittepute i gele materiale for de som må sitte lenge i rullestol. Profilert sittegrep i komfortlaget. Høyde 8 cm

EquaGel er en tørr polymergele som kjennes nesten gummilignende ved berøring. Den viktigste funksjonen er måten cellene samarbeider på. Hver cellevegg kan bare ta en lett belastning, og når denne terskelen overskrides fordeles belastningen til de omkringliggende celleveggene slik at støtten for brukerens vekt fordeles så jevnt som mulig over puten.

Hver EquaGel-modell har en totrinns cellestruktur. Den øvre delen av puten består av et smårutet gelenettverk som er ekstra trykkfølsomt. Dette laget kalles komfortlaget. De kroppsdelenene som trenger støtte synker gjennom dette laget og ned i laget under, som kalles støttelaget.

Kombinasjonen av putens myke gele og strukturelle oppbygning gir et svært bekvemt sitteunderlag. Siden puten har helt åpne celler, gir den også brukeren et utrolig godt mikroklima. Kombinasjonen av det myke materialet og de gode pusteegenskapene gir puten svært effektive trykksårforebyggende egenskaper. **Utjevningsplate leveres med puten**

Fakta

Materialspesifikasjon

Base i gelestruktur med to lag.
Overtrekk i brannsikret polyester

Rengjøring

Puten kan overflatedesinfiseres med vaskemidlene som er oppført på etiketten, men den kan ikke vaskes i maskin. Puten skal lufttørkes.

Putetrekke vaskes i maskin på 60 grader og kan tørkes i trommel.

Vekt

0,8-4,5 kg avhengig av størrelse

Brukerinformasjon: Puten er klar for bruk. Ta den ut av emballasjen og legg den i rullestolen i henhold til merkene på puten (frem, bak, opp, ned).

Størrelser

Finnes i sittebredder fra 27 cm til 55 cm, størrelser over ca. 50 cm bygges ut med gel

CE-merket

Brukervekt

Maks 150 kg

Tilbehør

- Luftgjennomtrengelig standardtrekk
- Inkontinensbeskyttende trekk
- Hygienetrekk
- Utjevningsplate (gratis tilbehør)