

Storm Thermosåler



Storm Thermosåler er en innleggssåle for sko og støvler. Den har et innstøpt varmeelement plassert i sålens nest fremre del. Under hælen finnes et oppladbart Li-ion batteri som går fra kant til kant. Du kjenner derfor ikke batteriets ytterkanter når du trækker foten mot sålen. Med disse sålene har du fått et oppladbart velværeprodukt som kan gi deg en bedre hverdag.

Storm Thermosåler leveres i to størrelser, 35 – 40 og 41 – 46. Du tilpasser selv sålene til din aktuelle skostørrelse ved å klippe dem til etter skoens innersåle. På sålenes underside er det angitt klippesoner. Du må ikke klippe innenfor den innerste klippesonen.

Alle delene i denne pakken er testet av

Batteriene er ferdig oppladet og klart til bruk. Du aktiverer varmeelementet ved å trykke på fjernkontrollens startknapper I – II - III. Ønsker du å endre varmetilførselen, så varierer du effektuttaket mellom disse tre nivåene, eller du slår varmen helt av ved å trykke på fjernkontrollens «Av-knapp». På I lyser en ledlampe i sålens bakkant **grønt**. På II lyser den **oransje** og på III klart **rødt**.

Batteriet lades ved å sette laderen i en stikkontakt, 220 V og så kobler du ladeledningens USB-plugg til laderen. Du kan like gjerne plugge inn ladeledningens USB i solsellepanelets, bilens, eller pc'ens motsvarende USB, og sålene vil lades. På ladeledningens motsatte ende finnes to pluggere som passer inn i pluggene på hver såle. Plugg de inn, og du ser en ledlampe tennes i sålens bakkant. Hvis sålene blir varme under lading, så kobler du de fra, holder den sorte rektangulære bryterknappen inn til lyset slukker. Så plugger du inn laderen på nytt og fortsetter ladingen. Den lyser **rødt** under ladingen. Når batteriet er fulladet så endres lyset til **grønt**. Dersom det er mer enn to måneder siden forrige lading, så skal sålene lades i 24 timer uten opphold.

I sålenes batteri sitter en liten datachip. Det forekommer i alle innretninger som benytter datachip, at denne ikke alltid fungerer slik den skal. Da må man restarte (boote). Slik er det her også. For å boote, så holder du den rektangulære startknappen nede i 2-3 sekunder. Den røde lampen aktiveres og sålene begynner å varmes. Deretter trykker du på fjernkontrollens knapper I, II, og III, og du ser nå om lampen endrer farge. Trykk deretter på fjernkontrollens «Av-knapp».

Advarsel!

Dersom du ikke har så god førlighet i huden i fot og tær slik at du ikke kjenner forskjell på varmt og kaldt, da bør du ikke bruke oppladbart varmeplagg. Dersom du er i tvil, så anbefales du å kontakte din fastlege.

Vi håper at du blir fornøyd med Storm Thermosåler og at du vil anbefale dem til andre. Har du lyst, så skriv en kommentar på vår Facebook side, www.facebook.com/varmeplagg.



www.varmeplagg.no
www.facebook.com/varmeplagg
post@varmeplagg.no
Stille Storm AS, Pb 37 Ullern, 0381 Oslo