



Immedia OneWayGlide

FOR ENKEL REPOSISJONERING I STOL

Immedia OneWayGlide er en glidematte som har lav friksjon i en retning og bremses i motsatt retning. Den er egnet for brukere som ofte trenger reposisjonering bakover i stolen for å oppnå en god sittestilling. OneWayGlide gjør det enkelt å utføre en selvstendig forflytning eller med assistanse av en hjelper.

Immedia OneWayGlide leveres i følgende versjoner: Immedia OneWayGlide Anti-skli, Immedia OneWayGlide velour, Immedia OneWayGlide pad.

Immedia OneWayGlide Anti-skli er en tubeformet glidematte med et sklisikkert yttermateriale. Den kan kombineres med et bomullstrekk ved behov.

Immedia OneWayGlide velour er en tubeformet glidematte med velour overflate, som er mer behagelig å sitte på. Den fungerer kun i stoler med tekstiltrekk som gir friksjon i kombinasjon med velourmaterialet.

Immedia OneWayGlide pad er en åpen glidematte som egner seg til bruk direkte på rullestolen uten bruk av pute.

**ANBEFALT
BRUK!**



1. Immedia OneWayGlide letter reposisjonering når brukeren glir fremover i stolen.



2. For å komme bakover i rullestolen må brukeren lene seg fremover, holde i armlenet og presse mot ryggen med armene og - hvis mulig, beina.



3. Når brukeren sitter oppreist igjen, vil den unike utformingen av Immedia OneWayGlide hindre brukeren i å gli fremover i stolen igjen.



Plasser OneWayGlide i stolen rett i forkant av setet

TIPS!

Hvis en bruker glir fremover, kan det være på grunn av en dårlig tilpasset rullestol. Gjør alltid en grundig vurdering av sitteeheten før bruk av Immedia OneWayGlide.



*Immedia OneWayGlide
anti-skli glidematte.*



*Immedia OneWayGlide
velour glidematte.*



*Immedia
OneWayGlide
pad velour.*

OneWayGlide Long

Immedia OneWayGlide Long er en åpen lang glidematte med håndtak og velour overflate. Lengden gjør det mulig å hjelpe brukeren til forflytning bakover i stolen.

Håndtakene gir et godt grep, slik at hjelperen kan oppnå en god arbeidsteknikk.

Finnes i to alternativer; med eller uten knytebånd. Knytebånd brukes til å feste produktet i rullestolen ved behov.



*Immedia OneWayGlide Long med
håndtak og knytebånd.*



BRUKSOMRÅDE

- Posisjonering i stol/rullestol/lenestol

BESKRIVELSE	B X L	HMS NR.	ART. NR.	SPESIFIKASJONER
Immedia OneWayGlide	CM			TOPP: Antiskli POLSTRING: Polyester
~ Tubeformet anti-skli	43 x 37	170608	IM39/8	INNSIDE: Nylon
~ Tubeformet anti-skli	45 x 45		IM38/8	POLSTRING: Polyester
~ Tubeformet anti-skli	60 x 80		IM37/8	ONEWAY MATERIALE: Polyester
~ Tubeformet velour	43 x 37		IM45/8	
~ Tubeformet velour	50 x 42	164179	IM50/8	
~ Velour	43 x 37		IM44/8	Velour modell
~ Long	30 x 130		IM30/8	TOPP: Polyester, Nylon
~ Long, velour, bånd	40 x 130		IM33/8	
~ Long	40 x 130	164180	IM34/8	
~ Long	45 x 130		IM51/8	
~ Long	55 x 130		IM35/8	
Immedia				
~ Trekk til IM39/8	45 x 39		IM391	
~ Trekk til IM38/8	47 x 47		IM381	

VASKEANVISNING

Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

