



Immedia 2Move

FORFLYTNINGSBRETT FOR LIGGENDE FORFLYTNING

Immedia 2Move forflytningsbrett blir brukt til å bygge bro over åpninger og jevne ut høydeforskjellen mellom to vannrette flater. Den brukes ved liggende forflytning mellom senger, seng og dusjvogn, seng til røntgenbord, bære til seng, osv. Den er enkel å transportere og oppbevare.

Immedia 2Move forflytningsbrett inkl. nylon trekk.



Finnes i to lengder og bredder

2Move forflytningsbrett finnes i to lengder: 90cm og 180cm. Den lange modellen kommer i tre utgaver: Smal sammenleggbar (50cm), smal ikke sammenleggbar (50cm) og bred sammenleggbar (70cm).

Det brede sammenleggbare brettet er egnet når avstanden mellom liggeflatene er noe større.

Lavfriksjons trekk

Immedia 2Move brukes alltid i kombinasjon med et lavfriksjons trekk som glir rundt på platen, dette minimerer friksjonen og forenkler forflytningen. Fire forskjellige typer trekk er tilgjengelig.



Engangstrekk på rull.




Med Immedia 2Move er forflytning mellom to liggeflater trygt og behagelig for pleier og bruker.


**ANBEFALT
BRUK!**



1. Plasser Immedia 2Move under halvparten av pasientens kropp. Plasser hodet og føttene til pasienten på Immedia 2Move.

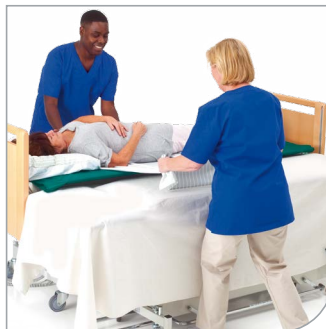


2. Plasserer båren så nær sengen som mulig. En pleier vipper og skyver pasienten mot Immedia 2Move. En annen pleier trekker pasienten mot båren.

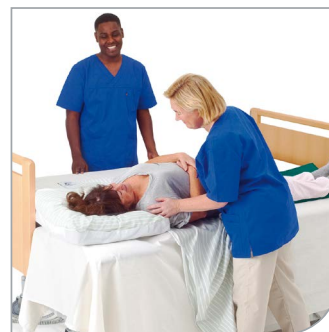

3. Når forflytningen er fullført, fjernes 2Move platen.

TIPS!

Bruk et laken eller en stikkilaken mellom Immedia 2Move og pasienten for å redusere friksjonen ytterligere og gi hjelperne bedre arbeidsbetingelser.

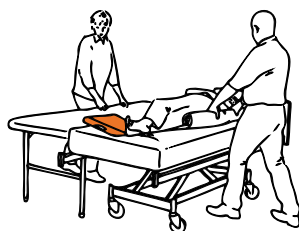

BRUKSOMRÅDE

- Bygger bro ved forflytninger mellom to liggende flater
- Forflytning mellom senger
- Forflytning mellom seng og dusjvogn
- Forflytning mellom seng og bære, røntgenbord, operasjonsbord

BESKRIVELSE	BREDDX LENGDE	ART. NR.	SPESIFIKASJONER
Immedia 2Move forflytningsbrett	CM		2Move, forflytningsbrett
~ Small	50 x 90	IM8050090	TOPP: Nylon
~ Large sammenleggbar	50 x 180	IM8050180	INSIDE: Plywood
~ Large ikke-sammenleggbar	50 x 180	IM8150180	HÅNDTAK: Polyester
~ X-Large sammenleggbar	70 x 180	IM8070180	2Move, trekk
Trekk - Immedia 2Move			MATERIALE: Nylon
~ Nylontrekk til IM8050090	50 x 90	IM4043	2Move, engangstrekk
~ Nylontrekk, vanntett, til IM8050090	50 x 90	IM4045	MATERIALE: Polyetylen
~ Engangstrekk til IM8050090, rull - 150 stk	60 x 100	IM4031	
~ Nylontrekk til IM8050180 og IM8150180	50 x 180	IM4042	
~ Nylontrekk, vanntett, til IM8050180 og IM8150180	50 x 180	IM4044	
~ Engangstrekk til-IM8050180 og IM8150180, rull - 75 stk	60 x 200	IM4030	
~ Nylontrekk, vanntett, til IM8070180	70 x 180	IM4046	
Immedia TransferMattress	60 x 195	IM60/195	
~ mykt polstringstrekk til IM8050180 + IM8150180	60 x 195	IM60/195	
Sett - Immedia 2Move			
~ Large Std sett - inkludert IM8050180 + IM4044	Se over	IM4307	
~ Small Std sett - inkludert IM8050090 + IM4045	Se over	IM4308	
VASKEANVISNING			
FORFLYTNINGSBRETT: Kan tørkes av med desinfeksjonsmiddel.			
NYLONTREKK: Vaskes som anbefalt. Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.			

