




Immedia 4WayGlide System

ET FORFLYTNINGSSYSTEM FOR BRUKERE MED BEGRENSET ELLER INGEN MOBILITET

Immedia 4WayGlide er et forflytningssystem som er integrert i sengen og dermed enkelt og effektivt å anvende. 4way Glide er utviklet til bruk på svært immobile pasienter og pasienter med smerte- og/eller trykksårproblematikk.

Systemet består av et glidelaken som festes til sengen og en overmadrass. Kombinasjonen av nylonlakenets og overmadrassens lave friksjon, gjør posisjonering, vending og forflytning i alle 4 retninger meget enkelt for pleiepersonalet. Vending kan gjøres enten manuelt eller med bruk av personløfter.

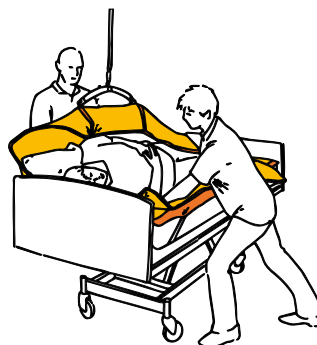

Overmadrassen til 4WayGlide er utstyrt med håndtak som kan festes til en løfter for å snu tunge eller passive pasienter.

BRUKSOMRÅDE

- Brukere med svært redusert mobilitet
- Tunge brukere, brukere med smerter og/eller trykksår
- Vending
- Posisjonering
- Hjelp ved liggende forflytning mellom to horisontale flater
- Kan brukes sammen med personløfter


Lås På Laken (LPL)

En stor utfordring med et forflytningssystem som integreres i sengen, er å hindre at pasienten sklir ned i sengen, spesielt når ryggdelen heves. Med den unike LPL funksjon på Immedia 4WayGlide, hindres pasienten i å skli ned i sengen, ved at lavfriksjonsmaterialet rundt setet enkelt kan fjernes. Videre kan det enkelt re plasseres slik at brukeren igjen kan posisjoneres, vendes og forflyttes


ANBEFALT BRUK!



1. Med det unike LPL System kan lavfriksjonsmaterialet fjernes og gjøre det mulig for pasienten å sitte komfortabelt uten å skli ned.

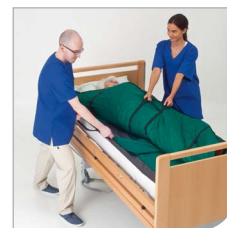

2. Når pasienten skal posisjoneres, vendes eller forflyttes, deaktiveres LPL funksjonen slik at pasienten igjen har lav friksjon under setet.

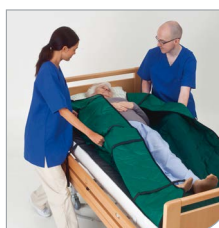

3. Immedia 4WayGlide System kan nå brukes til f.eks. å repositionere pasienten høyere opp i seng.



4. Sideveis repositionering er også lett å gjennomføre med en eller to pleiere.

TIPS!

Ved å bibeholde Lav-friksjonsmaterialet under brukerens rygg når LPL funksjonen aktiveres under setet, kan brukeren fritt bevege overkroppen, slik at skyvekrefter unngås og trykksår forebygges!

Alternativer for 4WayGlide System


4WayGlide System består av to deler: Et nylonlaken og en overmadrass. Nylonlakenet er festet til madrassen og over madrassen er plassert på nylonlakenet



Immedia
4WayGlide

Standard konfigurasjon av 4 WayGlide System

Standard nylonlakenet har en unik Lås På Laken funksjon og sklisikkert materiale langs sengekanten.

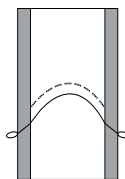


IM85/200LPLNS, 1 lås



IM140/200LPL


Standard overmadrass har en bomull/ polyester overside. Håndtak på innsiden gir bedre grep og kan festes til en løfter.

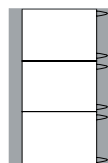

IM85/2003LPLNS
3 låser

Alternativ nylonlaken

For større fleksibilitet har dette Nylon lakenet en Lås På Laken funksjon på tre steder. Det har også sklisikkert materiale langs sengekanten.

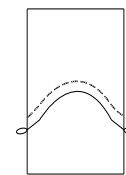

IM85/200LPL

Immedia TwinSheet overmadrass har en integrert inkontinensoverflate. Håndtakene på innsiden gir bedre grep og kan festes til en løfter. Overmadrassen er todelt for å forenkle den personlige hygiene.

(Se ytterligere detaljer på s. 14)



IM140/200LPLG

Alternativ overmadrass

Overmadrassen har en polyuretan overside. Håndtakene på innsiden gir bedre grep og kan festes til en løfter. Overflaten kan tørkes ren.



IM4315

BESKRIVELSE	B X L X H	HMS NR.	ART. NR.	SPESIFIKASJONER
IMMEDIA 4WAYGLIDE LPL	CM			OVERMADRASS, LPL OG MAXI
~ Overmadrass, bomull/polyester	140 x 200	164211	IM140/200LPL	TOPP: Polyester/bomull eller polyuretan
~ Overmadrass, polyuretan	140 x 200		IM140/200LPLG	INNSIDE: Polyester, nettforsterkning (kun Maxi)
~ Nylonlaken med NS-lås	85 x 200		IM85/200LPL	UNDERSIDE: Nylon, antistatisk behandlet
~ Nylonlaken - 3xNS-lås og NS-sider	85 x 200		IM85/2003LPL	HÅNDTAK: Polyester
IMMEDIA 4WAYGLIDE LPL MAXI				POLSTRING: Polyester
~ Glidemadrass, bomull/polyester	180 x 210		IM180/200LPL	NYLONLAKEN: Nylon
~ Glidemadrass, polyuretan	180 x 200		IM180/200GLPL	LÅS: Nylon med PU-belegg
~ Nylonlaken - NS-lås og NS-sider	110 x 200		IM110/200LPLNS	
TILBEHØR – POSITIONING WEDGE				
~ Med sklisikkert trekk	30 x 20 x 53	170036	IM53NS	
~ Med sklisikkert trekk	30 x 20 x 80	173420	IM53/80NS	
~ Trekk PU/bomull, hvit	140 x 220		IM140/200PU	
SETT – IMMEDIA 4WAYGLIDE LPL				
~ Standardsett – inkludert IM140/200LPL + IM85/200LPLNS		164212	IM4309	
~ 3-Lås-sett – inkludert IM140/200LPL + IM85/2003LPLNS			IM4300	
VASKEINSTRUKSJONER				
<p>Kan tørkes av med desinfeksjonsmiddel (polyuretan topp).</p> <p>Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.</p>				