

TURNISOFT OBA



Automatisk repositioneringssystem
– For effektiv trykksårforebygging og
-behandling.



**Enkel
Intelligent
Effektiv**

Enkel å håndtere

- Takket være automatisk repositionering blir det mindre fysisk påkjenning for pleiepersonell.
- En pasients vektklasse kan enkelt justeres og tilpasses.
- Brukervennlig.
- Passer til alle pleiesenger.
- Kan brukes på trykksår i alle grader (1-4).
- Pleiefunksjon gjør det enkelt for pleiepersonell å utføre stell i seng.


Perfekt sengehygiene


- Inkontinensbeskyttelse rundt hele systemet.
- Overflaten er desinfiserbar og vaskbar.
- Trekk med glidelås kan tas av og vaskes i opp til 95 °C.
- HOSPICLEAN ANTI MRSA Beskyttelse – permanent – test JIS Z2801
- Flammehemmende 12952

Den beste

trykksårforebyggingen

- Fullt automatisk 30° repositionering.
- Myk overflate.
- Våkner ikke av unødvendige repositioneringsaktiviteter
- Meget stillegående motor.
- Hyppig aktiv pasientbevegelse.
- Aktiv stimulering.

Inntrykksbestandighet	Supermyk
Dimensjoner	90 x 200 cm
Høyde	25 cm
Trekk	Obatex Hospiclean Anti MRSA med glidelås
Vask	Overflatedesinfiserbar og vaskbar 95°C
Garanti	Kjerne 5 år, trekk 2 år.
Swiss made 	EN ISO 9001/2000

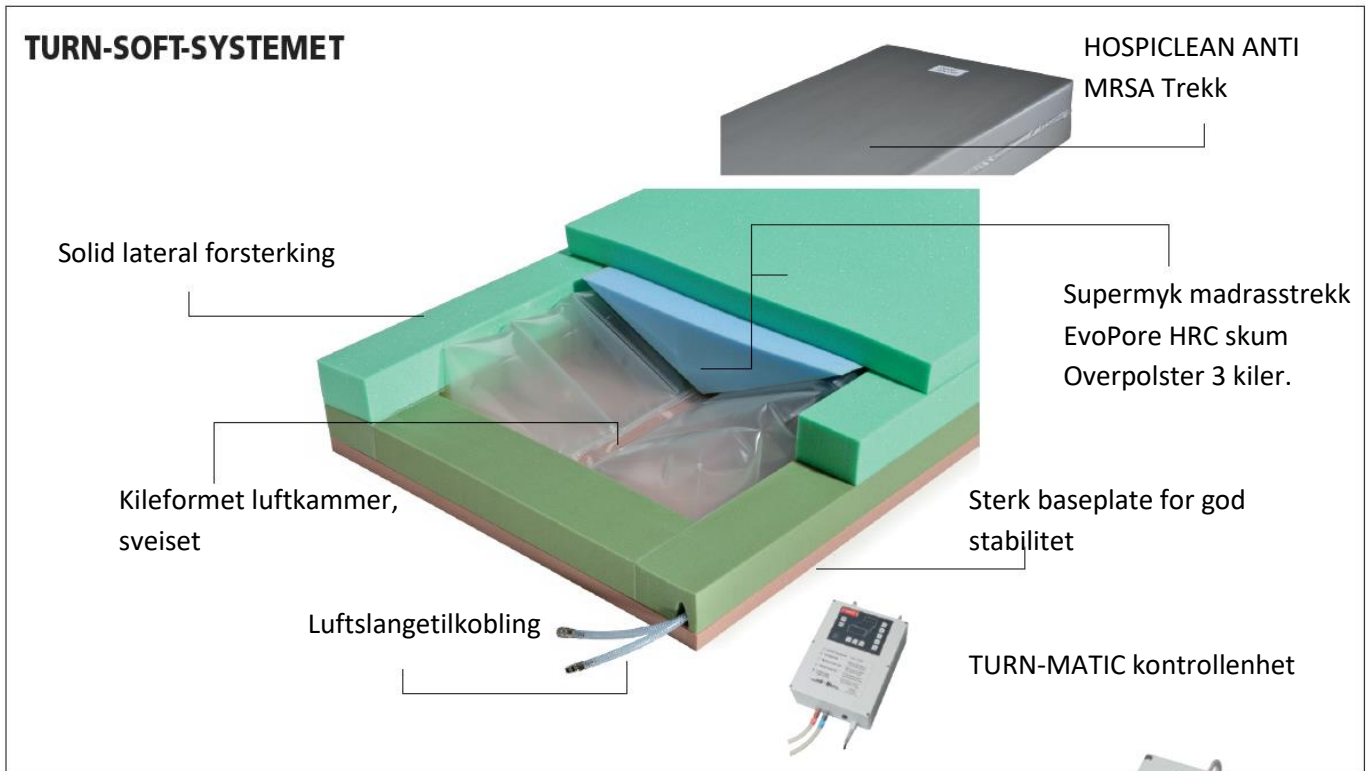

Automatisk trykkavlastning med klinisk testede og godkjente programmer.
Med feilindikator og pleiefunksjon.

Turn-Matic program

Program 1

Liggende, og pleieposisjon

Program 2

Automatisk forebyggingsprogram: 30° til venstre i ca. 30 min., liggende posisjon i ca. 30 min., 30° til høyre i ca. 30 min. Repeterer syklusen.

Program 3

Automatisk behandlingsprogram for sår på venstre side: liggende posisjon i ca. 30 min., 30° til høyre i ca. 30 min. Repeterer syklusen. Ingen trykk på såret.

Program 4

Automatisk behandlingsprogram for sår på høyre side: liggende posisjon i ca. 30 min., 30° til venstre i ca. 30 min. Repeterer syklusen. Ingen trykk på såret.

Program 5

Automatisk behandlingsprogram for sår på hæl/sete: 30° til høyre i ca. 30 min., 30° til venstre i ca. 30 min. Repeterer syklusen.

