



Etac Cross 5 XL

For økt sittekomfort og bedre
kjøreegenskaper

 **etac**[®]

Etac Cross 5 XL

Etac Cross rullestoler kombinerer topp komfort med optimal funksjonalitet.

Bredere seter og høyere brukervekt

Etac Cross 5 XL har samme kvaliteter og egenskaper som en Cross 5. For å takle en tøff belastning, er ryggstøtten forsterket med et fellbart tverrstag. Cross 5 XL finnes i setebredder opp til 60 cm, og maksimal brukervekt er 160 kg.

Den har samme innstillingsmuligheter og store tilbehørsprogram som Cross 5 rullestol. Den kan også leveres med ledsagerbrems.



Cross 5 XL vist som standard

Detaljer



3A rygg

Nå enda mer intuitiv innstilling. Ryggstøtten har alle muligheter for å gjøre en nøy innstilling, og stolen tilpasses med brukeren sittende i stolen. Ryggen vinkeljusteres (i hoften og lumbalt), og høydejusteres trinnløst for en optimal sittestilling.



36 + 2 drivhjulsposisjoner

Små innstillingsintervaller (1,25cm) gir optimal innstilling av setehøyde samt tyngdepunktets plassering.



Høyere brukervekt, krysset

Krysset er forsterket og tåler opp til 160 kg brukervekt. Leveres også med tverrstag på rygg og forsterkede gafler.



Ekstra lav setehøyde

Med 20" drivhjul montert i øverste drivhjulsposisjon oppnås en setehøyde på 34 cm.

Cross 5XL som standard

Ramme	Støpt aluminium, sammenleggbare med doble kryss
Farge	Sort
Ryggstøtte	3A-rygg, høyde- og vinkelregulerbar 35-45 cm
Tverrstag rygg	Gir ekstra stabilitet
Kjørehåndtak	Høyderegerbare og avtagbare
Velcroygg	35-45 cm
Ryggtrekk	Airmesh. Avtagbart og vaskbart på 60°
Ryggvinkel	Regulerbar, -5° - + 20° (std +2° ryggvinkel og 7° lumbalvinkel)
Setetrekk	Dybderegulerbart
Setepute	Skum med velourtrekk
Seteforlenger bak	Montert bak setetrekk
Setehøyde bak	47 cm
Setehøyde foran	49 cm
Armstøtter	Høyderegerbare med langt polster, 38 cm, inkl. klesbeskytter
Benstøtter	Åpen vinkel, sort
Fotplater	Delte, oppfellbare, vinkel- og dybderegulerbare
Brems	Med vinklet rødt håndtak
Drivhjul	24" C5 med QuickRelease
Dekk	Massive
Drivringer	Aluminium
Camber	2°
Drivhjulsinnfesting	D4
Svinghjul	6,5", massive
Gaffel	Medium forsterket, med stålaksling
Gaffelhusfeste	Standard. Høyde- og vinkeljusterbar
Tippesikring	Oppfellbar, teleskop, 2 stk.



38 mulige drivhjulsposisjoner gjør det mulig å justere setehøyden fra 34 til 53 cm. Mindre avstand mellom trinnene i hjulinnstillingene - både horisontalt og vertikalt, sikrer perfekt balanse og fremdrift.

Cross 5XL funksjoner og detaljer

Velcroygg

Med overdrag i pustende AirMesh

AirMesh pustende ryggtrekk

Behagelig og pustende ryggtrekk.

Stort spenn i setehøyder

Lav setehøyde for de som har behov for å sparke seg fram. Fra 34-53 cm.

Seteforlenger – integrert

Integrering av beslag for forlengelse av sete og bakre transportfeste.

Dobbeltkryss for høyere brukervekt

Forsterket rammekryss som tåler en brukervekt opptil 160 kg

Balansepunkt

Stort spenn i drivhjuls plassering for å sikre optimalt balansepunkt.

Tippesikring for alle setehøyder

Oppfellbar tippesikring tilpasses enkelt alle hjulposisjoner og setehøyder.





Cross 5XL	Artikkelnr.	HMS nr.	Total bredde	Setedybde fra ryggstøtterør*	Vekt med drivhjul
47.5 cm kort	13126111	221405	68.5 cm	36-42 cm (+7 cm*)	15.9 kg
47.5 cm lang	13126112	221406	68.5 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.1 kg
50 cm kort	13126113	221407	71.0 cm	36-42 cm (+7 cm*)	16.0 kg
50 cm lang	13126114	221408	71.0 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.2 kg
52.5 cm kort	13126115	221409	73.5 cm	36-42 cm (+7 cm*)	16.1 kg
52.5 cm lang	13126116	221410	73.5 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.3 kg
55 cm kort	13126117	221411	76.0 cm	36-42 cm (+7 cm*)	16.3 kg
55 cm lang	13126118	221412	76.0 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.5 kg
57.5 cm kort	13126119	221413	78.5 cm	36-42 cm (+7 cm*)	16.4 kg
57.5 cm lang	13126120	221414	78.5 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.6 kg
60 cm kort	13126121	221415	81.0 cm	36-42 cm (+7 cm*)	16.5 kg
60 cm lang	13126122	221416	81.0 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.7 kg

* Med 3A rygg.

Vekt og angitte dimensjoner er for en rullestol med 24 drivhjul med quick-release, massive dekk, rustfrie drivringer, tverrstag rygg, benstøtter, fotstøtter, hælstopper, bremses, armstøttefester, 6½" hjul med medium gafler. Angitte mål kan variere med ± 2%.

Setehøyde, foran
34-56.5 cm

Transportbredde
32 cm

Lengde benstøtter
26-64 cm

Setehøyde, bak
34-53 cm

Total høyde
74-128 cm

Vinkel benstøtte
108°-114°

Høyde rygg
32-45 cm
(med standard 3A rygg)

Total lengde
102-122 cm

Diameter drivhjul
46.5-48.5 cm

Høyde 3A rygg
38-51 cm

Lengde sammenlagt
76-92 cm

Maks. brukervekt
160 kg

Tilbehør



Hodestøtte, velour (ink. stang)

Høyde-, dybde- og vinkeljusterbar hodestøttestang. Hodestøttepute leveres med avtagbart trekk og mulighet for sideveis justering. Trekk i velour eller hygiene



Trekk

Mykt, elastisk trekk i mørk grå velour.



Hodestøtte, hygiene

Regulerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Monteres på hodestøttefeste, alternativt kjørebøyle (feste kjøpes separat). Trekk: grå hygiene.



Komforttrekk

Et mer polstret trekk i mørk grå velour.



Hodestøtte med sidestøtte

Regulerbart i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Trekk: Grå hygiene.



Hygienetrekk

Til 3A rygg. Materiale: Dartex. Vannavstøtende og vaskbart.



Hodestøttefeste til 3A rygg

Avtagbart med hurtigkobling.




Pustende trekk, AirMesh (std)

Gir et moderne og rent uttrykk. Kan brukes med 2B rygg (lav og høy) og 3A rygg (kun standard).



Velcorygg (std)

Seks borrelåsstropper, hvorav den øverste er bredere og fastere.

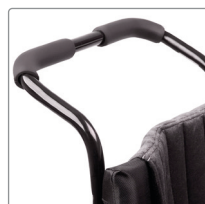


Kjørebøyle

Høydejusterbar og avtakbar.



3A rygg (standard)

Høyde 38-51 cm (15"-20"). Mulighet for justering av hofter og korsrygg.

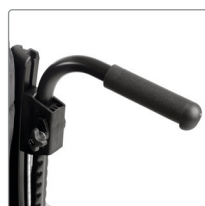

Kjørehåndtak

Høydejusterbar og avtakbar.



2B rygg

Vår mest aktive rygg. Det kurvede ryggørret gir en diskret sidestøtte.



Kjørehåndtak, fast

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket




Tverrstag (std)

Gir ekstra stabilitet. Nedfellbar med hurtiglås på den ene siden. Standard på Cross 5XL. Monteres direkte i 3A rygg.




Ryggkile lang

30 cm lang. Myk skumkile som festes med borrelås under ryggoverdraget. Kombineres med en eller flere sidestopp rett eller sidestopp vinklet for økt utvendig støtte. Trekk i mørk grå velour.

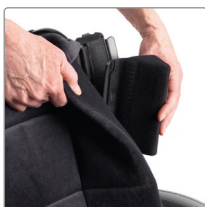

Ryggkile, kort

15 cm lang. Myk skumkile som festes med borrelås under ryggoverdraget. Kombineres med en eller flere sidestopp rett eller sidestopp vinklet for økt utvendig støtte. Trekk i mørk grå velour.

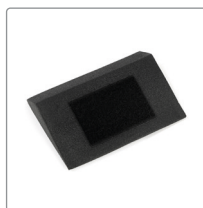

Komfortkile, mod. 2 (medium)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 19 cm, B: 12 cm, H: 2 cm



Komfortkile, mod. 3 (large)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 20 cm, B: 17 cm, H: 2.5 cm



Sidepute

Monteres med borrelås mellom ryggtrekk og ryggoverdrag. Kombineres med rett sidestopp for utvendig støtte. Sideputen gir økt sidestabilitet.




Sidestopp, rett

Kombineres med sidepute rygg eller kan brukes for å holde en ryggkile på plass.



Sidestøtte, regulerbar og avtagbar

Muligheten for en kroppsnær sidestøtte som ikke begrenser armbevegelsen.

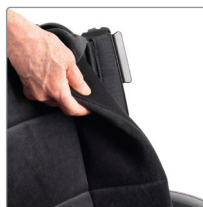

Sidestopp, skrå bredding, 15 mm

Øker ryggbreddfen med 15 mm på hver side.




Sidestøtte, utsvingbar

Regulerbar i høyde og dybde.



Sidestopp, skrå bredding, 30 mm

Øker ryggbreddfen med 30 mm på hver side.

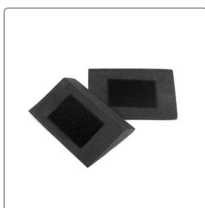

Komfortkile, mod. 1 (small)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan monteres direkte under ryggoverdraget. L: 13 cm, B: 9.5 cm, H: 2 cm



Armlener. Høydejusterbar med unbraco

Avtagbar.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Armlenepolster med trekk
Polstret med skum eller gel. Avtagbart.



Skvettskjerm i karbonfiber
Justerbar i høyde, dybde og vinkel.



Armlener. Høyderegulering med fingerskrue.
Kan også låses fast på rullestolen.



Benstøtte standard, stk
Sort. Avtakbar og sidesvingbar. Finnes også med lås. Legglengde 35-52 cm med std. fotplate. NB! Fotplate bestilles separat.



Armstøtte pad, bred og myk
Settes på eksisterende armstøtte. Str. 8 x 40 cm (3¼" x 15¾"). Passer både kort og lang armstøtte, høyre og venstre side.



Benstøtter m/ spiss vinkel (80°)
Med spiss vinkel kommer fotstøttene ca. 6 cm nærmere setet. NB! Fotstøtte bestilles separat.



Hemiplegiarmlene
Vinkeljusterbar. Høyden innstilles med justering av armlenet.



Vinkelregulerbar benstøtte, mod. 1
Kombineres med leggstøtte i myk velour som kan reguleres i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Fotplate, putekonsoll og leggstøtte bestilles separat.



Klesbeskytter
Avtakbar og høydejusterbar,



Trekk leggstøtte
Til vinkelregulerbar benstøtte. Overdrag i mørk grå velour, alternativt sort Dartex.



Lårstøtte
Festes på eksisterende armstøtte. Tilgjengelig i kort (50 cm) and lang (57 cm) modell.



Fotplate (std)
Sammenleggbare og justerbar i dybde og vinkel Høydejusterbar.



Polster til lårstøtte
Polster i myk PU montert på innside av lårstøtte med velcro.



Polstring til fotstøtte
For økt komfort, velour.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket



Hel fotplate

Oppfellbar



Polstring, hel fotplate

For ekstra komfort.



Hel fotplate, smal

Justerbar i høyde og dybde. Regulerbar i vinkel. Finnes til setebredde 35 og 37,5 cm. Avtagbar.



Forlengt fotstøtte

Øker dybden på fotstøtten. Monteres på den eksisterende fotstøtten.



Breddet fotplate

Øker bredden på fotplaten. Monteres på eksisterende fotplate. Kun til Cross 5 XL størrelse 52.5-60 cm.



Leggbånd

Avtagbar og lengdejusterbar.



Polstring til leggbånd

For økt komfort og mykere støtte.



Leggbånd, komfort

Velour for ekstra komfort. Justerbart med borrelås. Monteres på faste eller vinkelstillbare benstøtter.



Hælbånd

Regulerbar lengde. Passer både høyre og venstre side. Kan ikke kombineres med utvidet fotstøtte.



Amputasjonsbenstøtte, stk

Høyde-, lengde- og vinkelregulerbar. Passer begge sider. Mørkegrå velour eller sort Dartex.



Amputasjonsvekt

Motvirker tippfare og forbedrer kjøreegenskapene. Avtagbar og vinkelregulerbar. Vekt: 3 Kg



Drivhjul

20", 22", 24" og 26" med standard felg, samt 24" lavvektshjul med karbonnav. Velg mellom ulike dekk; massive, luft- eller høytrykk.



Drivringer

Velg mellom plastbelagte, cellegummi, aluminium, titan og rustfrie.



Enhåndsdrift

Passer både høyre og venstre side. Kan ikke kombineres med ledsagerbrems.


For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Svinghjul

4", 5", 6", 6.5" 7" eller 8".

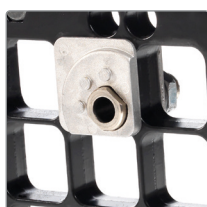

Cambervinkel

Standard 2°, alternativt 0°.



Eikebeskytter

Grå.



Brems med vinklet bremsehåndtak

Gir større gripeflate. Avtagbart tverrgrep. Fås med rødt eller sort håndtak.



Ledsagerbrems

Komplett ledsagerbrems består av monteringskit, wire og kjørehåndtak.



Ledsagerbrems

100 mm mellom håndtak og spak.



Plansete

Avtakbart. Kompletteres med passende sittepute. Lavmontert.



Høy montering, plansete

Tilbehørssett for å få plansetet i samme høyde som seterørene.




Setepute

52 cm lang. Anatomisk formet som kuttes til innstilt setedybde. Trekk: mørk grå velour.



Brems med bremsespakforlenger

Bremsespaken kan vinkles fremover, for å forenkle sideveis forflytning.

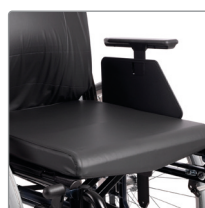

Setepute hygiene

Med vannavstøtende hygienetrekk i sort Dartex.
46 cm lang (setebredde 35-40 cm)
50 cm lang (setebredde 42,5-60 cm)



Enhåndsbrems

Høyre eller venstre side. Kan kombineres med ledsagerbrems.



Seteforlenger

Festes med borrelås mellom transportfestsene. Øker setedybden med opptil 7 cm. Standard.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket




Teleskoperte tippesikringer

Oppfellbare, justerbar høyde og regulerbare i lengde og vinkel.




Feste, brystsele

Montert på stang for hodestøtte

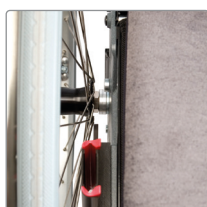

Breddeøkingssett, drivhjul

Øker avstanden mellom armstøttene med 1 cm. Totalbredden øker også 1 cm. Kan ikke kombineres med ledsagerbrems.

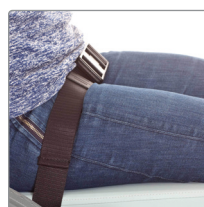

Hoftebelte

Med hurtiglås, justerbare lengder. To alternative festepunkter på rammen.



Breddet fremgaffelfeste

Flytter svinghjulet 3 cm ut. Stolens totalbredde påvirkes ikke.



Krykkeholder

Dobbel, monteres på tippesikring.



Fremgaffelfeste, kort og breddet

Til 4" og 5" svinghjul. Gir mulighet for setehøyde ned til 34 cm.



IV stativ

Med feste.



Bord

Transparent. Monteres på lange armstøtter.



Verktøysett

Komplett



Hemibord

Bord inkl. armstøtteputer med påmontert velcro. Finnes til både korte og lange armstøtter, opptil 50 cm setebredde.

Rammefarger



Sort - 01

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
155150	Belte hofte kompl mrs Cross 5XL	25668
219994	Benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktiv hø grå dartex kompl	26210-63-1
219996	Benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktiv ve grå dartex kompl	26210-63-2
219997	Benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktiv ve grå velour kompl	26210-60-2
219995	Benstøtte amputasjon mrs Cross 6/Cross 5XL hø grå velour kompl	26210-60-1
278547	Benstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b55 vreg m/leggstøtte grå hø	27860-65-1
278548	Benstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b55 vreg m/leggstøtte grå ve	27860-65-2
278549	Benstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv vreg hø kompl	27730-01-1
278550	Benstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv vregkompl	27730-01-2
278551	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL b45 vreg m/leggstøtte grå hø	27858-65-1
278552	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL b45 vreg m/leggstøtte grå ve	27858-65-2
278553	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL b50 vreg m/leggstøtte grå hø	27859-65-1
278554	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL b50 vreg m/leggstøtte grå ve	27859-65-2
154159	Bord Hemi mrs Cross 6/Cross 5XLb45 kort armlenepute kompl	26556
138839	Bord mrs Cross 5XL b65 kompl	26021
138840	Bord mrs Cross 5XL b68 kompl	26022
279292	Bord mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b58	27971
220272	Bord mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b70 kompl	26907
220308	Brems enhånds mrs Cross 6/Cross 5XL hø kompl	27531-1
220309	Brems enhånds mrs Cross 6/Cross 5XL ve kompl	27531-2
220321	Brems Mod3 mrs Cross 6/Cross 5XL forl håndtak hø	27530-1
220322	Brems Mod3 mrs Cross 6/Cross 5XL forl håndtak ve	27530-2
220323	Brems Mod3 mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak rød hø	27528-1
220324	Brems Mod3 mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak rød ve	27528-2
220325	Brems Mod3 mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak sort hø	27532-1
220435	Drivhjul mrs Cross 5XL 26" brems ledsager halvmassivt m/pakning	28112
220473	Drivhjul mrs Cross 5XL 26" halvmassivt	27992
240317	Drivhjul mrs Cross 5XL/Prio Aktiv 24" høytrykk plast matt u/aksel	28064
181141	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" brems ledsager massivt alu	81337
279339	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" høytrykk alu	28474
279340	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" høytrykk cellegummi	28475
279341	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" høytrykk plast	28476
279342	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" høytrykk rfr	28477
279343	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" høytrykk u/driving/aksel	28420
220444	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" massivt alu grå u/aksel	27542
220445	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" massivt cellegummi u/aksel	27543
220446	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" massivt plast u/aksel	27957
220447	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" massivt u/aksel	27544
220448	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" massivt u/driving/aksel	27541
220422	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager halvmassivt	81338

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
220425	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager høytrykk	81344
220423	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager høytrykk alu	81342
220424	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager høytrykkk plast matt	81343
181133	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager massivt	81341
181131	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager massivt alu	81339
181132	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager massivt plast	81340
220429	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager halvmassivt	26282
220432	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager høytrykk	81351
220430	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager høytrykk alu	81349
220431	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager høytrykk plast matt	81350
181136	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager massivt	81348
181134	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager massivt alu	81346
181135	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager massivt plast	81347
279344	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 26" høytrykk alu u/aksel	27570
279345	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 26" høytrykk u/aksel	27572
140766	Drivring D465 mrs Cross 6/Cross 5XL hjul 20" plast sort matt	81229
012868	Eikebeskytter mrs Cross 6/Cross 5XL 20" grå	25502-28
021239	Enarmsdrift drivenhet mrs Cross 6/Cross 5XL 20" fast nav	26534
021240	Enarmsdrift drivenhet mrs Cross 6/Cross 5XL 22" fast nav	26533
021241	Enarmsdrift drivenhet mrs Cross 6/Cross 5XL 24" fast nav	26522
279368	Feste framgaffel lavt mrs Cross 5XL kompl	28633
220917	Feste framgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL breddet	80899
158043	Feste framgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL breddet kompl	25763
236865	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 5XL sb53 kompl	28132
236606	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 5XL sb55 kompl	28133
278679	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 5XL sb58 kompl	28134
278680	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 5XL sb60 kompl	28135
236964	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 6/Cross 5XL sb48 kompl	28130
237020	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 6/Cross 5XL sb50 kompl	28131
220925	Feste lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL	82489
137227	Fotplate mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb53-60bred kompl sett	28443
154107	Framgaffel kort mrs Cross 6/Cross 5XL stålaksel 4mm	24834
154110	Framgaffel medium mrs Cross 5XL stålaksel 4mm	24835
236584	Framgaffel mrs Cross 5XL 8x2 stålaksel	27874
154112	Framgaffel xliten mrs Cross 6/Cross 5XL stålaksel	26238
279400	Infusjonsstativ mrs Cross 6/Cross 5XLkompl	28323
221229	Kjørebøyle mrs Cross 5XL 3A rh48 hreg kompl	27434-01
221230	Kjørebøyle mrs Cross 5XL 3A rh50 hreg kompl	26063-01
221231	Kjørebøyle mrs Cross 5XL 3A rh53 hreg kompl	26064-01
027044	Kjørebøyle mrs Cross 5XL 3A rh55 hreg kompl	26068-01

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
027046	Kjørebøyle mrs Cross 5XL 3A rh58 hreg kompl	26069-01
027047	Kjørebøyle mrs Cross 5XL 3A rh60 hreg kompl	26070-01
215075	Kjørehåndtak mrs Cross 5XL hreg	27589-01
221261	Kjørehåndtak mrs Cross 6/Cross 5XL 3A fast	27644
181155	Krykkeholder mrs Cross 6/Cross 5XL universal kompl	27327
154244	Leggbånd mrs Cross 5XL/Prio Aktivsb55/58 avtag delb kompl	26062
221344	Leggplate mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-48 vreg benstøtte m/konsoll grå	27794
221346	Leggplate mrs Cross 6/Cross 5XL sb50-60 vreg benstøtte m/konsoll grå	27795
256514	Leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b75	63186-60
278645	Leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv b90	63187-60
278646	Leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb55 grå kompl	27736-65
278647	Leggstøtte mrs Cross 6 Cross 5XL sb45 grå kompl	27734-65
221339	Leggstøtte mrs Cross 6 Cross 5XL vreg kompl	26136
278648	Leggstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb50 grå kompl	27735-65
220160	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL kort hø kompl	27391-1
220161	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL kort ve kompl	27391-2
220162	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL lang hø kompl	27392-1
220163	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL lang ve kompl	27392-2
279431	Monteringssett plansete mrs Cross 6 Cross 5XL	27330
278655	Polster delt fotplate mrs Cross 5XL/Prio Aktivsb53-60 hø	63192-60-1
278656	Polster delt fotplate mrs Cross 5XL/Prio Aktivsb53-60 ve	63192-60-2
154257	Polster leggplate mrs Cross 6/Cross 5XL	24544-01
181120	Polster leggplate mrs Cross 6/Cross 5XL utsv	27322-01
278659	Polster leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb45m/hygienetrek grå	63047-65
278660	Polster leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb50m/hygienetrek grå	63048-65
278661	Polster leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb55m/hygienetrek grå	63049-65
221853	Pute lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL hø kompl	82488-1
221854	Pute lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL ve kompl	82488-2
222018	Pute sete Tidy mrs Cross 5XL b53	63137-63
222019	Pute sete Tidy mrs Cross 5XL b55	63138-63
222010	Pute sete Tidy mrs Cross 5XL b58/60	63139-63
027366	Pute sete Universal mrs Cross 5XL sb53grå	62420-60
027367	Pute sete Universal mrs Cross 5XL sb55grå	62421-60
027368	Pute sete Universal mrs Cross 5XL sb58/60grå	62422-60
278917	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 5XL b53-60 høy	28588
278918	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 5XL b53-60 std	28591
278921	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6/Cross 5XL b43-50 høy	28590
278922	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6/Cross 5XL b43-50 std	28587
158009	Seteplate ECS mrs Cross 5XL sb55-58 kort kompl	26724
158019	Seteplate ECS mrs Cross 5XL sb55-58 lang kompl	26729

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
221758	Seteplate ECS mrs Cross 5XL sb60 kort kompl	26660
221759	Seteplate ECS mrs Cross 5XL sb60 lang kompl	26662
158005	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-48 kort kompl	26722
158015	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-48 lang kompl	26727
158007	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb50-53 kort kompl	26723
158017	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb50-53 lang kompl	26728
236587	Sidestopp rett mrs Cross 6/Cross 5XL kombineres m/kilepute/sidepute	28136
279048	Sidestopp vinklet mrs Cross 6/Cross 5XL l15kombineres	28137
235202	Sidestopp vinklet mrs Cross 6/Cross 5XL l30kombineres	28173
279049	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast +15grader kompl	28143
240315	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast 0grader kompl	28142
279050	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast -15grader kompl	28144
279051	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast -45grader kompl	28145
222525	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast h10 l15 dartex kompl	27395
239901	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv 0grader hø kompl	28181-1
239902	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv 0grader ve kompl	28181-2
244149	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -15grader hø kompl	28180-1
279052	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -15grader ve kompl	28180-2
279053	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -45grader hø kompl	28141-1
279054	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -45grader ve kompl	28141-2
222528	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XLh9 l19 fast 3A kompl	27917
222529	Sidestøtte R82 3A mrs Cross 6/Cross 5XLh9 l19 utsv hø kompl	27916-1
222530	Sidestøtte R82 3A mrs Cross 6/Cross 5XLh9 l19 utsv ve kompl	27916-2
222527	Sidestøtte R82 mrs Cross 6/Cross 5XL h6 l17 utsv 3A ve kompl	27915-2
222526	Sidestøtte R82 mrs Cross 6/Cross 5XL h6 l17 utsv 3Ahø kompl	27915-1
181194	Sklisikring bord hemi mrs Cross 6/Cross 5XL	81633
222721	Svinghjul mrs Cross 5XL/Prio Aktiv diam20 b5 massivt mykt	27868
222719	Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL diam20 b3 luft	27872
222739	Teleskopaksel enarmsdrift kompl mrs Cross 5XL/Prio Aktiv sb60kompl	27321
167422	Teleskopaksel enarmsdrift kompl mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-50 kompl	27319
167423	Teleskopaksel enarmsdrift kompl mrs Cross 6/Cross 5XL sb53-58 kompl	27320
279471	Tippesikring Mod2 mrs Cross 5XL lav sh34-37	28471
006025	Tippesikring Mod2 mrs Cross 5XL std sh37-55	28470
215098	Tippesikring mrs Cross 6/Cross 5XL multi cc 59 kompl	28457
222779	Transportfeste mrs Cross 5XL hø	82573
222780	Transportfeste mrs Cross 5XL ve	82574
222836	Trekk armlene bord hemi mrs Cross 6/Cross 5XL kort polstret m/borrelås	81631
222837	Trekk armlene bord hemi mrs Cross 6/Cross 5XL lang polstret m/borrelås	81632
154313	Trekk benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktivhø grå 26210-60-1	62450-60
222830	Trekk benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktivhø velour 26210-60-	62450-63

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
222833	Trekk benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktivve grå 26210-60-2	62761-60
222831	Trekk benstøtte amputasjon mrs Cross 5XL/Prio Aktivve velour 262100-	62761-63
279062	Trekk hodestøtte m/sidestøtte mrs Cross 5XL/Prio Aktiv	63185-65
279063	Trekk hodestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL hygiene	63177-65
279064	Trekk hodestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL velour	63177-60
181085	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b53 grå	62948-60
221555	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b53 høy grå	63027-60
221557	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b53 komfort grå	62963-60
221556	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b53 komfort høy grå	63040-60
181086	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b55 grå	62949-60
221558	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b55 høy grå	63028-60
221560	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b55 komfort grå	62964-60
221559	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b55 komfort høy grå	63041-60
181087	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b58 grå	62950-60
221562	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b58 høy grå	63029-60
221564	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b58 komfort grå	62965-60
221563	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b58 komfort høy grå	63042-60
181088	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b60 grå	62951-60
221566	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b60 høy grå	63030-60
221568	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b60 komfort grå	62966-60
221567	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL b60 komfort høy grå	63043-60
181091	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL rb53-60	62955-60
222916	Trekk rygg 3A mrs Cross 5XL rd53-60 høy	63016-60
181083	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL b48 grå	62946-60
221590	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL b48 høy grå	63025-60
181084	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL b50 grå	62947-60
221594	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL b50 høy grå	63026-60
181090	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL rb43-50	62954-60
222917	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL rd35-40 høy	63014-60
279109	Trekk rygg B/3A mrs Cross 5XL 2Bb53 ventilerende	63211-68
279110	Trekk rygg B/3A mrs Cross 5XL 2Bb55 ventilerende	63212-68
279111	Trekk rygg B/3A mrs Cross 5XL 2Bb58 ventilerende	63213-68
279112	Trekk rygg B/3A mrs Cross 5XL 2Bb60 ventilerende	63214-68
279113	Trekk rygg mrs Cross 5XL b53 komfort std/høy grå	62902-60
279114	Trekk rygg mrs Cross 5XL b55 komfort std/høy grå	62903-60
279115	Trekk rygg mrs Cross 5XL b58 komfort std/høy grå	62904-60
279116	Trekk rygg mrs Cross 5XL b60 komfort std/høy grå	62905-60
029091	Trekk rygg mrs Cross 5XL rb52/55 justbar kompl	62430-60
029092	Trekk rygg mrs Cross 5XL rb58/60 justbar kompl	62431-60
279117	Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XLb48 komfort std/høy grå	62900-60

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279118	Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XLb50 komfort std/høy grå	62901-60
221717	Trekk rygg Tidy 3A mrs Cross 5XL b53	63094-63
221718	Trekk rygg Tidy 3A mrs Cross 5XL b55	63095-63
221708	Trekk rygg Tidy 3A mrs Cross 5XL b58	63096-63
221709	Trekk rygg Tidy 3A mrs Cross 5XL b60	63097-63
279260	Tverrstag 3A rygg mod10mrs Cross 6/Cross 5XL b50 kompl	28120
279261	Tverrstag 3A rygg mod11mrs Cross 5XL b53 kompl	28121
279262	Tverrstag 3A rygg mod12mrs Cross 5XL b55 kompl	28122
279263	Tverrstag 3A rygg mod13mrs Cross 5XL b58 kompl	28123
279264	Tverrstag 3A rygg mod14mrs Cross 5XL b60 kompl	28124
279270	Tverrstag 3A rygg mod9mrs Cross 6/Cross 5XL b48 kompl	28119
223360	Wirelås mrs Cross 5XL bremsehåndtak I10 10stk	82854
223361	Wirelås mrs Cross 5XL bremsehåndtak I7 10stk	82855
223362	Wirepakke brems ledsager mrs Cross 6/Cross 5XL I99	81805

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
139108	Aksel brems ledsager mrs Cross 6/Prio Aktiv 138mm quick release	81325
279318	Bremseadapter mrs Cross 6/Prio Aktiv 5mm	51019
279321	Camberbrikke mrs Crissy Swing Away/Cross 6 2grader indre	82568
279322	Camberbrikke mrs Crissy Swing Away/Cross 6 2grader ytre	82567
220760	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d465 hjul 20" alu	81109
140743	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d500 hjul 22" alu	25636
140741	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d540 hjul 24" alu	25181
220772	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d585 hjul 26" alu	81508
220912	Feste armlene mrs Cross 6/Prio Aktiv kompl	25535
220918	Feste framgaffel mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv	80606
239980	Feste framgaffel mrs Cross 6 kompl	28147
220922	Feste kjørehåndtak Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 kompl	25676
220920	Feste kjørehåndtak Mod3 mrs Cross 6 hreg kompl hø	27371-1
220921	Feste kjørehåndtak Mod3 mrs Cross 6 hreg kompl ve	27371-2
016126	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35 std hø	25641-1
016127	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35 std ve	25641-2
016128	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38 std hø	25642-1
016129	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38 std ve	25642-2
016130	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40 std hø	25643-1
016131	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40 std ve	25643-2
016132	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b43 std hø	25644-1
016133	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b43 std ve	25644-2
016134	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b45 std hø	25645-1
016135	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b45 std ve	25645-2
016136	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b48 std hø	25736-1
016137	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b48 std ve	25736-2
016138	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b50-60 std hø	25646-1
016139	Fotplate Mod2 mrs Cross 6/Prio Aktiv b50-60 std ve	25646-2
221260	Kjørehåndtak mrs Cross 6 hreg m/håndtak brems ledsager	27625-01
221365	Kjørehåndtak mrs Cross 6 m/wire	27627
181045	Ryggpakke 3A Mod4 mrs Cross 6 b35-40	27382
222419	Ryggpakke 3A Mod4 mrs Cross 6 b35-41 høy	27953
181049	Ryggpakke 3A Mod4 mrs Cross 6 b43-50	27386
222420	Ryggpakke 3A Mod4 mrs Cross 6 b43-50 høy	27990
158029	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 35cm kort	62718-60
240197	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 38cm kort	62719-60
240198	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 40cm kort	62720-60
240199	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 43cm kort	62721-60
240200	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 45cm kort	62722-60
240201	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 48cm kort	62978-60

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
240202	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 50cm kort	62979-60
240203	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 53cm kort	62980-60
240204	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 55cm kort	62981-60
240205	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 58cm kort	62982-60
240206	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 60cm kort	62983-60
158033	Trekk sete mrs Cross 6 35cm lang	62728-60
279255	Trekk sete mrs Cross 6 38cm lang	62729-60
236921	Trekk sete mrs Cross 6 40cm lang	62730-60
236922	Trekk sete mrs Cross 6 43cm lang	62731-60
236923	Trekk sete mrs Cross 6 45cm lang	62732-60
236924	Trekk sete mrs Cross 6 48cm lang	62984-60
236925	Trekk sete mrs Cross 6 50cm lang	62985-60
279256	Trekk sete mrs Cross 6 53cm lang	62986-60
279257	Trekk sete mrs Cross 6 55cm lang	62987-60
279258	Trekk sete mrs Cross 6 58cm lang	62988-60
279259	Trekk sete mrs Cross 6 60cm lang	62989-60
223205	Trommelbrems mrs Cross 6 hø	27590
223206	Trommelbrems mrs Cross 6 ve	27591
219993	Aksel quick release mrs Cross 5 XL/Prio Aktiv d12 stålnav	82483
221258	Kjørehåndtak mrs Cross 5 XL hreg m/håndtak brems ledsager	27626-01
222418	Ryggpakke 3A Mod4 mrs Cross 5 XLb3-60 høy	27991
181053	Ryggpakke 3A Mod4 mrs Cross 5 XLb53-60	27390



Med forbehold om trykfeil og endringer. Sist endret oktober 2020

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

etac[®]
Creating Possibilities