



Etac Cross 5 / Cross 5XL

En ny generasjon Cross,
med enda bedre sittekomfort
og kjøreegenskaper.

 **etac**[®]



Etac Cross 5 – rullestolen med uendelig mange muligheter

Alle mennesker er forskjellige. Det er det enkle utgangspunktet for utviklingen av den nye rullestolen Etac Cross 5. Cross 5 er mer enn allround, den kan tilpasses alle individuelle behov på detaljnivå.




Cross 5 avbildet i standard konfigurasjon

Høyeste komfort med beste funksjonalitet

Ryggstøtten kan enkelt formes etter de aller fleste kroppsformer, kombinert med forenklede innstillinger av setevinkel og setedybde, gir det en fantastisk komfort.

Videre gir den nye rammen Cross 5 enda mere stabilitet, og stolen er enda bedre å kjøre. Som tidligere kan Cross 5 enkelt omjusteres eller kompletteres med vårt brede tilbehørssortiment.

Detaljer

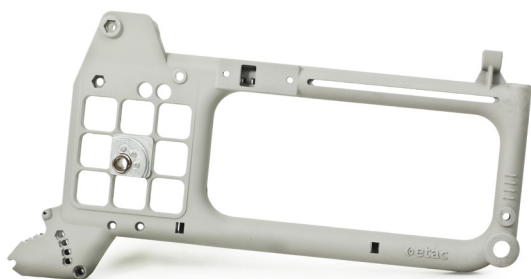

36 + 2 drivhjulsposisjoner

Små innstillingsintervaller (1,25cm) gir optimal setehøydeinnstilling og tyngdepunkt plassering.

Ekstra lav setehøyde

Setehøyde ned til 34 cm.

Standard rammefarge Cross 5/5XL er midnattsblå.

3A ryggen

Leveres som standard med 3A rygg. Kan vinkeljusteres (i hoften og lumbalt), og høydejusteres trinnløst for en optimal sittestilling.




Tilpassing av velcrorygg

Med seks ryggband, hvorav det øverste er ekstra bredt. Trekket kan justeres individuelt for maksimal komfort og stabilitet.

Overdrag

Ryggoverdrag i myk og behagelig plysj.

Tippesikring for alle setehøyder
Oppfellbar tippesikring, tilpasses enkelt alle hjulposisjoner og setehøyder fra 34 til 51 cm.

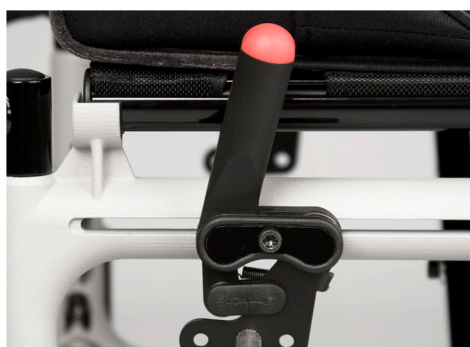

Enkel justering av bremsene

Justeringen gjøres enkelt på bremsens utside.



Standard konfigurasjon Cross 5 og Cross 5XL



Cross 5



Cross 5XL

Ramme:	Støpt aluminium, sammenleggbar med doble kryss
Chassisfarge:	Midnattsblå
Ryggstøtte:	3A-rygg, høyde og vinkelregulerbar, 35-45cm (40cm standard)
Tverrstag rygg:	Gir ekstra stabilitet. Kun til Cross 5XL.
Kjørehåndtak:	Høyderegulerbare, avtagbare
Velcroygg:	35-45cm
Ryggtrekk:	Standard, velour. Avtagbart og vaskbart på 60°
Ryggvinkel:	Regulerbar, -5° - +20° (standard +2° i ryggvinkel og 7° lumbalvinkel)
Setetrekk:	Dybderegulerbart
Seteforlenger bak:	Standard, montert bak setetrekket
Setehøyde bak:	Cross 5: 45cm. Cross 5XL 47 cm.
Setehøyde foran:	Cross 5: 47cm. Cross 5XL 49 cm.
Armstøtter:	Høyderegulerbare med langt fast polster, 38cm. Med klesbeskytter
Benstøtter:	Åpen vinkel, sort
Fotplater:	Delte, oppfellbare, vinkel/dybde regulerbare
Brems:	Med vinklet sort håndtak
Drivhjul:	24", med quickrelease
Dekk:	Massive
Drivringer:	Aluminium
Camber:	2°
Drivhjulsinnfesting:	D4
Svinghjul:	6.5", massive
Gaffel:	Medium, med stål aksling
Gaffelhusfeste:	Standard. Høyde- og vinkeljusterbart.
Tippesikring:	Oppfellbar, teleskop, 2 stk

Midnattsblå -98
Standard rammefarge

Artikkelnummer og HMS nummer

Cross 5		Kort ramme		Lang ramme		Cross 5XL		Kort ramme		Lang ramme				
Setebredde	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Setebredde	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Setebredde	Art. nr.	HMS nr.		
35,0 cm	13126001	221385	13126002	221386	42,5 cm	13126107	221401	13126108	221402	45,0 cm	13126109	221403	13126110	221404
37,5 cm	13126003	221387	13126004	221388	47,5 cm	13126111	221405	13126112	221406	50,0 cm	13126113	221407	13126114	221408
40,0 cm	13126005	221389	13126006	221390	52,5 cm	13126115	221409	13126116	221410	55,0 cm	13126117	221411	13126118	221412
42,5 cm	13126007	221391	13126008	221392	57,5 cm	13126119	221413	13126120	221414	60,0 cm	13126121	221415	13126122	221416
45,0 cm	13126009	221393	13126010	221394										
47,5 cm	13126011	221395	13126012	221396										
50,0 cm	13126013	221397	13126014	221398										
52,5 cm	13126015	221399	13126016	221400										

Mål og vekt (standard konfigurasjon)



Cross 5				Kort ramme			Lang ramme		
Setebredde	Totalbredde	Setehøyde foran	Setehøyde bak	Setedybde	Total vekt	Transport vekt*	Setedybde	Total vekt	Transport vekt*
35,0 cm	56,0 cm	34–56 cm	34–51 cm	36–49 cm	18,0 kg	10,8 kg	42–55 cm	18,3 kg	11,1 kg
37,5 cm	58,5 cm	34–56 cm	34–51 cm	36–49 cm	18,1 kg	10,9 kg	42–55 cm	18,4 kg	11,2 kg
40,0 cm	61,0 cm	34–56 cm	34–51 cm	36–49 cm	18,2 kg	11,0 kg	42–55 cm	18,5 kg	11,3 kg
42,5 cm	63,5 cm	34–56 cm	34–51 cm	36–49 cm	18,3 kg	11,1 kg	42–55 cm	18,6 kg	11,4 kg
45,0 cm	66,0 cm	34–56 cm	34–51 cm	36–49 cm	18,4 kg	11,2 kg	42–55 cm	18,7 kg	11,5 kg
47,5 cm	68,5 cm	34–56 cm	34–51 cm	36–49 cm	18,5 kg	11,3 kg	42–55 cm	18,8 kg	11,6 kg
50,0 cm	71,0 cm	34–56 cm	34–51 cm	36–49 cm	18,6 kg	11,4 kg	42–55 cm	19,0 kg	11,7 kg
52,5 cm	73,5 cm	34–56 cm	34–51 cm	36–49 cm	18,7 kg	11,5 kg	42–55 cm	19,1 kg	11,8 kg

Cross 5 XL				Kort ramme			Lang ramme		
Setebredde	Totalbredde	Setehøyde foran	Setehøyde bak	Setedybde	Total vekt	Transport vekt*	Setedybde	Total vekt	Transport vekt*
42,5 cm	68,5 cm	34–56 cm	40–51 cm	36–49 cm	18,8 kg	11,3 kg	42–55 cm	19,2 kg	11,6 kg
45 cm	68,5 cm	34–56 cm	40–51 cm	36–49 cm	19,0 kg	11,4 kg	42–55 cm	19,3 kg	11,8 kg
47,5 cm	68,5 cm	34–56 cm	40–51 cm	36–49 cm	19,1 kg	11,5 kg	42–55 cm	19,5 kg	11,9 kg
50,0 cm	71,0 cm	34–56 cm	40–51 cm	36–49 cm	19,2 kg	11,6 kg	42–55 cm	19,6 kg	12,0 kg
52,5 cm	73,5 cm	34–56 cm	40–51 cm	36–49 cm	19,6 kg	11,8 kg	42–55 cm	20,0 kg	12,1 kg
55,0 cm	76,0 cm	34–56 cm	40–51 cm	36–49 cm	19,7 kg	11,8 kg	42–55 cm	20,1 kg	12,2 kg
57,5 cm	78,5 cm	34–56 cm	40–51 cm	36–49 cm	19,8 kg	11,9 kg	42–55 cm	20,1 kg	12,3 kg
60,0 cm	81,0 cm	34–56 cm	40–51 cm	36–49 cm	19,9 kg	12,0 kg	42–55 cm	20,2 kg	12,4 kg

Felles fakta

Ryggstøtte høyde	32–45 cm
Transportbredde	31,0 cm
Maks brukervekt, Cross 5	135 kg
Maks brukervekt, Cross 5 XL	160 kg

*Transportvekt

Målt uten drivhjul, fotbrett og armlen






Dette er nytt på Cross 5

Drivhjulplassering med uante muligheter

Finn den optimale drivhjulplasseringen i forhold til setehøyde og tippepunkt.
 (Plasseringen D4 er standard på Cross 5 og Cross 5XL).

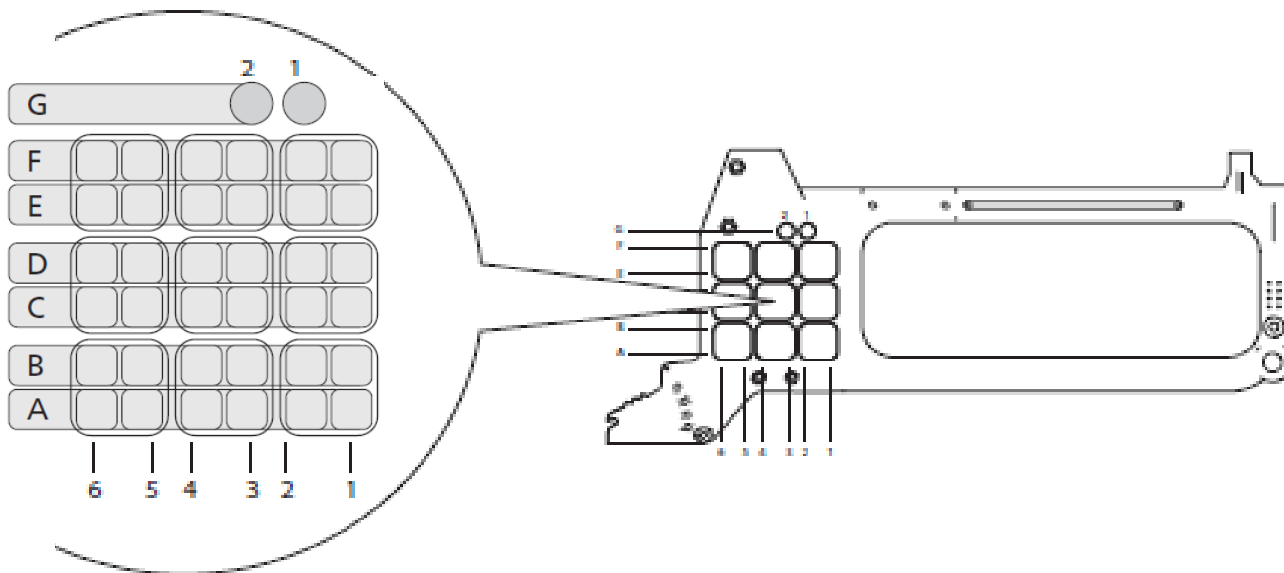

3A rygg - En ny standard for tilpasning av rygg til rullestol

3A står for Angulus, Altitudo og Altus – de latinske ordene for vinkel, høyde og dybde.

Ryggstøtten kan meget enkelt og presist formes etter brukers kroppsforn og behov, mens brukeren sitter i rullestolen.

For å skape mer plass til brukeren, er ryggrorene festet mot utsiden av seterorene. Denne konstruksjonen gir bedre komfort og stabilitet enn tradisjonelle løsninger.



Vinkel (Angulus)

Hoftevinkel kan justeres fra -5° til $+20^{\circ}$.

Lumbalvinkel kan justeres fra -2° til $+18^{\circ}$.



Høyde (Altitudo)

Ryggstøtte høyde er trinnløst justerbar mellom 32–45cm.



Dybde (Altus)

Når setetrekkets dybdejustering (6cm) kombineres med 3A ryggens reguleringer, er setedybde intervallet fra 36 til 49cm.

Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no.



Komforttrekk

Med ekstra tykk polstring. Fås også til høy rygg. Mørk grå plysj.



Hygienetrek Tidy

Vannavstøtende hygienetrek med skumpute, samt sveisede sømmer. Kan leveres med kundespesifikk brodering (f.eks. logo)



Etac Crossrygg 3A - høy

Høydejusterbar (38-51 cm).
Justerbar hoft- og lumbalvinkel




Ryggkile

Myk kile som festes med borrelås mot trekket. 15 cm, alternativt 30 cm høy.
Trek: Mørk grå plysj.



Brems

Kneleddsbrems med rett bremsetapp.

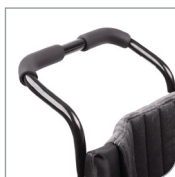

Kjørebøyle

Høydejusterbar og avtagbar




Ledsagerbrems, komplett (uten drivhjul)

Sett



Hodestøtte

Inklusiv stag, monteres på kjørebøylen. Regulerbar høyde, dybde og vinkel. Festebeslag kjøpes separat. Materialer: mørk grå plysj, alternativt sort Dartex.

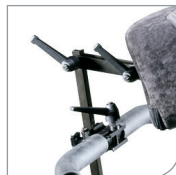

Hodestøttefeste

Til kjørebøyle.



Sidestøtte

Myk sidestøtte i sort Dartex. Regulerbar i høyde og dybde. To alternative bredder.



Sidestøtte

Sidestøtte med stor pute i sort PUR. Justerbar i høyde och dybde.



Sidestøtte, utsvingbar

Sidestøtte i sort PUR. Utsvingbar. Justerbar i høyde och dybde. Mellomstor eller stor pute.



Faste kjørehåndtak



Drivhjul for ledsagerbrems

20", 22" og 24".



Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no.



Klesbeskytter

Avtagbar og justerbar i høyden.



Lårstøtte

Finnes i kort (50 cm) og lang (57 cm) modell. Monteres på eksisterende armstøtte.



Mykpute, lårstøtte

Finnes i tre varianter, samtlige er justerbare i høyde (38–51 cm) og hoftvinkel. Med fast, alternativt justerbar lumbalvinkel



Skvettskjerm i karbonfiber

Justerbar i høyde, dybde og vinkel.



Overdrag armstøtte

Polstret med kaldskum eller gel. Avtagbart. Finnes til kort (25 cm) og lang (35 cm) modell. Trekk i mørk grå plysj eller sort Dartex.



Armstøttepute bred og myk

Monteres på eksisterende armstøtte. Størrelse 8 x 40 cm. Passer både kort og lang armstøtte, høyre og venstre side..



Armstøttepute Hemi

Passer kun til lange armstøtter (35 cm). Polstret avtagbart overdrag. Overdrag i mørk grå plysj.



80° benstøtter / 80° korte benstøtter

Bringer fotstøttene cirka 6 cm nærmere setet. Finnes også i en kort versjon og med lås.



Vinkelregulerbar benstøtte modell 3 med leggplater

Med skålformet, oppfellbar leggplate som kan justeres i to høyder på benstøtterøret. Passer till både høyre og venstre side.



Overdrag leggstøtte

Til vinkelregulerbar benstøtte. Overdrag i mørk grå plysj, alternativt sort Dartex.



Vinkelregulerbar benstøtte modell 1

Kombineres med leggstøtte i myk plysj som kan reguleres i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Benstøtte, putekonsoll og leggstøtte bestilles separat..



Putekonsoll oppfellbar

Til vinkelregulerbar benstøtte. Oppfellbar.



Leggplate til modell 1

Separat leggplate, mørkegrå



Amputasjonsstøtte

Justerbar høyde, regulerbar dybde, vinkel og sideveis. Passer til høyre og venstre side. Overdrag i mørk grå plysj, eller sort Dartex. Avtagbar.



Amputasjonsvekt

Motvirker tippefare og forbedrer kjøreegenskapene. Avtagbar og vinkelregulerbar. Vekt: 3 kg



Gipsbenstøtte

Brukes når hele benet er gipset. Støtten har tre separate puter som er regulerbare i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Fås til både høyre og venstre side.

Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no.



Fotstøtter

Oppfellbare. Justerbare i dybde og vinkel, regulerbare i høyden. Leveres med standard innfestningsrør. Finnes også med korte (-8 cm) eller lange (+10 cm) innfestningsrør.




Hel fotplate

Oppfellbar og stillbar i høyde, dybde og vinkel



Hel fotplate junior

Justerbar i høyde og dybde. Regulerbar i vinkel. Finnes til setebredde 35 og 37,5 cm. Avtagbar.

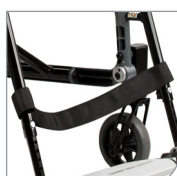

Leggbånd

Avtagbart, regulerbar lengde..



Polstring til leggbånd

Gir en mykere støtte for leggene. Finns i 20, 30 og 40 cm lengde..



Fotplate forlenger

Monteres på eksisterende fotstøtte. Fotplaten finnes opp til setebredde 50 cm




Hælbånd

Regulerbart i lengden. Passer både høyre og venstre side. Kan ikke kombineres med forlenget fotplate.



Drivhjul

20", 22" alternativt 24", samt 24" lettvektsdrivhjul.. Velg mellom massive dekk eller luftfylte med høytrykksslange.

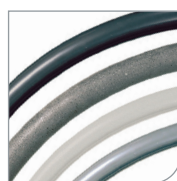

Drivringer

Velg mellom aluminium, rustfrie, plast-belagte, cellegummi og titan.



Enarmsdrift

Passer både høyre og venstre side. Kan ikke kombineres med ledsagerbrems.



Svinghjul

4", 5" alternativt 6,5".



Eikebeskyttere

Med grått alternativt gult trykk..



Tetra quick release beslag

For brukere med nedsatt håndfunksjon, for enklere å kunne ta av eller sette på drivhjul.



Brems med vinklet bremsehåndtak (standard)

Gir større gripeflate. Finnes i sort og rødt.



Brems med bremsepakforlenger

Bremsepakken kan vinkles fremover, for å lette sideforflytning.



Enhåndsbrems

Høyre alternativt venstre side. Kan kombineres med ledsagerbremsehjul



Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no.



Plansete

Avtagbart. Kompletteres med passende sittepute. Lavmontert.



Høy montering, plansete

Tilbehørssett for å få plansetet i samme høyde som seterørene



Sittepute

56 cm lang. Anatomisk formet sittepute som kuttes til innstilt setedybde. Trekk: mørk grå plysj.



Sittepute Tidy

Med vannavstøtende hygienetrekk i sort Dartex. 46 cm lang (setebredde 35-40 cm) 50 cm lang (setebredde 42.5-60 cm)



Komfortkile

Gir større setegrop. Plasseres i putetrekks lomme




Breddeøkingssett drivhjul

Øker avstanden mellom armstøttene med 2 cm. Totalbredden øker også 2 cm.



Feste til bord

For rullestolbord med rund innfestning. Passer for rør opp til 18 mm diameter.

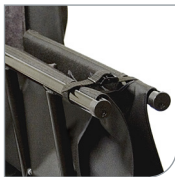

Låse sammenslått ramme

Festes rundt et av seterørene. Når rammen er sammenslått dras remmen rundt begge rørene og låses med en spenne.



Breddet framgaffelfeste

Flytter svinghjulet ut 3 cm, stolens totalbredde påvirkes ikke.



Framgaffelfeste kort

Til 4" og 5" svinghjul. Gjør at man kommer ned til 34 cm setehøyde.



Hoftebelte og belte

Med hurtiglås, justerbare lengder. Hoftebelte: To alternative festepunkter på rammen.



Krykkeholder

Inklusive festebånd for øvre feste av krykken. Monteres på tippesikringens feste. Passer både høyre og venstre side.



Bord

Transparent. Monteres på lange armstøtter.



Hemibord

Festes på armstøtteputer (std) med borrelås. Passer både korte og lange armstøtter. Finnes opp til 50 cm bredde. Sklisikring er ekstra tilbehør.




Hemibord

Justerbart i dybde og bredde. Fellbart til siden. Festes på armstøttekonsollen. Høyden justeres med armstøtten.

Reservedeler - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no.



Setetrek
Stillbar 6 cm dybde.

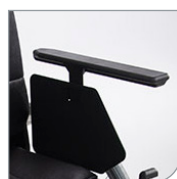

Armstøtter
Avtakbare og høydejusterbare med sideplate, med langt (38 cm) armlenepolster. Alternativt kan unbracoskruen erstattes med en fingerskrue. Mulighet til å låse armstøtten fast på rullestolen.



Ryggtrekk, 3A utførelse
Mykt elastisk trekk. Mørk grå plysj.



Benstøtte standard
Sort. Avtagbar og sidesvingbar. Finnes også med lås.




Kjørehåndtak
Høydejusterbare og avtakbare



Vinklet brems, sort



Tverrstag rygg
Gir ekstra stabilitet. Fellbart med hurtiglås på den ene siden.
Standard på Cross 5 XL.

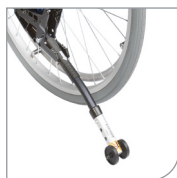

Tippesikringer, teleskop
Oppfellbare, justerbar høyde og regulerbare i lengde og vinkel. Passer alle setehøyder.



Svinghjul
Størrelse 6,5"



Drivhjul
Kompakte



Verktøysett
Inneholder tre fastnøkler, fem unbrakonøkler, en pipenøkkel og en stjernetrekker.



Cambervinkel 0°

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer

Etac Cross 5

Hver liten detalj utgjør en stor forskjell



Etac AS
Pb. 249, 1501 Moss
Vanemvn. 1, 1599 Moss
Tlf 815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

 **etac**[®]
Skaper muligheter