


# ToppAir

Statisk overmadrass  
med justeringsmulighet

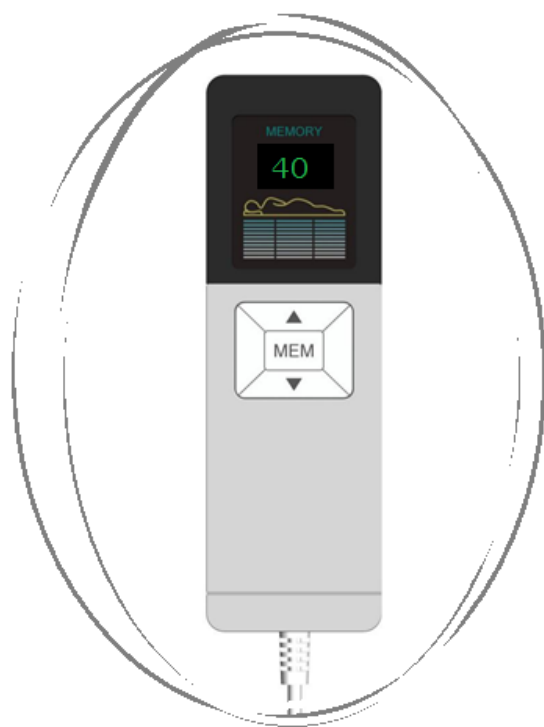

 *Sofies AS*

**Justeringsmuligheter:** Madrassens luftkammer justeres ved hjelp av håndpanelet til pumpen mens bruker ligger på madrassen. Brukeren kan selv justere fastheten i madrassen.

Hos pasienter med smerter og sårproblematikk kan det være særlig behov for å forandre fastheten i madrassen til stadighet. Det er også en fordel å utføre stell og forflytning på fast underlag.

**Pumpen:** Pumpen kan fylle inn og ut luft til ønsket trykk, samt memorere en foretrukket fasthet. MEM-knappen (Memory) som stiller automatisk tilbake til innstilt trykk. På den måten er det lettere for pleiepersonell og bruker å stille tilbake madrassen etter bruk. Pumpen bruker kun strøm ved justering. Det følger med pumpeoppheng som standard slik at den kan henges opp på sengen. Håndpanelet har også et oppheng.

**Brukervekt:** Fra 20-210 kg.


### Størrelser:

Bredden: 75/80/85/90/120 cm

Lengder: 190/200 cm

Høyde: 11 cm

Bilde av overpolster:

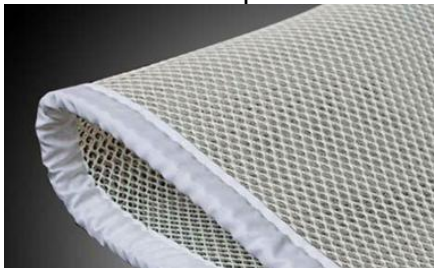


### Overpolster:


ToppAir har et spesialdesignet overpolster som sikrer optimal ventilasjon i madrassen og god trykkavlastning. Dette bidrar til å forhindre liggesår og skaper en god komfort.

**Målgruppe:** ToppAir er rettet mot brukere med mindre trykksår eller fare for sår og smerteproblematikk.

**Trekk:** ToppAir leveres med et ventilerende trekk i polyester Coolmax® som standard. Dette er utviklet for å holde brukeren tørr og ha en jevn temperatur. Svette og fukt transporteres raskt bort fra brukeren, noe som er viktig for å forhindre liggesår.

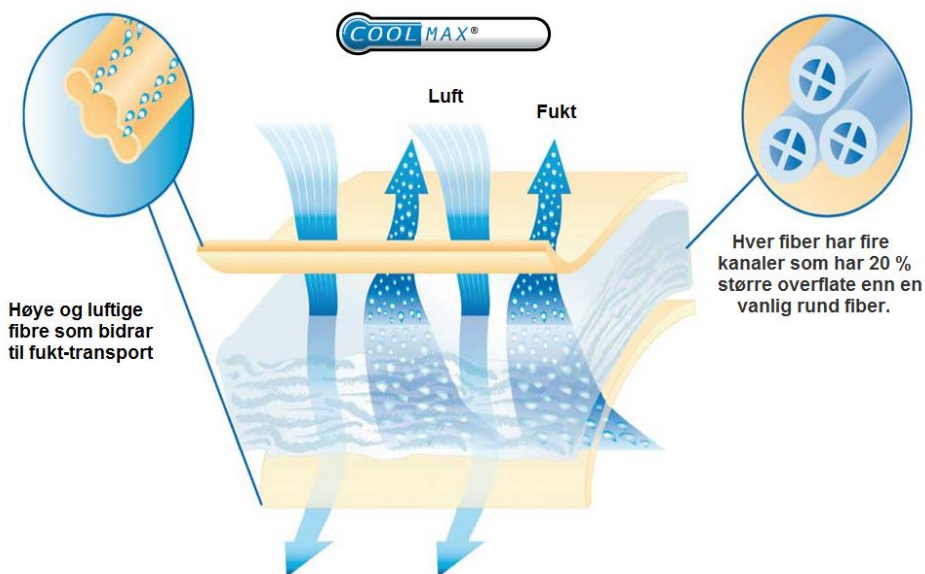

**Inkontinestrekk:** Man kan bestille pustende inkontinestrekk som tilbehør. Dette kan brukes i stedet for eller i tillegg til opprinnelig trekk. Inkontinestrekket er behandlet med Sanitized Silver teknologi. Denne innovative behandlingen av trekket benyttes på stoffet for å hindre veksten av mikroorganismer. Mikroorganismene drepes før de kommer i kontakt med brukeren. Det forhindrer spredning av mugg, lukt og bakterier.

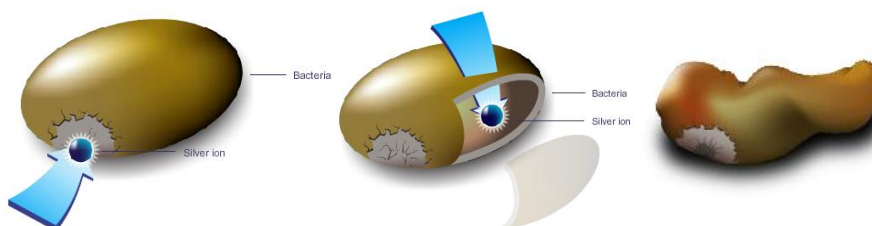

**Vaskeanvisning:** Både inkontinestrekket og stoff-trekket kan vaskes i vaskemaskin for tekstiler på 85° i 10 minutter eller desinfiseres kjemisk med et godkjent desinfiseringsmiddel. Madrassen forøvrig kan også desinfiseres.