



- Testet og godkjent som sykkelvogn
- 5-punktsbelte og støtteputer

September 2021



# XROVER

## JOGGEVOGN

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

## xRover joggevogn

### Neste generasjons joggevogn

xRover er en joggevogn som er laget med tanke på å kunne tilby en mer aktiv livsstil enn det vanlige joggevogner gjør. xRovers utforming gjør at brukeren sitter lavt og sikrer et lavt tyngdepunkt på vognen. Det er cambring på bakhjulene for å gjøre vognen lettere å trille i høyere hastigheter (ved for eksempel joggeturer), og holde den stabil i svinger. xRover finnes i tre størrelser for å kunne dekke brukerstørrelser opp til 185 cm.

Joggevognen har en helsveiset ramme, som er forsterket i alle hjørner og bøyer. Ettersom brukeren sitter inne i rammen, er man godt sikret i forhold til en kollisjon eller lignende. Framhjulet til vogna kan justeres slik at setetiltten kan økes eller minskes i forhold til hvilken vinkel hjulet plasseres i.



### Sikkerhet i høysetet

Brukeren sitter godt fastspennet med vognens 5-punktsbelte. Med støtteputene i setet, tilpasses setebredden og sikrer at brukeren sitter stabilt med bekkenet. Myke hodestøtteputer gir både komfort, beskyttelse og hjelper med å holde hodet sentrert.

### Standard utstur:

- Kalesje
- 5-punktsbelte
- Regntrekk
- Oppbevaringsbag
- Abduksjonskloss
- Støtteputer
- Joggereim
- 14" joggehjul



xRover i nedre tiltposisjon



xRover i øvre tiltposisjon



xRover med sykkeldrag

## Testet og godkjent som sykkelvogn

xRover sitt sykkel feste er konstruert med et kuleledd som gjør at det blir en naturlig fjæring på vognen i forhold til sykkelens bevegelser på forskjellig underlag. Sykkelvognen kommer med to fester til sykkel slik at man ikke er nødt til å demontere festet hvis en annen sykkel skal dra vognen.

Sykkeldraget er utstyrt med en hjulskjerm. Skjermen hindrer vann, stein og annet i å komme på brukeren i sykkelvognen selv om heldekkende utstyr ikke er påmontert vognen.

Etter en sykkel tur kan sykkel draget felles inn under vognen, og et lite svinghjul kan vippes ned på frontakslingen. Da kan vognen manøvreres videre uten at bruker må overføres til en separat vogn eller stol, og man ikke har tatt med standard forhjul (joggehjul).

xRover leveres standard med en justerbar kjørebøyle og ledsagerbrems som kan låses slik at den fungerer som en parkeringsbrems.



xRover med ski


## Teknisk data xRover

Modell	Artikkelnr.	HMS nr.	Min. setebredde	Maks. setebredde	Benlengde
xRover - S	501003	232330	26 cm	36 cm	60 cm
xRover - M	502002	230300	26 cm	36 cm	80 cm
xRover - L	503002	232331	26 cm	36 cm	105 cm

Modell	Setedybde	Min. rygg høyde	Maks. rygg høyde	Hjulstr. bak	Hjulstr. foran
xRover - S	25 cm	28 cm	42 cm	20"	14"
xRover - M	33 cm	36 cm	55 cm	20"	14"
xRover - L	45 cm	40 cm	60 cm	20"	14"

Modell	Total bredde	Total lengde	Egenvekt	Maks. brukervekt
xRover - S	76 cm	118 cm	18,5 kg	44 kg
xRover - M	76 cm	138 cm	19,5 kg	80 kg
xRover - L	76 cm	163 cm	21,5 kg	120 kg



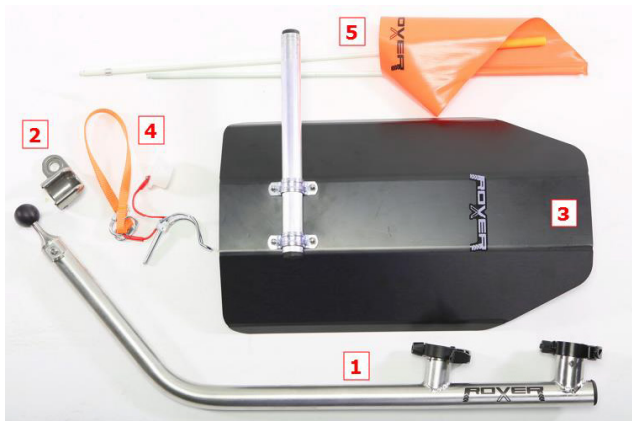

### Koble vognen til sykkel

Vognen kan utstyres med tilbehør for å koble den til sykkel. Settet består av disse komponentene:

- 1 - Stag for å koble til vognen.
- 2 - trekk til sykkel (2 deler i settet).
- 3 - Skjerm.
- 4 - Lås for å koble til sykkel.
- 5 - Flagg.

### Feste montert på sykkel

Del for tilkobling monteres på venstre bakgaffel til sykkel (se under). Løsne akselen helt og monter festet så festehullet på kuleleddet peker mot forsiden.



### Til info:

Ved enkelte tilfeller kan staget fra sykkelvogn til sykkel være for kort til at det kan festes. De fleste typer sykler har ikke dette problemet og trenger ikke noen forlenger, men kontakt leverandør hvis dette er nødvendig.

### Trekkstang

Hvis sykkeldraget på vognen brukes jevnlig (hvis den er permanent tilkoblet), så kan den skyves under vognen når den ikke skal brukes under sykling. Husk at skjerm må skrues av når det skal monteres på forhjul igjen. Skjermen kan lagres i sekken som er festet på ryggen til vognen.



For å senke sykkeldraget så er det nødvendig å løsne alle fire håndskruene på forakselen.

Vri staget omtrent 180 ° og fest det ved å låse det ytterste paret med hurtigkoblinger.

Finn en passende posisjon for festet på forakselen og lås også det innerste paret med hurtigkoblinger. Fronten kan settes ned med hjulet av, 6» svinghjul kan enten vippes opp under vognen eller transporteres i sekken som følger.



Sett skjermen i passende posisjon eller ta den av.



### Sykkeldrag montert på sykkel.

Ta sykkeldraget til vognen og plasser kuleleddet i festet som er montert på sykkel (se bilde over).

Finn riktig vinkel så festet på sykkel og kule ledd kan festes til hverandre.



### Feste av sykkeldrag på sykkel – sikkerhetssplint med klemme.

1. Sett plasthetten foran kule på draget slik at begge hullene stemmer overens så sikkerhetssplinten kan settes inn.
2. Sett inn splinten ovenfra.
3. Sikre splinten ved å dra klemmen nedover.
4. Sikkerhetsbåndet dras en runde rundt hjulets bakgaffel og festes til sykkeldrag igjen.

Ved demontering gjøres dette i motsatt rekkefølge.



Det er viktig å benytte sikkerhetsflagg når vognen brukes under sykling. Det er hull i rammen som flagget festes i (se bilde under).




Det er også lagringsplass for flagget når det ikke benyttes (se bilde under).



## Tilbehør xRover

Art. nr.	HMS. nr.	Beskrivelse	Art. nr.	HMS. nr.	Beskrivelse
202007		Håndvarmer for ledsager	SOS80011	234708	Sternumstøtte neopren Str. 0 XS
201001	232329	Ryggeske	SOS80073	234713	Sternumstøtte smal neopren Str. 2 M
201002	232313	Kjørebøyletaske	SOS80074	234714	Sternumstøtte smal neopren Str. 3 L
201003	230298	Bag til hjul	SOS80075	234703	H-sele neopren Str. 1 XS
204007	269375	Ski, sett	SOS80076	234704	H-sele neopren Str. 2 S
201004	232339	Sykkeldrag	SOS80077	234705	H-sele neopren Str. 3 M
201008	232337	6" svinghjul med alu. gaffel	SOS80078	234706	H-sele neopren Str. 4 L
201009	232312	Forlenget kjørebøyle	SOS80079	234707	H-sele neopren Str. 5 XL
201010	232343	Venstrehåndsbrems	SOS10454		Brystbelte neopren str. Small
202001	232344	Vindtrekk str. S	SOS10455	236975	Brystbelte neopren str. Medium
203001	230299	Vindtrekk str. M	SOS10456	253394	Brystbelte neopren str. Large
204001	230357	Vindtrekk str. L	SOS10457		Brystbelte neopren str. X-Large
202004	232345	Vinterpose str. S	SOS10508	234643	Poziflex Brystbelte neopren str. XS
203004	230302	Vinterpose str. M	SOS10509		Poziflex Brystbelte neopren str. S
204004	230360	Vinterpose str. L	SOS10510		Poziflex Brystbelte neopren str. M
202005	232298	Transportbag str. S	SOS10511		Poziflex Brystbelte neopren str. L
203005	230303	Transportbag str. M	SOS10512		Poziflex Brystbelte neopren str. XL
204005	230361	Transportbag str. L	SOS10490		Skrittsele skai str. 1 S
202006	232320	Myggnett str. S	SOS10491		Skrittsele skai str. 2 M
203006	232321	Myggnett str. M	SOS10492		Skrittsele skai str. 3 L
204006	232322	Myggnett str. L	SOS10493		Skrittsele skai str. 4 XL
101001	232338	Sykkelcomputer	SOS80087		Fotreim nylon m/sidespenne str. 1 S
10310	145121	Standard kjørepose lammeull, Senior	SOS80088		Fotreim nylon m/sidespenne str. 2 M
10320	145122	Standard kjørepose lammeull, Medium	SOS80089		Fotreim nylon m/sidespenne str. 3 L
10330	192364	Standard kjørepose lammeull, Junior	SOS80090		Fotreim nylon m/sidespenne str. 4 XL
10340	190379	Standard kjørepose lammeull, Barn 2	SOS80031	108679	2-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 1 XS
10350	145123	Standard kjørepose lammeull, Barn 1	SOS80062	265910	2-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 2 S
SOS80069	234709	Sternumstøtte neopren str. 1 S	SOS80032	248816	2-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 3 M
SOS80070	234710	Sternumstøtte neopren str. 2 M	SOS80033		2-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 4 L
SOS80071	184469	Sternumstøtte neopren str. 3 L	SOS80034		2-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 5 XL
SOS80072	234712	Sternumstøtte neopren str. 4 XL	SOS80064		4-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 1 XS
			SOS80065		4-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 2 S
			SOS80066		4-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 3 M
			SOS80067		4-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 4 L
			SOS80068		4-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 5 XL

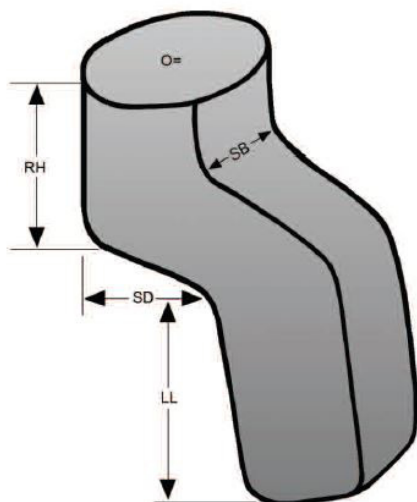

Posisjoneringstilbehør kan også leveres i nylon og skai

### Teknisk data på kjørepose

Beskrivelse	Senior	Medium	Junior	Barn 2	Barn 1
Rygghøyde	47 cm	42 cm	40 cm	30 cm	26 cm
Setebredde	45 cm	40 cm	35 cm	32 cm	30 cm
Setedybde	49 cm	46 cm	45 cm	36 cm	28 cm
Legglengde	50 cm	44 cm	45 cm	38 cm	20 cm
Omkrets	150 cm	140 cm	130 cm	105 cm	92 cm

xRover joggevogn er CE-merket

