



R82 Stingray

Multijusterbar vogn til alle behov

 **etac**[®]

R82 Stingray - en vogn å vokse i

Prisforhandlet som førstevalg fra 01.10.2020 i post 9 Avansert sittevogn.

Å leve et aktivt familieliv krever riktig utstyr. R82 Stingray er en multijusterbar vogn som ikke krever verktøy for justering verken når det gjelder postural støtte eller når kjøreretning på setet skal endres.

Opplev verden sammen

R82 Stingray er i en egen klasse!

Design, justeringsmuligheter, komfort og brukervennlighet er noen av nøkkelordene. Det er blant annet mulig å endre fra fremovervendt til bakovervendt kjøreretning med barnet sittende i vognen.

Barnet sitter alltid bekvemt og de ulike instillingsmulighetene gjør det lett å finne nøyaktig den riktige sitteposisjon det enkelte barnet behøver.

Stingray har mye funksjonelt tilbehør som dekker barnets spesifikke behov.

De hjelper bl.a. til med å støtte barnets bekken og skape en stabil base som opprettholder en bra balanse i setet. Denne støtten hjelper barnet å holde kroppen og hodet sentrert. Bra kroppskontroll hjelper barnet med å kjenne seg trygt samtidig som det lærer seg nye motoriske ferdigheter.



Stingray i prisforhandlet standard konfigurasjon

Detaljer



Setetilt og ryggvinkel

Setetilt på 45° og mulighet til ryggvinkling i planleie (170° grader) gir forutsetninger for å variere sitte- og hvilestilling for barnet.



180° vendbart sete

180° vendbart sete som lar barnet oppdage mer på turen. Seteenheten kan vendes mens barnet sitter i vognen.



Sammenleggbar

Vognen er enkel å legge sammen, tar liten plass og passer for transport i de fleste biler.

Stingray kan også slås sammen uten å ta av seteenheten.



Sikker transport

Stingray er testet og godkjent for transport ihht. ISO 7176/19-2001. Stingray er godkjent for 40 kg brukervekt ved transport.

Standard konfigurasjon

Beskrivelse	Størrelse 1	Størrelse 2
Art. nr.	3287300	3287400
HMS nr.	232525	232526
Seteenhet	Str. 1. Bredde- og høydejusterbart. Sete og ryggtilt. Vendbart 180°.	Str. 2. Bredde- og høydejusterbart. Sete og ryggtilt. Vendbart 180°.
Kiler til sete	Med borrelås.	Med borrelås.
Hoftebelte	Str. 1. Y-modell. Trochanter.	Str. 2. Y-modell. Trochanter.
Hoftestøtte	Breddejusterbar.	Breddejusterbar.
Sidestøtter	Størrelse 1.	Størrelse 2.
Understell	En størrelse. Regulerbar fjæring. Ramme i glassfiber og karbon. Sammenleggbart. Sentralbrems.	En størrelse. Regulerbar fjæring. Ramme i glassfiber og karbon. Sammenleggbart. Sentralbrems.
Kjørebøyle	Høydejusterbar.	Høydejusterbar.
Kalesje	Sort.	Sort.
Regntrekk	Størrelse 1.	Størrelse 2.
Hodestøttepute	Formet skum str. 1.	Formet skum str. 2.
Setepolster	Str. 1, grå. Komplet setepolster, flammesikkert og vaskbart.	Str. 2, grå. Komplet setepolster, flammesikkert og vaskbart.
Handlekurv	Netting.	Netting.
Hjul	2x12" bakhjul og 2x7" svingbare forhjul (prisforhandlet). Kompakte hjul.	2x12" bakhjul og 2x7" svingbare forhjul (prisforhandlet). Kompakte hjul.
Fotstøtte	Høyde- og vinkelregulerbar. En størrelse.	Høyde- og vinkelregulerbar. En størrelse.
Fotstøttestang	Vinkelregulerbar. Lengde str. 1: 21 cm.	Vinkelregulerbar. Lengde str. 2: 34 cm.
Puter*	Flammesikre og vaskbare.	Flammesikre og vaskbare.
Farge på trekk	Grå (standard). Kan også leveres i rød, kornblå, limegrønn og rosa. Ved andre farger enn standard må noe lenger leveringstid påregnes.	Grå (standard). Kan også leveres i rød, kornblå, limegrønn og rosa. Ved andre farger enn standard må noe lenger leveringstid påregnes.



Utstyrt for utendørsaktiviteter

Mange barn er følsomme for både sol, vind og regn. Kalesjen til Stingray er justerbar og tilpasset for å beskytte barnet i all slags vær.

Kalesjen kan justeres i ulike stillinger og har et vindu som gjør at barnet aktivt kan følge med på hva som skjer under hele turen.

Stingray leveres med regntrekk som standard tilbehør.





Kalesje med mange muligheter



Mål og vekt

Mål	Størrelse 1	Størrelse 2
Setebredde (A)	30 cm	35 cm
Setebredde mellom knestøtter	28 cm	33 cm
Setebredde mellom hoftestøtter (tilbehør)	18, 22, 26 cm	23, 27, 31 cm
Setedybde (B)	18-30 cm	25-40 cm
Rygghøyde ved skulder (C)	27-41 cm	36-51 cm
Rygghøyde (C1)	41-55 cm	50-65 cm
Legglengde (D)	14-45 cm	14-45 cm
Setehøyde over gulvet (E)	52 cm	52 cm
Ryggbredde innvendig (F)	30 cm	36 cm
Ryggbredde utvendig (F1)	45 cm	52 cm
Totalbredde (G)	59 cm	59 cm
Lengde (H1)	74 cm	74 cm
Lengde 12" faste forhjul	84 cm	84 cm
Høyde kjørebøyle 15° (I)	100, 103, 106 cm	100, 103, 106 cm
Fotbredde	31x20 cm	31x20 cm
Understellets lengde, sammenlagt	90 cm	90 cm
Totalhøyde sammenlagt	49 cm	49 cm
Vekt understell	13,5 kg	13,5 kg
Vekt sete	5,5 kg	6,5 kg
Vinkling av sete - tilt in space	45°	45°
Ryggvinkel	170°	170°
Maks bruker-/lastevikt	40 kg	40 kg
Maks bruker-/lastevikt ved transport	40 kg	40 kg

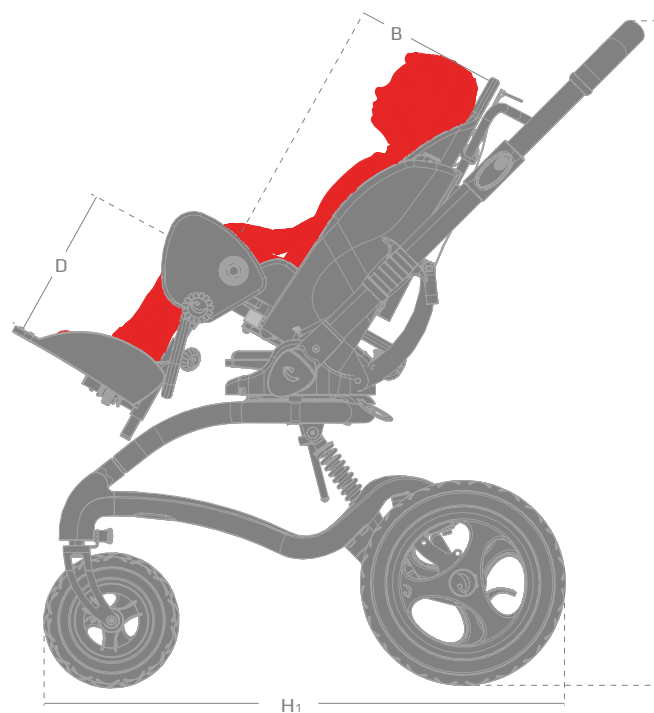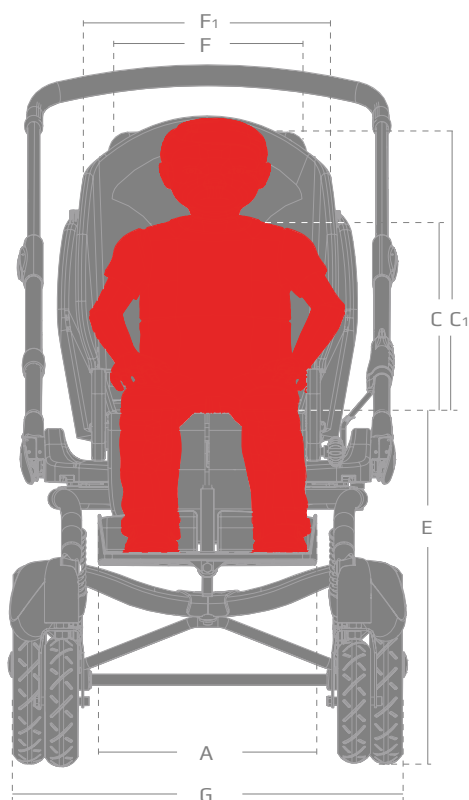

Variert sittestilling

R82 Stingray har et revolusjonerende og unikt 180° vendbart sete som kan snus med barnet i. Det vendbare setet gjør det enkelt å endre kjøreretning, noe som gir barnet mulighet til å følge med på omgivelsene i reiseretningen eller se og kommunisere med den som triller vognen.



Ved hjelp av setetilten, tilt-in-space, opprettholdes hoftvinkelen og gir barnet mulighet til hvile og avkobling. Barn uten tilstrekkelig hodekontroll sitter komfortabelt og trygt når sitsen er tiltet bakover. Endring av tilten avlaster også ryggen og setet, noe som gjør det mer komfortabelt og mulig for barnet å sitte lenger i vognen.

Stingray har en ryggvinkling på 170° som endrer vinkelen i hoftene. For en del barn med spastisitet er det å foretrekke å holde en fast vinkel i hoftene for å minske spastisiteten, og kun bruke tilten. For andre barn er det mer avslappende å ligge i plant leie. I denne posisjonen får barnet også mulighet til å hvile og sove.



Trygg og sikker transport

R82 Stingray er enkel å legge sammen og passer i de fleste biler. Slå sammen setet og understellet hver for seg eller sammen, legg vognen i bilen - og du er på vei. R82 Stingray er testet og godkjent for transport ihht. ISO7178-19. Godkjent for 40 kg brukervekt ved transport.

Det finns flere ulike tilbehør til Stingray som øker mulighetene til et aktivt familieliv.



Handlekurv



Transportfeste



Holder for oksygenflaske



Holder for ventilator

Sammenleggbar



R82 Stingray, lagt sammen.
Totallengde: 90 cm, høyde: 49 cm.

Slå sammen setet og understellet hver for seg eller sammen.

Understell – en størrelse

Understellet kommer med 7" alt. 12" forhjul og 12" bakhjul



Understell med 7" forhjul og 12" bakhjul

Beskrivelse	Art. nr.	HMS nr.
Lufthjul m/individuell fotbrems	318722122	231820
Lufthjul m/håndbrems	318724121	213113
Kompakte hjul m/håndbrems	318724221	285874
Kompakte hjul m/sentralbrems (std.)	318722222	



Understell med 12" for- og bakhjul

Beskrivelse	Art. nr.	HMS nr.
Kompakte hjul m/sentralbrems	318721222	285873
Lufthjul m/sentralbrems	318721122	231818

Fortsett å vokse!

Barns motoriske ferdigheter er i konstant utvikling og resulterer i nye ferdigheter og behov. Stingray leveres i en størrelse på understellet, seteenheten leveres i to størrelser som begge kan brukes på samme understell. Dette gir mulighet for barnet til å vokse med sin Stingray, ved kun å bytte setteenhet.

Fotstøtte, sete og rygg gir frihet og fleksibilitet i forhold til sittestillinger. Barnet kan dermed sitte aktivt og med variasjon i sittestillingen for å utvikles på best mulig måte.



Sett farge på tilværelsen

Det er enkelt å bytte puter på Stingray og dermed endre utseende på vognen.

Setepolsteret kommer i flere fine farger – grå farge er standard.

Rød, blå, grønn og rosa kan fås som tilvalg. Noe lenger leveringstid på påregnes ved valg av disse fargene.

Se "Tilbehør" for artikkelnummer.



Grå (std.)



Blå



Grønn



Rød




Rosa

Ansvarlig, hygienisk og sikker

Med det formål å redusere forbruket av naturressurser, introduserer vi et nytt stoff som er laget av 100% gjenbruksmaterialer.

Putene er laget i komfortabelt dobbeltstrikket stretchstoff med myk overflate og elegant utseende.

Stoffet er flammesikkert, vannavvisende, antibakterielt, vaskbart og motstandsdyktig mot falming.

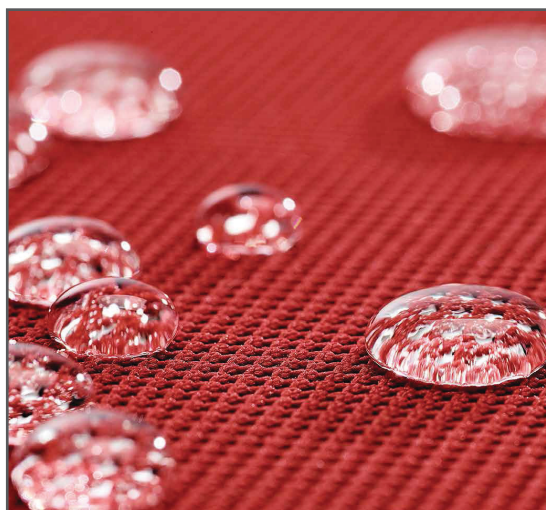


Det er viktig å sikre optimal støtte for overkroppen (postural støtte) til de individuelle behov. Litt ekstra støtte ved etablering av en stabil base i sittestillingen, gir barnet frihet til å bevege seg. Den nye Stingray fås med et stort tilbehørssortiment, som gir god støtte og stabilitet.

Tilbehør som er inkludert i standard konfigurasjon



Hodestøttepute, sort (standard)

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	231804	318740810
Str. 2	232538	318740820

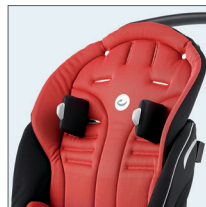

Sidestøtter, sett (standard)

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1 H10xD10cm	162432	318720301
Str. 2 H12,5xD13,5cm	162433	318720302



Kalesje, sort (standard)

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	230526	318740110
Str. 2	237286	318740120



Setepolster (standard)

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1, grå	233723	318750514
Str. 2, grå	257102	318750524



Hoftestøtter, breddejusterbare, komplett m/trekk, sett (standard)

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1 H16,5xB18cm	257105	318740230
Str. 2 H17,5xB22cm	232602	318740240



Regntrekk (standard)

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	189830	318720141
Str. 2	189831	318720142



Handlekurv (standard)

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
En størrelse	162443	318720600

Øvrig tilbehør



Formet hodestøttepute, for ekstra støtte til hodet

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Small B24xD12cm	213610	318720831
Medium B28xD15cm	232539	318720832



Anatomisk hodestøtte, medium nr. 4

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1 (4)	189824	318720862
Str. 2 (5)		318720863



Beslag til separat hodestøtte

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
En størrelse	162444	318720850

Se etac.no for andre hodestøtter



Setepolster (lenger leveringstid må påregnes vedvalg av disse fargene)

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1 kornblå	162406	318750511
Str. 2 kornblå	162409	318750521
Str. 1 rød	162413	318750512
Str. 2 rød	162416	318750522
Str. 1 grønn	162414	318750513
Str. 2 grønn	162417	318750523
Str. 1 rosa		318750515
Str. 2 rosa		318750525



Hofstøtter, multijusterbare u/bruk av verktøy, kompl. m/trekk, sett

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	232527	318740250
Str. 2	232528	318740260



Bord

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	162437	318720010
Str. 2	162438	318720020
Grå plast, en størrelse 44x34cm	189798	318776350



Abduksjonskloss

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1 H9xB4xD7 cm	132434	318720501
Str. 2 H9xB9xD9 cm	132435	318720502
Str. 3 H9xB9xD12cm	132436	318720503



Gripehåndtak

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1, B36cm	162439	318720401
Str. 2, B41cm	162440	318720402



Lasteplate, sort

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
34x44cm	232543	318776290



Oksygenflaskeholder

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Maks 14cm diameter	189816	318776295



Vester og seler

Se vårt store utvalg av vester og seler på vår hjemmeside www.etac.no



Transportbeslag

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
En størrelse	232542	318720902



Ryggsekk

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	162441	318720711
Str. 2	162442	318720721



Kjørepose

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	232540	318740131
Str. 2	232541	318740132

Kjørepose m/pelsfôr, Kaiser

Størrelse	Art. nr.	HMS nr.	Mål kjørepose	Setelengde*	Bredde	Omkrets	Rygghøyde
Str. 1	N0999025	009750	Str. 1, 1-3 år	66 cm	52 cm	90 cm	20 cm
Str. 2	N0999026	163641	Str. 2, 4-6 år	83 cm	58 cm	100 cm	21 cm
Str. 3	N0999027	164223	Str. 3, 7-10 år	99 cm	60 cm	110 cm	22 cm

*Setelengde = Setedybde, legg lengde og fotlengde

Kjøreposeinnlegg

Str. 1	N0909125	163642
Str. 2	N0909126	170465
Str. 3	N0909127	164224

HMS nr.	Art. nr.	Beskrivelse
257100	3176092	Seteplate str. 1, løs
257101	3176094	Seteplate str. 2, løs
285856	315076091	Seteplate str. 1, fast
285857	315076093	Seteplate str. 2, fast
162460	318775010	Fotplate
285860	3176134	Stag til vinkelregulering fotstøtte str. 1
285861	3176129	Stag til vinkelregulering fotstøtte str. 2
285819	313502545	Justeringsknopp fotbrettvinkel
285853	31115157	Seteforlenger str. 1
285854	31115174	Seteforlenger str. 2
285875	3176120	Vinkelbeslag sete rygg str. 1
285876	3176121	Vinkelbeslag sete rygg str. 2
285840	3187102260	Låsehus ryggvinkling
285808	313515100	Grep vinkelregulerbart str. 1
285809	313515101	Grep vinkelregulerbart str. 2
257114	3187102250	Utløserstropp ryggvinkel str. 1
257115	3187102255	Utløserstropp ryggvinkel str. 2
257108	318750410	Trekk abduksjonskloss str. 1
257109	318750420	Trekk abduksjonskloss str. 2
257110	318750210	Trekk sidestøtte str. 1, sort
257111	318750220	Trekk sidestøtte str. 2, sort
285790	31872023-kit	Avstandstykker med bolt, kit til hoftestøtter
162461	318775317	Fotstøttestang, lengde 21 cm
162462	318775318	Fotstøttestang, lengde 28cm
162463	318775319	Fotstøttestang, lengde 34 cm
285805	318750140-S	Forhjul 7" sort massivt
285814	313005070	Hjul Ø29 PUR quick release
257096	31113790	Fjæring
257097	318776149	Kit ettermontering sentralbrems
285841	315087040	Låsehåndtak kjørebøyle nedre del
285821	310235073	Kabelgjennomføring med talkum
285820	315002995	Kabel setetilt
285818	3176231	Håndtak tilt in space
285831	315087037-1	Kjørebøyle nedre del, venstre side
285830	315087038-1	Kjørebøyle nedre del, høyre side
285832	315087036-1	Kjørebøyle øvre del str. 1
285833	312207040	Kjørebøyle øvre del str. 2
285850	318711220	Sete str. 1 uten trekk
257099	318712220	Sete str. 2 uten trekk
233723	318750514	Pute sett str. 1 grå komplett
257102	318750524	Pute sett str. 2 grå komplett
230526	318740110	Kalesje str. 1 sort
237286	318740120	Kalesje str. 2 sort
257105	318740230	Hoftestøtter str. 1 faste
232602	318740240	Hoftestøtter str. 2 faste
162432	318720301	Sidestøtter str. 1
162433	318720302	Sidestøtter str. 2
231804	318740810	Nakkepute str. 1 sort
232538	318740820	Nakkepute str. 2 sort
285855	318720405	Setekile en størrelse
189830	318720141	Regntrekk str. 1
189831	318720142	Regntrekk str. 2
162443	318720600	Kurv en størrelse



“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter.”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Vanemveien 1, 1599 Moss
Tlf 815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com
etac.no

 **etac**[®]
Creating Possibilities