


Leglifter

Bruksanvisning

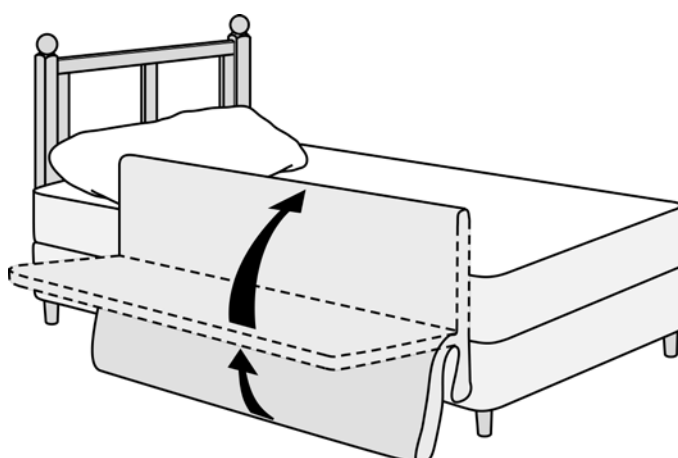

Norsk

Simple solutions for everyday independence

Tiltenkt bruk


Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health AirFlo 12-kompressoren.

LES de separate instruksjonene for AirFlo 12-kompressoren før du bruker Leglifter. Ved riktig vedlikehold kan Leglifter brukes uten problemer i mange år.




ADVARSLER

- Pass på at du har lest og forstår denne bruksanvisningen og den separate bruksanvisningen for AirFlo 12-kompressoren før utstyret tas i bruk
- Bruk kun lufttilførsel fra Mangar Health til å blåse opp Leglifter.
- Påse at Leglifter ikke kommer i kontakt med skarpe gjenstander.
- Påse at AirFlo 12-kompressoren, luftslangen og håndkontrollen er plassert slik at de ikke kan snubles over.
- Airflo 12-kompressoren må ikke brukes i nærvær av brannfarlige anestesigasser blandet med luft, oksygen eller dinitrogenoksid (lystgass), da disse blandingene kan danne et antennelig miljø som medfører mulighet for brann eller til og med eksplosjon i nærvær av en gnist.
- Påse at AirFlo 12-kompressoren, håndkontrollledningen og luftslangen ligger slik til at man unngår fare for snubling eller kvelning når utstyret er i bruk.
- Ikke la barn leke med Leglifter eller AirFlo 12, da drift av utstyret i en ukontrollert eller uovervåket situasjon kan føre til personskade og/eller skade.

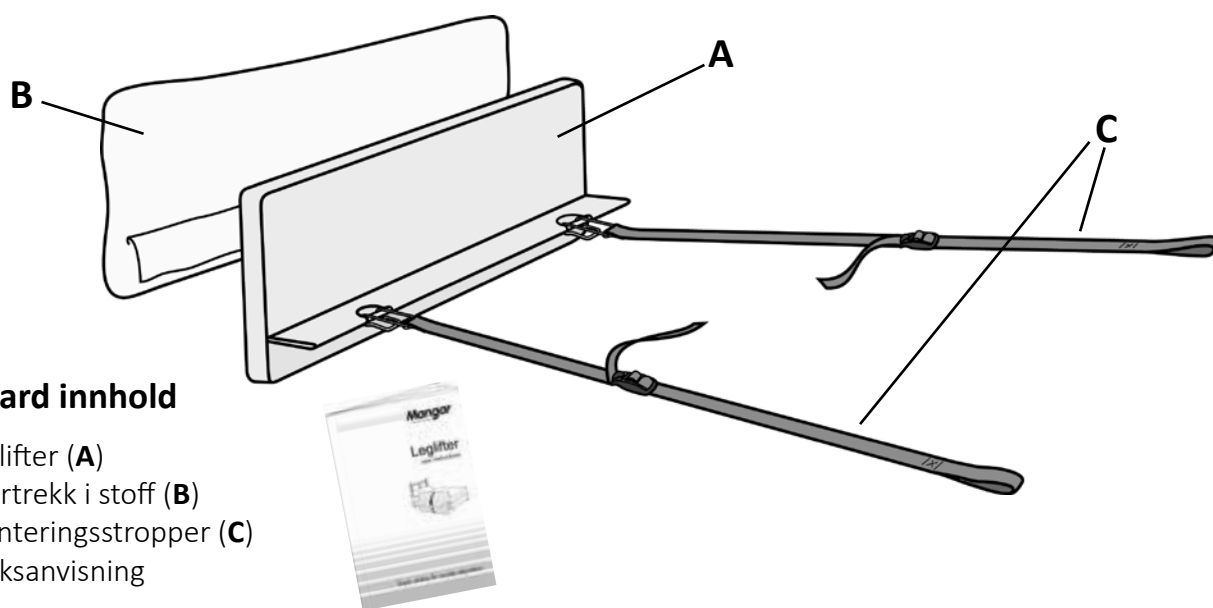

Standard innhold


- 1 x Leglifter (A)
- 1 x overtrekk i stoff (B)
- 2 x monteringsstropper (C)
- 1 x bruksanvisning

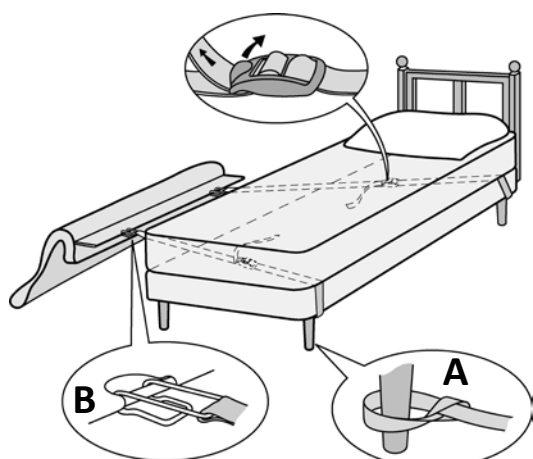

1


Standard monteringsanvisninger

- Fest enden av hver stropp rundt sengebene, -hjulene eller-rammen på motsatt side av sengen (A fig. 1), og før stroppene under madrassen.
- Fest kroken på hver stropp på Leglifter-klaffen (B fig. 1), og plasser Leglifter langsmed sengen, klar av hindringer, f.eks. nattbordet.

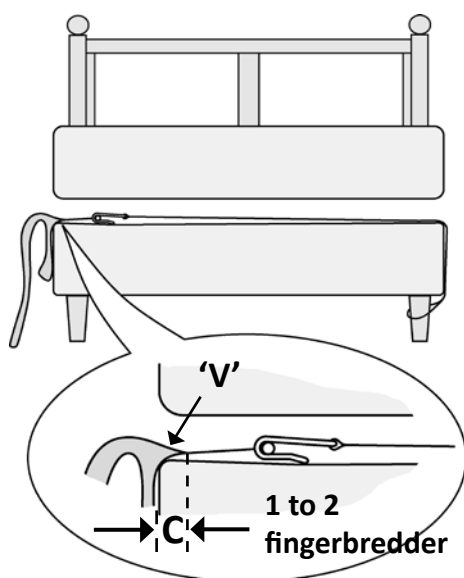

2

- Stram stroppene for å trekke enden på klaffen («V»-en på Leglifter når den er uten luft) ca. 1–2 fingerbredder under madrassen (C fig.2).

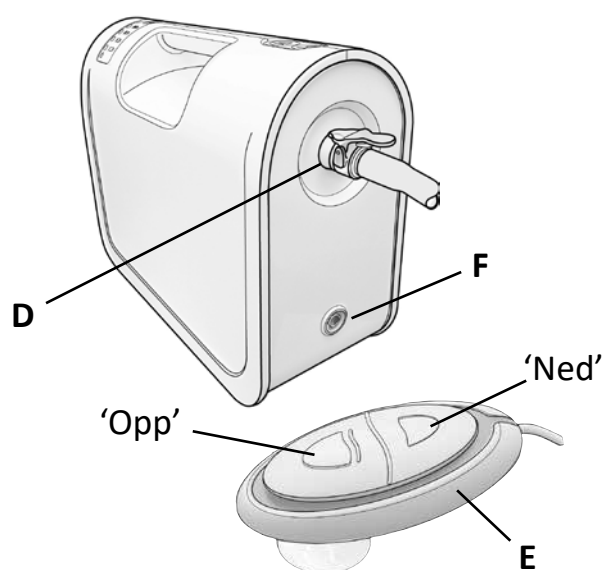

3

- Koble luftslangen på Leglifter til luftuttaket på AirFlo 12 (D fig. 3).
- Koble håndkontrollen (E fig. 3) til håndkontrolluttaket (F fig. 3).
- Trykk på «Opp» på håndkontrollen, og kontroller at Leglifter blåses opp helt til den står loddrett mot madrassen. Stram stroppene mer om nødvendig.

MERK: Når den er ferdig justert, skal kanten på klaffen («V»-en på Leglifter når den er uten luft – fig. 2) være ca. 1–2 fingerbredder fra kanten på sengerammen/madrassen. Dette vil variere i henhold til sengetypen, f.eks. divan, fjæret divan, seng med smal ramme.

- Plasser AirFlo 12-kompressoren ved siden av eller under senga, slik at den ikke er i veien.

Monteringsanvisninger (pleiesenger)

Den fleksible konstruksjonen til en Leglifter uten luft gjør den ideell for de fleste pleiesenger. Følg disse retningslinjene nøye for å unngå at Leglifter setter seg fast i bevegelige deler på sengen.

- Ta madrassen ut av sengen.
- Hev og senk ryggstøtten og benstøtten på sengen for å finne de beste posisjonene for stroppene, slik at de ikke gnager / blir skitne.
- På motsatt side av sengen fra der Leglifter skal monteres fester du løkken på hver stropp til den indre rammen, som vist (A fig. 4). **MERK:** Slå stroppen rundt rammen flere ganger for å gjøre stroppen kortere, slik at justeringsspennen ligger nær sengens midtlinje.

ADVARSEL: Når Leglifter monteres på en seng med hev/senk-funksjon, må du sikre at stroppene er festet til rammen som heves og senkes.


- Hekt de to stroppene på klaffen til Leglifter, som vist i (B fig. 4), og dra i stroppen ved justeringsspennen for å trekke «V»-en på den tomme Leglifteren inn over sengerammen og under madrassen med ca. 1–2 fingerbredder (C fig.5).
- Hev og senk ryggstøtten og benstøtten på sengen, og kontroller at stroppene ikke hindrer sengens funksjoner.
- Legg på plass madrassen.
- Koble Leglifter til AirFlo 12-kompressoren. Juster ryggstøtten og benstøtten slik at sengen er vannrett, og test at Leglifter blåses opp slik at den står loddrett mot madrassen. Stram stroppene ytterligere hvis nødvendig. Når den er ferdig justert, skal kanten på klaffen sitte på rammen (under madrassen) ca. 1–2 fingerbredder fra rammen.

MERK: Vanligvis skal Leglifter betjenes når alle sengedelene er i vannrett stilling. Dersom det er nødvendig, kan ryggstøtten løftes opp til 45° for å holde overkroppen stabil mens bena løftes opp.

ADVARSLER:

- Ikke bruk Leglifter når sengens benstøtte er hevet.
- Ikke hev sengens benstøtte når Leglifter er oppblåst.
- Slipp alltid ut luften av Leglifter etter at bena har blitt løftet opp på sengen.

MERK: Der det er montert, må ethvert integrert sengegjerde på den siden av sengen der Leglifter skal brukes, fjernes for at Leglifter skal kunne monteres og brukes.

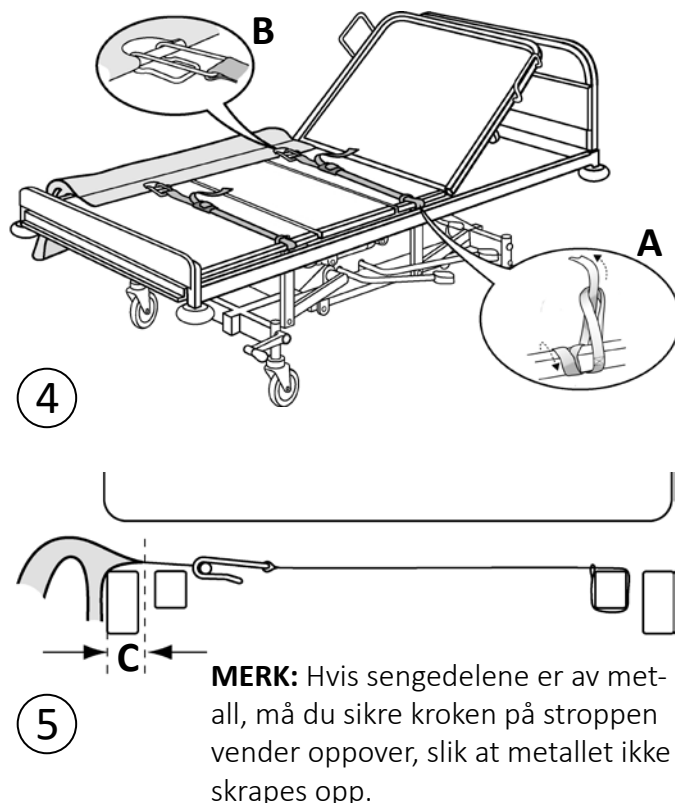



6


Bruksinstruksjoner

- Sett deg på sengen der du pleier, så langt oppå sengen som mulig. Plasser bena mot foten av sengen så langt som mulig (fig. 6). Bruk om mulig den ene armen til å støtte deg som vist, til du er klar til å legge deg ned. Noen foretrekker å bruke en sengespak til dette.




7

- Trykk «Opp» på håndkontrollen for å løfte bena opp i sengen. Slipp «Opp»-knappen når som helst for å stoppe, og juster posisjonen din som nødvendig (fig. 7).

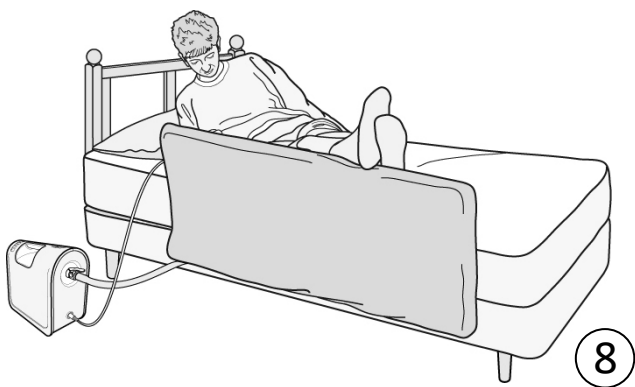

8

- Hev Leglifter helt opp, slik at bena kan gli langs puten og forsiktig ned i sengen (figurene 8 & 9).

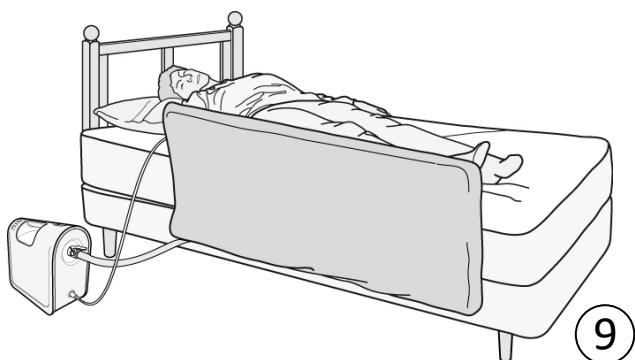

9

- Slipp luften ut av Leglifter ved å holde «Ned»-knappen i noen sekunder. Slipp knappen, og Leglifter fortsetter å slippe ut luft på egen hånd.

Rengjøring

Regelmessig rengjøring

- Fjern overtrekket og blås opp Leglifter. Vask med svamp, og bruk et ikke-slipende, flytende rengjøringsmiddel eller desinfiseringsmiddel, og tørk godt. **Må ikke tørkes med varmluft.**
- Overtrekket kan maskinvaskes på opptil 40 °C. Det kan tørkes i tørketrommel på lav varme, og strykes på middels varme. Må ikke tørrenses eller utsettes for blekemiddel.

Desinfeksjon

- Overtrekket må fjernes og Leglifter må være helt oppblåst. Leglifter må rengjøres med rengjøringsmiddel og vann, og må deretter desinfiseres med en løsning på 1:10 med flytende blekemiddel og vann (1 del blekemiddel i 10 deler kaldt vann). La løsningen være på Leglifter i ca. 10 minutter før du vasker den av grundig med rent, kaldt vann. **Må ikke tørkes med varmluft.**

Oppbevaring

Påse at Leglifter er helt tørr før oppbevaring. Oppbevar uten luft i Leglifter.

Vedlikehold

- Sjekk luftslangen regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
- Sjekk monteringsstroppene regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
- Vask overtrekket regelmessig, og la det tørke fullstendig før det tas på.


Vi anbefaler at Leglifter undersøkes grundig regelmessig (ikke lenger enn 12 måneder mellom hver gang).

Spesifikasjoner

(Oppblåst) 124cm x 57cm x 10cm

Maks. lufttrykk: 0,35 bar

Maks. temperatur: 50°C

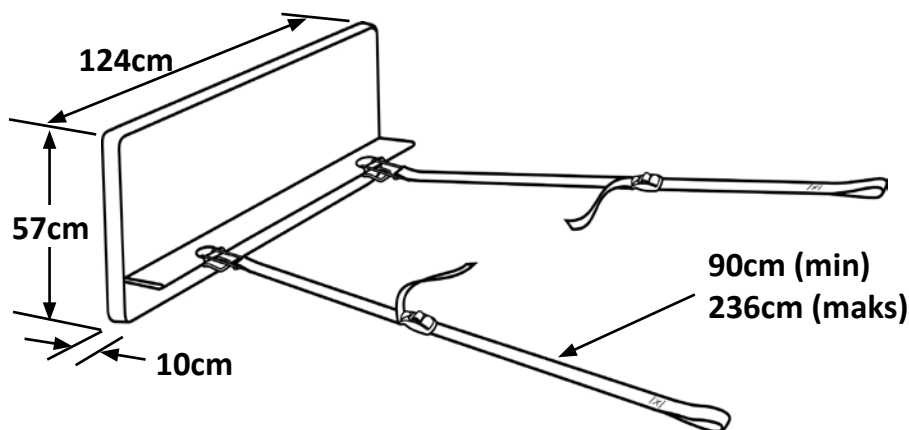

Garanti

Det gis garanti mot defekter i materialer og utførelse, og omfatter stykket, deler og arbeid. Garantien er ikke gyldig i tilfelle ventelig slitasje, overlagt skade, vanlig forsømmelse, feil bruk eller uautorisert endring eller reparasjon av ukyndige personer.

Følgende uttalelser påvirker ikke kundens lovfestede rettigheter. Dette produktet selges i den forståelse at i tilfelle defekter i utførelse eller materiale vises innen garantiperioden, vil defekten bli utbedret gratis forutsatt at:

- (a) Det tilveiebringes rimelig bevis (f.eks. innkjøpsfaktura, følgeseddel) for at kravet fremlegges innenfor garantiperioden.
- (b) Defekten kan ikke tilskrives utilsiktet skade (enten under transport eller på annen måte), misbruk eller uautorisert reparasjon.

Leglifter-serienummer:


Kjøpsdato:

Faktura-/følgrebrevsnummer:



Mangar International Ltd, som handler som Mangar Health, forbeholder seg retten til uten varsel på forhånd, å endre produktspesifikasjoner og/eller informasjonen som finnes i dette dokumentet.

Simple solutions for everyday independence

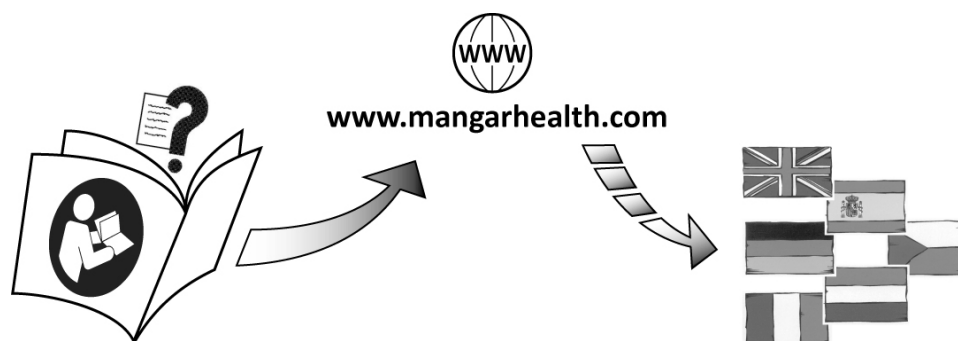

Mangar
HEALTH

Mangar International Ltd

Presteigne, Powys, Wales, LD8 2UF
United Kingdom

Tel: +44 (0)1544 267674

Fax: +44 (0)1544 260287

E-mail: sales@mangarhealth.com

www.mangarhealth.com

MI0421 Issue 1
(06/17)