

my-own-voice



Personlig og unik talesyntese for bruk med talehjelpemiddel

Stemmen er en viktig del av personligheten. En del vi gjerne ønsker å beholde ved en diagnose som indikerer tap av taleevnen.

For å bistå smed dette har Acapela Group laget tjenesten my-own-voice. Denne tjenesten lar personer som står i fare for å miste stemmen sin kunne lagre den som en talesyntese, slik at den senere kan benyttes med en kommunikasjonsenhet. Den helt nye "voice friend"-tjenesten lar mennesker spille inn stemmen sin, og gjøre den tilgjengelig for talehemmede brukere.



Om tjenesten my-own-voice:

Tjenesten my-own-voice håndterer to grunnleggende egenskaper for hvordan vi definerer oss selv:

- **Bevare identiteten:** Stemmen er en viktig del av identiteten vår. Ved å beholde sin egen stemme som en talesyntese, kan vi bevare den både for oss selv og for andre.
- **Være unik:** Vi blir gjenkjent som unike individer ved å bruke en tekst-til-tale stemme som er unik, og som ikke brukes av noen andre.

Tjenesten my-own-voice er beregnet på mennesker som står i fare for å miste sin egen stemme. De får muligheten til å bevare sin egen stemmeidentiteten med en tekst-til-tale stemme som fanger stemmens karakteristikk, og som enkelt gjenkjennes.

For å lage en tekst-til-tale stemme må brukeren lage en stemmebank. Dette gjøres hjemme på en egen PC, gjennom et brukervennlig grensesnitt. Stemmebanken består av opptak av omtrent 1 500 setninger i et valgt språk, blant de 13 språkene som for tiden støttes.

Resultatet av tekst-til-tale stemmen kan benyttes på Windows, Android og iOS, samt på de fleste talegenererende enheter tilgjengelig på markedet. Tjenesten my-own-voice har inngått samarbeid med aktører som AssistiveWare, Saitillo, Smartbox og Tobii dynamox.



Saitillo

Smartbox

tobii dynamox

Slik lages en stemme med my-own-voice:

Prosessen i fire trinn:



De tre første trinnene (opprette en konto, ta opp stemmen og lytte til tale-til-tekst resultatet gjennom et nettbasert type & talk-grensesnitt) er gratis.

Brukeren oppfordres derfor til å starte opptakene så snart som mulig, noe som gjøres helt uten forpliktelser. Dette er spesielt viktig ved en diagnose som indikerer stemmetap, siden stemmen bør tas opp så snart som mulig. Senere kan man ta en beslutning om kjøp og valg av talehjelpemiddel.


Brukeren kan gjøre et kjøp hvis og når stemmen trenger å benyttes. Da oppgis hvilken enhet stemmen skal benyttes på, og en korresponderende pakke blir laget og levert.

Søknader sendes gjennom kontaktskjemaet på www.acapela-group.com.

Status og språk:

Tjenesten my-own-voice er relativt ny på markedet og i hurtig vekst. Tjenesten kan benyttes til å lage alle stemmetyper, inkludert barnestemmer.

Tjenesten my-own-voice er tilgjengelig på 13 språk: Engelsk (USA), engelsk (Storbritannia), engelsk (Australia), nederlandsk, nederlandsk (Belgia), fransk, fransk (Canada), tysk, italiensk, norsk, spansk, spansk (Nord-Amerika) og Svensk.

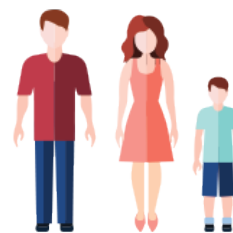

Launched in 2015

200+ accounts opened

50+ voices created

Programmet “voice friend”



Programmet voice friend er laget for å lage en talebank med syntetiske stemmer. Herfra kan talehemmede brukere velge en stemme og gjøre den til sin egen, basert på smak, regional dialekt eller andre egenskaper.

For å lage denne stemmebanken har vi bedt mennesker i alle aldre og med ulike språk om å lage en stemme med my-own-voice, og gjøre den tilgjengelig for talehemmede brukere gjennom voice friend-programmet.

Stemmebank

BLI EN VOICE FRIEND!

kontakt oss i dag på www.acapela-group.com