



# R82 Scallop

Lett, bærbart og fleksibelt sitteskall



# Innhold

R82 Scallop.....	3
En størrelse til deg, en størrelse til alle.....	4
Hvorfor skal du velge Scallop?.....	4
Hva kan Scallop .....	6
Passer Scallop til meg? .....	7
Det skal være lett.....	8
Slik måler du bruker for å kunne velge og bestille Scallop i riktig størrelse.....	10
Kristoffers historie.....	11
Scallop og Kristoffer.....	12
Jonahs historie.....	15

ENKEL. BÆRBAR. ALLSIDIG.  
DET HANDLER OM Å KUNNE VÆRE MED





# R82 Scallop

Forestill deg at hele familien sitter sammen.

Vi kjenner alle den gode følelsen av å hygge seg med venner og familie, uansett om det er ved spisebordet eller på skolen. Dessverre kan det være vanskelig å finne en sitteplass til et barn med spesielle behov. Det er her Scallop kommer inn. Det er et unikt sitteskall som fokuserer på tre faktorer: ENKELHET, BÆRBARHET og ALLSIDIGHET. Det er en god løsning for dem som trenger ekstra støtte når de sitter på gulvet eller på en stol. Setet er lett og smart og gjør det mulig for barnet å delta i hverdagsaktiviteter med hele familien. Scallop kan brukes til forskjellige aldersgrupper og til et mange forskjellige aktiviteter.

scallop  
by RBZ



# En størrelse til deg, en størrelse til alle!

For å dekke alles behov har vi utviklet et sete som passer alle. Scallop kommer i fire størrelser, i to utgaver og i fire farger som er vendbare.

HVILKEN PASSER TIL DIN STIL?



## Hvorfor skal du velge Scallop? Fordi den er ...

- Lett
- Bærbar (lav vekt)
- Allsidig
- To i étt-produkt – kan brukes på gulvet eller i en stol
- Brukervennlig
- Enkel å legge sammen uten bruk av verktøy
- Puten kan enkelt tas av for rengjøring



DU KAN TA MEG MED OVERALT

LEGG I HÅNDKLE OG SOLKREM OG TA MEG  
MED PÅ STRANDEN



JEG VEIER  
UNDER 2 KG

HUSK Å TA MED SØSKNENE MINE

DEN SKAL KUNNE BÆRES  
... LAV VEKT OG LETT Å TA MED





# Hva kan Scallop?

Scallop er utviklet i samarbeid med brukere, familier og fagfolk med fokus på å:

- Gjøre det mulig å sitte med minimal støtte
- Gi brukeren mulighet for å sitte ved spisebordet i en vanlig stol
- Forhindre at brukeren sitter i W-stilling
- Gi sensorisk stimuli
- Fremme en bedre sitteposisjon
- Øke den posturale kontrollen
- Støtte den sittende stilling ved tidlig tiltak
- Folde seg rundt overkroppen når brukeren lener seg tilbake, noe som gir stabilitet og trygghet
- Stimulere den sittende balansen
- Fremme aktiv deltagelse
- Setet kan lett håndteres og tas med takket være bærestropper og lav vekt.




# Passer Scallop til meg?

Dette produktet er velegnet til barn med **GMFCS NIVÅ 1-3\*** ; barn som har bruk for litt ekstra hjelp når de sitter på gulvet eller på en stol. Scallop er også fantastisk til barn med innlæringsvansker, som f.eks autisme, da setet gir følemessig stimulering, noe som bidrar til å berolige dem, slik at de kan slappe av og konsentrere seg når de sitter i setet. Takket være den ekstremt lave vekten kan Scallop tas med overalt, helt problemfritt. Scallop er den perfekte og enkle, bærbare løsningen, uansett om dere skal på piknik i parken, i klasserommet, besøke bestemor eller på en fin restaurant.


"SCALLOP, PERFEKT TIL TIDLIG TILTAK"




\* GMFCS (Gross Motor Function Classification System; klassifiserings-system til bestemmelse av motorisk bruttofunksjonsevne)

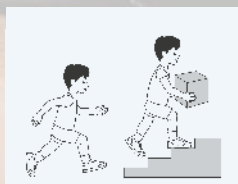

Nivå I

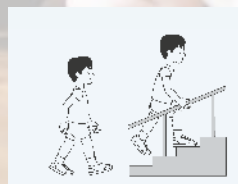

Nivå II

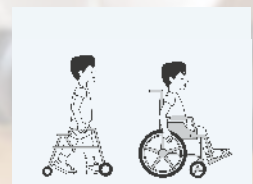

Nivå III




# Det skal være lett


Scallop er utviklet med fokus på at det skal være lett og ukomplisert. Setet består av et fleksibelt skall som gir stabilitet uten å forhindre bevegelse, og holdes sammen med borrelås. Scallop leveres med en behagelig og smart pute, to stropper, to bærehåndtak, et belte og en setebeskytter.

DET ER DA LETT!

STØRRELSE 1 OG 2

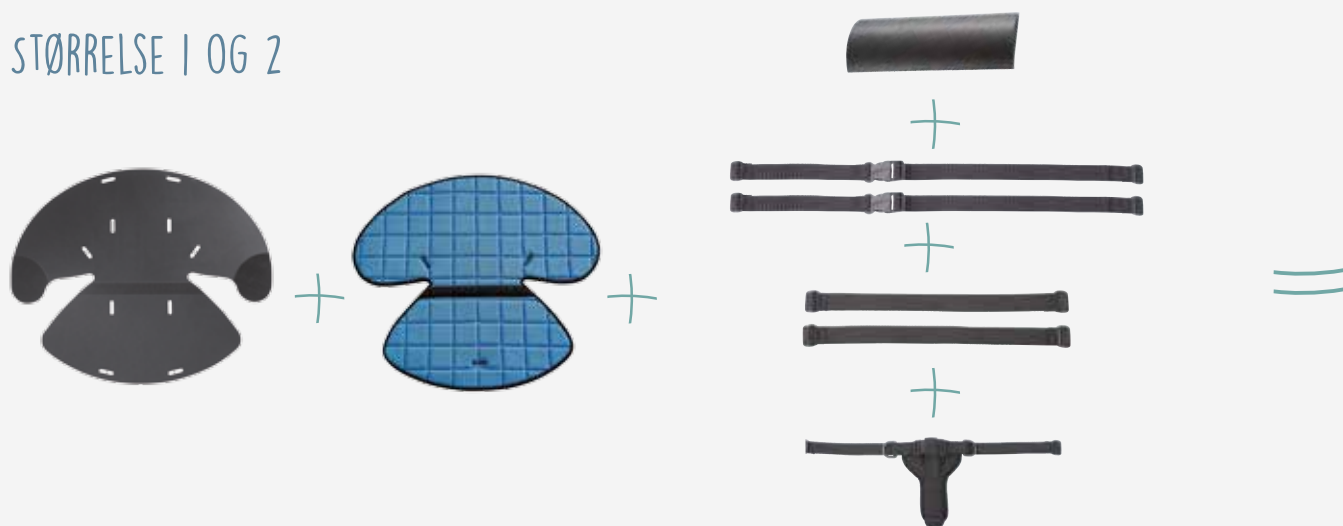

STØRRELSE 3 OG 4

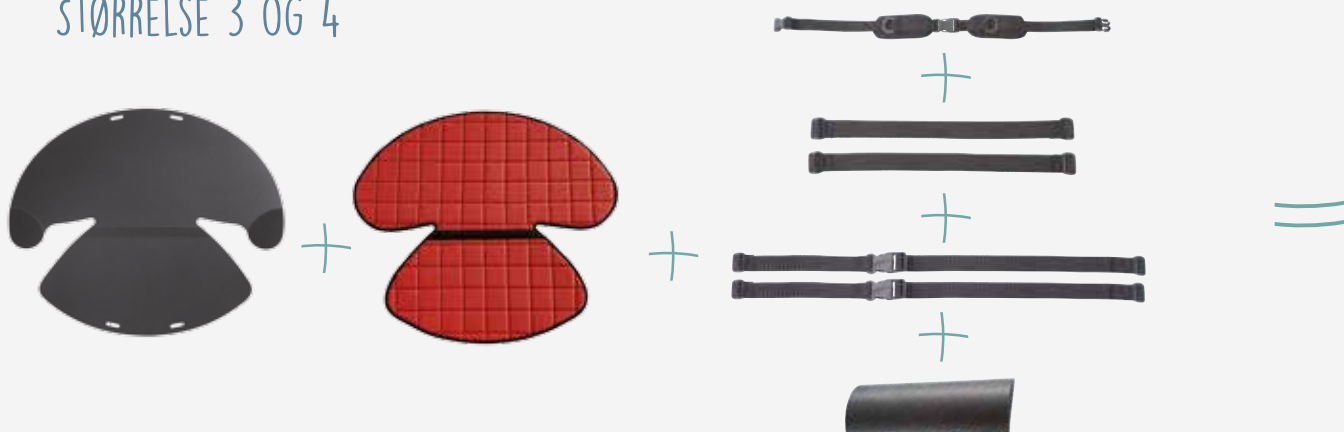




## IKKE NOE BESVÆR, IKKE NOE TULL, IKKE NOE STRESS, BARE ...

- Borrelås til justering av skallet
- Avtagbar pute gir enkel rengjøring
- 3-punktssele til størrelse 1 og 2
- 2-punktssele til størrelse 3 og 4
- To festestropper til stol
- To bærehåndtag, setet er lett å transportere
- Seteputen gir ekstra komfort.



# Slik måler du brukeren for å kunne velge og bestille Scallop i riktig størrelse

Der er fire størrelser å velge mellom. For at du skal få mest mulig glede av din Scallop er det viktig at du velger riktig størrelse. Bruk oversikten for å finne brukers mål, slik at du finner den størrelsen som passer best.

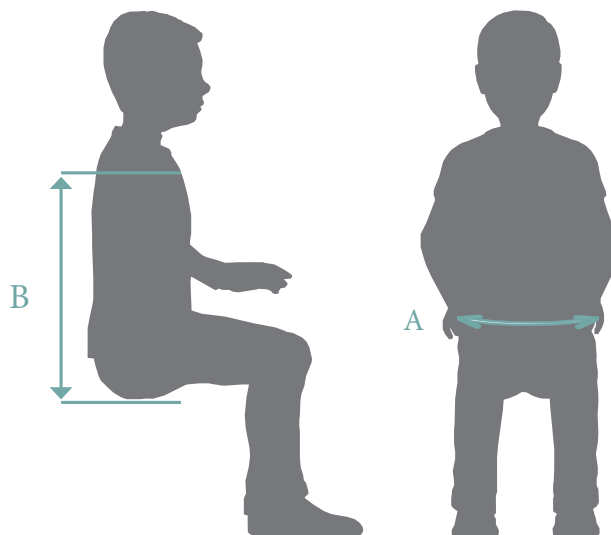

BRUKERENS MÅL	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4
Hoftebredde (A)	15-21 cm	21-24 cm	24-27 cm	27-38 cm
Rygghøyde (B)	33-38 cm	38-42 cm	42-47 cm	47+ cm
Maks. brukervekt/ belastning	15 kg	22 kg	29 kg	70 kg
<b>BESTILLING*</b>				
Art.nr. for rød/blå pute	31991051-1CR21F	31991051-2CR21F	31991051-3R21F	31991051-4R21F
Art. nr. for grå/grønn pute	31991051-1CR43F	31991051-2CR43F	31991051-3R43F	31991051-4R43F
HMS-nr.				



Putene kommer i 2 fargekombinasjoner: Rød på den ene side og blå på den andre - eller grønn på den ene side og grå på den andre. Snu puten for ønsket farge.





# Kristoffers historie

Kristoffer er 10 år og har diagnosen spastisk lammelse. Til daglig kommer han seg rundt i sin aktive rullestol. På skolen og hjemme sitter han enten i rullestolen eller en kontorstol. Som de fleste andre barn elsker han å leke med sin lillesøster Kristine og sin beste venn Daniel. Noen av hans yndlingsaktiviteter er å spille Playstation, ballspill og mye mer. Kristoffer sliter når han skal sitte på gulvet, og han har aldri kunnet sitte ved bordet på en vanlig stol. Kristoffer og hans familie lette etter et sete som kunne støtte hans sittebehov, både på gulvet og på en stol.



"DET HER ER FØRSTE GANG,  
JEG SITTER VED ET BORD I  
EN VANLIG STOL."

*Kristoffer, 10 år, har spastisk lammelse*

# Scallop og Kristoffer

Til vår glede fikk vi lov til å besøke Kristoffer på skolen. Kristoffer er rullestolbruker og han har ofte vanskeligheter med å sitte på gulvet. Han pleier derfor å lene seg fremover med rund rygg for å holde balansen, og det er ekstremt vanskelig for ham å gjøre noe med hendene uten å falle bakover.

Under vårt besøk spilte vi ball med Kristoffer mens han satt på gulvet uten støtte. Dessverre kunne han ikke ta tak i ballen uten å falle bakover når han løftet armene for å gripe ballen.

"KRISTOFFER ER NORMALT VELDIG NERVØS I FORHOLD TIL NYE TING. JEG ER OVERRASKET OVER AT HAN OMGÅENDE VAR SÅ TØFF MED DETTE PRODUKTET!"

*Kristoffers terapeut*

Etter det tilbød vi Kristoffer å prøve å leke samme lek med å ta tak i ballen mens han satt i en Scallop. Kristoffer satt i en Scallop i størrelse 3, og resultatene var fantastiske! Ikke nok med at han nå kunne ta tak i ballen; han kunne også kaste den tilbake. Kristoffer satt behagelig i Scallop, og han hadde det veldig gøy med ball-leken!

Scallop ga Kristoffer den støtten han hadde bruk for uten å hindre ham i å bevege seg fritt, mens han satt i produktet. Kristoffer er normalt veldig nervøs i forhold til nye ting, men Scallop ga ham selvtilliten til å strekke seg etter, og gripe ballen uten at han trengte å være redd for å falle bakover. Og han gav høylytt uttrykk for sin begeistring over Scallop.

Scallop gav Kristoffer selvtilliten til å for første gang leke uhindret på gulvet!



"KAN JEG TA  
DEN MED HJEM?"

*Kristoffer*

"KAN JEG LENE MEG  
TILBAKE I DEN DER?"

*Kristoffer*





"DET ER FØRSTE GANG,  
KRISTOFFER HAR SITTET VED  
BORDET SAMMEN MED OSS  
UTEN RULLESTOLEN"

*Maria, Kristoffers mor*



"DEN ER MORSOM Å SITTE I, OG DET ER OGSÅ  
GØY FORDI DEN BEVEGER SEG LITT"

*Kristoffer*



Senere møtte vi Kristoffers familie: hans mor, søsteren Kirstine og hans skolekamerat Daniel. Hele familien tok noen Scallops med ut for å prøve dem!

Først var de på restaurant, hvor Kristoffer for første gang kunne komme ut av rullestolen og sitte i øyehøyde med resten av familien rundt bordet. Det var et fantastisk og følelsesladet øyeblikk for både Kristoffer og hans mor. For første gang fikk Kristoffer friheten og selvtilliten til å kunne spise selv og ha det gøy sammen med de andre ved bordet.

Fordi Scallop veier så lite, var det lett for Kristoffers mor å henge sittekallet over rullestolens håndtak og bevege seg rundt.

"DET ER SÅ DEILIG AT KRISTOFFER SITTER I ØYEHØYDE MED OSS ANDRE RUNDT BORDET!"

*Maria, Kristoffers mor*

Deretter nøt hele familien solskinnen i parken, hvor de spiste is og koste seg. Hele familien kunne sitte i hver sin Scallop og slappe av, og Kristoffer kunne spille ball med Daniel og Kirstine uten å være redde for å falle bakover.

"DEN ER VIRKELIG GOD Å SITTE I, OG JEG LIKER AT JEG KAN SITTE OG LEKE MED BROREN MIN."

*Kirstine, 7 år, Kristoffers søster*



"DET ER NOEN GANGER VANSKELIG Å LEKE SAMMEN, MEN DET KAN VI MED SCALLOP-STOLEN."

*Daniel, 8 år, Kristoffers og Kirstines venn*



# Jonahs historie

"SCALLOP TAR EN TUR DOWN UNDER TIL AUSTRALIA"

Jonah er 5 år og er diagnostisert med alvorlig autisme og hypermobilitet. Han er veldig aktiv og løper alltid rundt med sitt yndlingsleketøy: en iPad. Det kan være litt av en utfordring å få ham til å sitte stille i en god stilling; han er sansesøkende og elsker å føle seg trygg. Da vi testet Scallop med ham, gjorde vi det de to steder han elsker: på lekerommet (hvor alle lekene er) og på kjøkkenstolen, hvor han spiser alle sine måltider.

Når Jonah leker på lekerommet sitter han ofte i sofaen eller på gulvet i en "W-sittstilling" (se bildene), og det er ikke godt for hans lår, hofter og knær. På grunn av hans svake muskler og hypermobilitet har han vanligvis en dårlig kroppsholdning, og det er vanskelig å korrigere fordi han konstant beveger seg rundt.

Så snart vi satte Jonah i Scallop virket han veldig fornøyd og veltilpass. Han ville slett ikke ut av den igjen, og han ble faktisk litt sur da vi åpnet beltet til den. Han satt veldig godt i den og likte godt følelsen av at sitteskallets sider formet seg rundt ham, fordi det fikk ham til å føle seg trygg og veltilpass.

DET ER FANTASTISK, AT SCALLOP ER SÅ LETT Å BÆRE, FOR DA KAN VI BARE TA DEN MED SÅ JONAH OGSÅ KAN SITTE GODT. DET ER EN FANTASTISK HJELP NÅR VI SITTER OG SPISER VED BORDET, OG DET FÅR HAM TIL Å FØLE SEG TRYGG.

## VI ELSKER ALLE SAMMEN SCALLOP!

*Rebecca og Tim, Jonahs og Samanths foreldre*

Når Jonah sitter på en stol mens han spiser sitter han alltid på knærne eller beveger seg konstant rundt. Det er ofte vanskelig å holde ham i ro, og han reiser seg ofte opp fra stolen hvis han blir distraheret. Da vi plasserte ham i Scallop satte han med en gang beinene ned og ble sittende glad og tilfreds i en god stilling, mens han spilte på sin iPad.

Under måltidene er det en perfekt løsning fordi han kan sitte stille og fornøyd i stedet for hele tiden å løpe vekk.

Det gir også en fin mulighet for at hans søster Samantha på åtte år kan sitte sammen med ham og leke på iPad'en. Jeg kan se mange muligheter med Scallop til glede for Jonah, og også for Samantha. Jonah hopper og løper omkring, og det er derfor vanskelig for Samantha å få litt kvalitetstid med ham. Scallop kan brukes over hele huset mens de leker og den er også til stor hjelp når vi spiser.



GIR STABILITET UTEN Å  
HINDRE BEVEGELSE



*“Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv  
og følge sine drømmer uavhengig av fysiske omstendigheter.”*



*For nyheter og løpende produktoppdateringer -  
se **www.etac.no***