



StimuLITE® SMART setepute er en pute for alle rullestoler. Det er lett å løfte på grunn av lav vekt, og er bare 5 cm høy. Brukeren sklir ikke på puten, noe som letter kjøring av rullestolen. Puten er enkel å håndtere og lett å holde rent i at det er vasket i maskin på 60 ° C i 30 minutter. Puten ligger still i rullestol takket være borrelås på trekkets underside. Trekket har også et bærehåndtak og et grep ring på glidelåsen som forenkler å sette på trekket. Du får en kjølig og luftig sitteopplevelse, og det passer godt for personer med sensitiv hud. Putens viktigste kjennetegn er:

- Optimal trykkfordelingLuft sirkulerer som gir et tørt og kjølig sitte
- Svært stabil takket være celle tilslutning (anisotrope)
- Nesten vedlikeholdsfritt, kan vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel
- Ingen endring i volum eller punktering uavsett om puten er tørr eller våt, kald eller varm
- Vekt ca 1 kg, høyde 5 cm
- Ingen løse deler

StimuLITE® SMART rullestol pute er et forebyggende antidecubitusdyna med en myk toppskikt for følsom hud. Puten er luft gjennomtrengelig, og har også en gjennomtrengelig trekk. Alle StimuLITE® putene er laget av miljøvennlig termoplastisk polyuretan i bikubestruktur. Materialet har en åpen cellestruktur som er hul og tillater luft å sirkulere og fuktighet å fordampe. Puten utmerket pusteevne, sammenlignet med de andre sitteunderlag, bidrar til å holde huden kjølig og tørr. Puten er også mulig å bevege seg med når man vil sitte i de andre stolene i lang tid, for eksempel, buss eller fly seter. Det er også godt egnet til bruk i varmt eller kaldt vær fordi dens egenskaper ikke endres. Hvis du ønsker å bruke den i svømmebassenget eller på stranden er fine. Det blir våt "slår" du vann ut av cellene og tørk med et håndkle for å sitte på puten igjen. Det kan være betryggende å vite at det er punkteringsfri og at den har ingen løse deler som kan komme unna.


Total Pressure Management™

Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår.

StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikak-estruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.


Puster og fordamp fuktighet

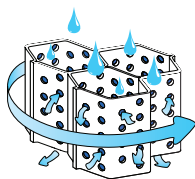

Komplett ventilasjonssystem

Trykkavlastning og sidestabilitet


StimuLITE® sitteputen SMART består av to lag med ulik hardhet, og redusere trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdel. StimuLITE SMART sitteputen fordeler trykk fra sete- og lårknuter til mykdelene under lårene, og kan brukes og anvendes som et forebyggende tiltak mot trykksår og fuktskader. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stilling samtidig som den omfordeler trykk.

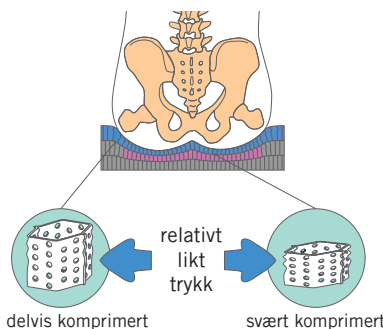

Fordeler trykk etter kroppsform

Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITEs bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

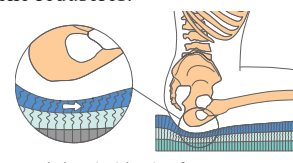

Diffus lateral skyvekraft



STIMULITE®: SMART SITTEPUTE

Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. StimuLITE® SMART sitteputen tilverkes ikke med rund bunn men er fleksibel nok til å bli brukt sammen med lettere hengekøye sete

StimuLITE® SMART Sittepute

Disse størrelse har vi på lager. Andre størrelse kan spesialbestilles uten ekstra kostnad, men med leveringstid ca 4 uker.
Maks størrelse som kan tillverkes er SMRT2020 (b51 d51 h5)


Størrelse	Pute med flat bunn						Passer alla puter	
	Pute (*)		Ekstra Cordura Trekk		Tillbehør: Ull trekk		Ekstra Inkoinlegg	
	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS.nr
b33 d41 h5	SMRT1316	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikkeln er ikke prisforhandlet med NAV	COVSMRT1316	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikkeln er ikke prisforhandlet med NAV	WCOVSMRT1316	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikkeln er ikke prisforhandlet med NAV	IN1414	207498
b36 d36 h5	SMRT1414		COVSMRT1414		WCOVSMRT1414		IN1414	207498
b36 d41 h5	SMRT1416		COVSMRT1416		WCOVSMRT1416		IN1414	207498
b36 d46 h5	SMRT1418		COVSMRT1418		WCOVSMRT1418		IN1414	207498
b38 d41 h5	SMRT1516		COVSMRT1516		WCOVSMRT1516		IN1616	207499
b38 d43 h5	SMRT1517		COVSMRT1517		WCOVSMRT1517		IN1616	207499
b38 d46 h5	SMRT1518		COVSMRT1518		WCOVSMRT1518		IN1618	207500
b38 d51 h5	SMRT1520		COVSMRT1520		WCOVSMRT1520		IN1618	207500
b41 d41 h5	SMRT1616		COVSMRT1616		WCOVSMRT1616		IN1616	207499
b41 d43 h5	SMRT1617		COVSMRT1617		WCOVSMRT1617		IN1616	207499
b41 d46 h5	SMRT1618		COVSMRT1618		WCOVSMRT1618		IN1618	207500
b41 d51 h5	SMRT1620		COVSMRT1620		WCOVSMRT1620		IN1618	207500
b43 d41 h5	SMRT1716		COVSMRT1716		WCOVSMRT1716		IN1616	207499
b43 d43 h5	SMRT1717		COVSMRT1717		WCOVSMRT1717		IN1616	207499
b43 d46 h5	SMRT1718		COVSMRT1718		WCOVSMRT1718		IN1618	207500
b43 d51 h5	SMRT1720		COVSMRT1720		WCOVSMRT1720		IN1618	207500
b46 d41 h5	SMRT1816		COVSMRT1816		WCOVSMRT1816		IN1816	207501
b46 d43 h5	SMRT1817		COVSMRT1817		WCOVSMRT1817		IN1816	207501
b46 d46 h5	SMRT1818		COVSMRT1818		WCOVSMRT1818		IN1818	207502
b46 d51 h5	SMRT1820		COVSMRT1820		WCOVSMRT1820		IN1818	207502
b51 d41 h5	SMRT2016	COVSMRT2016	WCOVSMRT2016	IN1816	207501			
b51 d46 h5	SMRT2018	COVSMRT2018	WCOVSMRT2018	IN1818	207502			
b51 d51 h5	SMRT2020	COVSMRT2020	WCOVSMRT2020	IN2020	207503			

(*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinnlegg og en vaskepåse

Tillbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilstøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vannrett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207541)

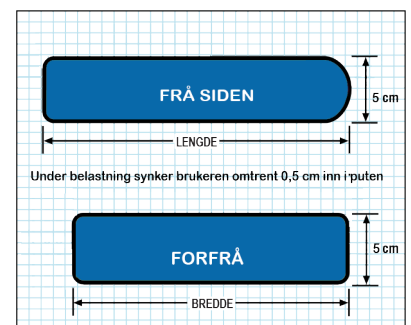

Litrapid Media AB Göteborg 2014/04 212324 Miljømerket trykksak 341 834 SMRT/NO 2017/01



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Alle StimuLITE® produkter er branntestet og godkjent i henhold til ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 og CE-merket.



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: +(47) 48 50 32 97

email: ordre@rehabshop.com

www.rehabshop.as