


StimuLITE® Silver setepute er utviklet spesielt for å forbedre sittekomfort i rullestol og deres vanlige stoler for personer med økt smerte og trykkfølsomhet. StimuLITE® Silver setepute i bikubestruktur er veldig lett (veier ca 1 kg) og er lett å bære for dem som trenger optimal trykkavlastning og komfort "på farten".

To ulike faste lag av bikakestruktur tillater sittbenknömlarna synke ned i puten. Resultatet er en tilpassning av puten til kroppen, som fører til en jevn trykkfordeling og god stabilitet for brukeren og er spesielt bra for hemplegiker og brukere som sparker seg fremover i rullestolen.

Materialet er antibakterielle og hindrer utvikling av lukt under vanlig rengjøring. Puten og trekket kan vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel. For inkontinente brukere medfølger et fukttoppsamlare som plasseres under puten inne i trekket. Både trekket og dynbasen tåle kontakt med urin.

Hovedårsaken til trykksår problemet oppstår er trykk, sjukraft og fuktighet som gjør huden skjør. StimuLITE® sølv seteputen reduserer trykkbelastning, reduserer skjærkrefter og friksjon oppstår og leder bort fuktighet som hindrer mykning av huden. De perforerte bikakeformen fremmer luftsirkulasjon avleder fuktighet. En luft gjennomtrengelig dekke med åpninger rundt sidene kompletterer putens effektive ventilasjonssystem.

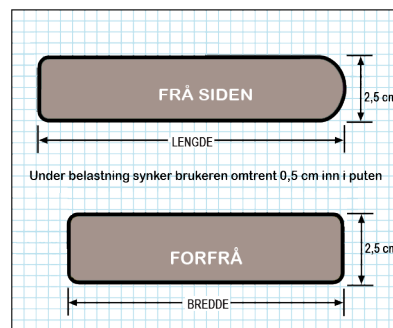

### Total Pressure Management™

#### Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppsvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår.

StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikakestruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.





Puster og fordamp fuktighet



Komplett ventilasjonssystem


#### Trykkavlastning og sidestabilitet

StimuLITE® sitteputen Silver består av to lag med ulik hardhet, og redusere trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdel. StimuLITE® Silver sitteputen fordele trykk fra sete- og lårknuter til mykdel under lårene, og kan brukes kan anvendes som et forebyggende tiltak mot trykksår og fuktskader. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stilling samtidig som den omfordeler trykk.

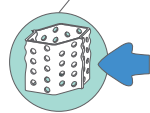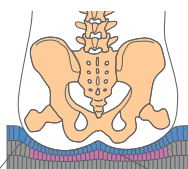

delvis komprimert

relativt likt trykk

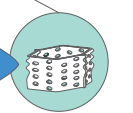


svært komprimert

Fordeler trykk etter kroppsform

#### Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITE®s bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

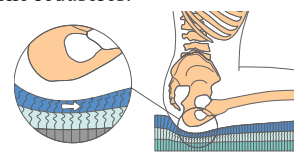

minimal skjærkraft mot venene  
Diffus lateral skyvekraft





Forst velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. StimuLITE® Silver sitteputen tilverkes ikke med rund bunn men er fleksibel nok til å bli brukt sammen med lettere hengekøye sete

## StimuLITE® Silver Sittepute

Disse størrelse har vi på lager. Andre størrelse kan spesialbestilles uten ekstra kostnad, men med leveringstid ca 4 uker.  
Maks størrelse som kan tillverkes er SI2020 (b51 d51 h5)

Størrelse	Pute med flat bunn						Passer alla puter	
	Pute (*)		Ekstra Cordura Trekk		Tillbehør: Ull trekk		Ekstra Inkoinlegg	
	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS.nr
b36 d36 h2,5	SI1414	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikkeln er ikke prisforhandlet med NAV	COVSI1414	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikkeln er ikke prisforhandlet med NAV	WCOVSI1414	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikkeln er ikke prisforhandlet med NAV	IN1414	207498
b36 d41 h2,5	SI1416		COVSI1416		WCOVSI1416		IN1414	207498
b36 d46 h2,5	SI1418		COVSI1418		WCOVSI1418		IN1414	207498
b36 d51 h2,5	SI1420		COVSI1420		WCOVSI1420		IN1414	207498
b38 d41 h2,5	SI1516		COVSI1516		WCOVSI1516		IN1616	207499
b38 d43 h2,5	SI1517		COVSI1517		WCOVSI1517		IN1616	207499
b38 d46 h2,5	SI1518		COVSI1518		WCOVSI1518		IN1618	207500
b38 d51 h2,5	SI1520		COVSI1520		WCOVSI1520		IN1618	207500
b41 d41 h2,5	SI1616		COVSI1616		WCOVSI1616		IN1616	207499
b41 d43 h2,5	SI1617		COVSI1617		WCOVSI1617		IN1616	207499
b41 d46 h2,5	SI1618		COVSI1618		WCOVSI1618		IN1618	207500
b41 d51 h2,5	SI1620		COVSI1620		WCOVSI1620		IN1618	207500
b43 d41 h2,5	SI1716		COVSI1716		WCOVSI1716		IN1616	207499
b43 d43 h2,5	SI1717		COVSI1717		WCOVSI1717		IN1616	207499
b43 d46 h2,5	SI1718		COVSI1718		WCOVSI1718		IN1618	207500
b43 d51 h2,5	SI1720		COVSI1720		WCOVSI1720		IN1618	207500
b46 d41 h2,5	SI1816		COVSI1816		WCOVSI1816		IN1816	207501
b46 d43 h2,5	SI1817		COVSI1817		WCOVSI1817		IN1816	207501
b46 d46 h2,5	SI1818		COVSI1818		WCOVSI1818		IN1818	207502
b46 d51 h2,5	SI1820		COVSI1820		WCOVSI1820		IN1818	207502
b51 d41 h2,5	SI2016	COVSI2016	WCOVSI2016	IN1816	207501			
b51 d46 h2,5	SI2018	COVSI2018	WCOVSI2018	IN1818	207502			
b51 d51 h2,5	SI2020	COVSI2020	WCOVSI2020	IN2020	207503			

(\*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinnlegg og en vaskepåse

Tillbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilstøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vannrett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207541)



Alle StimuLITE® produkter er branntestet og godkjent i henhold til ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 og CE-merket.



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: +(47) 48 50 32 97

email: [ordre@rehabshop.com](mailto:ordre@rehabshop.com)

[www.rehabshop.as](http://www.rehabshop.as)