



# Supracors 3-sone Stimulite® overmadrass

## Optimal trykkavlastning for akutt og langsiktig omsorg



### Optimal i hjellet eller i omsorgen av trykksår opp til grad 3

StimulITE® 3-SONE Overmadrass er ment å bli brukt oppå en vanlig seng madrass. Overmadrassen er konstruert i vaskbart StimulITE® Honeycomb materiale fra 100% termoplastisk polyuretan (TPU). Materialet er latex- og allergenfri. Overmadrassen leveres i et dampgjennomtrengelig, vanntett hygienetrek av vaskbare OekoTex materialer. Ideell for bruk i hjemmet eller på reise.

Overmadrassen i StimulITE® materiale er bygget av pustende og selfregulerende cellene i bikubestruktur, og består av tre sømløse sammenhengende seksjoner med forskjellige grader av fasthet tilpasset behovene til ulike kroppsdeler (hode, midtre delen, fot). Madrasskjernen består av 93% luftvolum, og bare 7% materialer. Brukerens kropp har således minimal kontakt med en fast overflate, og er for det meste ikke noe mottrykk. Kroppen opplever mindre nummenhet og smerte som ofte oppstår ved sengliggende i lange perioder.

StimulITE® madrassen er statisk og ikke i behov av motorer eller kabler og krever minimalt med service. Lett å flytte, om nødvendig. Overmadrassen kan enkelt ruller opp og takket være sin lave vekt (7kg), er det godt å fly med. Veldig trygt i sin bruk i miljøer uten konstant tilsyn, der brukeren har nedsatt kognitiv evne, eller mange er involvert i omsorgen. Madrassen er praktisk å ha hjemme som det er lett å flytte og lett å vedlikeholde. Madrassens alle deler er vaskbar. Videre må du ingen strømforsyning eller vedlikehold av elektriske komponenter og batterier.

Trykkavlastning: Overmadrassen i StimulITE® materiale er bygget av pustende og selfregulerende cellene i bikubestruktur med tre sømløse sammenhengende seksjoner med forskjellige grader av fasthet tilpasset behovene til ulike kroppsdeler (hode, midtre delen, fot).

StimulITE® 3-SONE Overmadrass har mye å tilby brukere med behov for differensiert trykkavlastning og/eller smertelindring: en sentral sone som støtter og avlaster torso, sete og hofter med minimal mottrykk når du ligger eller sitter samtidig som det letter at brukeren kan utføre stillningsendringer. En myk og behagelig hodesone som støtter hoder samtidig som det bidrar til å hindre sår på hodet eller ørene. En myk fotsone som avlaster hælen og malleolus.

Redusere skjærkreftene: Cellerne er anisotropisk, dvs. de beveger seg like godt i alle retninger. Dermed følger cellene kroppens alle bevegelser og minimerer skjær, hudirritasjon og smerte.

Kontroll av varme og fuktighet: Overmadrassens sekskantede celler er åpen ved toppen, ha perforerte sidevegger og en perforert cellebunnen. Sekskantede celler vil ikke kollapse under vekt slik at madrasskjernen beholder sin fulle ventilasjon når brukeren ligger på den, og under brukerens bevegelse oppstår en luftstrøm som hjelper til med å styre varme og fuktighet (mikroklima) av huden, tilsvarende definisjonen for Low Air Loss funksjon av dynamiske madrasser. Materialet kan vaskes og er anti-bakteriell og mugg-fri.





Artikkelnr	HMS Nr	Størrelse	Bekrivning
------------	--------	-----------	------------

**StimulITE® 3-SONE Overmadrass Brukervekt 25-180 kg**

3ZON82	Artikkene er ikke prisforhandlet med NAV	= 82,5 x 200 x 7 cm	GSR00056, COVIN33, BAG
3ZON85		= 85 x 200 x 7 cm	GSR00067, COVIN3480, BAG
3ZON90		= 90 x 200 x 7 cm	SRC00024, COVIN3680, BAG

**Reservdelar:**

GSR00056	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen	= 82,5 x 200 x 7 cm	StimulITE® 3-SONE Overmadrasse 82 cm, vikt 7 kg
GSR00067		= 85 x 200 x 7 cm	StimulITE® 3-SONE Overmadrasse 85 cm, vikt 7 kg
SRC00024		= 90 x 200 x 7 cm	StimulITE® 3-SONE Overmadrasse 90 cm, vikt 7 kg
LDBAGBED BAG			Vaskepose till overmadrasse, passer alle bredder Bærkasse till overmadrasse, passer alle bredder

**Tillbehør:**

COVST4080	230167	80-90 x 200 x 19 cm	Komforttrekk till StimulITE® 3-SONE madrass bomull, 82 - 90 cm
HEEL-S	230168	10 x 22 x 27 cm	Hælbeskyttelse StimulITE® Heelboot, Small, skostørrelse 35-41
HEEL-M	230169	11 x 24 x 33 cm	Hælbeskyttelse StimulITE® Heelboot, Medium, skostørrelse 35-45
HEEL-L	230170	12 x 26 x 36 cm	Hælbeskyttelse StimulITE® Heelboot, Large, skostørrelse 40-48
PILLOW	230171	49 x 38 x 9 cm	Ventillerende og trykkavlastande StimulITE® sengpute
SBS-1 90/60	230172	60 x 90 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimulITE® SBS-1 60 x 90 cm, åpne celler
SBS-1/48	230173	60 x 120 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimulITE® SBS-1 60 x 120 cm, åpne celler
SBS-2 90/60	230174	60 x 90 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimulITE® SBS-2 60 x 90 cm, film ene side
SBS-2/48	230175	60 x 120 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimulITE® SBS-2 60 x 120 cm, film ene side
SBS-3 90/60	230176	60 x 90 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimulITE® SBS-3 60 x 90 cm, stoff ene side
SBS-3/48	230177	60 x 120 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimulITE® SBS-3 60 x 120 cm, stoff ene side
SBS-4 90/60	230178	60 x 90 x 1,7 cm	Trykkavlastande teppe StimulITE® SBS-4 60 x 90 cm, film ene side
SBS-4/48	230179	60 x 120 x 1,7 cm	Trykkavlastande teppe StimulITE® SBS-4 60 x 120 cm, film ene side
SBS-5 90/60	230180	60 x 90 x 2,5 cm	Trykkavlastande teppe StimulITE® SBS-5 60 x 90 cm, film ene side
SBS-5/48	230181	60 x 120 x 2,5 cm	Trykkavlastande teppe StimulITE® SBS-5 60 x 120 cm, film ene side
INMATT3227	230182	80 x 185 cm	Inko-/fuktoppsamlare, legges under overmadrasse
COVIN3380	230183	82,5 x 200 x 7 cm	Inkotrekk, passer runt StimulITE® 3-SONE Overmadrasse 82 cm
COVIN3480	230184	85 x 200 x 7 cm	Inkotrekk, passer runt StimulITE® 3-SONE Overmadrasse 85 cm
COVIN3680	230185	90 x 200 x 7 cm	Inkotrekk, passer runt StimulITE® 3-SONE Overmadrasse 90 cm



Alle StimulITE produkter er  
branntestet og godkjent i henhold til  
ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006,  
NS-EN 597:2015 og CE-merket.

