



# StimuLITE®

## HEELBOOT

*ekstra myk hæl- og malleol beskyttelse  
for mennesker med smerter  
eller risiko for trykksår*



De vanligste trykksår i forbindelse med sengeliggende oppstår rundt hælen. Stimulite® Heelboot er beregnet for personer med økt risiko for å utvikle trykksår rundt hælen og ankelen, samt økt smerte problemer i dette området. Heelbooten er lett og behagelig å ha på, og passer både i sengen og når du sitter opp. Den unike hæl og fotavlastningsmaterialet med Stimulite honeycomb bare er 3 cm tykke og avlaste trykket i en meget effektiv måte regionen rundt den malleoli og tålederna, hælbeinet og området rundt bastålederna.

Liggisår forårsakes fremfor alt av tre ting: trykk, fuktighet og skjær. Stimulite Heelboot reduserer presset gjennom en honeycomb materiale med bevegelige sexkantceller og avlaster trykket. En tørr hud er en sterk hud. Stimulite celler består til 93% av volumet av luft som holder foten tørr og kjølig, noe som er viktig å ta hensyn til langtids liggende.

Stimulite Heelboot reduserer skjær då cellene beveger seg når foten beveger seg, og materialet er ettergivende langs foten. Dette er viktig når du beveger deg i sengen, men også når du har ukontrollerte bevegelser og når man sitter i rullestol. Heelbooten kan brukes døgnet rundt, og det er greit å ta noen trinn, om nødvendig, som den er utstyrt med anti-skli materiale under foten.



Det er lett å holde rent. Vaske hele produktet i 40 ° eller 60 ° (i korte programmer 30 minutter). Kan tørkes i tørketrommel på tørr i lav varme. Kan desinfiseres med Virkon®. Produktet leveres klar til bruk. Det er ingen løse deler eller innstillinger.

### Spesifikasjoner:

Stoff: Cordura

Trykkavlastnings paneler: 100% termoplastisk polyuretan (TPU); ingen tilsetningsstoffer, fordampner ingen duft

Vekt: 0,2 kg

Farge: Sort

### Bruk:

Åpne borrelås og plassere foten. Juster borrelås til ønsket passform. Du kan ha det samme produktet på høyre eller venstre fot. Produktet fungerer best mot huden din. Produktet skal føle behagelig å bruke og ikke forårsaker ubehag.



StimuLITE Heelboot Størrelser			
	Small	Medium	Large
Artikkelnummer	HEEL-S	HEEL-M	HEEL-L
HMS Nummer	230168	230169	230170
Y - omkrets	< 32 cm	32-42 cm	> 36 cm
Passer skostørrelse	35-42	37-45	40-50
Høyde	28 cm	30 cm	33 cm

