

**TALEVARSLER**  
**Produktark**







vil man kunne få avspilt beskjed med kjent stemme. Beskjeder spilles av på bestemt tidspunkt, dersom en dør åpnes, eller personen beveger seg i en sensors «vindu». Talevarsleren har mulighet for å spille av to beskjeder, til ulike tidsperioder av døgnet. Den kan om ønskelig også sende varslinger til mottakere i boligen, eller til mobiltelefon. Den benyttes sammen med passasjesensor, magnetbryter o.l.

Innstillingsmenyen er tilgjengelig ved å åpne lokket. Her kan man velge hvilket tidsrom varslingen skal være aktiv og hvilke alarmer aktivitetsvarsleren skal sende.

**TALEVARSLER (HMS 253497)** benyttes for personer med behov for påminnelser og beslutningsstøtte. Ved å snakke inn en egen beskjed på Talevarsler,

**Varslingshjelpemidler, delkontrakt 7:**  
**Beslutningsstøtte til bruker.**

**Eksempler på bruk:**

<b>Eksempel 1: Talevarsler med Magnetbryter</b>	
	
<b>Talevarsler</b> <b>HMS nr.: 253497</b>	<b>Magnetbryter</b> En dørkontakt med magnet, for å detektere om f.eks. dører eller vinduer åpnes. <b>HMS-nr.: 197619</b>
<b>Eksempel 2: Talevarsler med Sensor PIR-GARDIN</b>	
	
<b>Talevarsler</b> <b>HMS nr.: 253497</b>	<b>Sensor PIR-GARDIN</b> Sensor som oppfatter bevegelse i et begrenset område, som f.eks. døråpning, smal gang, seng o.l. <b>HMS-nr.: 23265</b>
<b>Eksempel 3: Talevarsler med Sensor PIR MINI</b>	

	
<p><b>Talevarsler</b> HMS nr.: 253497</p>	<p><b>Sensor PIR MINI</b> Liten bevegelsessensor som dekker et vanlig rom. HMS-nr.: 232652</p>
<p><b>Eksempel 4: Talevarsler med Kontaktmatte</b></p>	
	
<p><b>Talevarsler</b> HMS nr.: 253497</p>	<p><b>Kontaktmatte</b> Brukes normalt på gulv, som tråkkematte HMS-nr.: 162290</p>
<p><b>Eksempel 5: Talevarsler med bevegelsessensor for takmontasje</b></p>	
	
<p><b>Talevarsler</b> HMS nr.: 253497</p>	<p><b>PIRTAK</b> Sensor som festes i taket. HMS-nr.: 233431</p>