


**TIDSSYRT AKTIVITETSVARSLER**  
**Produktark**

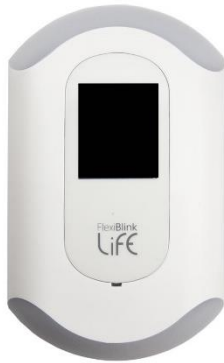

Innstillingsmenyen er tilgjengelig ved å åpne lokket. Her kan man velge hvilket tidsrom varslingen skal være aktiv og hvilke alarmer aktivitetsvarsleren skal sende.

**Følgende varslinger kan velges:**







- Barn har stått opp
- Passasjealarm (generell)
- Vandring inne
- Vandring ut
- Fravær fra seng
- Husk å lukke kjøleskapet
- Husk å lukke fryseren
- Husk å lukke døren
- Husk å lukke vinduet








**TIDSSYRT AKTIVITETSVARSLER (HMS 253485)**

varsler hendelser i valgte tidsrom og med en gitt varighet. Den benyttes sammen med mattesensor, passasjesensor, magnetbryter o.l. Ved aktivitet sendes alarmene trådløst til varslingsmottaker(e).

**Varslingshjelpemidler, delkontrakt 8: Trådløs varsling til nærpersion.**

**Eksempler på bruk:**

<b>Eksempel 1 A: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler med Magnetbryter og varlingsmottaker Junior Lommevibrator</b>		
		
<b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler</b> HMS nr.: 253485	<b>Magnetbryter</b> En dørkontakt med magnet, for å detektere om f.eks. dører eller vinduer åpnes. HMS-nr.: 197619	<b>Junior Lommevibrator Vandring</b> Kraftig lommevibrator for vandringalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504
<b>Eksempel 1 B: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler med Magnetbryter og varslingsmottaker NORA Flexiwatch</b>		
		
<b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler</b>	<b>Magnetbryter</b>	<b>NORA Flexiwatch, Life</b>

<p><b>HMS nr.: 253485</b></p>	<p>En dørkontakt med magnet, for å detektere om f.eks. dører eller vinduer åpnes. <b>HMS-nr.: 197619</b></p>	<p>Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. <b>HMS-nr.:</b></p>
<p><b>Eksempel 2 A: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler med Sensor PIR-GARDIN og varlingsmottaker Junior Lommevibrator</b></p>		
		
<p><b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler</b> <b>HMS nr.: 253485</b></p>	<p><b>Sensor PIR-GARDIN</b> Sensor som oppfatter bevegelse i et begrenset område, som f.eks. døråpning, smal gang, seng o.l. <b>HMS-nr.: 232651</b></p>	<p><b>Junior Lommevibrator Vandringsalarm</b> Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. <b>HMS-nr.: 253504</b></p>
<p><b>Eksempel 2 B: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler med Sensor PIR-GARDIN og varslingsmottaker NORA Flexiwatch</b></p>		
		
<p><b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler</b> <b>HMS nr.: 253485</b></p>	<p><b>Sensor PIR-GARDIN</b> Sensor som oppfatter bevegelse i et begrenset område, som f.eks. døråpning, smal gang, seng o.l. <b>HMS-nr.: 232651</b></p>	<p><b>NORA Flexiwatch, Life</b> Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. <b>HMS-nr.:</b></p>
<p><b>Eksempel 3: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler med Sensor PIR MINI og varlingsmottaker Junior Lommevibrator</b></p>		
		
<p><b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler</b> <b>HMS nr.: 253485</b></p>	<p><b>Sensor PIR MINI</b> Liten bevegelsessensor som dekker et vanlig rom. <b>HMS-nr.: 232652</b></p>	<p><b>Junior Lommevibrator Vandringsalarm</b> Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. <b>HMS-nr.: 253504</b></p>

Eksempel 3 B: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler med Sensor PIR MINI og varslingsmottaker NORA Flexiwatch		
		
<b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler</b> HMS nr.: 253485	<b>Sensor PIR MINI</b> Liten bevegelsessensor som dekker et vanlig rom. HMS-nr.: 232652	<b>NORA Flexiwatch, Life</b> Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:
Eksempel 4: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler med Kontaktmatte og varlingsmottaker Junior Lommevibrator		
		
<b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler</b> HMS nr.: 253485	<b>Kontaktmatte</b> Brukes normalt på gulv, som tråkkematte HMS-nr.: 162290	<b>Junior Lommevibrator Vandring</b> Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504
Eksempel 4 B: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler med Kontaktmatte og varslingsmottaker NORA Flexiwatch		
		
<b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler</b> HMS nr.: 253485	<b>Kontaktmatte</b> Brukes normalt på gulv, som tråkkematte HMS-nr.: 162290	<b>NORA Flexiwatch, Life</b> Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:

Eksempel 5: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler med Sengematte og varlingsmottaker Junior Lommevibrator		
		
<p><b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler</b> HMS nr.: 253485</p>	<p><b>Mattesensor for seng</b> Sensor som detekterer om bruker forlater seng eller ikke er tilbake i seng. HMS-nr.: 231018</p>	<p><b>Junior Lommevibrator Vandringsalarm</b> Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504</p>

Eksempel 5 B: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler med Sengematte og varslingsmottaker NORA Flexiwatch		
		
<p><b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler</b> HMS nr.: 253485</p>	<p><b>Mattesensor for seng</b> Sensor som detekterer om bruker forlater seng eller ikke er tilbake i seng. HMS-nr.: 231018</p>	<p><b>NORA Flexiwatch, Life</b> Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:</p>

**Andre produkter:** Det kan benyttes andre varslingsmottakere, der dette er mest hensiktsmessig.

		
<p><b>Varslingsmottaker IRIS LIFE</b> Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. HMS nr.: 253474</p>	<p><b>AURORA LIFE</b> Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. HMS-nr.: 253466</p>	<p><b>FlexiApp-sender</b> Videresender for varsling til mobiltelefon og smartklokke. HMS-nr.: 253465</p>