

# Vibio sengevibrator

BE1221



 Bellman & Symfon®



## Egenskaper

### Kraftige vibrasjoner

Vekker deg som sover tungt

### Trådløs Bluetooth®

Med lett-å-bruke mobilapp

### Varsling

For samtale og meldinger

### Slumrebånd

Slumre med et lett trykk

### "Set-and-Forget"

Fungerer også uten mobil

## Våkne i tid uten å forstyrre resten av familien

Vibio er en trådløs sengevibrator som du styrer fra mobilen. Legg Vibio under puten eller madrassen og still alarmen i appen som er tilgjengelig for både iOS og Android. Når det er på tide å stå opp, vekker Vibio deg med vibrasjoner istedenfor lyd. Vibio er et perfekt valg for deg som har det vanskelig for å bli vekket, har en partner som sover lett, eller har det vanskelig for å høre en tradisjonell vekkeklokke.

Vibio har en rekkevidde på ca. 30 meter og kan dessuten varsle deg for samtale og meldinger. Du kan velge å slumre alarmen på mobilen eller direkte under puten ved å dra i tekstilbåndet.



# Teknisk informasjon



## Mål og vekt

### Sengevibrator

Ø: 94 × 94 mm

Høyde: 27 mm


Vekt: 153 g

### Slumreband

Lengde: 120 mm



## Knapper og uttak

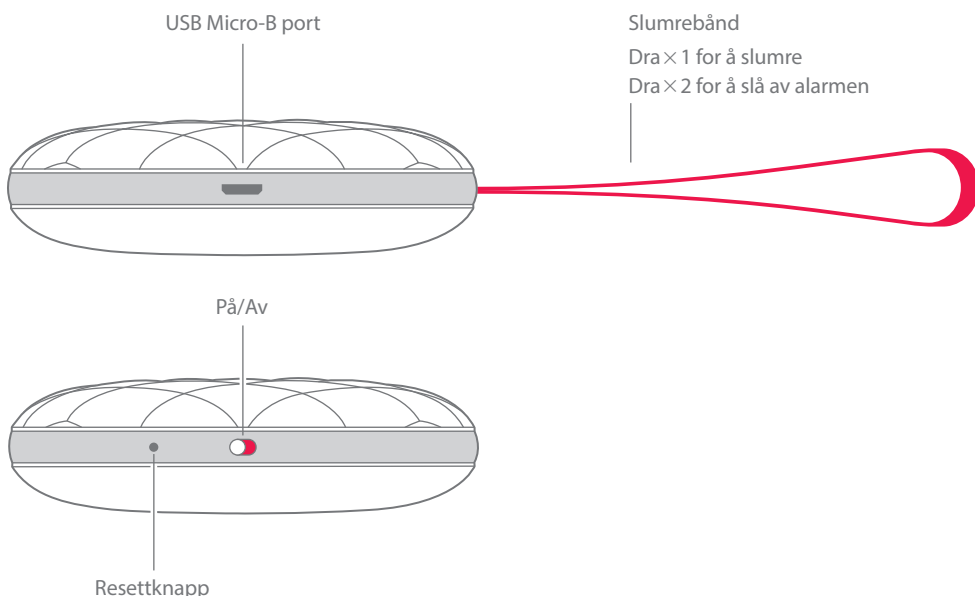

## Kompabilitet

- iOS 11 / Android 4.4 og senere
- iPhone 5S og senere
- Moderne Android-mobiler

## Frekvens og rekkevidde

- Bluetooth® frekvens: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth® rekkevidde: Opp til 30 m.  
Rekkevidden kan reduseres av vegger og store gjenstander.

## Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Temperatur: 0° – 35° C
- Relativ luftfuktighet: 5% – 95%, ikke kondenserende

## Regulatoriske krav

- Oppfyller følgende regulatoriske krav: CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE, Grønt Punkt



## Strøm og batteri

- Batteridrift: 1 × 3.7V AA Litium-ion
- Strømforbruk:  
Aktiv med sterk vibrasjon < 1000 mA  
Standby < 100 µA
- Driftstid: Opp til 10 dager pr. lading
- Ladetid: Opp til 1,5 timer @ 500mA
- Ladestrøm: Opp til 500 mA, 5V DC

## Kommunikasjon

- Bluetooth® 5

## Kabler og tilkoblinger

- Kabellengde: 1 m
- Kontakter: USB type A til USB Micro-B

## Vedlikehold og rengjøring

- Vedlikeholdsfri. Rengjør kun med en tørr klut.
- Bruk ikke vindusvask, rengjøringsmiddel, spray, løsemiddel, alkohol, ammoniak eller produkter som inneholder skuremiddel.

## I esken

- Vibio sengevibrator
- Ladekabel
- Bruksanvisning  
(mobiltelefon IKKE inkludert)



© 2020, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1221\_033DSH001-NO

[bellman.com](http://bellman.com)