



# R82 Wombat Living

En funksjonell arbeidsstol  
til skole, institusjon og hjem

 **etac**<sup>®</sup>



# R82 Wombat Living

## Prisforhandlet fra 2. mai 2020

Wombat Living er en flott aktivitetsstol til både barn og ungdom. Stolens størrelse kan endres i takt med brukerens vekst og er dermed en stol for livet. Det høydejusterbare understellet og den fremoverlente vippefunksjon gjør det lettere å komme opp på stå, samt at man unngår unødvendige og gjentakende løft.

Wombat Living oser av dansk design.

Det minimalistiske utseendet med det diskrete understellet og delikatene fargene gjør at den passer inn overalt.

Wombat Living leveres som standard med hvit ramme, komfortable, grå puter og sentralbrems.

## Wombat Living som standard

Ramme	Hvit pulverlakkert ramme.
Høydejustering	Elektrisk
Rygg	Justerbar i høyden og vinkeljusterbar
Sete	ABS-plast, vinkeljustert
Hjul	100 mm hjul, lett kjørte
Bremser	Bremse på alle fire hjul, sentralbrems forhjul
Pute	Grå, avtakbare og vaskbare trekk
Armlen	Vinkel- og høyderegulerbare
Fotbrett	Høyde- og vinkelregulerbar
Kjørehåndtak	Nedfellbare



Wombat Living str. 3 er vist som standard



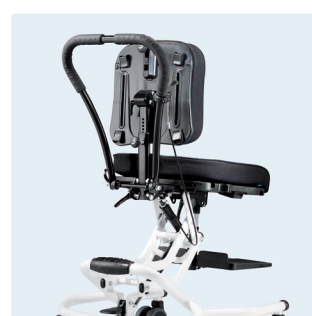
Wombat Living har brems på alle fire hjul. Sentralbrems låser de to forhjulene.



Wombat Living er elegant og diskret, og utformet med en åpen front for å lette forflytning til og fra setet.


















Lav inngangshøyde (37,5 cm med setepute) letter stående forflytning til og fra setet.



Vinkeljusterbar kjørebøyle som er designet og montert med omtanke. Brukes ved justering av høyde og vinkel.

## Bestilling &amp; mål

Wombat Living	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Artikkelnummer	32951136	32952136	32953135
HMS nr.	268214	268215	268216
 Høyde rygg (A)	280-340 mm	310-380 mm	390-500 mm
 Effektiv setedybde (B)	180-310 mm	250-380 mm	320-500 mm
 Ryggbredde, flat pute (C)	250 mm	300 mm	350 mm
 Ryggbredde, komfortpute (D)	170 mm	230 mm	270 mm
 Effektiv setebredde (E)	300 mm	370 mm	420 mm
 Ryggvinkel (F)	0-28°	0-28°	0-28°
 Vinkel, fotstøttestang (H)	-30-30°	-30-30°	-30-30°
 Lengde (I)	645 mm	645 mm	645 mm
 Avstand mellom sete og fotstøtte, montert på sete (J) **	85-185 mm	85-285 mm	85-375 mm
 Avstand mellom sete og fotstøtte, montert på ramme (J) **	95-320 mm	95-320 mm	245-395 mm
 Setehøyde over gulv (K)*	310-430 mm	310-430 mm	375-491 mm
 Setehøyde over gulv, med pute	375-495 mm	375-495 mm	440-556 mm
 Total bredde (L)	560 mm	560 mm	560 mm
 Max brukervekt/belastning	45 kg	45 kg	70 kg
 Totalvekt	12,5 kg	13 kg	16 kg
* Målt med puter. Der er seks høydeinnstillinger i midtsøylen. Hver økning legger til 22 mm til målet, som begynner ved posisjon -1		(A-E) Målt med puter	
** Legg til 65 mm for å måle med pute		(I) Legg til 15 mm til målet, når det er montert 100 mm hjul.	
		(L) Legg til 10 mm til målet, når det er montert 100 mm hjul.	



# Len deg frem, og vær aktiv

Wombat Living kan vippes fremover opp til -15°. Dette er en kjempefordel ved forflytning av brukere med innervasjon i underekstremitetene, og hvis føttene kan støtte på gulvet eller de skal hjelpes ved selvstendig forflytning.

For flere brukere er den aktive posisjon med på å bevare en hensiktsmessig holdning, så det blir mulig å være ennå mer med. Dessuten har undersøkelser vist at en fremoverlent stol retter ryggsøylen mer ut og minsker belastningen av ryggens muskler.



## Egenskaper

### Stort utvalg av tilbehør

Wombat Living er en arbeidsstol med mange konfigurasjonsmuligheter.

### Uavhengighet

Wombat Living gir brukeren optimal uavhengighet og selvstendighet ved å gjøre det mulig å kontrollere sittestillingen selv med den elektriske håndkontrollen.

### Åpent design

Wombat Living-rammen er ikke bare elegant og diskret, men også utformet med en åpen front, for forenkle forflytning ut og inn av setet.

### Komfort

Putene er laget av tykt, behagelig skum med pustende trekk. Små detaljer som f.eks. formede puter som beskytter baksiden av barnets knær og ekstra slitesterke hjørner, gjør en stor forskjell i den daglige bruk.

### Bygget for å vokse i

Wombat Living tilbyr trinnløse tilpasninger etterhvert som brukeren vokser. Flytt rygglenet frem eller tilbake og still inn hoftestøtten til den enkelte bruker. Hoftestøttene kan også vinkles for å støtte barnets hofter og lår.

### Lav setehøyde

Wombat Livings lave setehøyde (37,5 cm med pute) kombinert med med tiltfunksjonen foran, forenkler stående forflytning inn og ut av stolen.



30-42 cm



18-50 cm



28-50 cm



max. 45/70 kg

Grå puter er standard, andre farger velges fra tilbehørslisten.

Petroleum



Rød



Grå (standard)



Grå komfortputer





## Tilbehør



### Puter og trekk

Alle puter leveres med trekk. Ekstra trekk kan bestilles.

Bestillingskode for fargevalg:

Grå: XXX = 228. Rød: XXX = 224

Petroleum: XXX = 225

NB: Grå puter leveres som standard.

Andre farger bestilles som tilbehør.

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMSnr.
Ryggpute str. 1	31955031-XXX	239848
Ryggpute str. 2	31955032-XXX	239852
Ryggpute str. 3	31955033-XXX	239856
Setepute str. 1	31955021-XXX	239831
Setepute str. 2	31955022-XXX	239837
Setepute str. 3	31955023-XXX	239843



### Inkontinensstrekk, setepute

Pute med vaskbart trekk til inkontinente brukere. Alle puter leveres med trekk.

Ekstra trekk kan også bestilles.

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Setepute med inkontinensstrekk		
Str. 1	31955021-223	
Str. 2	31955022-223	
Str. 3	31955023-223	
Formet setepute med inkontinensstrekk		
Str. 1	31955021-237	239834
Str. 2	31955022-237	239840
Str. 3	31955023-237	239846
Trekk til setepute		
Str. 1	31955621-282	
Str. 2	31955622-282	
Str. 3	31955623-282	



### Formet puter og trekk

De konturerte putene fås kun i fargen grå.

Alle puter leveres med trekk. Ekstra trekk kan også bestilles. For ekstra trekk til setepute, se ovenfor.

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Ryggpute str. 1	31955031-238	239851
Ryggpute str. 2	31955032-238	239855
Ryggpute str. 3	31955033-238	239859
Setepute str. 1	31955021-238	239835
Setepute str. 2	31955022-238	239841
Setepute str. 3	31955023-238	239847



### Høy rygg (ombygningskit)

Gir mulighet for en høyere rygg, samt forutsetning for å montere bekkenstøtter.

Høy rygg krever ikke annen type puter.

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMSnr.
Str. 1	3195560-1	268238
Str. 2	3195561-1	268239



## Tilbehør

**Kjørehåndtak, standard**

For optimal arbeidsstilling. Nedfellbare. Kommer i par.

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Kjørehåndtak	3195145	161613

**Sidestøtter, faste**

For ekstra støtte og sikkerhet. Kommer i par.  
Mål oppgitt i (høyde x dybde).

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
One size (15x11cm)	3195121	268228

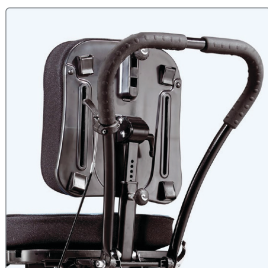
**Kjørebøyle**

For optimal arbeidsstilling. Fås til Wombat Solo str. 3.

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Kjørebøyle til str.3	3195147	157322

**Sidestøtter, svingbare**

For korrekt posisjonering og støtte. For mer info, alternativer og mål, se avsnitt "Sidestøtter" under Barn/Junior på våre hjemmeside [www.etac.no](http://www.etac.no).

**Kjørebøyle, vinkelregulerbar**

Bruk også kjørebøylene som hjelp ved justering av høyde og vinkel.

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Str. 1 + 2	3195148-1	268217
Str. 3	3195148-3	268218

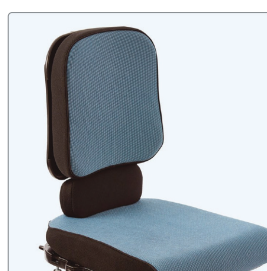
**Ryggforlenger**

For ekstra støtte nedre del av ryggen. Til Wombat str. 3. Mål oppgitt i (høyde x bredde).

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Str. 3 (6 x 27 cm)	3195140-60	268234

**Hodestøtte**

Finn korrekt hodestøtte i vårt store utvalg for å korrigere hodets stilling. For ytterligere informasjon, se fanen Hodestøtter under Barn/Junior på våre hjemmesider [www.etac.no](http://www.etac.no).

**Bekkenstøtte, flat**

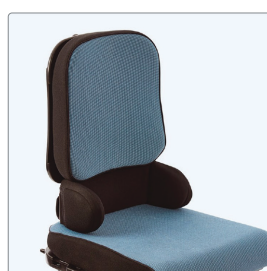
For stabilisering av hoften. Kan kun monteres på Wombat med høy rygg.

Beskrivelse	Artikkelnr.
Str. 1+2	3195140-61
Str. 3	3195140-63

**Ryggkile (standard)**

For ekstra ryggstøtte. Tykkelse i midten: 1 cm. Tykkelse i endene: 2 cm. Mål oppgitt i (lengde x bredde).

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Str. 1 (24 x 9 cm)	31955030-1	268258
Str. 2 (28 x 11 cm)	31955030-2	268259
Str. 3 (35 x 11 cm)	31955030-3	268260

**Bekkenstøtte med sider**

Kan kun monteres på Wombat med høy rygg.

Beskrivelse	Artikkelnr.
Str. 1	3195140-64
Str. 2	3195140-65
Str. 3	3195140-66





## Tilbehør

**Hoftestøtter, sett**

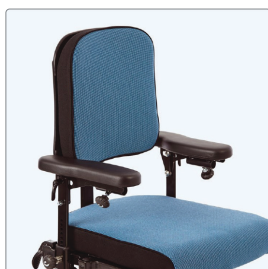
Trekk til hoftestøtter fås separat.  
Mål oppgitt i (høyde x bredde).

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Str.1+2 (8 x 19 cm)	3195110-1	254326
Str.3 (10 x 25 cm)	3195111-1	268226
Trekk str.1+2	3195110-60	268225
Trekk str. 3	3195111-60	268227

**Abduksjonskloss, forlengt**

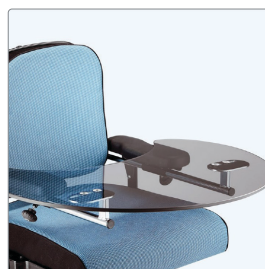
Forhindrer brukeren i å skli ned av stolen, og holder beinene adskilt.

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
One size	3195230-10	268237
Trekk	3195430-10260	222781

**Armlen (standard)**

Mål oppgitt i (høyde x bredde x lengde).

Beskrivelse	Artikkelnr.
Str. 1 + 2 (6-18 x 8 x 26 cm)	3195112-1
HMS nr. 268262	
Str. 1 + 2 (12-21 x 8 x 29 cm)	3195113-1
HMS nr. 268261	
Str. 3 (6-18 x 8 x 26 cm)	3195114
HMS nr. 268263	
Str. 3 (6-18 x 8 x 37 cm)	3195115
HMS nr. 192060	

**Bord, tonet plast**

Gir støtte til armene.

Mål oppgitt i (bredde x dybde).

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Str.1+2 (60 x 34 cm)	3195125	268230
Str.3 (60 x 46 cm)	3195126	161612

**Armlen, Swing away**

Sving armlenene opp for å lette forflytning til/fra stolen. Dette gjør det mulig å bruke stolen tett på et bord, uten at armlenene er i veien. Et kit gjør det mulig å montere swing away-ledd på eksisterende armlener.

Beskrivelse	Artikkelnr.
Kort	3195112-1S
Langt	3195113-1S
Ombygningskit	3195112-SW

**Fotplate til montering på sete (standard)**

Ved montering av fotplaten, følger fotplaten setet, uansett om stolen dreies eller justeres i høyden. .

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Str. 1	3195955-1	268255
Str. 2	3195955-2	268256
Str. 3	3195955-3	268257

**Abduksjonskloss**

Forhindrer brukeren i å skli ned av stolen, og holder beinene adskilt.

Mål oppgitt i (høyde x bredde x dybde).

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Str.1 (9 x 9 x 9 cm)	3195130-1	268231
Str.2 (9 x 9 x 12 cm)	3195130-2	268232
Str.3 (9 x 9 x 15 cm)	3195130-3	174418
Str.4 (9 x 9 x 18 cm)	3195130-4	268233

**Fotbrett med lav innfestning**

Mål oppgitt i (bredde x dybde).

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Str.1(31 x 19 cm)*	3195145-1	177766
Str.2(36 x 23 cm)**	3185145-2	163815

\*standard på str. 1  
\*\*standard på str. 2

**Fotbrett med høy innfestning**

Mål oppgitt i (bredde x dybde).

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS nr.
Str. 2 (36 x 23 cm)	3195145-2	187676
Str. 3 (41 x 24 cm)*	3195145-3	150061
Str. 4 (48 x 24 cm)	3195145-4	197213

\*standard på str. 3







Version 1 - 2020 - Forbehold om trykfeil og evt. endringer

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk [www.etac.no](http://www.etac.no)

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss  
Telefon: 815 69 469  
E-post: [hovedkontor.norge@etac.com](mailto:hovedkontor.norge@etac.com)  
[www.etac.no](http://www.etac.no)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities