



# LIFE RT

AKTIV, FASTRAMME,  
AVTAGBARE BENSTØTTER



2.0 Oppdatert november 2021

# QUICKIE LIFE RT

Aktiv, fastramme, avtagbare benstøtter

Post 3, 2. valg



Aktiv fastramme

## AKTIV KJØRESTILLING I EN LETTKJØRT RULLESTOL

Med Life RT får du en god, fast og retningsstabil stol som kan ha svært lav setehøyde. Den har ut-/innsvingbare og avtagbare benstøtter og små ytre mål. Stolen egner seg derfor meget godt for deg som bruker beina ved fremdrift.

- Nett rullestol som passer en aktiv hverdag.
- Gode tilpasningsmuligheter for en aktiv sittestilling, optimal kjørestilling og gode kjøreegenskaper.
- Lav setehøyde og åpen rammeløsning gir gode forutsetninger for framdrift med beina.
- Kompakt ramme for smidig manøvrering og hensiktsmessig transport.



#### SPESIFIKASJONER QUICKIE LIFE RT

Setebredde	28 - 48 cm
Setedybde	32 - 46 cm
Setehøyde bak	38 - 44 cm (36 - 45 cm)*
Setehøyde foran	39 - 44 cm (36 - 50 cm)*
Setevinkel	0° - 12°
Rygg høyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	89° - 98°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	Fra 8 kg kg
Vekt rullestol	Fra 10 kg
Maks. brukervekt	100 kg

\*Med skifte av deler

#### STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE LIFE RT I POST 3

- Kjørehåndtak, faste
- Rygg vinkleljusterbar, nedfellbar
- Ryggtrekk EXO
- Armlener, høydejusterbare
- Benstøtter 80°, utsvingbare, avtakbare med oppfellbare fotplater
- Tippetikringer innsvingbare
- Svinghjulsgafler Carbotecture
- Svinghjul 4" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium
- Vekt rullestol ca 14, 3 kg (NAV standard)



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.




Aktiv  
fastramme

## Quickie Life RT passer aktive og selvstendige rullestolbrukere.



Høy sittekomfort i standardversjon med høydestillbare, avtagbare armlener og ryggtrekk med ventilerende egenskaper.

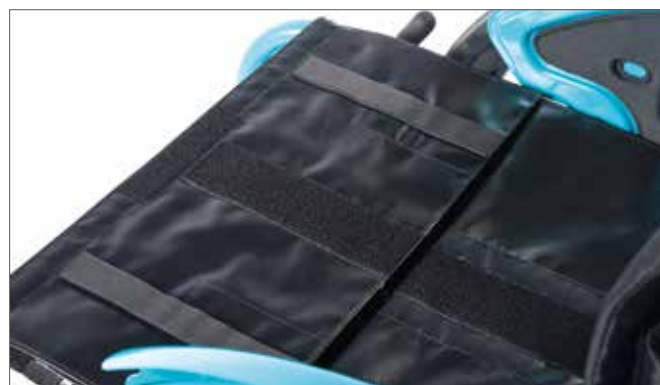

Dybdejusterbart setetrekk sammen med en lengre ramme gir fleksibilitet.



Setehøyden kan justeres i 7 posisjoner. Mulighet for svært lav setehøyde (36 cm).



God stabilitet og gode trilleegenskaper med cambringsmulighet fra 0° til 6°



## Quickie Life RT Post 3 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde										
		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
32	Art.nr	LIRTS2832	LIRTS3032	LIRTS3232	LIRTS3432	LIRTS3632	LIRTS3832	LIRTS4032	LIRTS4232	LIRTS4432	LIRTS4632	LIRTS4832
	Hms.art.nr.	272770	272778	272786	272794	272802	272810	272818	272826	272834	272842	272850
34	Art.nr	LIRTS2834	LIRTS3034	LIRTS3234	LIRTS3434	LIRTS3634	LIRTS3834	LIRTS4034	LIRTS4234	LIRTS4434	LIRTS4634	LIRTS4834
	Hms.art.nr.	272771	272779	272787	272795	272803	272811	272819	272827	272835	272843	272851
36	Art.nr	LIRTS2836	LIRTS3036	LIRTS3236	LIRTS3436	LIRTS3636	LIRTS3836	LIRTS4036	LIRTS4236	LIRTS4436	LIRTS4636	LIRTS4836
	Hms.art.nr.	272772	272780	272788	272796	272804	272812	272820	272828	272836	272844	272852
38	Art.nr	LIRTS2838	LIRTS3038	LIRTS3238	LIRTS3438	LIRTS3638	LIRTS3838	LIRTS4038	LIRTS4238	LIRTS4438	LIRTS4638	LIRTS4838
	Hms.art.nr.	272773	272781	272789	272797	272805	272813	272821	272829	272837	272845	272853
40	Art.nr	LIRTS2840	LIRTS3040	LIRTS3240	LIRTS3440	LIRTS3640	LIRTS3840	LIRTS4040	LIRTS4240	LIRTS4440	LIRTS4640	LIRTS4840
	Hms.art.nr.	272774	272782	272790	272798	272806	272814	272822	272830	272838	272846	272854
42	Art.nr	LIRTS2842	LIRTS3042	LIRTS3242	LIRTS3442	LIRTS3642	LIRTS3842	LIRTS4042	LIRTS4242	LIRTS4442	LIRTS4642	LIRTS4842
	Hms.art.nr.	272775	272783	272791	272799	272807	272815	272823	272831	272839	272847	272855
44	Art.nr	LIRTS2844	LIRTS3044	LIRTS3244	LIRTS3444	LIRTS3644	LIRTS3844	LIRTS4044	LIRTS4244	LIRTS4444	LIRTS4644	LIRTS4844
	Hms.art.nr.	272776	272784	272792	272800	272808	272816	272824	272832	272840	272848	272856
46	Art.nr	LIRTS2846	LIRTS3046	LIRTS3246	LIRTS3446	LIRTS3646	LIRTS3846	LIRTS4046	LIRTS4246	LIRTS4446	LIRTS4646	LIRTS4846
	Hms.art.nr.	272777	272785	272793	272801	272809	272817	272825	272833	272841	272849	272857

Setehøyde



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

### Opsjoner og tilbehør

- Jay rygg
- Vinkelstillbar kjørebøyle
- Safaribremser
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Kinetic Balance belter og seler
- Drivaggregat

Se også egen tilbehørskatalog og [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



Gi ledsager en bedre arbeidsstilling med hjelp av høyde- og vinkelregulerbar kjørebøyle (tilbehør).



Vibrasjonsdempende Loopwheels gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.

Aktiv faststramme

# GODE VALG TIL RULLESTOLEN

## EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



**Empulse WheelDrive** Drivhjul med elektrisk motor.



**Empulse F55** Drivaggregat med manuell styring.



**Empulse R20** ledsagerstyrt drivaggregat.



**SmartDrive** brukerstyrt drivaggregat.

## LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreopplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



## RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

**Har du ikke vår tilbehørskatalog?** Kontakt vårt kundesenter [Post@SunriseMedical.no](mailto:Post@SunriseMedical.no) eller finn katalogen på: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrize Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## DECON ADVENTUS FRONTHJUL

Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.